



A41009

Camminatore all'aperto

MANUALE DI ISTRUZIONI

Ref. AAL41009FM



oltre 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono subire modifiche progettuali in base alle esigenze di produzione.

Il prodotto presente in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Si prega di consultare il nostro sito web per vedere il modello aggiornato per il modello actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

VI RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA FIDUCIA.

Grazie di aver acquistato un prodotto di **IM by TotalCare Europa**.

Il prodotto che avete acquistato è stato concepito con tecnologia d'avanguardia e ha superato le prove di collaudo più rigorose.

L'esperienza attraverso il tempo fa sì che i nostri ausili offrano un design funzionale che permette più libertà e autonomia, per svolgere le attività di igiene ogni giorno.

La preghiamo di dedicare un momento alla lettura del presente manuale per assicurare un corretto uso del nuovo **camminatore A41009F**. Troverete le informazioni e i consigli per un corretto uso del dispositivo e prolungare il suo ciclo di vita.

oltre **50 anni** di vita **senza limiti**

INDICE

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 — Parti	4
2 — Descrizione	4
3 — Caratteristiche tecniche	4
4 — Montaggio e utilizzo	5
5 — Informazione generali	6
6 — Manutenzione e pulizia	7
7 — Garanzia	7

1. PARTI



DESCRIZIONE

DEAMBULATORE A41009F

Il deambulatore modello A41009F è ideale per le persone con mobilità ridotta, che hanno bisogno di fermarsi a riposare lungo il percorso.

Possiede un sedile con pedane che permette di alzare le gambe ed essere spinto da un'altra persona. Sotto la seduta c'è un cestino, ed è dotato di freni a leva con posizione di parcheggio.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Misure

Larghezza totale	61,5 cm
Larghezza tra le ruote posteriori	42,5 cm
Profondità con pedana	79 cm
Profondità senza pedana	68 cm
Profondità se piegato	32,5 cm
Altezza totale (regolabile)	83,5 - 95,5 cm

Peso

Peso total	9,10 kg
Portata massima	120 kg

Materiale	Alluminio	Colore	grigio opaco e blu
-----------	-----------	--------	--------------------



A41009F

CARATTERISTICHE TECNICHE

Seduta

Larghezza della seduta	35 cm
Profondità della seduta	34 cm
Altezza dal pavimento alla	53 cm
Tipo di sedile	Pieghevole
Materiale della seduta	Imbottito

Schienale

Larghezza	45 cm
Tipo di schienale	Fisso ma smontabile
Materiale	Barra imbottita

Pedana

Profondità	17 cm
Tipologia	Pieghevole

Ruote

Misura ruota anteriore	Ø19 cm
Misura ruota posteriore	Ø19 cm
Larghezza ruota anteriore	3 cm
Larghezza ruota posteriore	3 cm
Tipo di ruota	Solido
Numero di ruote anteriori	2
Numero di ruote posteriori	2

Altre caratteristiche


Cestino	Cestino in tessuto
Misure cesto (larghezza x altezza x	41 x 20 x 22 cm
Portabastones	Sì
Pieghevole	Sì
Tipo de freno	Freno maneta y bloqueo



Reposapiés plegable



Regulable en altura

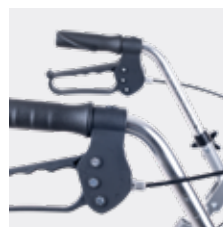

Freno de maneta

4. IMPOSTAZIONI

 Non utilizzare questo prodotto se danneggiato o mancano pezzi. Contatta il tuo fornitore.

Per iniziare a utilizzare il deambulatore, rimuovere con attenzione il deambulatore dalla confezione. Aprirlo spingendo verso il basso sui cardini del meccanismo pieghevole.

- **Per mettere lo schienale**, spingere i perni ai lati dello schienale e inserirli nei supporti posti nella parte anteriore del telaio. Il supporto deve fare clic quando viene installato correttamente, e i perni dovrebbero sporgere dai fori.



- **1 Per posizionare le impugnature**, svitare leggermente le manopole e inserire le impugnature.
- **2 Regolazione dell'altezza delle impugnature**, l'altezza giusta dovrebbe essere riferita da un fisioterapista o altro professionista qualificato. Inserire la vite nel telaio in modo che la testa esagonale si inserisca nel foro a sei facce.
- Avvitare la manopola fino in fondo, assicurandosi che la testa della vite rimanga nascosta all'in-



5. INFORMAZIONI PER L'USO SICURO

Assicurarsi che lo schienale e la pedana siano ben posizionati per usare questo deambulatore come una sedia a rotelle. Se si vuole usare questo deambulatore solo come sedia, assicurarsi che il freno sia inserito.

- Non sedersi mai per poi spingere con i piedi.
- Non utilizzare per salire o scendere scale, scale mobili o nastri trasportatori.

Consultare sempre il proprio medico o terapeuta per determinare l'uso corretto e la regolazione dell'altezza per il massimo appoggio e il buon uso del freno.

Assicurarsi che entrambe le manopole di regolazione dell'altezza siano strette e che le impugnature siano alla stessa altezza. Si prega di testare la stabilità prima dell'uso.

Assicurarsi che il deambulatore e i cardini sia completamente aperti, e il sedile nella sua corretta posizione.

Regolare l'altezza e assicurarsi che le ruote si muovono liberamente prima dell'uso.

5.1.5.1. LIMITE DI PESO DEL PRODOTTO

Non esporre il deambulatore a temperature estreme (molto alte o molto basse), umidità o acqua

per evitare la deformazione delle parti in plastica.

Tutto le ruote devono essere a contatto con il terreno durante l'utilizzo del deambulatore in modo che questo sia stabile e bilanciato.

5.2. 5.2. PER EVITARE IL RIBALTAMENTO

- Non cercare ad afferrare oggetti se si deve avanzare mentre seduto nel deambulatore.
- Non appendere nulla sul deambulatore.
- Lo schienale deve sempre essere inserito ma non è stato disegnato per sopportare il peso del corpo.
- Se si vuole raggiungere o raccogliere un oggetto, si devono posare entrambi i piedi a terra.
- Non aggiungere altro peso al deambulatore quando si è seduto.
- Non utilizzare il seggiolino se ci si trova su un pendio o su un terreno irregolare.
- Il cestino ha una capacità di 5 kg e gli oggetti non devono sporgere da esso.
- Per fermare momentaneamente il deambulatore, premere contemporaneamente su entrambe le maniglie.

6. MANUTENZIONE E PULIZIA

- Eseguire una manutenzione regolare del deambulatore.
- Pulire il telaio con un panno umido per rimuovere lo sporco.
- Conservare il deambulatore in casa durante la notte. Non esporlo ad aria salmastra o ambienti ostili.
- Controllare settimanalmente le ruote, vedere se girano correttamente, se non hanno sporco o qualsiasi altra cosa che possa interferire con il suo buon funzionamento. Controllare ugualmente che il telaio non sia danneggiato, che non presenti crepe o altri problemi con le saldature. Per ultimo, assicurarsi che i freni fun-

7. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto.

COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

PROCEDURA PER RICHIEDERE LA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com che potrà informarle del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, da collisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI..

Simboli grafici.



Conformità Europea



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso
per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente
prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul prodotto



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto di produzione



Codice prodotto



Numero di serie



Dispositivo medico

Manuale d'istruzione

Deambulatore A41009F

V5 · 14/06/2023