



# Magnum Shop

Andarilho  
e carrinho de compras

**MANUAL DO UTILIZADOR**

Ref. AALMAGNUMSHOP

mais de 50 anos a viver sem limites

## ! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

[www.totalcare-europe.com](http://www.totalcare-europe.com)

DA TOTALCARE EUROPE

# OBRIGADO PELA VOSSA CONFIANÇA

Obrigado por adquirir um produto da **IM** by **TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e resistiu aos testes mais exigentes.

A experiência adquirida ao longo do tempo permite que os nossos produtos ofereçam os melhores desempenhos, para que possa usufruir cada vez mais da liberdade e da autonomia de que necessita todos os dias.


Sugerimos-lhe que leia atentamente as instruções fornecidas. Este permitirá familiarizar-se com o seu novo andarilho e carrinho de compras **Magnum Shop**, o que lhe permitirá tirar o máximo partido do seu desempenho e da sua vida útil.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

# GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

<b>1 — Partes do andarilho .....</b>	<b>4</b>
<b>2 — Descrição do produto .....</b>	<b>4</b>
<b>3 — Caraterísticas do produto .....</b>	<b>5</b>
<b>4 — Utilização e montagem .....</b>	<b>6</b>
<b>5 — Manutenção e limpeza .....</b>	<b>7</b>
<b>6 — Segurança e outras informações .....</b>	<b>8</b>
<b>7 — Garantia.....</b>	<b>9</b>



## 1. PARTES DO ANDARILHO



## 2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### ANDARILHO E CARRINHO DE COMPRAS

Faça compras com estilo, conforto e segurança com o novo andador e carrinho de compras **Magnum Shop**: uma solução inovadora para quem procura conforto, estilo, segurança e praticidade no seu quotidiano.

Possui um grande cesto com uma capacidade de carga de 24 litros e um peso máximo de 15 kg. Incorpora também um grande saco amovível e lavável no interior.

Os tecidos utilizados no andador **Magnum Shop** são de alta qualidade, impermeáveis e ignífugos, proporcionando durabilidade e segurança na utilização.

Com a sua robustez, design e conforto, o andador e carrinho de compras **Magnum Shop** é o companheiro ideal para fazer compras com toda a segurança e conforto..

3. CARATERÍSTICAS DO PRODUTO



MAGNUM SHOP



MAGNUM SHOP PLUS



INFORMAÇÕES GERAIS

<b>Medidas</b>	
Largura total	55 cm
Largura entre as rodas traseiras	40 cm
Profundidade total	68 cm
Altura total (regulável)	79 - 91 cm
Dobrado (L x A x P)	55 x 65 x 42 cm

<b>Peso</b>	
Peso total	10,90 kg
Peso máximo suportado	136 kg

<b>Material</b>	Alumínio
-----------------	----------

<b>Cor</b>	
Cor chassis	Preto mate
Cor tecidos	Cinzentos / Turquesa



Cesto de grande capacidade



Saco interior amovível

<b>Assento</b>	
Largura do assento (tamanho)	40 cm
Profundidade do assento	32 cm
Altura do assento ao chão	51 cm
Tipo de assento	Dobrável
Tipo de cobertura	Amovível e lavável

<b>Encosto</b>	
Largura do encosto	40 cm
Altura do encosto	17 cm
Tipo de encosto	Dobrável
Tipo de cobertura	Amovível e lavável

<b>Rodas</b>	
Tamanhos das rodas	Ø20 cm
Largura da roda	3 cm
Tipo de rodas	Maciços

<b>Cesto exterior</b>	
Dimensões	38 x 25 x 25 cm
Capacidade	24 l.
Peso máximo suportado	15 kg
Tipo de cesto	Amovível e lavável

<b>Cesto interior</b>	
Tipo de cesto	Amovível e lavável
Tipo de fixação	Fixação com 4 tiras de velcro

<b>Outras caraterísticas</b>	
Tipo de travão	Alavanca do travão / Bloqueio do travão
Tipo de dobragem	Rodas dobráveis com botões de libertação rápida

## 4. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM

### 4.1. TIRAR O ANDARILHO DA CAIXA

Antes de começar, encontrará na caixa um saco com quatro parafusos de fixação.



### 4.2. UTILIZAÇÃO DO ECRÃ

**Passo 1:** Baixe as duas rodas dianteiras e prenda-as firmemente com dois parafusos de botão, um em cada extremidade da parte superior da roda..



**Passo 2:** Baixe as rodas traseiras, pressione a esfera de alumínio para fazer a primeira fixação e termine de as fixar com os dois parafusos de botão..



**Passo 3:** Para alterar a altura, pressione o pino de bloqueio prateado; saberá que a altura está completamente fixa quando vir o pino entre um dos oito orifícios.



### 4.3. UTILIZAÇÃO DOS TRAVÕES

Travão de serviço (ao empurrar): Puxe as alavancas do travão para cima.



Bloqueio dos travões (ao estacionar e ao utilizar a função de banco): Pressionar as alavancas dos travões para baixo.



### 4.4. UTILIZAÇÃO DO ASSENTO

Para rebater completamente o banco, rebata o encosto para trás e pode abrir o cesto.



### 4.5. UTILIZAÇÃO DA AJUDA À TRANSPOSIÇÃO DE OBSTÁCULOS

O andarilho tem um sistema incorporado nas duas rodas traseiras para o ajudar a ultrapassar diferentes obstáculos, como lancis ou outros objectos.



## 4.6. COLOCAÇÃO DO SACO EXTERIOR

Coloque o saco no cabide do andarilho e utilize o velcro para o fixar à estrutura. A aba mais comprida é colocada na parte da frente da armação.



## 4.6. COLOCAÇÃO DO SACO INTERIOR

Coloque o saco interior amovível no interior do andarilho e utilize o velcro para o fixar.



## 4.7. INSTALAÇÃO DO APOIO DE BRAÇO

Esta opção só está disponível no modelo **Magnum Shop Plus**.

Para fixar os apoios de braços, retire as braçadeiras de apoio de braços do andarilho e faça deslizar o tubo do apoio de braços até parar contra a lateral. Os apoios de braços não têm um lado específico, pelo que podem ser posicionados à esquerda ou à direita. a la derecha.



# 5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

### Manutenção

A sujidade normal das peças de metal e plástico pode ser removida com produtos de limpeza.

Verifique o conteúdo dos produtos de limpeza e utilize apenas produtos de limpeza e desinfecção adequados. Não utilize solventes ou produtos de limpeza abrasivos. Apesar da construção robusta e da utilização de materiais resistentes e anticorrosivos, a cadeira de rodas está sujeita a desgaste, pelo que se recomenda que a cadeira de rodas seja verificada regularmente (pelo menos uma vez por ano).

Este controlo deve incluir: Um controlo visual de todas as partes da estrutura quanto a dobras, danos, desgaste e corrosão e, em particular, um controlo do seguinte

- Estrutura do andarilho.
- Barras de empurrar, pegas e correia.

- Manípulos e cabos dos travões.
- Forquilhas e rodas dianteiras.
- Rodas traseiras com travão.
- Assento e dispositivo de fecho.
- Saco de compras.
- Verificar se faltam peças de montagem (por exemplo, porcas, parafusos, parafusos, rebites...) e se funcionam e estão bem apertadas.
- Verificar o funcionamento dos travões, diminuindo a velocidade e travando as rodas.

### Limpeza

A limpeza e a desinfecção devem ser efectuadas em intervalos regulares. Utilizar uma solução de sabão suave sem abrasivos.

Podem ser utilizados métodos padrão para a desinfecção. Não utilizar equipamento de injeção de vapor, esfregões ou produtos de limpeza corrosivos.

## 6. SEGURANÇA E MAIS INFORMAÇÕES



### CUIDADO

Não utilizar o andarilho como cadeira de rodas ou cadeira de transporte.

- Utilizar o assento apenas para estar sentado.
- Nunca se sente e empurre com os pés.
- Não utilizar para subir ou descer escadas, escadas rolantes ou tapetes rolantes..

Consulte sempre o seu médico ou terapeuta para determinar a utilização e o ajuste adequados da regulação em altura para obter o máximo apoio e a ativação adequada do travão.

Certifique-se de que ambos os botões de regulação da altura estão bem apertados e que as pegas estão à mesma altura. Teste a estabilidade antes da utilização.

Certifique-se de que o andarilho está totalmente aberto, que o assento está na posição correta e que as dobradiças estão corretamente colocadas.

Verificar se as regulações em altura estão corretas e se as rodas se movem livremente antes da utilização.

Respeitar o limite de peso do produto.

Substituir as rodas quando estiverem gastas ou

danificadas. Verificar semanalmente se as rodas dianteiras apresentam sinais de danos.

Interromper a utilização do andarilho se as rodas estiverem soltas e devolver ao local de compra para serem ajustadas.

Não expor a temperaturas extremas (muito altas ou muito baixas), humidade ou molhagem para evitar a deformação das peças de plástico.

Todas as rodas devem estar em contacto com o solo quando o andarilho estiver a ser utilizado, de modo a mantê-lo equilibrado.

### Para evitar que se vire:

- Não pegue em objectos se tiver de se deslocar para a frente enquanto estiver sentado no andarilho.
- Não pendure nada no andarilho.
- O encosto deve estar sempre no lugar e não foi concebido para suportar o peso total do corpo.
- Se quiser alcançar ou apanhar um objeto, deve colocar os dois pés firmemente no chão.
- Não adicione peso extra ao andarilho quando estiver sentado.
- Não utilize o assento se estiver num declive ou num terreno irregular.
- O cesto tem uma capacidade de 5 kg e os objectos não devem ficar salientes.
- Para travar temporariamente o andarilho, prima os dois punhos ao mesmo tempo.



## 7. GARANTIA

### DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

### ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

### PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail [info@totalcare-europe.com](mailto:info@totalcare-europe.com).

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à fatura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

### ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

**NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.**

**CONTACTE O SEU FORNECEDOR.**

# ***MAGNUM*** **SHOP**

*IM BY TOTALCARE*



# ***magnum*** **SHOP**

*1m BY TOTALCARE*



## Legenda da etiquetagem.



Conformidade europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

## Manual do utilizador

Andarilho e carrinho de compras, **Magnum Shop**

**V3 · 24/07/2024**