



Forum

Camminatore e
carrello della spesa

MANUALE D' USO

Ref. AALFORUMG



più di 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, poiché possono presentare modifiche progettuali a seconda delle esigenze costruttive.

Il prodotto in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Consulta il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

GRAZIE PER PER LA VOSTRA FIDUCIA

Grazie per aver acquistato un prodotto da **IM** by **TotalCare Europe**.

Il prodotto che avete acquistato è dotato della tecnologia più avanzata e ha superato i test più impegnativi.

L'esperienza maturata nel tempo fa sì che i nostri prodotti offrano le migliori prestazioni, per consentirvi di godere ogni giorno di più della libertà e dell'autonomia di cui avete bisogno.

Vi suggeriamo di dedicare un momento alla lettura delle istruzioni fornite. In questo modo prenderete confidenza con il vostro nuovo deambulatore e carrello **Forum** e potrete ottenere il massimo delle prestazioni e della durata.

più di **50 anni** di vita **senza limiti**

GUIDA RAPIDA.

È importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto

1 — Parti del Forum dei camminatori	4
2 — Descrizione del prodotto.....	4
3 — Caratteristiche del prodotto	5
4 — Uso e montaggio.....	6
5 — Manutenzione e pulizia.....	7
6 — Sicurezza e ulteriori informazioni	8
7 — Garantía.....	9

1. PARTI DEL FORUM DEI CAMMINATORI



2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CAMMINATORE E CARRELLO DELLA SPESA

Fai acquisti con stile, comfort e completa sicurezza con l'innovativo deambulatore e carrello Forum. Questa soluzione versatile unisce praticità, eleganza e funzionalità per facilitare la tua vita quotidiana.

Dispone di un ingegnoso cestino pieghevole che, quando il sedile è ripiegato, si trasforma in un doppio cestino, simile ad un tradizionale carrello

della spesa, con una capacità fino a 49 litri.

Il girole e carrello spesa Forum si distingue per il design ultracompatto, con una larghezza totale di soli 53 cm e una profondità di 67 cm. Grazie alle sue dimensioni ridotte, al peso leggero di 8,5 kg e alle doppie ruote anteriori piroettanti, offre una manovrabilità eccezionale sia all'interno che all'esterno.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

forum



INFORMAZIONI GENERALI

Misure

Larghezza complessiva	53 cm
Larghezza tra le ruote posteriori	35 cm
Profondità totale	67 cm
Altezza totale (6 livelli)	81 - 96 cm
Piegato (L x A x P)	53x85x52 cm

Peso


Peso totale	8,50 kg
Peso massimo supportato	136 kg

Materiale

Alluminio

Colore

Colore del telaio	Nero opaco
Colore del tessuto	Grigio scuro

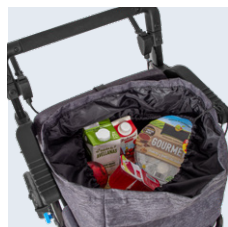

Carrello spesa Walker, con doppio cestello pieghevole dalla capacità di 49 litri

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posto a sedere

Larghezza del sedile	37 cm
Larghezza per sedersi (dimensione)	40 cm
Profondità del sedile	37 cm
Altezza sedile-pavimento	51 cm
Tipo di posto	Pieghevole

Schienale

Larghezza dello schienale	37 cm
Altezza dello schienale	17 cm
Tipo di schienale	pieghevole
Tipo di caso	Sfoderabile e lavabile

Ruote

Misure della ruota anteriore	Ø20 cm
Misure della ruota posteriore	Ø14 cm
Larghezza della ruota	4 cm
Tipo di ruota	Solido

Cestino esterno

Misure	32 x 55 x 28 cm
Capacità	49 l.
Peso mass. cestino sostenuto	20 kg
Tipologia cestino	Sfoderabile e lavabile


Altre caratteristiche

Tipo di freno	Leva/blocco freno
Tipo di bracciolo	Pieghevole

4. UTILIZZO E MONTAGGIO

4.1. MONTAGGIO DELLA CARROZZINA

Estrarre il girello Forum dalla scatola e assemblare le gambe con le ruote posteriori. Usa le manopole blu per fissare entrambe le gambe in posizione.

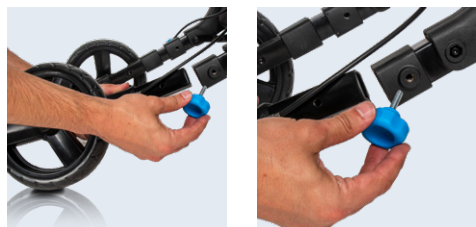

4.2. REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA

La barra consente una facile regolazione dell'altezza rimuovendo le due manopole laterali. Con 6 livelli di regolazione, può essere regolato tra 81 cm e 96 cm. Per fare ciò, rimuovi le manopole da entrambi i lati, posizionale su uno dei 6 livelli e assicurati che entrambi i lati siano allo stesso livello.



4.3. PIEGATURA E APERTURA

Per piegare il deambulatore, piegare prima indietro lo schienale. Quindi, tieni la struttura del cestino con una mano e il pugno con l'altra e unisci entrambi gli elementi. Il deambulatore si piegherà. Per eseguire la distribuzione, ripetere la procedura in ordine inverso.



4.4. USO DEI FRENI

Freno di servizio: per frenare il deambulatore durante l'utilizzo, tirare la leva in avanti.

Freno di bloccaggio: per bloccare e parcheggiare il deambulatore, ad esempio da seduti, tirare la leva verso di sé. Il deambulatore verrà bloccato.



4.5. BLOCCAGGIO DELLE RUOTE ANTERIORI

Le doppie ruote anteriori piroettanti possono essere bloccate in posizione diritta. Per fare ciò, posizionare le ruote in linea retta e tirare la leva verso l'alto, assicurandosi che siano fissate. Verificare che entrambi i lati siano nella stessa posizione.



4.6. UTILIZZANDO IL SISTEMA DEL PERCORSO A OSTACOLI

Il deambulatore è dotato di un sistema sulle due ruote posteriori che facilita il superamento di ostacoli, come cordoli o altri elementi.





4.7. POSIZIONAMENTO DEL SACCO ESTERNO

Posiziona la borsa sulla gruccia del deambulatore e fissala al telaio utilizzando il velcro. Il lato con la piccola etichetta TotalCare Europe corrisponde alla parte anteriore del deambulatore.




4.8. BRACCIOLO

Per ripiegare il bracciolo, tirare in avanti la maniglia sporgente. Una volta sbloccato è possibile abbassare facilmente il bracciolo.

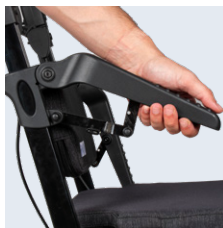
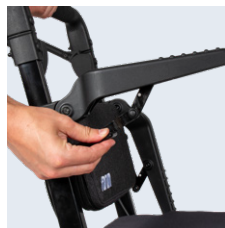


4.9. FISSAGGIO DELLA BORSA PIEGHEVOLE DOPPIA

Per utilizzare la doppia borsa esterna, ripiegare prima il sedile verso l'alto e lo schienale indietro.

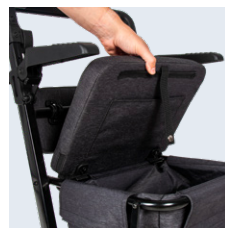

Successivamente, apri la borsa e fissala alla base interna del sedile utilizzando la cerniera. Una volta fissato, ancorare il sedile allo schienale con la clip per garantire che il doppio cestino sia saldamente in posizione.

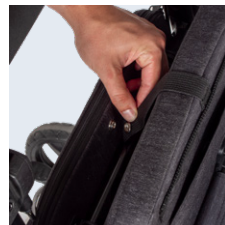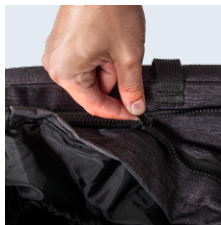

5. MANTENIMENTO Y LIMPIEZA

Manutenzione

- Lo sporco normale sulle parti in metallo e plastica può essere rimosso con detergenti.
- Controllare il contenuto dei detergenti e utilizzare solo prodotti adatti per la pulizia e la disinfezione. Non utilizzare solventi o detergenti abrasivi nonostante la struttura solida e l'utilizzo di materiali resistenti e anticorrosivi, il deambulatore è soggetto ad usura, pertanto si consiglia di controllare regolarmente il deambulatore (almeno una volta all'anno).
- Questo controllo dovrebbe includere: Un controllo visivo di tutte le parti del telaio: se sono state piegate, danneggiate, usurate o corrose e, in particolare, un controllo di quanto segue
- Struttura del camminatore.
- Barre di spinta, maniglie e cinghia.
- Maniglie dei freni e cavi dei freni.

- Forcelle e ruote anteriori.
- Ruote posteriori frenate.
- Sedile e dispositivo di bloccaggio.
- Borsa della spesa.
- Controllare se mancano parti di montaggio (ad esempio dadi, viti, rivetti...) e se sono funzionanti e serrate.
- Controllare il funzionamento dei freni rallentando e frenando le ruote.

Pulizia

La pulizia e la disinfezione devono essere effettuate a intervalli regolari. Utilizzare una soluzione di sapone neutro senza abrasivi.

Per la disinfezione è possibile utilizzare metodi standard. Non utilizzare apparecchiature per l'iniezione di vapore o detergenti per la pulizia o corrosivi.

6. SICUREZZA E ULTERIORI INFORMAZIONI



ATTENZIONE

Non utilizzare il deambulatore come sedia a rotelle o sedia da trasporto..

- Usare il sedile solo per stare fermi.
- Non sedersi mai e non spingere con i piedi.
- Non utilizzare per salire o scendere le scale, le scale mobili o i nastri trasportatori..

Consultare sempre il proprio medico o terapeuta per determinare l'uso e la regolazione corretta della regolazione in altezza per ottenere il massimo sostegno e la corretta attivazione del freno.

Assicurarsi che entrambe le manopole di regolazione dell'altezza siano ben strette e che le maniglie siano alla stessa altezza. Verificare la stabilità prima dell'uso.

Assicurarsi che il deambulatore sia completamente aperto, che il sedile sia in posizione e che le cerniere siano correttamente dispiegate.

Verificare che le regolazioni in altezza siano corrette e che le ruote si muovano liberamente prima dell'uso.

Rispettare il limite di peso del prodotto.

Sostituire le ruote quando sono usurate o danneggiate. Controllare settimanalmente che le ruote anteriori non presentino segni di danneggiamento.

Se le ruote sono allentate, interrompere l'uso del deambulatore e restituirlo al rivenditore per la regolazione.

Non esporre il deambulatore a temperature estreme (molto alte o molto basse), all'umidità o al bagnato per evitare la deformazione delle parti in plastica.

Quando il deambulatore è in uso, tutte le ruote devono essere a contatto con il suolo per mantenerlo in equilibrio.

Per evitare che si ribalti:

- Non afferrare gli oggetti se dovete spostarvi in avanti mentre siete seduti sul deambulatore.
- Non appendere nulla al deambulatore.
- Lo schienale deve essere sempre in posizione e non è progettato per sostenere tutto il peso del corpo.
- Se si vuole raggiungere o raccogliere un oggetto, è necessario appoggiare entrambi i piedi sul pavimento.
- Non aggiungere altro peso al deambulatore quando si è seduti.
- Non utilizzare il sedile se ci si trova in pendenza o su un terreno irregolare.
- Il cestino ha una capacità di 5 kg e gli oggetti non devono sporgere da esso.
- Per frenare temporaneamente il deambulatore, premere contemporaneamente su entrambe le maniglie.

7. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto.

COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

PROCEDURA PER RICHIEDERE LA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com che potrà informarle del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, da collisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI.

CONTATTA IL TUO FORNITORE.

forum



forum



Simboli grafici.



Conformità Europea.



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul prodotto



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto di produzione



Codice prodotto



Numero di serie



Dispositivo medico

Manuale d'uso

Camminatore e carrello della spesa, **Forum**

V2 · 11/11/2024