



CR04

Camminatore all'aperto

MANUALE DI ISTRUZIONI

Ref. BSDPAL9100FB - BSDPAL9100FREFB

Oltre 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono subire modifiche progettuali in base alle esigenze di produzione.

Il prodotto presente in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Si prega di consultare il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

VI RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA FIDUCIA.

Grazie di aver acquistato un prodotto di **IM by TotalCare Europa**.

Il prodotto che avete acquistato è stato concepito con tecnologia d'avanguardia e ha superato le prove di collaudo più rigorose

L'esperienza attraverso il tempo fa sì che i nostri ausili offrano un design funzionale che permette più libertà e autonomia, per svolgere le attività di igiene ogni giorno.

La preghiamo di dedicare un momento alla lettura del presente manuale per assicurare un corretto uso del nuovo **camminatore CR04**. Troverete le informazioni e i consigli per un corretto uso del dispositivo e prolungare il suo ciclo di vita.

oltre **50 anni** di vita **senza limiti**

INDICE

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 – Parti	4
2 – Descrizione	4
3 – Caratteristiche tecniche	5
4 – Manutenzione e pulizia	6
5 – Montaggio	7
6 – Informazioni e norme di sicurezza	7
8 – Utilizzo	10
8 – Garanzia	11

1. PARTI



DESCRIZIONE

DEAMBULATORE LIGHTWALKER CON SEDILE

I deambulatori CR04 con freno incorporano (un sistema di freno manuale) garantisce pieno controllo alla persona che lo usa. È progettato in alluminio, un materiale leggero, ma resistente e di lunga durata.

Ha una comoda seduta regolabile sotto la quale si trova un cestino e sopra, una barra imbottita da usare come schienale durante la pausa. Un deambulatore facile da piegare e trasportare.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE



CR04 FM



CR04 FP



CR04 FM R8

Misure	CR04 FP	CR04 FM
Larghezza	65,5 cm	64 cm
Larghezza tra le ruote posteriori	36 cm	45,5 cm
Profondità	60/67 cm	67/73,5 cm
Profondità se ripiegato	26,5 cm	31 cm
Altezza (regolabile)	80,5/97 cm	82/99 cm
Altezza dal pavimento alla seduta (regolabile)	50/57 cm	50/57 cm

Peso	CR04 FP	CR04 FM
Peso total	7,15 kg	7,30 kg
Portata massima	100 kg	100 kg

Materiale	Alluminio	Colore	Blu / Rosso
-----------	-----------	--------	-------------

Seduta	
Larghezza	37 cm
Profondità	25 cm
Tipologia	Pieghevole
Materiale	Imbottito
Colore	Nero


CARATTERISTICHE TECNICHE

Schienale

Larghezza	48 cm
Tipologia	Pieghevole
Materiale	Barra imbottita

Ruote	CR04 FP	CR04 FM	CR04 R8
Diametro ruota anteriore	Ø15 cm	Ø15 cm	Ø20 cm
Diametro ruota posteriore	Ø15 cm	Ø15 cm	Ø20 cm
Spessore ruote anteriori	2,5 cm	2,5 cm	4 cm
Spessore ruote posteriori	2,5 cm	2,5 cm	4 cm
Tipologia	Macizas	Macizas	Macizas
Numero di ruote anteriori	2	2	2
Numero di ruote posteriori	4	2	2


Altre caratteristiche	CR04 FP	CR04 FM
Cestino	Cestino in tessuto	Cestino in tessuto
Misure cesto (larghezza/altezza/profondità)	36/18/19 cm	36/18/19 cm
Portata massima	8 kg	8 kg
Pieghevole	Sì	Sì
Tipi di freno	Pressione dei freni	Leva freno e blocco parcheggio
Porta bastone	Sì	Sì

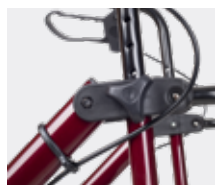

Manopola di regolazione



Altezza

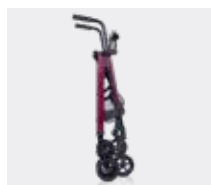

Schienale Rollator CR04 FP



Porta baston

4. MANUTENZIONE E PULIZIA

- Eseguire una manutenzione regolare del deambulatore.
- Pulire il telaio con un panno umido per rimuovere lo sporco.
- Conservare il deambulatore al riparo durante la notte. Non esporlo ad aria salmastra o ambienti ostili. Se esposto, verificare la presenza di danni e pulire prima dell'uso.
- Controllare settimanalmente le ruote, se girano correttamente, se non hanno peli, o fili o qualsiasi cosa che ne pregiudica il buon funzionamento. Controllare il telaio che non sia danneggiato, che non presenti crepe, né problemi alle saldature. Controllare anche i per garantire una buona frenata, altrimenti si deve portare al servizio tecnico per la regolazione.

5. ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

5.1. PRENDERE IL WALKER FUORI DALLA SCATOLA

Prima di iniziare, ritirare il deambulatore dall'imballaggio. Aprirlo spingendo verso il basso sui cardini del meccanismo pieghevole.

5.2. MONTAGGIO RUOTE

Ruote anteriori

Le ruote anteriori sono quelle con le forcelle (entrambe le ruote sono collegate). Inserire la barra di alluminio, regolare l'altezza, e fissare fissarla con l'apposito abbellitore.

Ruote posteriori

Le ruote posteriori sono quelle che non hanno le forcelle. Ripetere il passaggio precedente.

5.3. IMPUGNATURE E MANIGLIA FRENO

Inserisci la barra di alluminio allo stesso modo, ma questa volta attraverso la parte superiore del deambulatore come si vede nell'immagine.

5.4. MANOPOLA E VITE PER REGOLARE L'ALTEZZA

Inserire la manopola nel foro e ruotare fino a ottenere l'altezza desiderata come si vede nell'immagine.



5.5. MONTAGGIO DEL CESTINO

Mettere il cestino lungo la barra di piegatura in mezzo alle barre laterali e inserisci i bottoni. Devi sentire un click conferma che conferma il corretto montaggio."



ATTENZIONE

Una volta completato il montaggio del deambulatore, è importante verificare che tutte le parti siano posizionate correttamente prima dell'uso. Se si notano difetti, o le parti non sono perfettamente incastrate, si prega di usare il deambulatore e contattare il fornitore.

5.6. PORTA-BASTONE

Sulla barra destra del deambulatore sporge un cerchio sul quale puoi inserire il porta-bastone.



5.7. FRENI

Posizionare i cavi che collegano l'impugnatura con i freni come si mostra nell'immagine..



6. INFORMACIÓN DE USO Y SEGURIDAD



ATTENZIONE

- Non utilizzare il deambulatore come sedia a rotelle o sedia da trasporto.
- Usare il sedile solo per fare una pausa.
- Non sedersi mai per poi spingere con i piedi.
- Non utilizzare per salire o scendere scale, scale mobili o nastri trasportatori.
- Consultare sempre il proprio medico o terapista per determinare l'uso corretto e la regolazione dell'altezza per il massimo appoggio e il buon uso del freno.
- Assicurarsi che entrambe le manopole di regolazione dell'altezza siano strette e che le impugnature siano alla stessa altezza. Si prega di testare la stabilità prima dell'uso.
- Assicurarsi che il deambulatore e i cardini sia completamente aperti, e il sedile nella sua corretta posizione.
- Regolare l'altezza e assicurarsi che le ruote si muovono liberamente prima dell'uso.
- Rispettare la portata massima del deambulatore.
- Sostituire le ruote se usurate o danneggiate. Controllare settimanalmente le ruote anteriori per segni di danni.
- Interrompere l'uso del deambulatore se si osservano problemi di scorrimento delle ruote e contattare il punto di vendita.
- Non esporre il deambulatore a temperature estreme (molto alte o molto basse), umidità o acqua per evitare la deformazione delle parti in plastica.
-
- Tutto le ruote devono essere a contatto con il terreno durante l'utilizzo del deambulatore in modo che questo sia stabile e bilanciato.
- Per evitare il ribaltamento:
 - Non cercare ad afferrare oggetti se si deve avanzare mentre seduto nel deambulatore.
 - Non appendere nulla sul deambulatore.
 - Lo schienale deve sempre essere inserito ma non è stato disegnato per sopportare il peso del corpo.
 - Se si vuole raggiungere o raccogliere un oggetto, si devono posare entrambi i piedi a terra.
 - Non aggiungere altro peso al deambulatore quando si è seduto.
 - Non utilizzare il seggiolino se ci si trova su un pendio o su un terreno irregolare.
 - Il cestino ha una capacità di 5 kg e gli oggetti non devono sporgere da esso.
 - Per fermare momentaneamente il deambulatore, premere contemporaneamente su entrambe le maniglie.
 - Para frenar el andador temporalmente, presione hacia abajo las dos empuñaduras a la vez.

7. UTILIZZO

7.1. COME USARE I FRENI

Per frenare basta premere contemporaneamente l'impugnatura e la maniglia del freno sottostante..



7.2. COME USARE LA MANOPOLA PER REGOLARE L'ALTEZZA

Per regolare l'altezza bisogna rimuovere la manopola, ai lati dello schienale, per alzare o abbassare la barra e collocarla all'altezza desiderata. Dopodiché è necessario reinserire la manopola e avvitare sul suo asse..



7.3. COME REGOLARE E IMPOSTARE L'ALTEZZA DELLA SEDUTA AL PAVIMENTO

Ruote anteriori

Per regolare e fissare l'altezza delle due ruote posteriori, è necessario rimuovere entrambi gli abbellitori, premere il perno e muovere la barra fino all'altezza desiderata. Far fuoriuscire il perno e assicurarsi di ascoltare il click di conferma.

Ruote posteriori

Premere sulla sfera che sporge dalla barra di alluminio e abbassare o alzare la barra fino all'altezza desiderata. Assicurarsi di ascoltare il click che conferma che le parti sono ben incastrate nella nuova posizione.



7.4. COME PIEGARE IL DEAMBULATORE

Per ripiegare il deambulatore basterà aprire il cestino, e tirare verso l'alto la base che sostiene la seduta..



8. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto..

COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

PROCEDURA PER RICHIEDERE LA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com che potrà informarle del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, da collisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI.

CONTATTA IL TUO FORNITORE.

Simboli grafici.



Conformità Europea



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul prodotto



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto di produzione



Codice prodotto



Numero di serie.



Dispositivo medico

Manuale d'istruzione

Andador CR04 FM · CR04 FP · CR04 FM R8

V4 · 08/04/2022