



Elite XL

Andador de exterior
bariátrico

MANUAL DE USUARIO

Ref. AAELITEFML

más de 50 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nuevo andador para exterior **Elite XL**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de este.

más de **50 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 — Partes del andador	4
2 — Descripción del producto	4
3 — Características del producto	5
4 — Uso y montaje	7
5 — Seguridad y más información	8
6 — Mantenimiento y limpieza	9
7 — Garantía	10

1. PARTES DEL ANDADOR



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ANDADOR BARIÁTRICO ULTRARESISTENTE FABRICADO EN ALUMINIO

El andador Elite XL es el modelo más grande y resistente de la reconocida familia de andadores Elite.

Diseñado específicamente para usuarios bariátricos y personas de gran estatura, el Elite XL ofrece un soporte robusto y seguro, con una capacidad de carga de hasta 210 kg.

Sus generosas dimensiones incluyen un ancho total de 67 cm, un asiento acolchado de 48 cm y un ancho útil para sentarse de 55 cm, lo que garantiza comodidad y estabilidad durante el uso.

Tanto la altura de los puños como la del asiento son ajustables: el asiento puede regularse entre 51 y 61 cm de altura, y el andador alcanza una altura máxima de hasta 105 cm.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	67 cm
Ancho entre ruedas traseras	50 cm
Profundidad total	70 cm
Alto total (regulable)	85 - 105 cm
Alto del asiento al suelo	51 - 61 cm

Medidas plegado

Ancho plegado	67 cm
Profundidad plegado	46 cm
Alto total plegado	93 cm

Peso

Peso total	10,6 kg
Peso máximo soportado	210 kg

Material	Aluminio
----------	----------

Color	Negro
-------	-------



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento	48 cm
Ancho útil para sentarse	55 cm
Profundidad del asiento	40 cm

Bolsa

Ancho de la bolsa	40 cm
Profundidad de la bolsa	28 cm
Alto de la bolsa	19 cm
Peso soportado de la bolsa	5 kg
Material de la bolsa	Nailon

Respaldo

Ancho del respaldo	60 cm
Alto del respaldo	20 cm
Tipo de respaldo	Extraíble

Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø20 cm
Medidas ruedas traseras	Ø20 cm
Ancho ruedas delanteras	3,5 cm
Ancho ruedas traseras	3,5 cm
Tipo de ruedas	Macizas
Tipo de freno	Freno maneta




4. USO Y MONTAJE

4.1. MONTAJE DEL ANDADOR

Antes de comenzar, saque de la caja el andador, las patas delanteras y traseras, el respaldo y las empuñaduras.



Paso 1: Una las patas delanteras con las traseras y fíjelas firmemente presionando el pasador de bloqueo plateado. Sabrá que la altura ha quedado correctamente ajustada cuando el pasador encaje y sea visible a través de uno de los orificios.

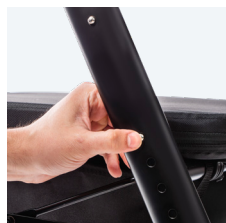

Paso 2: Repita el mismo procedimiento anterior con las empuñaduras, colocándolas en la parte superior de la estructura y utilizando los pasadores de bloqueo. Ajuste la altura de los mangos según su comodidad, asegurándose de que queden bien fijados en la posición deseada.




Paso 3: Coloque el respaldo encajándolo en las piezas indicadas (como se muestra en las imágenes). Finalmente, gírelo para asegurar el cierre y fijarlo correctamente.

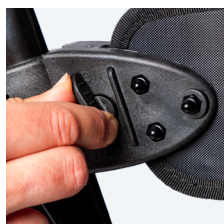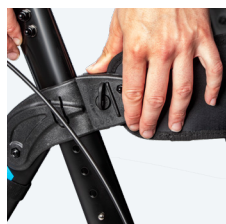


4.2. USO DEL DESPLEGADO Y PLEGADO

1. Desplegado : Tire hacia abajo de la barra de plegado para desplegar el andador. Puede ayudarse separando suavemente las patas. Luego, baje el asiento y colóquelo en posición horizontal.

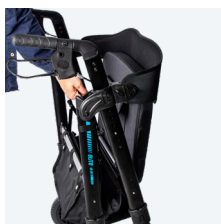


2. Plegado : Levante el asiento y tire hacia arriba de la barra de plegado para cerrar el andador.

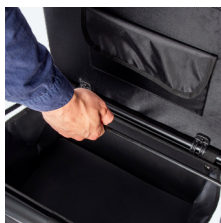

4.3. USO DEL FRENO

Freno de servicio (al empujar): tire de las palancas de freno hacia arriba.

Freno de estacionamiento (al estacionar y usar la función de asiento): presione las palancas de freno hacia abajo para dejar bloqueado el freno.

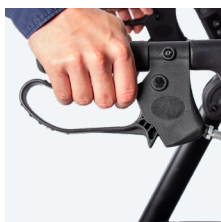

5. SEGURIDAD Y MÁS INFORMACIÓN

- Solo usar el asiento para estar sentado y quieto.
- Nunca sentarse y empujar con los pies.
- No utilizar para subir o bajar escales, escaleras mecánicas o cintas transportadoras.

Consulte siempre con su médico o terapeuta para determinar el uso y ajuste adecuado de la regulación de la altura para obtener el máximo apoyo y la correcta activación del freno.

Asegúrese que ambos pomos de ajuste de altura estén bien apretados y que los puños están a la misma altura. Pruebe la estabilidad antes de usarlo.

Asegúrese que el andador está completamente abierto, el asiento en posición y las bisagras desplegadas correctamente. Comprobar que los ajustes de altura sean los correctos y que las ruedas se mueven libremente antes de utilizarlo. Respete el límite de peso del producto.

Reemplace las ruedas cuando estén desgastadas o dañadas. Comprobar las ruedas delanteras semanalmente para detectar signos de daños.

Suspenda el uso del andador si comprueba que las ruedas están flojas y vuelva al lugar donde las compro para ajustarlo. No exponer a temperaturas extremas (muy altas o muy bajas), humedad o que se moje, para evitar deformaciones de las piezas de plástico.

Todas las ruedas tienen que estar en contacto con el suelo a la hora de utilizar el andador para que esté equilibrado.

Para evitar que vuelque:

- No intente alcanzar objetos si tiene que moverse hacia adelante mientras esté sentado en el andador. No cuelgue nada en el andador.
- El respaldo debe estar siempre en su sitio y no está diseñado para soportar todo el peso corporal.
- Si quiere alcanzar o recoger algún objeto debe colocar ambos pies firmemente en el suelo.
- No añadir más peso al andador cuando esté sentado. No use el asiento si se encuentra en una pendiente o terreno irregular.
- La cesta tiene una capacidad de 5 kg. Y los objetos no deben sobresalir de ella. Para frenar el andador temporalmente, presione hacia abajo las dos empuñaduras a la vez.

6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Mantenimiento

La suciedad normal en las piezas de metal y plástico se puede eliminar con agentes de limpieza normales.

Compruebe el contenido de los agentes de limpieza y utilice únicamente productos adecuados para la limpieza y desinfección. No utilice disolventes o agentes de limpieza abrasivos a pesar de la estructura sólida y el uso de materiales resistentes y anticorrosivos, el andador está sujeto a desgaste, por lo tanto, se recomienda revisar el andador con regularidad (una vez al año como mínimo).

Dicho control debería comprender: Un control visual de todas las partes del marco: si han sido dobladas, dañadas, gastadas o corroídas y, en particular, un control de lo siguiente

- Estructura del andador.
- Barras de empuje, asas y correa.
- Mangos de freno y cables de freno.
- Horquillas y ruedas delanteras.
- Ruedas traseras frenadas.
- Asiento y dispositivo de bloqueo.
- Bolsa de compras.
- Compruebe si falta alguna pieza de montaje (por ejemplo, tuercas, tornillos, remaches...) y si funcionan y están bien apretados.
- Compruebe el funcionamiento de los frenos bajando la velocidad y frenando las ruedas.

La limpieza y desinfección deben realizarse a intervalos regulares. Use una solución jabonosa suave sin abrasivos.

7. GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su numero de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

elite XL

El andador Elite XL es el modelo más grande y resistente de la reconocida familia de andadores Elite



Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Datos del fabricante.



Fecha de fabricación.



Representante Europeo.



Lote.



Referencia del producto.



Número de serie.



Producto sanitario conforme con el MDR.

Manual de usuario

Andador de exterior bariátrico Elite XL

V1 · 16/05/2025