



Elite XL

Andarilho
bariátrico de exterior

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. AAELITEFML



mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem estar sujeitas a alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Ver o nosso website para o modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com o seu novo andarilho de exterior **Elite XL**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Partes do andarilho	4
2 — Descrição do produto	4
3 — Características do produto	5
4 — Utilização e montagem	7
5 — Segurança e mais informações	8
6 — Manutenção e limpeza	9
7 — Garantia	10

1. PARTES DO ANDARILHO



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ANDARILHO BARIÁTRICO ULTRA-RESISTENTE EM ALUMÍNIO

O andador Elite XL é o maior e mais forte modelo da famosa família de andadores Elite.

Concebido especificamente para utilizadores bariátricos e pessoas de grande estatura, o Elite XL oferece um apoio robusto e seguro, com uma capacidade de carga até 210 kg.

As suas dimensões generosas incluem uma largura total de 67 cm, um assento almofadado de 48 cm e uma largura útil de assento de 55 cm, garantindo conforto e estabilidade durante a utilização.

Tanto a altura das pernas como a do assento são ajustáveis: o assento pode ser ajustado entre 51 e 61 cm de altura e o andador atinge uma altura máxima de 105 cm.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas

Largura total	67 cm
Largura entre as rodas traseiras	50 cm
Profundidade total	70 cm
Altura total (regulável)	85 - 105 cm
Altura do assento ao solo	51 - 61 cm

Dimensões dobradas


Largura dobrada	67 cm
Profundidade dobrada	46 cm
Altura total dobrada	93 cm

Peso

Peso total	10,6 kg
Peso máximo suportado	210 kg

Material	Alumínio
----------	----------

Cor	Preto
-----	-------

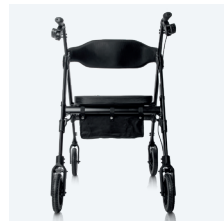

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Assento

Largura do banco	48 cm
Largura útil do assento	55 cm
Profundidade do assento	40 cm

Saco

Largura do saco	40 cm
Profundidade do saco	28 cm
Altura do saco	19 cm
Peso suportado pelo saco	5 kg
Material do saco	Nylon

Encosto

Largura do encosto	60 cm
Altura do encosto	20 cm
Tipo de encosto	Amovível

Rodas

Dimensões da roda dianteira	Ø20 cm
Medidas das rodas traseiras	Ø20 cm
Largura das rodas dianteiras	3,5 cm
Largura da roda traseira	3,5 cm
Tipo de rodas	Sólido
Tipo de travão	Alavanca de travão




4. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM

4.1. MONTAGEM DO ANDARILHO

Antes de começar, retire o andarilho, as pernas dianteiras e traseiras, o encosto e as pegas da caixa.



Passo 1: Junte as pernas dianteiras às pernas traseiras e fixe-as firmemente, premindo o pino de bloqueio prateado. Saberá que a altura foi corretamente ajustada quando o pino encaixar e for visível através de um dos orifícios.

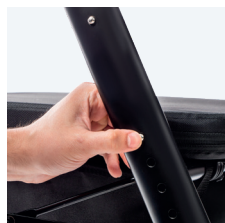

Passo 2: Repita o mesmo procedimento acima com as pegas, colocando-as no topo da estrutura e utilizando os pinos de bloqueio. Ajuste a altura dos punhos de acordo com o seu conforto, certificando-se de que estão bem fixos na posição desejada.




Passo 3: Posicione o encosto encaixando-o nas partes indicadas (como indicado nas imagens). Por fim, rode-o para prender o fecho e fixá-lo corretamente.

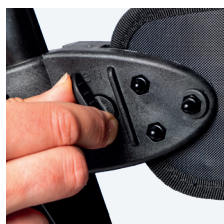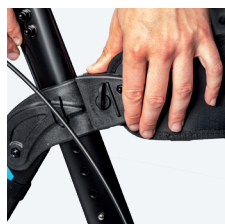


4.2. UTILIZAÇÃO DE DESDOBRAMENTO E DOBRAGEM

1. Desdobrada : Tire hacia abajo de la barra de plegado para desplegar el andador. Puede ayudarse separando suavemente las patas. Luego, baje el asiento y colóquelo en posición horizontal.

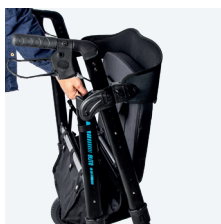

2. Dobrável : Levante o assento e puxe a barra de dobragem para cima para fechar o andarilho.

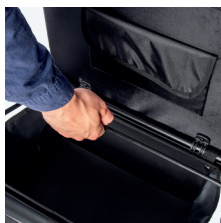

4.3. UTILIZAÇÃO DO TRAVÃO

Travão de serviço (ao empurrar): puxar as manetes dos travões para cima.

Travão de estacionamento (ao estacionar e ao utilizar a função de banco): pressione as alavancas do travão para baixo para bloquear o travão.



5. SEGURANÇA E MAIS INFORMAÇÕES

- Utilizar o assento apenas para estar sentado.
- Nunca se sente e empurre com os pés.
- Não utilizar para subir ou descer escadas, escadas rolantes ou tapetes rolantes..

Consulte sempre o seu médico ou terapeuta para determinar a utilização e o ajuste adequados da regulação em altura para obter o máximo apoio e a ativação adequada do travão.

Certifique-se de que ambos os botões de regulação da altura estão bem apertados e que as pegas estão à mesma altura. Teste a estabilidade antes da utilização.

Certifique-se de que o andarilho está totalmente aberto, que o assento está na posição correta e que as dobradiças estão corretamente colocadas. Verificar se as regulações em altura estão corretas e se as rodas se movem livremente antes da utilização. Respeitar o limite de peso do produto.

Substituir as rodas quando estiverem gastas ou danificadas. Verificar semanalmente se as rodas dianteiras apresentam sinais de danos.

Interromper a utilização do andarilho se as rodas estiverem soltas e devolver ao local de compra

para serem ajustadas. Não expor a temperaturas extremas (muito altas ou muito baixas), humidade ou molhagem para evitar a deformação das peças de plástico.

Todas as rodas devem estar em contacto com o solo durante a utilização do andarilho para que este fique equilibrado.

Para evitar que tombe:

- Não pegue em objectos se tiver de se deslocar para a frente enquanto estiver sentado no andarilho. Não pendure nada no andarilho.
- O encosto deve estar sempre no lugar e não foi concebido para suportar o peso total do corpo.
- Se quiser alcançar ou apanhar um objeto, deve colocar os dois pés firmemente no chão.
- Não adicione peso extra ao andarilho quando estiver sentado. Não utilizar o assento se estiver num declive ou num terreno irregular.
- O cesto tem uma capacidade de 5 kg. Os objectos não devem ficar salientes do cesto. Para travar temporariamente o andarilho, prima os dois punhos ao mesmo tempo..

6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Manutenção

A sujidade normal nas peças de metal e plástico pode ser removida com produtos de limpeza normais.

Verifique o conteúdo dos produtos de limpeza e utilize apenas produtos adequados para a limpeza e desinfeção. Não utilize solventes ou produtos de limpeza abrasivos. Apesar da construção robusta e da utilização de materiais resistentes e anticorrosivos, a cadeira de rodas está sujeita a desgaste, pelo que se recomenda que a cadeira de rodas seja inspeccionada regularmente (pelo menos uma vez por ano).

Esta inspeção deve incluir: Um controlo visual de todas as partes da estrutura quanto a dobras, danos, desgaste e corrosão e, em particular, uma verificação do seguinte

- Estrutura do andarilho.
- Barras de empurrar, pegas e correia.
- Manípulos e cabos dos travões.
- Forquilhas e rodas dianteiras.
- Rodas traseiras com travão.
- Assento e dispositivo de fecho.
- Saco de compras.
- Verificar se faltam peças de montagem (por exemplo, porcas, parafusos, parafusos, rebites...) e se funcionam e estão bem apertadas.
- Verificar o funcionamento dos travões, diminuindo a velocidade e travando as rodas..

A limpeza e a desinfeção devem ser efectuadas em intervalos regulares. Utilizar uma solução de sabão suave e não abrasiva..

7. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à factura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO utilizar ESTE PRODUTO SE ele PARECER estar DANIFICADO OU faltar PEÇAS.

contacte o seu FORNECEDOR.

elite XL

ndarilho Elite XL é o maior e mais forte modelo da famosa família de andarilhos Elite.



Legenda da etiquetagem.



Conformidade Europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

Manual do utilizador

Andarilho de exterior bariátrico Elite XL

V1 · 16/05/2025