



Elite XL

Camminatore
bariatrico per esterni

MANUALE D'USO

Ref. AAELITEFMLXL



più di 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono subire modifiche progettuali in base alle esigenze di produzione.

Il prodotto presente in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Si prega di consultare il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

VI RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA FIDUCIA.

Grazie di aver acquistato un prodotto di **IM by TotalCare Europa**.

Il prodotto che avete acquistato è stato concepito con tecnologia d'avanguardia e ha superato le prove di collaudo più rigorose

L'esperienza attraverso il tempo fa sì che i nostri ausili offrano un design funzionale che permette più libertà e autonomia, per svolgere le attività di igiene ogni giorno.

La preghiamo di dedicare un momento alla lettura del presente manuale per assicurare un corretto uso del nuovo camminatore **Elite XL**. Troverete le informazioni e i consigli per un corretto uso del dispositivo e prolungare il suo ciclo di vita.

oltre **50 anni** di vita **senza limiti**

INDICE

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 — Parti	4
2 — Descrizione	4
3 — Caratteristiche tecniche	5
4 — Montaggio e utilizzo.....	7
5 — Informazioni e norme di sicurezza.....	8
6 — Montaggio e utilizzo.....	9
7 — Garanzia	10

1. PARTI



2. DESCRIZIONE

CAMMINATORE BARIATRICO ULTRARESISTENTE IN ALLUMINIO

Il camminatore Elite XL è il modello più grande e robusto della rinomata famiglia di camminatori Elite.

Progettato specificamente per utenti bariatrici e persone di grande statura, Elite XL offre un supporto robusto e sicuro, con una capacità di carico fino a 210 kg.

Le sue dimensioni generose comprendono

una larghezza complessiva di 67 cm, un sedile imbottito di 48 cm e una larghezza utile di seduta di 55 cm, che assicurano comfort e stabilità durante l'uso.

Sia l'altezza delle maniglie che quella del sedile sono regolabili: il sedile può essere regolato tra 51 e 61 cm di altezza, mentre il deambulatore raggiunge un'altezza massima di 105 cm.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE



INFORMAZIONI GENERALI

Misure

Larghezza totale	67 cm
Larghezza tra le ruote posteriori	50 cm
Profondità totale	70 cm
Altezza totale (regolabile)	85 - 105 cm
Altezza dal sedile al pavimento	51 - 61 cm

Dimensioni ripiegate


Larghezza ripiegata	67 cm
Profondità ripiegata	46 cm
Altezza totale ripiegata	93 cm

Peso

Peso totale	10,6 kg
Peso massimo supportato	210 kg

Material	Alluminio
----------	-----------

Colore	Nero
--------	------

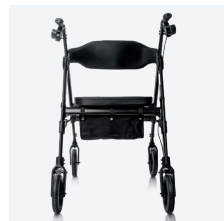

CARATTERISTICHE TECNICHE**Sedile**

Larghezza del sedile	48 cm
Larghezza utile del sedile	55 cm
Profondità del sedile	40 cm

Borsa




Larghezza della borsa	40 cm
Profondità della borsa	28 cm
Altezza della borsa	19 cm
Peso supportato della borsa	5 kg
Materiale della borsa	Nylon

Schienale

Larghezza dello schienale	60 cm
Altezza dello schienale	20 cm
Tipo di schienale	Rimovibile

Ruote

Misure della ruota anteriore	Ø20 cm
Misure della ruota posteriore	Ø20 cm
Larghezza della ruota anteriore	3,5 cm
Larghezza della ruota posteriore	3,5 cm
Tipo di ruota	Solido
Tipo di freno	Leva del freno

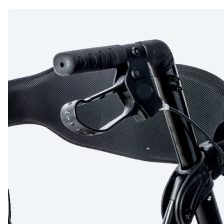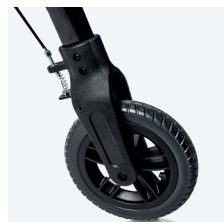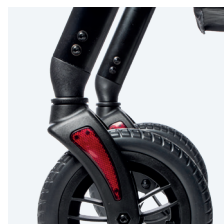


4. MONTAGGIO E UTILIZZO

4.1. MONTAGGIO DEL CAMMINATORE

Prima di iniziare, togliere dalla scatola il deambulatore, le gambe anteriori e posteriori, lo schienale e le maniglie.



Passo 1: Unire le gambe anteriori a quelle posteriori e fissarle saldamente premendo il perno di bloccaggio argentato. L'altezza è stata regolata correttamente quando il perno si innesta ed è visibile attraverso uno dei fori.

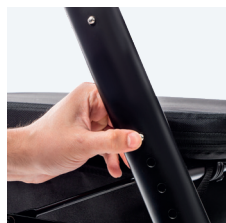

Passo 2: Ripetere la stessa procedura sopra descritta con le maniglie, posizionandole sulla parte superiore del telaio e utilizzando i perni di bloccaggio. Regolare l'altezza delle maniglie in base al proprio comfort, assicurandosi che siano fissate saldamente nella posizione desiderata.




Passo 3: Posizionare lo schienale inserendolo nelle parti indicate (come mostrato nelle immagini). Infine, ruotarlo per bloccare la serratura e fissarlo correttamente.

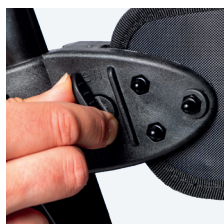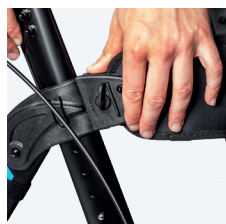

4.2. USO DI DISPIEGAMENTO E RIEPIEGAMENTO

1. Dispiegata : Tire hacia abajo de la barra de plegado para desplegar el andador. Puede ayudarse separando suavemente las patas. Luego, baje el asiento y colóquelo en posición horizontal.

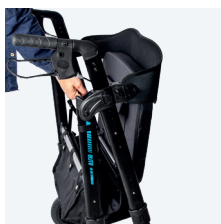


2. Pieghevole : Sollevare il sedile e tirare su la barra pieghevole per chiudere il deambulatore.



4.3. USO DEL FRENO

Freno di servizio (quando si spinge): tirare le leve dei freni verso l'alto.

Freno di stazionamento (quando si parcheggia e si usa la funzione sedile): premere le leve dei freni verso il basso per bloccare il freno..

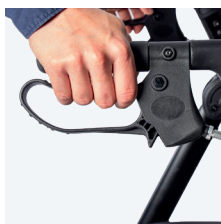

5. SICUREZZA E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Usate il sedile solo per stare fermi.
- Non sedersi mai e non spingere con i piedi.
- Non utilizzare per salire o scendere le scale, le scale mobili o i nastri trasportatori.

Consultare sempre il proprio medico o terapista per determinare l'uso e la regolazione corretta della regolazione in altezza per ottenere il massimo sostegno e la corretta attivazione del freno.

Assicurarsi che entrambe le manopole di regolazione dell'altezza siano ben strette e che le maniglie siano alla stessa altezza. Verificare la stabilità prima dell'uso.

Assicurarsi che il deambulatore sia completamente aperto, che il sedile sia in posizione e che le cerniere siano correttamente dispiegate. Verificare che le regolazioni in altezza siano corrette e che le ruote si muovano liberamente prima dell'uso. Rispettare il limite di peso del prodotto.

Sostituire le ruote quando sono usurate o danneggiate. Controllare settimanalmente che le ruote anteriori non presentino segni di danneggiamento.

Se le ruote sono allentate, interrompere l'uso del deambulatore e restituirlo al rivenditore per

la regolazione. Non esporre il deambulatore a temperature estreme (molto alte o molto basse), all'umidità o al bagnato per evitare la deformazione delle parti in plastica.

Tutte le ruote devono essere a contatto con il terreno quando il deambulatore è in uso, affinché sia bilanciato.

Per evitare che si ribalti:

- Non afferrate gli oggetti se dovete spostarvi in avanti mentre siete seduti sul deambulatore. Non appendere nulla al deambulatore.
- Lo schienale deve essere sempre in posizione e non è progettato per sostenere tutto il peso del corpo.
- Se si vuole raggiungere o raccogliere un oggetto, è necessario appoggiare entrambi i piedi sul pavimento.
- Non aggiungere altro peso al deambulatore quando si è seduti. Non utilizzare il sedile se ci si trova in pendenza o su un terreno irregolare.
- Il cestino ha una capacità di 5 kg. Gli oggetti non devono sporgere dal cestino. Per frenare temporaneamente il deambulatore, premere contemporaneamente su entrambe le maniglie.

6. MANUTENZIONE E PULIZIA

Manutenzione

Lo sporco normale sulle parti in metallo e plastica può essere rimosso con normali detergenti.

Controllare il contenuto dei detergenti e utilizzare solo prodotti idonei per la pulizia e la disinfezione. Non utilizzare solventi o detergenti abrasivi. Nonostante la struttura robusta e l'utilizzo di materiali resistenti e anticorrosivi, il deambulatore è soggetto a usura, pertanto si raccomanda di controllarlo regolarmente (almeno una volta all'anno).

Questo controllo deve comprendere: un controllo visivo di tutte le parti del telaio per verificare l'assenza di piegature, danni, usura e corrosione, e in particolare un controllo dei seguenti elementi

- Telaio del deambulatore.

- Manubri, maniglie e cinghia.
- Maniglie e cavi dei freni.
- Forcelle e ruote anteriori.
- Ruote posteriori frenate.
- Sedile e dispositivo di bloccaggio.
- Borsa della spesa.
- Controllare se mancano parti di montaggio (ad esempio dadi, bulloni, viti, rivetti...) e se funzionano e sono serrate correttamente.
- Controllare il funzionamento dei freni rallentando e frenando le ruote.

La pulizia e la disinfezione devono essere effettuate a intervalli regolari. Utilizzare una soluzione di sapone delicata e non abrasiva.

7. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto.

COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

PROCEDURA PER RICHIEDERE LA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com che potrà informarle del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, da collisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI.

CONTATTA IL TUO FORNITORE.

elite XL

Il camminatore Elite XL è il modello più grande e robusto della rinomata famiglia di camminatori Elite.



Simboli grafici



Conformità Europea.



Rappresentante europeo



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza



Lotto.



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Codice prodotto



Informazioni sul prodotto



Numero di serie



Data di produzione



Dispositivo medico

Manuale d'uso

Camminatore bariatrico per esterni Elite XL

V1 • 16/05/2025