

lanzarote



Lanzarote

Scooter com
dobragem eletrónica

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. SCPALLANZAROT185M12GM



mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA

Obrigado por adquirir um produto da **IM** by **TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e resistiu aos testes mais exigentes.

A experiência adquirida ao longo do tempo permite que os nossos produtos ofereçam os melhores desempenhos, para que possa usufruir cada vez mais da liberdade e da autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos-lhe que leia atentamente as instruções fornecidas. Desta forma, irá familiarizar-se com a sua nova scooter **Lanzarote**, permitindo-lhe tirar o máximo partido do seu desempenho e vida útil.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Peças da scooter Lanzarote	4
2 — Descrição do produto	4
3 — Características do produto	5
4 — Antes de começar	7
5 — Utilização e montagem	8
6 — Bateria e carregamento	11
7 — Manutenção	12
8 — Transporte e armazenamento	13
9 — Guia de resolução de problemas	13
10 — Proteção ambiental	13
11 — Garantia	14

1. PEÇAS DA LANZAROTE SCOOTER



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

SCOOTER ELÉCTRICA COM DOBRAGEM ELETRÓNICA E AMORTECEDORES

A scooter Lanzarote distingue-se pelo seu design ultra-compacto e pela tecnologia de ponta. Com apenas 98 cm de comprimento e 47 cm de largura, é ideal para manobrar em espaços apertados.

Graças ao seu sistema de dobragem eletrónica, a scooter pode ser fechada comodamente sem esforço a partir do joystick ou através do controlo remoto Bluetooth.

Com um peso de apenas 25,5 kg sem bateria, é surpreendentemente leve e, quando dobrada, tem aproximadamente o tamanho de uma mala, o que a torna uma escolha perfeita para armazenamento ou transporte.

Também possui um sistema de amortecimento avançado que garante uma condução suave e um conjunto moderno de luzes LED, que melhoram a visibilidade e a segurança.

3. CARATERÍSTICAS DO PRODUTO



INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas

Largura total	56 cm
Largura total (sem apoios de braços)	47 cm
Profundidade total	98 cm
Altura total	88 cm
Altura do assento ao chão	53 cm

Dimensões quando dobrado

Largura quando dobrado (sem apoios de braços)	47 cm
Profundidade quando dobrado	40 cm
Altura quando dobrado	65 cm

Peso

Peso total (sem bateria)	25,5 kg
Peso total (com bateria de 10 Ah)	27,5 kg
Peso máximo suportado	125 kg

Material	Alumínio
----------	----------

Cor	Cinzentos mate
-----	----------------



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Banco	
Largura do banco	42 cm
Largura utilizável do banco (entre apoios de braços)	46 cm
Profundidade do banco	40 cm
Motor	
Motor	120 W
Bateria	16 Ah (litio)
Número de baterias	1
Autonomia	15 - 20 km
Velocidade máxima	6 km/h
Apoio de braços	
Comprimento do apoio de braços	25 cm
Largura do apoio de braços	5 cm
Tipo de apoio de braços	Dobrável / Extraível
Encosto	
Largura do encosto	40 cm
Altura do encosto	24 cm
Tipo de encosto	Dobrável
Rodas	
Medidas da roda dianteira	Ø 17 cm
Medidas da roda traseira	Ø 17 cm
Largura da roda dianteira	4 cm
Largura da roda traseira	6 cm
Tipo de rodas	Maciços
Outras caraterísticas	
Altura máxima da berma	5 cm
Altura do solo à base da plataforma	9 cm
Amortecimento	Sim
Buzina	Sim
Ligação USB	Sim
Luzes LED	Sim
Mastro	Ajustável em altura e inclinação
Inclinação máxima de subida	12°
Raio de viragem	140 cm
Rodas anti-tombamento	Sim
Tipo de travões	Eletromagnético
Tipo de dobragem	Eletrónico a partir do painel ou painel de controlo, com opção de dobragem manual de emergência.



4. ANTES DE COMEÇAR

4.1. UTILIDADE DA SCOOTER

Esta trotinete é utilizada como auxiliar de mobilidade para pessoas com mobilidade reduzida, bem como para utilizadores ou pessoas idosas que necessitam de apoio ou de auxiliares de mobilidade. A carga máxima segura da trotinete Lanzaote é de 125 kg.

4.2. INSTRUÇÕES PARA UMA CONDUÇÃO SEGURA

1. Antes de conduzir, o utilizador deve familiarizar-se com o funcionamento da scooter. É crucial compreender totalmente este capítulo do manual do utilizador.
2. Avalie o seu estado físico de saúde antes de conduzir. Não é adequado conduzir nas seguintes circunstâncias: deficiência visual, deficiência dos membros superiores, doença cardíaca, gravidez, crianças, percepção lenta, inconsciência, coma ou circulação sanguínea grave. Os utilizadores preocupados com a sua saúde ou equipados com um regulador do ritmo cardíaco devem consultar um médico antes de utilizar a scooter.
3. Não pare a scooter em declives enquanto conduz; e tenha em atenção que a distância de travagem em declives será significativamente maior do que em piso plano.
4. É estritamente proibido conduzir sob a influência de álcool, drogas ou certos medicamentos.
5. Evite conduzir a scooter de Lanzaote à noite ou em condições climáticas extremas.
6. Antes de entrar ou sair da scooter eléctrica dobrável, certifique-se de que está desligada.
7. Não conduza a trotinete eléctrica dobrável em auto-estradas ou estradas.
8. Não ligue quaisquer dispositivos mecânicos ou electrónicos à scooter eléctrica dobrável, exceto os acessórios fornecidos pela Total-Care Europe.
9. Não conduzir em declives com inclinação superior a 12°. Não transpor obstáculos com altura superior a 5 cm.

10. Evitar conduzir em terrenos alagados, gelados, molhados ou escorregadios, bem como em terrenos irregulares, para evitar acidentes.
11. Não conduzir em combinação com outros veículos para evitar perigos.
12. A scooter Lanzaote pode ser afetada por interferências electromagnéticas específicas, tais como sistemas de segurança ou portões automáticos; tenha cuidado.
13. Não utilize a trotinete eléctrica dobrável para transportar objectos pesados ou para transportar um segundo passageiro.
14. É proibido circular ao longo de bermas ou lancis, pois pode causar danos permanentes no veículo.
15. Não exceda o peso máximo de carga de 125 kg.
16. Evitar circular nas escadas rolantes para evitar capotamentos.
17. Não vire bruscamente para evitar capotar.
18. Carregue totalmente a trotinete eléctrica antes de a utilizar pela primeira vez.

4.3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilize a scooter antes de o utilizador ter lido e compreendido completamente este manual de instruções.
- Não conduza depois de beber.
- Não deixe a chave na scooter quando esta não estiver a ser utilizada.
- Certifique-se de que o assento está bloqueado e fixo no lugar.
- Reduza a velocidade e tenha cuidado ao conduzir em curvas, terrenos irregulares, solo macio, declives, lancis, portas e escadas.
- É proibido alterar a configuração inicial ou voltar a montar a scooter.
- Tenha cuidado quando conduzir em ruas movimentadas, mercados ou centros comerciais. Não conduza em áreas não seguras ou em estradas legalmente proibidas; consulte os regulamentos de trânsito locais ou nacionais.

- Segurar o guiador com as duas mãos e colocar os pés na plataforma quando conduzir.
- Não utilize a scooter como assento num veículo em movimento.
- Quando transportar a scooter noutros veículos, certifique-se de que garante a segurança da bateria.
- Evitar fazer marcha atrás em rampas ou terrenos irregulares e ter cuidado ao conduzir em rampas.
- Não conduza à noite, em dias de chuva, neve ou nevoeiro, ou em dias de vento forte, ou em estradas esburacadas e irregulares, etc.
- Quando transportar a scooter de carro ou avião, dobre-a e desligue-a, e retire a chave para evitar uma ativação accidental.
- A temperatura da superfície da trotinete pode aumentar com o sol; evite o contacto direto com partes quentes para evitar queimaduras ou outros ferimentos.

4.4. INSTRUÇÕES DE CONDUÇÃO DA SCOOTER

- Pratique antes de utilizar a scooter.
- Pratique em áreas amplas e abertas para evitar perigos.
- Pratique as seguintes competências: acelerar, desacelerar, estacionar, fazer marcha atrás, virar, subir e descer declives. Comece com uma velocidade mínima e aumente à medida que a sua capacidade aumenta.
- Recomenda-se que tenha companhia durante a prática inicial para evitar perigos e acidentes.
- O utilizador controla a scooter com os dedos para avançar, recuar e virar. Certifique-se de que consegue ler e compreender as instruções, avaliar os riscos, ter consciência da segurança e reagir rapidamente.

5. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM

5.1. UTILIZAÇÃO DO BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO

- Introduzir a chave e rodá-la no sentido dos ponteiros do relógio para ligar e no sentido contrário para desligar.
- Desligue a alimentação se não for utilizar a trotinete eléctrica.



Se a alimentação for desligada durante a condução, o travão eletromagnético funciona e a scooter pára subitamente.

5.2. UTILIZAR O INTERRUPTOR DE AJUSTE DA VELOCIDADE

O interruptor de ajuste da velocidade é utilizado para alterar a velocidade de deslocação para a frente e para trás, que pode ser ajustada no intervalo de 0 a 6 km/h.

Velocidade mínima:

Para reduzir a velocidade ao mínimo, rode o botão para a esquerda. Isto assegura uma velocidade mais lenta e mais controlada.

Velocidade máxima:

Para aumentar a velocidade ao máximo, rode o botão para a extrema direita. Desta forma, obtém-se a velocidade mais rápida disponível.



Não ajustar a velocidade máxima ao virar ou fazer marcha-atrás.

5.3. UTILIZAÇÃO DA ALAVANCA DE COMANDO DA DIREÇÃO

A alavanca móvel, equipada com uma pega de borracha para maior comodidade, é utilizada para conduzir a scooter para a frente ou para trás. Siga estas instruções para um controlo eficaz.

Movimento para a frente

Segure a alavanca de controlo direita com o dedo direito e empurre-a para a frente. A scooter desloca-se para a frente de forma controlada.

Marcha atrás

Segure a alavanca de controlo esquerda com o dedo esquerdo e empurre-a para a frente. A scooter desloca-se para trás e são emitidos sinais sonoros de aviso como medida de precaução.



⚠ Evite ajustar a velocidade máxima enquanto vira ou faz marcha-atrás.

Se a fonte de alimentação for desligada durante a condução, o travão eletromagnético é ativado, fazendo com que a scooter pare abruptamente.

Paragem automática

Quando a alavanca de movimento é totalmente libertada, a scooter pára na posição "central". O travão eletromagnético entra em ação, garantindo uma paragem segura.


5.4. UTILIZAÇÃO DA BUZINA

Para evitar acidentes e danos, utilize corretamente o botão da buzina. A buzina soará depois de premir o botão.



5.5. REGULAÇÃO DO MASTRO

A altura do mastro da scooter Lanzarote é regulável em função das necessidades do utilizador. Para o ajustar, desbloquear a patilha do sistema de fixação, deslizar o mastro até à altura desejada e voltar a fixá-lo. Para além disso, também pode ser ajustado em inclinação, pressionando o mecanismo indicado e colocando-o na altura desejada.

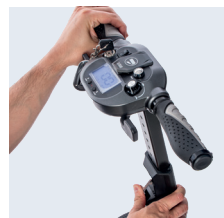

5.6. UTILIZAÇÃO DE LUZES

A scooter Lanzarote está equipada com um sistema avançado de iluminação LED. Os faróis são controlados a partir do painel de controlo: prima "I" para os ligar e "0" para os desligar.



5.7. MUDANÇA DE QUILOMETROS PARA MILHAS

O ecrã TFT da scooter Lanzarote apresenta informações como a velocidade, a distância percorrida, entre outras. Por defeito, a unidade de medida é em quilómetros. Se pretender alterar para milhas ou vice-versa, prima e mantenha premidos os botões "A - Open" e "B - Close" em simultâneo durante alguns segundos até que o sistema atualize as definições.



5.8. DESDOBRAMENTO E DOBRAGEM DA SCOOTER EM MODO ELETRÔNICO

A scooter Lanzarote dispõe de um sistema de dobragem eletrónico, que permite realizar o processo em apenas dois passos, quer a partir do painel de controlo, quer através do controlo remoto bluetooth.

Desdobramento eletrónico a partir do painel de controlo ou do telecomando bluetooth:

- Coloque a scooter na posição vertical.
- Prima o botão **"A - Open"** uma vez. A scooter emite um sinal sonoro e começa a desdobrar-se. O primeiro passo do desdobramento está concluído quando a scooter parar e deixar de emitir um sinal sonoro.



- Prima novamente o botão **"A - Open"** para completar o segundo passo. Saberá que o processo está concluído quando a scooter apitar três vezes seguidas. Importante: Verifique sempre se a scooter está totalmente aberta antes de a utilizar.



Antes de iniciar o processo de desdobramento, certifique-se de que deixa espaço suficiente à frente e atrás da scooter para evitar quaisquer obstáculos que possam interferir com o movimento automático.

Dobragem eletrónica a partir do painel de controlo ou do telecomando bluetooth:

- Coloque a scooter na posição desdobrada.
- Prima o botão **"B - Close"** uma vez. A scooter emite um sinal sonoro e começa a dobrar. O primeiro passo de dobragem está completo quando a scooter parar e parar de emitir um sinal sonoro.



- Prima novamente o botão **"B - Close"** para concluir o segundo passo. Saberá que o processo de dobragem está concluído quando a scooter emitir três bips seguidos.



Utilização do painel de controlo e do telecomando bluetooth:

Os processos electrónicos de dobragem e desdobragem descritos acima podem ser realizados a partir do painel de controlo ou do telecomando bluetooth.

- Para dobrar a scooter, a partir do painel de controlo ou do controlo remoto bluetooth.



- Para desbloquear a scooter, a partir do painel de controlo ou do controlo remoto bluetooth.




5.9. DESDOBRAR E DOBRAR A SCOOTER NO MODO MANUAL

No caso de a scooter ficar sem bateria ou de o sistema de dobragem eletrónico não funcionar, é possível efetuar o **processo de dobragem manualmente, apenas em situações de emergência específicas.**

Desdobramento manual*:

- Afaste os dois lados da scooter e aplique força no centro da scooter, evitando colocar as mãos dentro do mecanismo.
- Pressione a plataforma para baixo para garantir que a dobragem está segura.

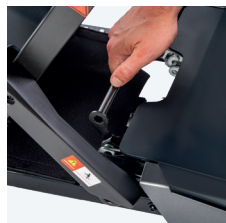

Dobragem manual:

- Puxe a pega no centro da plataforma para cima.
- Aplique pressão na direção da traseira da scooter.
- Dobre a scooter puxando a parte da frente da scooter na sua direção. hacia la trasera, logrando así una forma más compacta y manejable.



***Se a scooter tiver sido dobrada eletronicamente, não pode ser desdobrada no modo manual.**



Quando dobrada manualmente, a scooter não está bloqueada na posição dobrada e, por isso, deve ser manuseada com cuidado durante o transporte ou armazenamento.

6. BATERIA E CARREGAMENTO

6.1. NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

O ecrã apresenta o nível de carga da scooter. Se o ecrã apresentar as 5 linhas, a scooter está na capacidade máxima. Recomendamos que carregue a scooter antes que a bateria se esgote.

6.2. CARREGAMENTO DA BATERIA

Desligue a scooter e, em seguida, insira a ficha de carregamento na tomada de carregamento a partir do painel. Também pode carregar a partir da traseira da scooter.



A scooter tem uma função automática para evitar que se ligue durante o carregamento. Após o carregamento, é importante desligar primeiro o interruptor de alimentação e depois desligar as outras fichas.

6.3. INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

- Durante o carregamento, se a luz vermelha não estiver acesa, certifique-se de que verifica se todas as fichas estão corretamente inseridas.
- O tempo de carregamento é normalmente de 6 a 8 horas e não deve exceder 12 horas. É importante carregar a bateria de lítio aquando da sua primeira utilização. Recomenda-se que seja carregada nos primeiros 3 meses a partir da data de compra ou após um período de não utilização.
- Se a bateria não for utilizada durante 30 dias seguidos, carregue-a totalmente e retire-a da scooter. Retire a bateria quando a scooter não estiver a ser utilizada.
- Para um carregamento seguro e eficiente, deve ser utilizado o carregador original TotalCare Europe.
- Se utilizar a scooter durante todo o dia, carregue-a após cada dia de utilização. Se a utilizar uma vez por semana, carregue-a uma vez por semana.
- A distância de condução e o tempo após o carregamento completo podem variar se conduzirem scooter em pendientes, zanjais de acera, terrenos irregulares ou contra el viento.



A scooter Lanzarote pode ser carregada a partir do painel ou da parte traseira.

7. MANUTENÇÃO

7.1. AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO ADEQUADO

Coloque a scooter em áreas secas e bem ventiladas para evitar a corrosão causada pela humidade. Evite o contacto com produtos químicos corrosivos, tais como óleos, ácidos e álcalis.

7.2. LIMPEZA REGULAR DA SCOOTER LANZAROTE

- Utilize um pano limpo para limpar o painel de controlo, coberturas e outras superfícies externas da scooter.
- Evite utilizar líquidos químicos ou óleos que possam danificar a superfície da scooter.
- Não utilize escovas afiadas que possam riscar a pintura da scooter.
- Evite lavar a scooter diretamente com água da torneira para evitar danos nos componentes eléctricos. Se necessário, utilize um pano húmido com água limpa para limpar a superfície da scooter.

7.3. PROTEÇÃO CONTRA CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS ADVERSAS

- Evitar expor a trotinete ao sol e à chuva.
- Depois de molhar a scooter com água, certifique-se de que a seca bem para evitar a corrosão.
- Aplique ocasionalmente óleo lubrificante nos mecanismos dos rolamentos para os manter a funcionar corretamente.

7.4. UTILIZAÇÃO CORRETA DA SCOOTER

- Não utilize a scooter para actividades desportivas, tais como jogos de bola ou corridas.
- Evite conduzir a scooter em terrenos perigosos ou inadequados.

7.5. INSPECÇÕES REGULARES

- Verificar regularmente o piso dos pneus e substituir os pneus gastos.
- Apertar regularmente os parafusos para evitar que se soltem.
- Remover os objectos estranhos dos rolamentos das rodas para manter um bom funcionamento.

7.6. INSPECÇÕES MENSAIS E ANUAIS

Efectue uma inspeção diária para verificar o aspeto geral da scooter e para garantir que não existem danos visíveis.

Efectue inspecções mensais ou anuais para garantir um desempenho ótimo da scooter:

- Verificar os eléctrodos da bateria para garantir que estão corretamente ligados e sem corrosão (**mensalmente**).
- Inspeccionar os conectores dos cabos eléctricos expostos e garantir que estão em boas condições (**mensalmente**).
- Verificar o isolamento dos cabos eléctricos e reparar ou substituir os encaixes e conectores danificados (**anualmente**).
- Verificar se os parafusos ou porcas expostos estão soltos e apertá-los se necessário (**mensalmente**).
- Inspeccione os rolamentos e as peças do motor/transmissão da trotinete eléctrica e ateste o óleo lubrificante conforme necessário (**anualmente**).



CUIDADO

Evite que os módulos eléctricos se molhem e seque as peças molhadas antes de utilizar a scooter.

8. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

A scooter de Lanzarote é cuidadosamente embalada numa caixa para a proteger da água e da pressão durante o transporte. Pode ser transportada por via aérea, marítima ou terrestre sem problemas.

Para o armazenamento, o produto deve ser guardado em locais à sombra, frescos, secos, ventilados e livres de gases corrosivos, com uma temperatura entre -20°C e 45°C e uma humidade de 10% a 80%.

É importante evitar a exposição à luz solar direta e não armazenar a scooter junto a substâncias inflamáveis e explosivas, uma vez que isso pode afetar negativamente o seu desempenho ou mesmo danificá-la.

9. GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Solução
O indicador de alimentação não se acende quando liga o interruptor de alimentação.	Verifique se a linha de alimentação e a linha de controlo estão corretamente ligadas. Verificar a existência de contactos soltos e certificar-se de que a bateria está a fornecer energia corretamente.
A scooter Lanzarote apresenta inconsistências na velocidade e pára e reinicia durante a condução.	Verifique se o motor está a sobreaquecer, a emitir ruídos anormais ou a apresentar outros fenómenos invulgares. Verificar se a linha de alimentação está corretamente ligada. Se o controlador estiver danificado, contacte o concessionário para reparação.
A scooter não pode ser carregada corretamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar se a tensão de carga é adequada. • Certifique-se de que a ventoinha de arrefecimento do carregador está a funcionar normalmente. • Verifique se a junta do carregador faz bom contacto com a interface do controlador. • Se a bateria continuar a não carregar totalmente após um período de carregamento prolongado, considere a hipótese de substituir a bateria, uma vez que esta pode estar danificada ou envelhecida.



CUIDADO

Não tente reparar ou resolver problemas a não ser que seja uma oficina autorizada TotalCare Europe.

10. PROTEÇÃO AMBIENTAL

É crucial tratar corretamente as baterias, de acordo com as leis e regulamentos locais, quando estas atingem o fim da sua vida útil. Este tratamento pode envolver métodos como a solidificação e o enterramento profundo, o armazenamento no poço da mina perdida, a reciclagem ou outros processos autorizados. É importante evitar o abandono arbitrário das baterias para proteger o ambiente e cumprir os regulamentos aplicáveis.

11. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à factura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZE ESTE PRODUTO SE ESTE PARECER DANIFICADO OU COM PEÇAS EM FALTA.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.



Lanzarote



Legenda da etiquetagem.



Conformidade europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

Manual do utilizador

Scooter com dobragem eletrónica **Lanzarote**

V1 · 27/05/2025