



MARTINIKA CARBON



Martinika Carbon

Cadeira de rodas
eléctrica dobrável

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. SEPALMACARBON

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

consulte o nosso website para ver o modelo atualizado

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com a sua nova cadeira de rodas elétrica **Martinika Carbon**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 – Partes do Martinika Carbon	4
2 – Descrição do produto	4
3 – Características do produto	5
4 – Instruções de segurança	7
5 – Funcionamento e perigos	9
6 – Utilização e montagem	10
7 – Bateria e carregamento	13
8 – Teste e manutenção	15
9 – Resolução de problemas	16
10 – Garantia	17

1. PARTES DO MARTINIKA CARBON



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA DOBRÁVEL EM FIBRA DE CARBONO

A cadeira de rodas eléctrica Martinika Carbon distingue-se pelo seu design compacto e peso ultra-leve. Fabricada em fibra de carbono, é extraordinariamente leve, pesando apenas 11,9 kg (sem bateria) e pode suportar até 150 kg.

Com dimensões reduzidas, é a escolha ideal para a mobilidade em espaços apertados, seja no interior ou no exterior. Equipado com dois motores de 150W, atinge uma velocidade de 6 km/h e tem

duas opções de baterias de lítio: 12 Ah e 15 Ah. Além disso, é possível instalar até duas baterias, proporcionando uma autonomia de até 35 km com as duas baterias de 15 Ah.

35 km com as duas baterias de 15 Ah.

O Martinika Carbon oferece uma dobragem excepcional e, graças ao seu peso ultra-leve, pode ser facilmente manuseado.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

MARTINIKA
CARBON



INFORMAÇÕES GERAIS

Medidas

Largura total	58 cm
Profundidade com os apoios para os pés rebatidos	91 cm
Profundidade total	100 cm
Altura total	90 cm
Altura do assento ao chão sem almofada	49 cm
Altura do assento ao chão com almofada	51 cm


Dimensões dobradas

Largura dobrada	28 cm
Profundidade dobrada	91 cm

Peso

Peso total (sem bateria)	11,90 kg
Peso total (com bateria de 12 Ah)	13,70 kg
Peso total (com bateria de 15 Ah)	13,75 kg
Peso total (com 2 baterias de 12 Ah)	15,50 kg
Peso total (com 2 baterias de 15 Ah)	15,60 kg
Peso máximo suportado	150 kg

Material	Fibra de carbono
----------	------------------

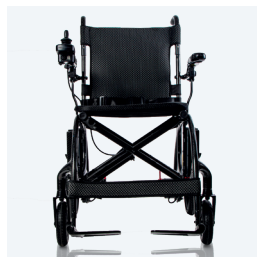

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Assento

Largura do banco	42 cm
Largura útil do assento	45 cm
Profundidade do assento	44 cm

Motor

Motor	2 x 150 W
Bateria	12 Ah / 15 Ah / 2 x 12 Ah / 2 x 15 Ah (litio)
Número de baterias	1 o 2
Autonomia	10 - 15 km (12 Ah) / 12 - 17 km (15 Ah) 25 - 30 km (2 x 12 Ah) / 30 - 35 (2 x 15 Ah)
Velocidade máxima	6 km/h
Carregador externo	2 Ah

Apoios de braços

Comprimento do apoio de braços	38 cm
Largura do apoio de braço	6 cm
Tipo de apoio de braço	Dobrável

Encosto



Largura do encosto	44 cm
Altura do encosto	38 cm
Tipo de encosto	Fósforo / Cinta de aperto

Rodas

Dimensões da roda dianteira	Ø16 cm
Medidas das rodas traseiras	Ø26 cm
Largura das rodas dianteiras	4 cm
Largura da roda traseira	4,5 cm
Tipo de roda	Maciços
Material da roda	Magnésio

Outras caraterísticas

Saco	30 cm x 26 cm (largura x altura)
Cinto de segurança	Sim
Buzina	Sim
Luzes LED	Não (Lightcare opcional)
Inclinação máxima de subida	10°
Raio de viragem	90 cm
Apoio para os pés	Dobrável
Rodas anti-tombamento	Sim
Tipo de travões	Eletromagnético

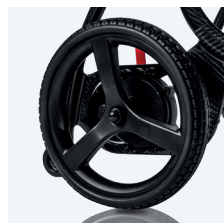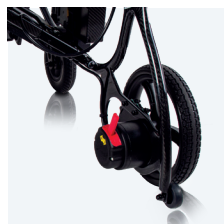

4. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

4.1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente este manual do utilizador antes de utilizar o seu Martinika Carbon e certifique-se de que compreende estas peças e que as mesmas estão presentes.



CUIDADO

- Não circule em estradas movimentadas, lama-centas, com gravilha, esburacadas, cobertas de neve ou gelo, ou em estradas que não estejam protegidas.
- Nunca tente modificar fisicamente a Martinika Carbon, incluindo a adição de componentes de terceiros, uma vez que as alterações anularão a garantia e poderão afetar a conformidade e a avaliação de riscos.
- Não desloque o seu corpo abruptamente, pois a cadeira de rodas pode tornar-se instável. Incline-se para a frente quando sobe e para trás quando desce, controle a velocidade para a posição mais baixa.

Nota: Quando utilizar a cadeira eléctrica em ruas ou passeios, aplicam-se as leis e regulamentos locais.

4.2. AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA

OBRIGATÓRIO: Este manual do utilizador deve ser lido e compreendido na sua totalidade antes de utilizar e conduzir o Martinika Carbon.

AVISO: O não cumprimento das instruções descritas neste manual pode resultar em danos na cadeira eléctrica ou em lesões corporais no utilizador.

AVISO: No supere nunca a carga máxima admissível. Ver ficha técnica.

AVISO: Nunca utilize a cadeira eléctrica sob a influência de medicamentos ou álcool. Se estiver a tomar medicamentos, consulte o seu médico para se certificar de que a sua capacidade de controlar a cadeira eléctrica não será afetada.

O Martinika Carbon foi concebido exclusivamente para ser utilizado por uma única pessoa com mobilidade reduzida, não podendo ser transportado por qualquer outra pessoa.

AVISO: Nunca tente entrar ou sair da sua cadeira de rodas sem primeiro desligar o controlo do joystick. Desta forma, evita-se que a Martinika Carbon se mova em caso de contacto acidental com o joystick.

AVISO: Nunca descer ou subir a uma inclinação superior à inclinação máxima recomendada (10°).

AVISO: Nunca atravessar um declive, uma rampa, etc., em qualquer direção..

AVISO: Nunca utilize a cadeira eléctrica sem as rodas anti-tombamento corretamente instaladas.

AVISO: Não utilizar o Martinika Carbon na areia, em pisos irregulares ou em superfícies molhadas e/ou escorregadias..

AVISO: Esta cadeira eléctrica não foi concebida para ser utilizada como assento num veículo motorizado. O Martinika Carbon pode falhar em caso de impacto com o veículo, resultando em ferimentos no ocupante da cadeira eléctrica ou noutras pessoas.

AVISO: Não utilize a cadeira eléctrica se esta estiver avariada ou não funcionar corretamente.

AVISO: Antes de se inclinar ou esticar para a frente, apoie sempre as nádegas nas costas da cadeira de rodas e olhe para a frente com as rodas.

AVISO: Nunca se apoie no apoio para os pés, pois a cadeira eléctrica pode tombar e causar ferimentos ao utilizador.

AVISO: Coloque sempre a cadeira eléctrica sobre uma superfície estável e plana antes de entrar ou sair dela.

AVISO: As rodas anti-queda só são eficazes em superfícies firmes; em solos moles, como a relva, a neve ou a lama, podem afundar-se. Além disso, quando se ultrapassa a inclinação máxima, estas rodas podem não impedir uma queda para trás.

4.3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

Destina-se a ser utilizada tanto no interior como no exterior e em espaços confinados. O seu principal objetivo é proporcionar um transporte confortável ao utilizador. No entanto, é importante ter em conta que o peso e as dimensões do utilizador devem ser limitados a 150 kg. Além disso, esta cadeira de rodas não deve ser utilizada por pessoas que tenham limitações físicas ou mentais evidentes que as impeçam de a utilizar com segurança.

4.4. CONTRA-INDICAÇÃO

O Martinika Carbon foi concebido exclusivamente para o transporte de adultos, excluindo mercadorias e crianças com menos de 16 anos de idade. Não deve ser utilizado por pessoas com limitações físicas ou mentais que comprometam a sua capacidade de o utilizar em segurança no trânsito. Estas limitações podem incluir hemiplegia, paraplegia, perturbações mentais ou deficiência visual. É essencial ter em conta estas contra-indicações para garantir a segurança do utilizador e das pessoas que o rodeiam.

4.5. OBSERVAÇÕES SOBRE A COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA (EMC)

É importante notar que as fontes de ondas electromagnéticas, como os telemóveis, podem causar interferências com a cadeira eléctrica. Do mesmo modo, a eletrónica interna da cadeira eléctrica pode também afetar o funcionamento de outros aparelhos eléctricos.

Para atenuar o efeito destas interferências electromagnéticas, é crucial seguir os avisos abaixo:

⚠️ AVISO: A cadeira eléctrica pode perturbar o funcionamento de aparelhos próximos que emitam campos electromagnéticos.

⚠️ AVISO: Os campos electromagnéticos, como os gerados por geradores eléctricos ou fontes de alta potência, podem influenciar o desempenho de condução do Martinika..

⚠️ AVISO: Evite utilizar televisores ou rádios portáteis perto da cadeira eléctrica enquanto esta estiver a funcionar para evitar interferências.

⚠️ AVISO: Antes de utilizar a cadeira eléctrica, verifique a presença de antenas emisoras na zona

e evite utilizá-la perto delas para evitar possíveis interferências.

⚠️ AVISO: Em caso de movimentos involuntários ou de travagem inesperada, desligue a cadeira eléctrica logo que seja seguro, para evitar situações perigosas.

4.6. FONTES POTENCIAIS DE RADIAÇÃO:

Algumas fontes comuns de radiação incluem:

- Instalações portáteis de receptores e transmissores, tais como dispositivos com antenas fixas montadas diretamente na unidade transmissora.
- Telemóveis ou walkie talkies.
- Aparelhos portáteis de televisão, rádio e navegação.
- Outros dispositivos pessoais de transmissão.
- Dispositivos móveis de transmissão e receção de médio alcance, tais como antenas de automóveis com a antena montada no exterior do veículo.
- aparelhos emissores e receptores fixos
- Aparelhos móveis fixos de transmissão e receção
- dispositivos de receção.
- Sistemas fixos de rádio, televisão e navegação.
- Dispositivos de transmissão e receção de longo alcance.
- Torres de rádio e de televisão.
- Aparelhos de rádio.

É importante notar que outros aparelhos domésticos, tais como leitores de CD, computadores portáteis, telefones sem fios, rádios AM/FM, máquinas de barbear eléctricas e secadores de cabelo, não terão geralmente qualquer influência na sua cadeira eléctrica, desde que estejam a funcionar corretamente e a sua cablagem esteja em boas condições. No entanto, recomenda-se que siga as instruções de funcionamento fornecidas com estes dispositivos eléctricos para garantir um funcionamento sem problemas da sua cadeira eléctrica.

4.7. RECOMENDAÇÕES:

Evitar utilizar dispositivos portáteis, como rádios da banda do cidadão (CB), ou ligar dispositivos de comunicação pessoal, como telemóveis, enquanto o veículo a motor estiver ligado.

Estar atento a transmissores próximos, como es-

tações de rádio ou de televisão, e tentar evitar aproximar-se deles para minimizar possíveis interferências electromagnéticas.

Em caso de movimento involuntário ou de desbloqueio do travão, desligar o veículo a motor logo que seja seguro.

Ter em atenção que a adição de acessórios ou componentes, ou qualquer modificação do veículo a motor, pode aumentar a sua suscetibilidade às interferências electromagnéticas. É importante ter este fator em consideração ao efetuar modificações na cadeia eléctrica.

5. FUNCIONAMENTO E PERIGOS

5.1 ANTES DE SE SENTAR NO SEU CARBONO MARTINIKA

- Antes de utilizar o seu Martinika Carbon, é essencial efetuar algumas verificações para garantir a segurança e o funcionamento correto:
- Verificar se o interruptor da caixa da bateria está na posição "On".
- Verificar se as alavancas da roda livre estão na posição "Drive".
- Verifique se a bateria está totalmente carregada.
- Não se esqueça de apertar o cinto de segurança.
- cinto de segurança.
- Verifique se a cadeira de rodas está totalmente aberta e se os tubos do assento estão corretamente posicionados nos apoios laterais.
- Certifique-se de que a alavanca do joystick está desligada para evitar um movimento acidental em caso de contacto acidental com o joystick.

5.2. INÍCIO

- Certifique-se de que está bem sentado.
- Verifique se os apoios para os pés estão colocados à altura correta para os seus pés.

5.3. ENDEREÇO

- Utilize o joystick para conduzir a cadeira eléctrica. Recomenda-se que regule a velocidade para a posição mais baixa até ter adquirido experiência e prática na direção.
- Mantenha uma folga suficiente ao virar a cadeira eléctrica para garantir que as rodas estão livres de obstáculos.
- Tenha especial cuidado ao conduzir em marcha-atrás.

5.4 CONDUÇÃO EM ENCOSTAS, DECLIVES E RAMPAS

- Não subir ou descer declives que excedam o limite recomendado (10°).
- Ao subir ou descer declives, conduzir sempre em linha reta.
- Evite conduzir em declives em qualquer direção, pois isso pode provocar o capotamento da Martinika Carbon e causar ferimentos graves.
- Tente manter a cadeira de rodas em movimento ao subir ou descer um declive. Se for necessário parar, volte a arrancar e acelere devagar e com cuidado.
- Tenha em atenção que a distância de travagem da cadeira de rodas pode ser consideravelmente maior em declives do que em terreno plano.

6. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM

6.1. PAINEL DE CONTROLO DE CARBONO MARTINIKA

Botão ON/OFF: Prima uma vez para ligar a cadeira eléctrica e uma vez para a desligar.

Controlador Joystick: Controla a direção do movimento. Empurre para a frente para avançar, puxe para trás para recuar, para a esquerda para virar à esquerda e para a direita para virar à direita.

Indicador da bateria Apresenta o nível de carga da bateria. Verde indica carga completa, âmbar indica carga média e vermelho indica necessidade de recarga.

Indicador de velocidade: Apresenta a velocidade definida com os botões de velocidade baixa ou alta.

Botão de velocidade alta: Prima para aumentar a velocidade.

Botão de velocidade baixa: Prima para diminuir a velocidade.

Botão da buzina: Ativa uma buzina de aviso para alertar os outros.



CUIDADO

É proibido desligar a fonte de alimentação durante a condução, pois isso pode fazer com que o Martinika Carbon pare subitamente e tombe.

6.2. DOBRAR E DESDOBRAR

Implementado

Retire a cadeira de rodas da caixa e localize o gancho de dobragem. Desbloqueie o gancho e agarre a pega, como indicado na imagem.



Levante a cadeira de rodas até que os pinos de mola estejam inseridos na pega de impulso.



Com as duas mãos, pressione as barras transversais do assento até que a cadeira de rodas esteja totalmente desdobrada.



Dobrável

Agarre nos estofos do assento, como indicado na figura à direita, e puxe para cima com as duas mãos para fechar a estrutura da cadeira de rodas.

Agarre nos apoios de braços de ambos os lados e empurre-os simultaneamente para dentro até a cadeira de rodas ficar dobrada.



Segure o guiador e prima o botão de dobragem. Entretanto, levante ligeiramente o guiador, até que o pino de mola se solte do orifício da manga do guiador. Em seguida, dobre o guiador para baixo.



6.3. TRANSPORTE DA CADEIRA

Retirar a almofada e baixar os estofos do assento:

Retire a almofada do assento e baixe os estofos do assento enquanto dobra a cadeira de rodas. Em seguida, exponha as correias das pegas dos dois lados do assento.

Apertar o fecho de dobragem: Aperte o fecho de dobragem depois de dobrar a cadeira de rodas para evitar que o chassi se abra.



Levantar a cadeira de rodas com as correias das pegas: Quando precisar de transportar a cadeira de rodas, pode levantar facilmente todo o produto com as correias das pegas.

6.4. UTILIZAÇÃO DO CINTO

Agarrar na fivela do cinto de segurança e premir para a soltar.



CUIDADO

Certifique-se de que não existem obstáculos à volta do Martinika Carbon antes de o abrir ou dobrar.

Antes de abrir ou dobrar este produto, preste atenção aos seus dedos e mantenha a sua mão afastada das articulações mecânicas para evitar entalar as mãos.

Não se sente ou conduza esta cadeira de rodas eléctrica quando estiver dobrada ou incompletamente aberta.

Alinhe a fivela com a inserção e prima até ouvir um "clique".

Por favor, aperte o cinto de segurança quando se sentar no Martinika Carbon.



6.5. UTILIZAÇÃO DA ELEVACÃO DO APOIO DE BRAÇOS

Prima o botão preto na parte lateral.

O apoio de braços pode ser levantado ou baixado, facilitando a transferência na Martinika Carbon..



6.6. MONITORIZAÇÃO DA BATERIA

Ativar e desativar a bateria: Utilize o botão de ativação para ligar ou desligar a bateria. Quando o botão "I" é premido, a bateria é activada. Para a desativar, prima o botão "O".



Substituição da bateria: Se o seu Martinika Carbon estiver equipado com duas pilhas, utilize o botão seguinte para seleccionar qual delas pretende utilizar. Premir o botão "I" para ativar a bateria do lado esquerdo e "O" para a bateria da direita.

Se tiver seleccionado um lado sem bateria, o Martinika Carbon não funcionará.



6.7. UTILIZAÇÃO DE APOIOS PARA OS PÉS

Levante o apoio para os pés, como mostra a figura, e dobre-o para dentro, como mostra a figura. Para o desdobrar, basta efetuar o procedimento inverso.




CUIDADO

É proibido utilizar a função de abertura quando a cadeira de rodas está a subir ou a descer, para garantir a segurança do utilizador e da cadeira de rodas.

6.8. UTILIZAÇÃO DO TRAVÃO DE MÃO (RODA LIVRE)

Puxe o manípulo para a posição aberta "N" para colocar a cadeira de rodas na posição de libertação do travão, de modo a que a cadeira de rodas possa ser empurrada manualmente. Quando o punho é empurrado para a posição fechada "D", a cadeira de rodas está travada e não pode ser empurrada.

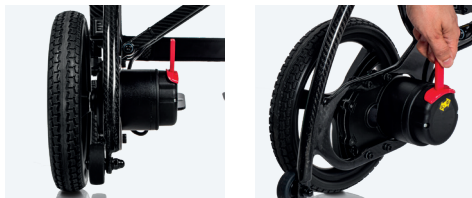

6.9. AS RODAS ANTI-TOMBAMENTO

A cadeira de rodas está equipada com rodas anti-tombamento, que evitam que a cadeira de rodas tombe em caso de emergência. As rodas anti-tombamento desta cadeira de rodas não são amovíveis.

6.10. MONTAGEM E DESMONTAGEM DO JOYSTICK DE CONTROLO


Insira o suporte superior do controlador no tubo fixo do apoio de braço, como mostra a figura, e aperte-o com o botão.

Operar na direção oposta se for operado com a mão esquerda.



6.11. REGULAÇÃO EM ALTURA DOS APOIOS PARA OS PÉS

Desapertar os parafusos e as porcas com uma chave de boca de 5 mm e uma chave Allen de 10 mm. Em seguida, mudar os furos para ajustar a altura desejada.

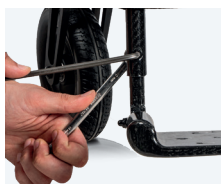

6.12. MONTAGEM DA BATERIA

Fixe as caixas das baterias em ambos os lados da cadeira de rodas. Existem quatro ranhuras e um cilindro atrás da caixa da bateria para alinhar com os orifícios e fulcros no suporte da bateria.

Em seguida, aperte-os até ouvir um "clique" e as caixas das baterias ficarem bem presas.



Antes de montar a bateria, certifique-se de que alinha o cilindro atrás da caixa da bateria com o orifício no suporte da bateria, o que pode facilmente fixar a bateria no lugar.

6.13. DESMONTAGEM DA BATERIA

Prima o botão situado na caixa da bateria e levante a bateria para a retirar.

Ao levantar a bateria, pode soltar a mão que pressiona o botão na caixa da bateria.



CUIDADO

Certifique-se de que o interruptor está na posição "I", ou seja, que a alimentação está ligada.

Segure a caixa da bateria com as duas mãos para evitar que caia durante a montagem e desmontagem da caixa da bateria.

7. BATERIA E CARREGAMENTO

7.1 INFORMAÇÕES GERAIS E INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO


- A sua cadeira eléctrica necessita de uma bateria de lítio selada e sem manutenção. A bateria é recarregada com o sistema de carregamento externo fornecido.
- Carregue a bateria da sua cadeira eléctrica durante pelo menos 10 a 12 horas antes de a utilizar pela primeira vez. A bateria nova atingirá a sua capacidade total depois de ter sido submetida a cerca de 10-20 ciclos de carga (período de amaciamento). Este período de amaciamento é necessário para que a bateria funcione na sua capacidade máxima e tenha uma longa vida útil.
- Mantenha a bateria totalmente carregada para manter a sua cadeira eléctrica a funcionar sem problemas. Carregue a bateria diariamente após cada descarga, mesmo após uma descarga parcial. Dependendo do nível de descarga, pode demorar até 12 horas até que a bateria esteja totalmente carregada novamente.
- Se o indicador da bateria tiver atingido a gama de LEDs vermelhos, carregue a bateria durante pelo menos 16 horas, ignorando a indicação de carga completa!
- Mesmo que a cadeira eléctrica não seja utilizada durante um longo período de tempo, a bateria deve ser carregada regularmente para garantir que permanece totalmente carregada.
- Não mantenha a bateria num estado de carga baixo sem a recarregar completamente com regularidade.
- Não carregue a bateria em temperaturas extremas. Não é recomendável carregar a bateria a temperaturas superiores a 40°C (104°F) ou a temperaturas inferiores a 10°C (50°F).
- Proteja o carregador de fontes de calor, tais como aquecedores e luz solar direta. Se o carregador de bateria sobreaquecer, a corrente de carga será reduzida e o processo de carregamento será atrasado.

7.2 CARREGAR AS PILHAS

- Certifique-se de que leu e compreendeu o manual do utilizador do carregador de baterias, se fornecido, bem como as notas de segurança do carregador.
- Desligue a alimentação eléctrica da cadeira de rodas.
- Decida qual a tomada de carregamento a utilizar, pode escolher entre duas tomadas de carregamento:
 1. Tomada da caixa da bateria.
 2. Tomada de carregamento do controlador.



Nota: O botão da caixa da bateria tem de estar em "I" durante o carregamento, ou seja, a carregar com a alimentação ligada.

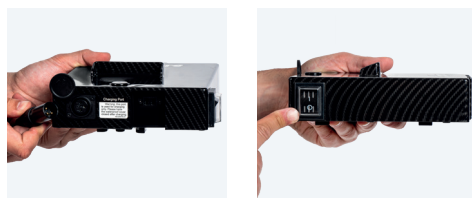

AVISO: Antes de iniciar o carregamento, certifique-se de que liga o interruptor na caixa da bateria.

- Introduzir a ficha do carregador na tomada.
- Só ligue o carregador de baterias quando todas as fichas estiverem colocadas.
- Durante o carregamento, a luz LED do carregador de baterias acende-se a âmbar.
- Quando as baterias estiverem totalmente carregadas, a luz LED do carregador de baterias passa a verde.
- Desligue a alimentação eléctrica do carregador antes de retirar a ficha da tomada do carregador.

AVISO: Evite colocar a bateria perto de fontes de calor, como um fogo ou um aquecedor.

AVISO: Existe um risco de explosão e de destruição das baterias se for utilizado um carregador incorreto. Utilize apenas o carregador de

baterias fornecido com o seu veículo ou um carregador aprovado pela Hi-Fortune.

AVISO: Nunca tente abrir ou desmontar o carregador. Se o carregador de baterias não parecer estar a funcionar corretamente, contacte o seu revendedor autorizado.

AVISO: Não utilize a bateria se esta emitir um odor, gerar calor ou apresentar algum tipo de anomalia. Se a bateria estiver a ser utilizada ou recarregada, retire-a imediatamente do aparelho ou do carregador e interrompa a utilização.

AVISO: Proteja sempre o carregador da água e carregue-o num ambiente seco para evitar o risco de choque eléctrico e danos.

AVISO: Não tente recarregar as baterias ligando os cabos diretamente aos terminais da bateria, pois isso pode provocar curto-circuitos e choques eléctricos.

AVISO: Utilize um cabo de extensão apenas se for absolutamente necessário e certifique-se de que está em boas condições para evitar o risco de incêndio e choque eléctrico.

AVISO: Não utilize a cadeira eléctrica enquanto as pilhas estiverem a carregar para evitar ferimentos e danos.

AVISO: Para um carregamento mais eficaz e seguro das baterias da sua cadeira eléctrica, utilize apenas o carregador fornecido como equipamento de origem com o seu produto.

AVISO: Não tente desmontar a bateria da caixa da bateria ou voltar a colocá-la. Em caso de problemas, contacte o seu revendedor autorizado.

AVISO: Se o carregador de bateria não tiver sido concebido para utilização no exterior, evite expô-lo a condições climáticas adversas ou extremas para evitar danos.

AVISO: Não guarde nem utilize a bateria em locais expostos a temperaturas elevadas, pois isso pode reduzir o seu desempenho e encurtar a sua vida útil. Evite deixar a bateria no automóvel em dias quentes ou sob a luz direta do sol.

8. TESTE E MANUTENÇÃO

Proteja a sua cadeira de rodas fazendo uma manutenção regular. Recomendamos vivamente que a sua Martinika Carbon seja inspeccionada pelo menos uma vez por ano pelo seu técnico ortopédico, que utilizará apenas as peças sobressalentes corretas. Esta inspeção regular garantirá que a cadeira de rodas funcionará perfeitamente durante muitos anos. Há muitas coisas que pode fazer para manter a sua cadeira eléctrica em perfeitas condições. Verifique regularmente a sua cadeira eléctrica e mantenha-a em perfeitas condições.

8.1 PNEUS E RODAS

- Verificar periodicamente o desgaste dos pneus e substituí-los quando necessário.
- Assegurar-se de que as rodas se podem mover livremente sem tocar em nada. A roda dianteira e a forquilha devem mover-se livremente para garantir uma condução suave.

8.2 QUADRO TRANSVERSAL

- Verificar se a estrutura transversal da cadeira de rodas está em boas condições. Certificar-se de que a cadeira de rodas é fácil de dobrar e desdobrar.

8.3 ACOLCHOADO

- Verificar se o tecido tem buracos, fissuras ou pontos de desgaste.
- Verificar se os ilhós de montagem dos estofos es-

tão corretamente alinhados e fixados.

8.4 LIMPEZA

- Limpe regularmente os estofos, o chassis, os componentes de plástico e as peças não eléctricas da cadeira eléctrica com um pano seco ou húmido.
- Não utilize água, óleo ou outras soluções químicas para limpar a cadeira eléctrica. Certifique-se de que não pulveriza a cadeira eléctrica com água, pois isso pode danificar os componentes electrónicos.

8.5 FIM DE UTILIZAÇÃO

O símbolo significa que o produto deve ser eliminado separadamente do lixo doméstico, de acordo com as leis e regulamentos locais. No final da vida útil da cadeira de rodas, entregue-a no local de reciclagem designado para o efeito. A triagem e a reciclagem ajudarão a conservar os recursos naturais e a garantir que o produto é reciclado de forma ecológica.

A reciclagem de cada peça deve ser efectuada por uma organização de reciclagem autorizada designada, em conformidade com as leis e regulamentos locais. As peças de plástico, a estrutura e os tubos podem ser entregues a unidades de reciclagem profissionais para serem eliminados após a utilização.

9. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Pode deduzir qual é a avaria a partir do número de sinais sonoros.

A seguinte lista de verificação para autoajuda é utilizada; tente resolver o problema seguindo primeiro a lista e, em seguida, consulte o seu ortopedista se o problema persistir.

Número de bips	Causa possível
2+1	O problema do controlador superior ou do controlador inferior
2+2	O motor direito ou o conetor estão em mau contacto
2+3	O travão direito ou o conetor está em mau contacto
2+4	O motor esquerdo ou o conetor está em mau contacto
2+5	O travão esquerdo ou o conetor está em mau contacto
2+6	Sobrecorrente
2+7	Joy stick ou cabo com mau contacto
2+8	Falha do controlador
2+9	Baixa tensão ou falha do controlador

Um exemplo de alarme que fornece indica que, se a sequência de som for de dois sinais sonoros rápidos seguidos de cinco sinais sonoros lentos (2+5), isso representa um código de alarme específico. Neste caso, a falha pode ser causada por problemas no travão esquerdo ou por um mau contacto no conetor.

9.1 SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA:

Recomenda-se a substituição da pilha uma vez por ano. Para o fazer, sugere-se que se dirija ao revendedor ou agência autorizada, onde poderá efetuar a substituição de forma adequada e utilizando pilhas compatíveis com o modelo da cadeira eléctrica.

9.2 MUDANÇA DE PNEUS:

Recomenda-se a substituição dos pneus quando o piso estiver meio gasto. Para isso, é aconselhável contactar a agência ou o revendedor, que poderá oferecer pneus adequados ao modelo da cadeira eléctrica e efetuar a substituição de forma profissional.

10. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à factura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

MARTINIKA carbon



Legenda da etiquetagem.



Conformidade europeia.



Representante Europeu.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Lote.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Referência do produto.



Dados do fabricante.



Número de série.



Data de fabrico.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

Manual do utilizador

Cadeira de rodas eléctrica dobrável **Martinika Carbon**

V1 · 18/04/2024