



# DU 06

## Ajudas de banho

**MANUAL DO UTILIZADOR**

Ref. BSDPALDU06FN

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

### Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado.

**TotalCare Europe**

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

[www.totalcare-europe.com](http://www.totalcare-europe.com)

DE TOTALCARE EUROPE

# OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.


Assim poderá familiarizar-se com a sua nova cadeira de duche **DU 06**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

# GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

<b>1 – Partes do cadeira .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – Descrição do produto .....</b>	<b>4</b>
<b>3 – Características do produto .....</b>	<b>5</b>
<b>4 – Insatalação e utilização .....</b>	<b>6</b>
<b>5 – Manutenção e limpeza .....</b>	<b>8</b>
<b>6 – Aviso .....</b>	<b>9</b>
<b>7 – Garantia.....</b>	<b>10</b>



## 1. PARTES DA CADEIRA



## 2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### CADEIRA COM RODAS E APOIOS PARA OS PÉS

Trata-se de uma cadeira de escritório que é construída principalmente com uma estrutura de alumínio revestida a pó. Vem com estofos de PU que são duráveis e fáceis de limpar. O cubo é removível e fácil de limpar. Os apoios de braços dobráveis são para um transporte seguro e fácil.

As rodas giratórias de 5" são muito adequados para utilização em interiores. As rodas traseiras são fáceis de apertar e soltar, pode pressionar os travões de estacionamento para bloquear as rodas. A capacidade máxima de peso da cadeira é de 100 kg.

### 3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



DU 06

#### INFORMAÇÕES GERAIS

##### Medidas

Largura total	57,5 cm
Profundidade global	85 cm
Profundidade sem apoio para os pés	60 cm
Altura total	103,5 cm
Altura do assento ao chão	53,5 cm
Largura do assento	45,5 cm
Profundidade do assento	41 cm
Largura do encosto	46,5 cm
Altura do encosto	23,5 cm
Largura da abertura do balde	18 cm
Profundidade da abertura do balde	36 cm

##### Peso

Peso total	12,90 kg
Peso sem balde	12,60 kg
Peso máximo suportado	100 kg

## Rodas

Medidas das rodas dianteiras	Ø 12 cm
Medidas das rodas traseiras	Ø 12 cm
Tipo de rodas	Maciças
Travão	Travão de bloqueio

Material	Aço	Cor	Preto
----------	-----	-----	-------

## 4. INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

### 4.1. CONTAGEM DAS PEÇAS

Verifique o estado dos componentes antes de iniciar a montagem, para detetar possíveis danos decorrentes de um transporte ou armazenamento inadequados.



### 4.2. SEPARAÇÃO DAS PEÇAS

Com um x-ato, corte as braçadeiras que mantêm unidos os tubos do quadro de base.



### 4.3. UNÇÃO DA BASE

Una as duas metades da estrutura da cadeira através do tubo de ligação e dos parafusos roscados. Deve colocar a peça de plástico preta em ambas as extremidades do tubo de ligação.



### 4.4. INSERIR AS RODAS

Insira as rodas na estrutura e, em seguida, fixe-as com os pinos. Faça-o conforme ilustrado na imagem. As rodas com travão devem ficar na parte traseira.



#### 4.5. COLOCAR O ENCOSTO

Insira o encosto encaixando-o na parte traseira da cadeira e fixe-o com os botões roscados.



#### 4.6. FIXAÇÃO DO ASSENTO

Pegue no assento completo e coloque-o sobre a estrutura. Pressione com firmeza nas laterais para que o encaixe fique fixo no tubo.



#### 4.7. INSERIR O APOIO PARA OS PÉS

Insira o apoio para os pés na estrutura. Depois de inserido, rode o apoio para os pés para dentro até que encaixe na sua posição, tal como mostrado na imagem.



#### IMPORTANTE

**É fundamental verificar se todos os parafusos estão bem apertados. Antes de utilizar a cadeira sanitária DU06, verifique se todos os parafusos estão bem apertados e corretamente instalados.**

**Faça verificações periódicas dos parafusos para garantir uma utilização segura do produto.**

#### 4.8. COLOCAÇÃO DA FITA

Coloque a fita com o velcro de forma a envolver um apoio para os pés em cada uma das suas extremidades.



## 5. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Recomenda-se que verifique o produto pelo menos uma vez por semana.
- Verificar o aperto correto dos parafusos, o estado dos fixadores, verificar a existência de fendas na estrutura, avaliar visualmente o estado de desgaste das rodas.
- Utilizar apenas acessórios originais. A utilização de peças não originais pode danificar o produto e pode causar riscos na utilização.
- As rodas, os acessórios de borracha, os punhos, os freios que estão presos para desgaste natural e devem ser substituídos regularmente
- Para que se desgastem naturalmente e tenham de ser substituídos regularmente.
- Adicionar regularmente uma quantidade adequada de óleo lubrificante às peças rotativas.
- Limpar regularmente o produto com um detergente suave e um produto de limpeza não abrasivo.
- Utilizar um detergente neutro e água morna para a limpeza. Não utilizar materiais de limpeza abrasivos.
- Após a lavagem, enxaguar com água limpa e limpar com um pano seco.
- Não utilizar jactos de água diretos e, em qualquer caso, esperar até que o produto esteja completamente seco antes de o utilizar.
- Depois de cada utilização da cadeira, o balde e o assento devem ser limpos e desinfetados. Utilizar desinfetantes comuns para a limpeza.
- São então colocados num ambiente seco e ventilado.

## 6. AVISO

- Por favor, certifique-se de que a cadeira está totalmente expandida, o assento deve estar na posição rebaixada antes da utilização.
- Certificar-se de que todos os parafusos/puxadores giratórios estão bem apertados.
- Certifique-se de que os grampos sobressaem pelo buraco em cada perna. Isto assegurará que as pernas estão fixadas em posição segura.
- Verificar se ambas as rodas se movem livremente e se não há acumulação de resíduos à volta do eixo.
- Testar a estabilidade da cadeira da cómoda e do mecanismo de travagem antes da sua utilização.
- Utilizar os apoios de braço apenas como ajuda. Não tente usar os seus braços para suportar todo o seu peso corporal.
- Os braços devem ser levantados para ajudar na transferência de e para o dispositivo.
- Os utilizadores com força física limitada devem ser supervisionados ou assistidos durante a utilização.
- Utilizar apenas sobre uma superfície firme e plana.
- Antes de utilizar o produto, certifique-se de que o produto é estável, sólido e que todos os parafusos são apertados e que o cubo é inserido na posição correta.
- Não exceder a capacidade máxima de carga do produto.
- Nunca fique de pé no banco ou o utilize como um degrau. Isto pode causar quedas e cargas inadequadas.
- Utilizar apenas em superfícies planas e sólidas, evitar todos os perigos potenciais tais como inclinação, superfícies irregulares ou macias, obstáculos rodoviários, pisos molhados e escorregadios, etc.
- Usar com cautela. Não agarrar as pegadas com as mãos molhadas, elas podem escorregar e perder a aderência.

## 7. GARANTIA

### DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

### ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

### PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail [info@totalcare-europe.com](mailto:info@totalcare-europe.com).

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à fatura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

### ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

**NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.**

**CONTACTE O SEU FORNECEDOR.**

## CADEIRA COM RODAS E APOIOS PARA OS PÉS DU 06

Trata-se de uma cadeira sanitária que é construída principalmente com uma estrutura de alumínio revestida a pó. Vem com estofos de PU que são duráveis e fáceis de limpar. O balde é removível e fácil de limpar.



## Legenda da etiquetagem.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.