



DU 06

Ausili da bagno

MANUALE D'USO

Ref. BSDPALDU06FN

oltre 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono presentare variazioni progettuali in funzione delle esigenze costruttive.

Il prodotto di questo catalogo non è necessariamente stato fotografato nella sua configurazione standard.

Controlla il nostro sito web per vedere il modello aggiornato per il modello actualizado

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPA

TI RINGRAZIAMO PER LA TUA FIDUCIA.

Grazie per aver acquistato un prodotto da IM by Totalcare Europa.

Il prodotto che avete acquistato è dotato della tecnologia più avanzata e ha superato i test più severi.

L'esperienza nel tempo fa sì che i nostri prodotti offrano le migliori funzionalità, permettendoti di godere di una maggiore libertà e autonomia di cui hai bisogno ogni giorno.

Ti suggeriamo di dedicare un momento alla lettura delle istruzioni fornite. In questo modo potrai familiarizzare con la tua nuova sedia per doccia DU 06, che ti permetterà di ottenere da essa il massimo delle prestazioni e della vita utile.

oltre **50 anni** di vita **senza limiti**

INDICE

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 — Parti	4
2 — Descrizione	4
3 — Caratteristiche tecniche	5
4 — Montaggio e utilizzo	6
5 — Manutenzione e pulizia	8
6 — Informazioni	9
7 — Garanzia	10

1. PARTI



2. DESCRIZIONE

SEDIA CON WC, RUOTE E POGGIPIEDI

Si tratta di una sedia comoda costruita principalmente con un telaio in alluminio verniciato a polvere. Viene fornito con rivestimento in PU resistente e facile da pulire. Il secchiello è rimovibile e facile da pulire. I braccioli ribaltabili permettono un trasporto sicuro e facile.

Le ruote anteriori misurano 12 cm (5 pollici) sono adatte per uso interno. Le ruote posteriori piroettanti sono facili da stringere e rilasciare, e premendo il freno si bloccano. La portata massima della sedia comoda è di 100 kg.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE



INFORMAZIONI GENERALI

Misure

Larghezza	57,5 cm
Profondità	85 cm
Profondità senza poggiapiedi	60 cm
Altezza	103,5 cm
Altezza dal pavimento alla seduta	53,5 cm
larghezza della seduta	45,5 cm
Profondità della seduta	41 cm
Larghezza schienale	46,5 cm
Altezza schienale	23,5 cm
Larghezza di apertura per il secchiello	18 cm
Profondità secchiello	36 cm

Peso

Peso total	12,90 kg
Peso senza ciotola	12,60 kg
Portata massima	100 kg

Ruote

Diametro ruota anteriore	Ø 12 cm
Diametro ruota posteriore	Ø 12 cm
Tipologia	Macizas
Freno	Freno bloqueo

Materiale

Acciaio

Colore

Nero

4. MONTAGGIO E UTILIZZO

4.1. CONTROLLO DEI COMPONENTI

Controllare lo stato dei componenti prima di iniziare il montaggio per individuare eventuali danni causati da un trasporto o uno stoccaggio non adeguati.



4.2. SEPARACIÓN DE PIEZAS

Con un cutter, corte las bridas que mantienen unidos los tubos del chasis base.




4.3. ASSEMBLAGGIO DELLA BASE

Unire le due metà della struttura della sedia utilizzando il tubo di collegamento e le viti filettate. È necessario posizionare il pezzo di plastica nera su



4.4. INSERIMENTO DELLE RUOTE

Inserire le ruote nel telaio e poi fissarle con i perni. Procedere come mostrato nell'immagine. Le ruote con freno devono essere posizionate nella parte posteriore.

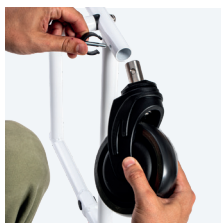

4.5. INSERIRE LO SCHIENALE

Inserire lo schienale incastrandolo nella parte posteriore della sedia e fissarlo con le viti filettate.



4.6. FISSAGGIO DEL SEDILE

Prendere il sedile completo e posizionarlo sopra la struttura. Premere con decisione sui lati in modo che il gancio si fissi al tubo.



4.7. INSERIMENTO DEL POGGIAPEDI

Inserire il poggiaiedi nel telaio. Una volta inserito, ruotare i poggiaiedi verso l'interno fino a bloccarli in posizione, come mostrato nell'immagine.



IMPORTANTE

È fondamentale verificare che tutte le viti siano fissate correttamente. Prima di utilizzare il sedile per WC DU06, assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate e montate correttamente.

Effettuare controlli periodici delle viti per garantire un utilizzo sicuro del prodotto.

4.8. POSIZIONAMENTO DELLA CINGHIA

Posizionare la cinghia con il velcro avvolgendo un poggiaiedi a ciascuna delle sue estremità.



5. MANUTENZIONE E PULIZIA

- Si consiglia di controllare il prodotto almeno una volta alla settimana.
- Verificare il corretto serraggio delle viti, lo stato di tutti gli elementi di fissaggio, la presenza di crepe nel telaio e lo stato di usura delle ruote.
- Ruote, accessori in gomma, impugnature, freni attaccati si consumano naturalmente e dovrebbero essere sostituiti regolarmente.
- Utilizzare solo accessori originali. L'utilizzo di parti non originali può danneggiare il prodotto e può causare pericoli nel suo utilizzo.
- Oleare regolarmente le ruote piroettanti.
- Pulire regolarmente il prodotto con un detersivo delicato.
- Si prega di utilizzare un detergente neutro e acqua tiepida per la pulizia. Non utilizzare prodotti e detersivi abrasivi. Risciacquare con acqua pulita e asciugare con un panno morbido.
- Non utilizzare getti d'acqua e attendere la completa asciugatura del prodotto prima dello stivaggio e l'utilizzo.
- Dopo ogni utilizzo della toilette, il secchiello e il sedile devono essere puliti e disinfettati. Posteriormente metterli in un ambiente asciutto e ventilato

6. AVVERTIMENTO

- Assicurarsi che il sedile del water sia completamente espanso e in posizione abbassata prima dell'uso.
- Assicurarsi che tutte le viti/manopole rotanti siano serrate.
- Assicurarsi che le clip sporgano dal foro di ogni barra. Ciò assicurerà che le gambe siano saldamente bloccate in posizione.
- Verificare che entrambe le ruote si muovano liberamente e che non vi siano detriti intorno all'assale.
- Testare la stabilità della sedia e del meccanismo del freno prima dell'uso.
- Utilizzare i braccioli solo come ausilio. Non usare le braccia per sostenere l'intero peso corporeo.
- Le braccia devono essere alzate per aiutare il trasferimento da e verso la sedia.
- Gli utenti con forza fisica limitata devono essere sorvegliati o assistito durante l'igiene.
- Utilizzare solo su una superficie solida e regolare. Non usare su pavimenti bagnati, scivolosi o inclinati.
- Non superare la portata massima del prodotto.
- Non salire mai sul sedile né usarlo come gradino. Ciò può causare cadute.
- Usare con cautela. Non afferrare le impugnature con le mani bagnate, dato che si potrebbe scivolare e perdere la presa.

7. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Questo prodotto è in garanzia per materiali difettosi per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di acquisto del prodotto.

COPERTURA DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 2 anni. Nel terzo anno si dovrà dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della produzione e non per un suo uso inadeguato, o dovuto alla mancanza di manutenzione.

Questa Garanzia copre l'intero territorio nazionale spagnolo.

PROCEDURA PER RICHIERERE LA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il cliente dovrà recarsi preferibilmente presso il punto vendita dove il prodotto è stato acquistato. Nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile, o perché ha chiuso o perché hai acquistato il prodotto in un'altra comunità autonoma, puoi contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com che potrà informarle del punto di vendita più vicino a casa sua.

È imprescindibile presentare al momento del reclamo una copia della fattura o della ricevuta di acquisto, che riporti chiaramente il prodotto acquistato e la data, assieme alla prova di pagamento per importi superiori a € 1000. Tutto questo dovrà essere accompagnato da una lettera spiegando il motivo del difetto e una fotografia del numero di serie.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente, negligenza, mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale, causati da altri fattori umani, da collisione con un oggetto o danni causati da terzi.
- Danni causati da incendio, alluvione, tempesta, qualsiasi evento di natura o forza maggiore.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore.
- Danni causati dal trasporto o da un imballaggio scadente.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli elementi di usura causati dall'uso, quali: Ruote, tappezzeria, braccioli, freno elettrico, lampadine, batterie, ecc...
- Le riparazioni o la sostituzione della parte difettosa saranno effettuate da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE DANNEGGIATO O MANCANO PEZZI.

CONTATTA IL TUO FORNITORE.

SEDIA CON WC, RUOTE E POGGIAPIEDI DU 06

Es una silla inodoro que está construida principalmente con un marco de aluminio pintado con polvo. Viene con tapizado de PU que es duradero y fácil de limpiar. El cubo es desmontable y fácil de limpiar.



Simboli grafici



Fare riferimento alle istruzioni per l'uso per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul prodotto



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto



Codice prodotto



Numero di serie

Manuale d'istruzione

DU 06

V4 · 14/02/2025