



DU 06

Aides au bain

MANUEL D'UTILISATION

Ref. BSDPALDU06FN

plus de **50 ans** de vie sans limites

⚠ Remarque importante

Les caractéristiques techniques indiquées sont indicatives, car elles peuvent faire l'objet de modifications de conception en fonction des exigences de fabrication.

Le produit présenté dans ce catalogue n'a pas nécessairement été photographié dans sa configuration standard.

Veuillez consulter notre site web pour voir le modèle mis à jour.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

Merci d'avoir acheté un produit **IM** by
TotalCare Europe.

Le produit que vous avez acheté est doté de la technologie la plus avancée et a subi les tests les plus exigeants.

L'expérience acquise au fil du temps permet à nos produits d'offrir les meilleures performances, afin que vous puissiez profiter toujours plus de la liberté et de l'autonomie dont vous avez besoin au quotidien.

Nous vous conseillons de prendre le temps de lire les instructions fournies. Vous vous familiariserez ainsi avec votre nouveau **chaise de douche DU 06**, ce qui vous permettra d'en tirer le maximum de performances et de durée de vie.

plus de **50 ans** de vie **sans limites**

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE.

Il est important de lire le manuel avant d'utiliser le produit.

1 — Parties du fauteuil	4
2 — Description du produit	4
3 — Caractéristiques du produit.....	5
4 — Installation et utilisation	6
5 — Entretien et nettoyage.....	8
6 — Avis.....	9
7 — Garantie.....	10

1. PARTIES



2. DESCRIPTION

CHAISE PERCÉE AVEC ROUES ET REPOSE-PIEDS

Il s'agit d'une chaise d'aisance construite principalement avec un cadre en aluminium peint par poudrage. Elle est équipée d'un revêtement en PU durable et facile à nettoyer. Le seau est amovible et facile à nettoyer. Les accoudoirs rabattables permettent un transport sûr et facile. Les roulettes pivotantes de 5 pouces conviennent

parfaitement à une utilisation en intérieur. Les roues arrière sont faciles à serrer et à desserrer. Vous pouvez appuyer sur les freins de stationnement pour bloquer les roues. La capacité de charge maximale de la chaise d'aisance est de 100 kg.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



DU 06

INFORMACIÓN GENERAL

Mesures

Largeur totale	57,5 cm
Profondeur totale	85 cm
Profondeur sans repose-pieds	60 cm
Hauteur totale	103,5 cm
Hauteur assise-sol	53,5 cm
Largeur de l'assise	45,5 cm
Profondeur de l'assise	41 cm
Largeur du dossier	46,5 cm
Hauteur du dossier	23,5 cm
Largeur de l'ouverture du baquet	18 cm
Profondeur de l'ouverture du baquet	36 cm

Poids

Poids total	12,90 kg
Poids sans godet	12,60 kg
Poids maximum supporté	100 kg

Roues

Dimensions des roues avant	Ø 12 cm
Dimensions des roues arrière	Ø 12 cm
Type de roues	Solide
Freins	Verrouillage du frein

Matériau

Acier

Couleur

Noir

4. INSTALLATION ET UTILISATION

4.1. VÉRIFICATION DU NOMBRE DE PIÈCES

Vérifiez l'état des composants avant de commencer le montage afin de détecter d'éventuels dommages dus à un transport ou un stockage inappropriés.



4.2. SÉPARATION DES PIÈCES

À l'aide d'un cutter, coupez les attaches qui maintiennent ensemble les tubes du châssis de base.



4.3. ASSEMBLAGE DE LA BASE

Assemblez les deux moitiés de la structure du fauteuil à l'aide du tube de raccordement et des vis filetées. La pièce en plastique noir doit être placée aux deux extrémités du tube de raccordement.



4.4. INSERTION DES ROUES

Insérez les roues dans le châssis, puis fixez-les à l'aide des goupilles. Procédez comme indiqué sur l'image ci-contre. Les roues avec frein doivent être placées à l'arrière.



4.5. INSÉRER LE DOSSIER

Insérez le dossier en l'emboîtant à l'arrière de la chaise et fixez-le à l'aide des vis à tête moletée.



4.6. FIXATION DE L'ASSISE

Prenez l'assise dans son ensemble et placez-la sur la structure. Appuyez fermement sur les côtés pour que le clip se fixe bien sur le tube.



4.7. INSERTION DU REPOSE-PIEDS

Insérez le repose-pieds dans le cadre. Une fois inséré, tournez les repose-pieds vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en position, comme indiqué sur l'image ci-contre.



IMPORTANT

Il est essentiel de vérifier que toutes les vis sont correctement serrées. Avant d'utiliser le siège de toilettes DU06, assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées et correctement installées.

Effectuez des contrôles réguliers des vis afin de garantir une utilisation sûre du produit.

4.8. MISE EN PLACE DE LA SANGLE

Placez la sangle à velcro de manière à ce qu'elle enserre un repose-pieds à chacune de ses extrémités.



5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Il est recommandé de vérifier le produit au moins une fois par semaine.
- Vérifier le bon serrage des vis, l'état des fixations, vérifier l'absence de fissures sur le cadre, évaluer visuellement l'état d'usure des roues.
- N'utilisez que des accessoires d'origine. L'utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine peut endommager le produit et entraîner des risques d'utilisation.
- Les roues, les accessoires en caoutchouc, les poignées, les freins qui sont fixés sur le site
- s'usent naturellement et doivent être remplacés régulièrement.
- Ajoutez régulièrement une quantité adéquate d'huile lubrifiante aux pièces rotatives.
- Nettoyez régulièrement le produit avec un détergent doux et un nettoyant non abrasif.
- Utilisez un détergent neutre et de l'eau tiède pour le nettoyage. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs.
- Après le lavage, rincez à l'eau claire et essuyez avec un chiffon sec.
- N'utilisez pas de jets d'eau directs et, dans tous les cas, attendez que le produit soit complètement sec avant de l'utiliser.
- Après chaque utilisation de la chaise d'aisance, le seau et le siège doivent être parfaitement propres et désinfectés. Utilisez des désinfectants courants pour les nettoyer.
- Placez-les ensuite dans un environnement sec et ventilé..

6. AVIS

- Veillez à ce que le siège des toilettes soit complètement déployé. Le siège des toilettes doit être en position basse avant l'utilisation.
- Veillez à ce que toutes les vis et tous les boutons pivotants soient bien serrés.
- Veillez à ce que les pinces dépassent du trou de chaque jambe. Cela permet de s'assurer que les pieds sont bien verrouillés en position.
- Vérifiez que les deux roulettes se déplacent librement et qu'il n'y a pas d'accumulation de débris autour de l'axe.
- Testez la stabilité de la chaise d'aisance et le mécanisme de freinage avant de l'utiliser.
- N'utilisez les accoudoirs qu'à titre d'aide. N'essayez pas d'utiliser les bras pour supporter tout le poids du corps.
- Les bras doivent être levés pour faciliter le transfert vers et depuis l'appareil.
- Les utilisateurs dont la force physique est limitée doivent être surveillés ou assistés lorsqu'ils utilisent les toilettes.
- N'utilisez le produit que sur une surface ferme et plane.
- Avant d'utiliser le produit, assurez-vous qu'il est stable et solide, que toutes les vis sont bien serrées et que le seau est inséré dans la bonne position.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale du produit.
- Ne montez jamais sur le siège et ne l'utilisez pas comme marchepied. Cela peut entraîner des chutes et des charges inappropriées.
- N'utiliser que sur des surfaces planes et solides, éviter tous les dangers potentiels tels que les pentes, les surfaces inégales ou molles, les obstacles routiers, les sols mouillés et glissants, etc.
- À utiliser avec précaution. Ne saisissez pas les poignées avec des mains mouillées, elles pourraient glisser et perdre leur adhérence.

7. GARANTIE

DURÉE DE LA GARANTIE

Le produit que vous avez acheté est protégé par cette garantie contre tout défaut de fabrication du produit qui se manifeste dans les 3 ans suivant la date d'achat du produit..

CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie couvre toute panne ou tout défaut de fabrication pendant les deux premières années suivant l'achat du produit. Après la troisième année, pour bénéficier de la garantie, l'utilisateur doit prouver que le produit est défectueux en raison de sa fabrication et non d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien..

La portée territoriale de la présente garantie s'étend à l'ensemble du territoire national espagnol.

PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE LA GARANTIE

Pour que la garantie soit efficace, le consommateur doit également contacter de préférence le point de vente où le produit a été acheté. S'il est impossible de communiquer avec le point de vente, soit parce qu'il a fermé ses portes, soit parce que le produit a été acheté dans une autre communauté autonome, vous pouvez contacter directement le fabricant par courrier électronique à l'adresse suivante : info@totalcare-europe.com. Il pourra vous indiquer le point de vente le plus proche de votre domicile.

Au moment de la réclamation, il est indispensable de présenter une **copie de la facture ou du reçu d'achat**, qui indique clairement le produit acheté et la date. Ainsi qu'une **preuve de paiement** pour les montants supérieurs à 1 000 euros. Elle doit également être accompagnée d'une note expliquant le défaut de conformité et d'une photographie du numéro de série..

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS

- Les dommages causés par une mauvaise utilisation par l'utilisateur, une négligence, le non-respect des instructions données dans le présent manuel, causés par d'autres facteurs humains, une collision avec un objet ou des dommages causés par un tiers.
- Les dommages causés par un incendie, une inondation, une tempête, tout événement naturel ou de force majeure.
- Les produits qui ont été préalablement réparés ou manipulés par du personnel non autorisé par le fabricant.
- Les dommages causés par le transport ou un mauvais emballage.
- Tout produit ne portant pas ou ayant eu son numéro de série ou d'usine modifié ou effacé.
- La garantie ne couvre pas les éléments d'usure dus à l'utilisation, tels que : les roues, la sellerie, les coussins d'accoudoir, les freins électriques, les ampoules, les batteries, etc... a réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse sera effectué par du personnel qualifié et autorisé par TotalCare Europe, S.L.

NE PAS UTILISER CE PRODUIT S'IL SEMBLE ENDOMMAGÉ OU S'IL MANQUE DES PIÈCES.

CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

CHAISE PERCÉE AVEC ROUES ET REPOSE-PIEDS DU 06

Il s'agit d'une chaise d'aisance construite principalement avec un cadre en aluminium peint par poudrage. Elle est équipée d'un revêtement en PU durable et facile à nettoyer. Le seau est amovible et facile à nettoyer.



Légende de l'étiquetage



Vous devez vous référer au mode d'emploi pour les informations relatives à la sécurité.



Consultez le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.



Données du fabricant



Date de fabrication



Représentant européen



Lot



Référence du produit



Numéro de série

Manuel d'utilisation

DU 06

V4 · 14/02/2025