



IKARIA



Ikaria

Petite scooter
démontable

MANUEL D'UTILISATION

Ref. SCACIKARIA270M45G20G

plus de 60 ans de vie sans limites

! Remarque importante

Les caractéristiques techniques indiquées sont indicatives, car elles peuvent faire l'objet de modifications de conception en fonction des exigences de fabrication.

Le produit présenté dans ce catalogue n'a pas nécessairement été photographié dans sa configuration standard.

Veuillez consulter notre site web pour voir le modèle mis à jour.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

Merci d'avoir acheté un produit **IM** by **TotalCare Europe**.

Le produit que vous avez acheté est doté de la technologie la plus avancée et a subi les tests les plus exigeants.

L'expérience acquise au fil du temps permet à nos produits d'offrir les meilleures performances, afin que vous puissiez profiter toujours plus de la liberté et de l'autonomie dont vous avez besoin au quotidien.

Nous vous suggérons de prendre quelques instants pour lire les instructions fournies. Vous vous familiariserez ainsi avec votre nouveau scooter **Ikarria**, ce qui vous permettra d'en tirer le maximum de performances et de durée de vie.


plus de **60 ans** de vie **sans limites**

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE.

Il est important de lire le manuel avant d'utiliser le produit.

1 – Pièces du scoote Ikaria	4
2 – Description du produit	4
3 – Caractéristiques du produit.....	5
4 – Avant de prendre la route	7
5 – Conduite	8
6 – Utilisation et montage	9
7 – Batterie et recharge.....	12
8 – Entretien	13
9 – Guide de dépannage	14
10 – Garantie.....	15

1. PIÈCES DU SCOOTER IKARIA

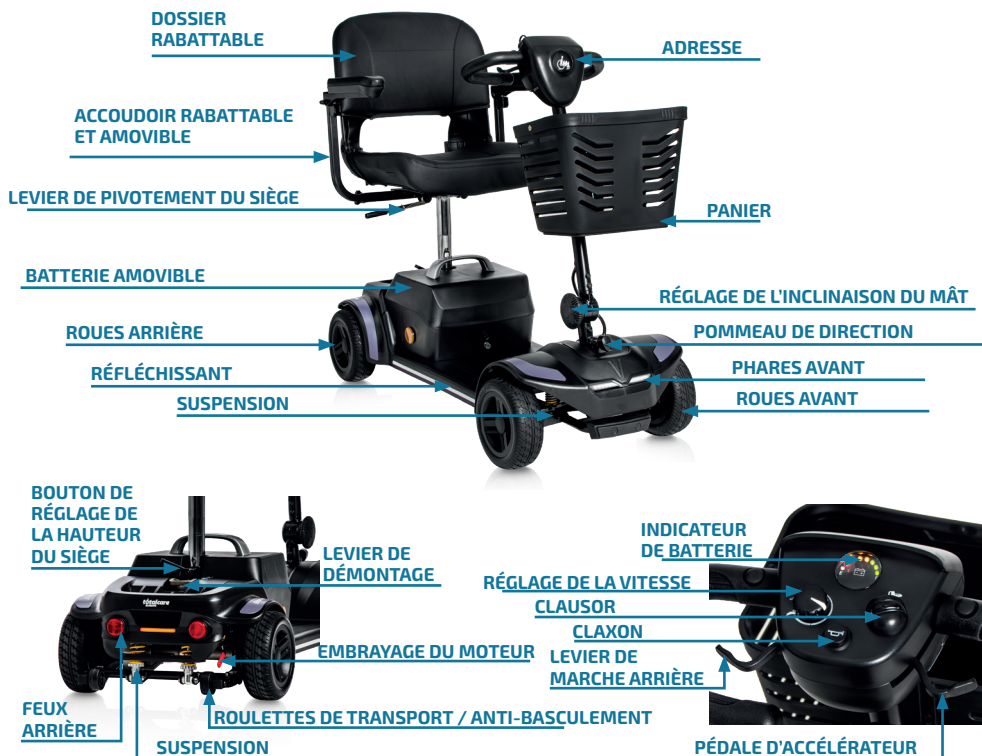

2. DESCRIPTION DU PRODUIT

PETITE TROTTINETTE DÉMONTABLE AVEC SUSPENSION

Le scooter Ikaria se distingue par son design compact et maniable. Avec une largeur totale de seulement 48 cm (sans accoudoirs) et une profondeur maximale de 103 cm, il permet de se déplacer dans des espaces restreints, de franchir facilement les portes et d'accéder à de petits ascenseurs.

Son châssis démontable en cinq parties facilite son transport et son rangement.

Équipé d'un moteur de 270 W, il atteint une vitesse maximale de 8 km/h. De plus, il intègre deux batteries au gel de 22 Ah offrant une autonomie pouvant atteindre 20 km.

Il dispose de feux avant et arrière, ainsi que d'une suspension sur les quatre roues, qui améliore la stabilité et absorbe les irrégularités du terrain, offrant une conduite plus souple.

3. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



IKARIA



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

Largeur totale (sans accoudoirs) 48 cm

Largeur totale (avec accoudoirs réglables) 53 - 70 cm

Profondeur totale 103 - 107 cm*

Hauteur totale 95 cm

Hauteur du siège au sol (réglable) 55 - 60 cm

*Profondeur réglable grâce aux roulettes anti-basculement amovibles. La profondeur indiquée ne tient pas compte du panier avant, qui augmente la longueur totale de 10 cm.

Poids

Poids total (sans batterie) 38,80 kg

Poids total (avec batteries) 52,30 kg

Poids maximal supporté 136 kg

Matériel Aluminium

Couleur Gris mat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Siège

Largeur du siège	44 cm
Largeur utile d'assise (réglable)	45 - 62 cm
Profondeur du siège	40 cm
Type de siège	Pivotant et réglable

Moteur

Moteur	270 W
Batterie	2 x 22 Ah (gel)
Nombre de batteries	2
Autonomie	15 - 20 km (2 x 22 Ah)
Vitesse maximale	8 km/h

Accoudoirs

Longueur des accoudoirs	26 cm
Largeur des accoudoirs	4 cm
Type d'accoudoirs	Rabattables, amovibles et réglables en largeur

Dossier

Largeur du dossier	45 cm
Hauteur du dossier	28 cm
Type de dossier	Pliable

Roues

Dimensions des roues avant	Ø 21 cm
Dimensions des roues arrière	Ø 21 cm
Largeur des roues avant	6,5 cm
Largeur des roues arrière	6,5 cm
Type de roues	Massives

Autres caractéristiques

Hauteur maximale des bordures	5 cm
Hauteur du sol au bas de la plateforme	7 cm
Hauteur du sol au haut de la plateforme	11 cm
Klaxon	Oui
Direction	Verrouillables
Feux	Avant et arrière
Mât	Inclinaison réglable
Pente maximale franchissable	9°
Rayon de braquage	130 cm
Roues anti-basculément	Oui, amovibles
Type de freins	Électromagnétiques



4. AVANT DE PRENDRE LA ROUTE

4.1. POUR COMMENCER

- L'utilisateur doit se familiariser avec l'utilisation et le fonctionnement de cette trottinette avant de la conduire.
- Circulez uniquement sur la chaussée et dans les zones piétonnes. Ne roulez jamais sur les autoroutes ou les voies rapides. Empruntez uniquement les passages piétons pour traverser la chaussée.
- Soyez attentif à la circulation lorsque vous traversez ou circulez sur la chaussée.
- Soyez très prudent lorsque vous conduisez votre trottinette dans des zones très fréquentées, comme les centres commerciaux.
- Ne conduisez pas la trottinette sous l'influence de l'alcool ou de drogues, ou lorsque vous êtes fatigué.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez la trottinette dans des conditions de faible luminosité. Elle n'est pas conçue pour une utilisation de nuit.
- Avant d'utiliser la trottinette dans des environnements fréquentés ou dangereux, familiarisez-vous avec son fonctionnement. Entraînez-vous dans un espace ouvert et sûr, exempt de dangers et de personnes. Baissez la vitesse maximale pour vos premiers essais.

4.2. AU VOLANT

- N'utilisez pas votre trottinette sur des surfaces boueuses, graveleuses, bosselées, étroites, enneigées ou verglacées ; ni sur des chemins de halage près de canaux non surveillés.
- N'utilisez pas votre trottinette à l'extérieur lorsqu'il pleut, qu'il neige, qu'il y a du brouillard ou qu'il y a du vent.
- Ne faites pas de virages brusques avec votre trottinette.
- Tenez compte des mouvements de conduite, tels que l'accélération, l'arrêt, les virages, les demi-tours et l'effet des pentes.
- Réduisez votre vitesse lorsque vous roulez en pente. Penchez-vous toujours vers l'avant lorsque vous montez une pente raide. Ne roulez pas sur des pentes dont la pente dépasse celles indiquées dans le schéma ci-dessous :
- Ne roulez pas sur des routes présentant des dénivelés importants ou des nids-de-poule.

- La trottinette n'est pas adaptée au transport de passagers.
- N'utilisez pas de téléphone portable ou d'autres appareils de communication sans fil pendant la conduite. Arrêtez-vous toujours à un endroit approprié et éteignez le scooter avant d'utiliser votre téléphone.
- Ne le mettez pas en mode roue libre pendant la conduite, en particulier sur une pente. Assurez-vous que le frein automatique du scooter est activé avant utilisation.
- Ne dépassez pas la limite de poids du scooter.

4.3. COMMENT UTILISER VOTRE SCOOTER

Mise en marche à l'aide de la clé. La clé de contact sert d'interrupteur de mise en marche pour la trottinette. Pour mettre l'appareil en marche, insérez la clé ; le voyant de batterie devrait alors s'allumer. Pour couper l'alimentation, retirez la clé ; le voyant de batterie devrait alors s'éteindre.

Ne débranchez pas la trottinette pendant que vous roulez, car cela provoquerait un arrêt d'urgence et pourrait entraîner des dommages matériels ou des blessures.

Réglage de la vitesse. Tournez le cadran de vitesse pour déterminer la vitesse maximale de la trottinette. Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la réduire.

Ne réglez pas la vitesse pendant la conduite. Ne réglez pas la vitesse au maximum lorsque vous roulez à l'intérieur.

Déplacement et freinage. Pour avancer, appuyez sur le côté droit de la manette de commande vers vous. Appuyez sur le côté gauche de la manette de commande vers vous et la trottinette reculera, émettant une alarme sonore de marche arrière. Pour freiner, relâchez la manette qui reviendra en position neutre, activera automatiquement le frein électromagnétique et arrêtera rapidement la trottinette. Le levier de commande vous permet de contrôler la vitesse de la trottinette jusqu'à une vitesse maximale déterminée par le réglage rapide. Plus vous inclinez le levier de commande, plus la trottinette ira vite, jusqu'à un maximum de 8 km/h.

Attendez au moins 2 secondes avant d'actionner le levier de commande après avoir mis le scooter en marche à l'aide de la clé. Si vous actionnez le levier de commande en même temps que vous tournez la clé, le scooter signalera une erreur via le voyant lumineux du tableau de bord.

N'appuyez pas simultanément sur les côtés gauche et droit du levier de commande. Vous ne pourrez pas contrôler le scooter.

Bouton d'avertisseur sonore : Appuyez sur le bouton d'avertisseur sonore pour faire retentir l'avertisseur. Relâchez le bouton pour arrêter l'avertisseur.

Frein électromagnétique : Relâchez complètement le levier de commande ; le frein électromagnétique s'activera automatiquement et le scooter s'arrêtera.

Lorsque vous êtes sur une pente, ne mettez jamais le véhicule en mode roue libre. Les freins ne seront pas activés.

Siège : le siège peut pivoter. Poussez le levier du siège vers l'avant et faites pivoter le siège. Relâchez le levier, puis continuez à faire pivoter le siège jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

Remettez le siège en position avant de conduire.

5. CONDUITE

5.1. DÉMARRAGE ET CONDUITE

- Assurez-vous que le siège est correctement installé.
- Assurez-vous que le mât est bien fixé et que le verrouillage du mât est désactivé.
- Rabattez les accoudoirs afin de pouvoir y poser vos bras.
- Mettez le contact.
- Vérifiez l'indicateur de batterie pour vous assurer que le panneau LED indique une charge complète pour votre trajet. Si vous avez des doutes quant au niveau de charge nécessaire pour votre trajet, rechargez la batterie avant de l'utiliser.
- Réglez la vitesse à un niveau qui vous semble sûr et confortable.
- Vérifiez que le levier de commande et le frein automatique fonctionnent correctement.

- Avant de prendre le volant, assurez-vous que les conditions environnantes vous permettent de conduire en toute sécurité.

Soyez prudent lorsque vous conduisez dans des endroits très fréquentés ou très animés. Lorsque vous faites marche arrière, faites attention aux personnes ou aux objets qui se trouvent derrière vous.

5.2. ARRÊTÉ

- Relâchez complètement le levier de commande. Le véhicule freinera et s'arrêtera automatiquement.
- Coupez le contact à l'aide de la clé et retirez-la.

La distance de freinage varie en fonction de la vitesse ; commencez donc à freiner le plus tôt possible. Garez-vous toujours sur une surface plane, coupez le contact et retirez la clé avant de descendre.

6. UTILISATION ET MONTAGE

6.1. MISE EN MARCHÉ DU SCOOTER

Insérez la clé pour mettre le scooter en marche et retirez-la pour l'éteindre. Lorsque vous n'utilisez pas le scooter, éteignez-le et retirez la clé afin d'éviter toute consommation inutile et de garantir la sécurité.



⚠ Si l'alimentation électrique est coupée pendant la conduite, le frein électromagnétique se déclenche et le scooter s'arrête brusquement

6.2. RÉGLAGE DE LA VITESSE

Le commutateur de réglage de la vitesse permet de modifier la vitesse de déplacement en marche avant comme en marche arrière ; celle-ci peut être réglée dans une plage comprise entre 0 et 8 km/h.

Vitesse minimale :

Pour réduire la vitesse au minimum, tournez le bouton vers l'extrême gauche. Cela garantira une vitesse plus lente et mieux contrôlée.

Vitesse maximale:

Pour augmenter la vitesse au maximum, tournez le bouton vers l'extrême droite. Vous atteindrez ainsi la vitesse la plus élevée disponible.



⚠ Ne réglez pas la vitesse maximale lorsque vous tournez ou reculez

6.3. DIRECTION

Le levier de commande sert à faire avancer ou reculer le scooter. Actionnez le levier en douceur et suivez les instructions ci-dessous pour garantir une conduite sûre et précise.

Mouvement vers l'avant

Saisissez le levier de commande droit de la main droite et poussez-le vers vous. La trottinette avancera de manière contrôlée..

Mouvement vers l'arrière

Saisissez le levier de commande gauche de la main gauche et poussez-le vers vous. La trottinette reculera et des bips d'avertissement retentiront par mesure de sécurité.



En cas de coupure de courant pendant la conduite, le frein électromagnétique s'activera, provoquant un arrêt brusque du scooter.

Arrêt automatique

Lorsque vous relâchez complètement le levier de commande, celui-ci revient automatiquement en position centrale et la trottinette s'arrête. Le frein électromagnétique s'active automatiquement pour garantir un arrêt sûr et stable.

6.4. CLAXON

Pour éviter les accidents et les dommages, utilisez correctement le bouton du klaxon. Le klaxon retentira dès que vous appuierez sur le bouton.



6.5. DÉMONTAGE

Pour démonter la trottinette et faciliter son transport ou son rangement, suivez les étapes suivantes :

- **Retirez le panier** en le soulevant vers le haut et en le faisant glisser le long du rail jusqu'à ce qu'il soit complètement sorti.
- **Retirez la selle**, actionnez le levier et tirez fermement vers le haut jusqu'à ce qu'elle se détache du cadre. Si vous rencontrez une résistance, effectuez de petits mouvements de rotation tout en tirant sur la selle pour faciliter son retrait.



- **Retirez la batterie** en tirant sur la poignée intégrée jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée.



- **Séparez la partie arrière de la base de la scooter.** Pour ce faire, tirez le levier métallique vers le haut tout en faisant glisser l'arrière de la trottinette vers l'arrière jusqu'à ce qu'il se détache de la base.



- **Repliez le mât de direction.** Tournez le bouton de réglage pour le desserrer et, une fois déverrouillé, abaissez le mât jusqu'à la position souhaitée. Resserrez le bouton pour bloquer l'ensemble si nécessaire.



6.6. MONTAJE

Pour remonter la trottinette, suivez les étapes décrites au paragraphe 5.5 dans l'ordre inverse. Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement assemblées et verrouillées avant d'utiliser la trottinette.

⚠ Vérifiez que la batterie est correctement installée, que le siège est bien fixé et que la colonne de direction est verrouillée et correctement réglée avant de mettre la scooter en marche.


6.7. RÉGLAGE DU MÂT

L'inclinaison du guidon du scooter Ikaria est réglable. Pour ajuster sa position, desserrez le bouton de réglage en le tournant vers vous. Placez le guidon dans la position souhaitée, puis resserrez le bouton une fois la position atteinte.

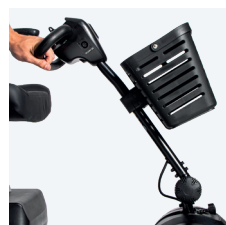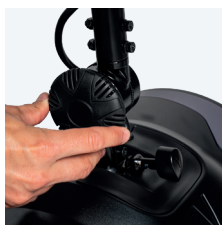

6.8. BLOCAGE DE LA DIRECTION

La scooter est équipée d'un système de verrouillage de la direction qui facilite son transport et son rangement. Une fois le guidon centré, serrez et tournez le loquet de verrouillage vers la gauche pour bloquer la direction. Pour déverrouiller la direction, tournez le loquet vers la droite jusqu'à ce qu'il se débloque. Une fois déverrouillé, le guidon pourra pivoter normalement.

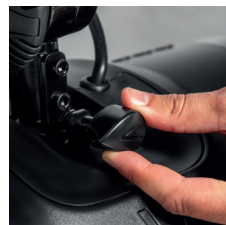

⚠ Avant de monter ou de descendre de la scooter, assurez-vous qu'elle est éteinte et effectuez cette opération sur une surface plane et stable.

6.9. ACCOUDOIRS

Les accoudoirs sont amovibles et réglables en largeur. **Pour les installer**, insérez les accoudoirs et fixez-les à l'aide des boutons situés à l'arrière. **Pour régler la largeur**, retirez le bouton de fixation, déplacez les accoudoirs jusqu'à la position souhaitée, puis remettez le bouton en place et serrez-le.



6.10. SIÈGE

Le siège est réglable en hauteur et pivotant.

Pour régler la hauteur, retirez la goupille située à l'arrière du tube du siège, réglez la hauteur souhaitée, puis réinsérez la goupille dans l'orifice correspondant.

Pour faire pivoter le siège, tirez vers le haut le levier situé sous le siège et faites-le pivoter.



6.11. ANTI-RETOURNEMENT

Pour retirer les roues anti-basculement, appuyez sur le bouton de déverrouillage rapide et tirez-les vers l'extérieur. Si nécessaire, aidez-vous d'un tournevis pour exercer une pression plus forte sur le bouton.



6.12. DÉSACTIVATION DU MOTEUR


Pour désactiver le moteur y poder empujar el scooter manualmente, tire de la palanca de desembrague hacia arriba. En esta posición, el scooter quedará en modo manual. Para volver a activar la tracción eléctrica, baje la palanca hasta su posición original. Si el scooter está en modo manual, no funcionará eléctricamente.



6.13. UTILISATION DU THERMOFUSIBLE

En cas de surcharge électrique, le fusible thermique de la batterie s'enclenche automatiquement pour protéger le système électrique du scooter.

Pour le réarmer, appuyez sur le bouton du fusible thermique à travers le capuchon en plastique transparent jusqu'à ce qu'il revienne à sa position normale.

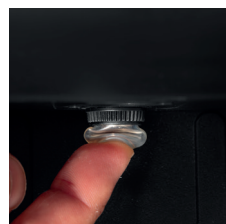

 **Conduisez toujours avec les roues anti-retournement correctement installées**

7. BATTERIE ET RECHARGE

7.1. INDICATEUR DE L'ÉTAT DE LA BATTERIE

Lorsque la clé est complètement insérée dans le contacteur d'allumage pour démarrer le scooter, cet indicateur affiche le niveau de charge approximatif de la batterie.

Pour plus d'informations sur l'indicateur d'état de la batterie, reportez-vous à la section 9, « Batteries et recharge ».

7.2. FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE

Le scooter est équipé d'une fonction d'arrêt automatique à économie d'énergie conçue pour préserver l'autonomie des batteries.

Si vous laissez accidentellement la clé en position « marche » sans utiliser le scooter pendant environ 15 minutes, le contrôleur s'éteindra automatiquement.

Si cette fonction est activée :

- Retirez la clé du contact.
- Réinsérez la clé et mettez le scooter en marche.

7.3. BATTERIES ET RECHARGE

Veillez lire les instructions de recharge des batteries figurant dans ce manuel ainsi que celles fournies avec le chargeur avant de recharger les batteries.

L'indicateur d'état de la batterie situé sur la console de direction affiche le niveau de charge approximatif à l'aide d'un code couleur :

- **Vert** : batteries complètement chargées.
- **Jaune** : niveau de charge moyen.
- **Rouge** : recharge immédiate nécessaire

Para obtener la máxima precisión, el indicador debe comprobarse mientras el scooter circula a velocidad máxima sobre una superficie seca y nivelada.



ATTENTION

Pour garantir une précision optimale, l'indicateur doit être vérifié lorsque le scooter roule à vitesse maximale sur une surface sèche et plane.

7.4. PREMIER CHARGEMENT

Votre scooter de mobilité fonctionne avec deux batteries à décharge profonde de 12 volts, scellées et sans entretien.

Les batteries se rechargent à l'aide du chargeur externe fourni.

Avant d'utiliser le scooter pour la première fois, rechargez complètement les batteries pendant 8 à 14 heures.

Le fait de maintenir les batteries complètement chargées contribuera à garantir un fonctionnement optimal du scooter.

7.5. CHARGE DU SCOOTER

Le scooter peut être rechargé à l'aide des ports de recharge situés à la fois sur le scooter lui-même et sur la batterie.

Procédure :

- Branchez le chargeur au scooter ou au boîtier.
- Branchez le chargeur à une prise électrique.
- Attendez que les batteries soient complètement chargées.
- Débranchez le chargeur du scooter.



Voyants lumineux du chargeur

- **Voyant rouge** : La charge est en cours.
- **Voyant vert** : La charge principale (environ 95 %) est terminée et le chargeur effectue une charge d'entretien.

Le scooter est équipé d'une fonction de blocage pendant la charge.

Pendant la charge des batteries :

- Le scooter ne pourra pas se déplacer.
- Le voyant d'état de la batterie restera éteint.

7.6. TEMPERATURES DE FONCTIONNEMENT

El scooter ha sido diseñado para funcionar de manera óptima entre: **-10 °C y +50 °C**

En condiciones extremadamente frías, las baterías pueden congelarse dependiendo de:

- Su nivel de carga / Su estado de uso / Su composición química.

En condiciones extremadamente calurosas, el scooter puede funcionar a una velocidad reducida.

Esta reducción de rendimiento forma parte de un sistema de protección diseñado para evitar daños en:

- La transmisión / El motor / Componentes elec.

7.7. FUNCIONAMIENTO Y CARGA DE LAS BATERÍAS

Si utiliza el scooter diariamente:

- Cargue las baterías al finalizar cada jornada de uso.
- El scooter estará listo para su uso al día siguiente.

Se recomienda cargar las baterías entre 8 y 14 horas después de cada uso diario.

Además, se recomienda mantener la carga durante aproximadamente 4 horas adicionales después de que el cargador indique que la carga se ha completado.

Si utiliza el scooter una vez por semana o con menor frecuencia:

- Cargue las baterías al menos una vez por semana.
- Mantenga la carga durante un mínimo de 24 h.

7.8. CARGA DE LAS BATERÍAS

Mantenga siempre las baterías completamente cargadas y evite descargarlas profundamente.

Consulte las instrucciones específicas suministradas con el cargador.

Se recomienda realizar una carga continua de al menos 48 horas una vez al mes para mejorar:

- El rendimiento de las baterías / Su vida útil.

La eliminación de la toma de tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica.

Si fuera necesario, utilice únicamente adaptadores homologados para tomas de corriente de dos polos. No utilice nunca alargadores eléctricos con el cargador de baterías. Conecte el cargador directamente a una toma de corriente correctamente instalada.

8. ENTRETIEN

Votre scooter de mobilité nécessite très peu d'entretien. Si vous ne vous sentez pas capable d'effectuer les tâches décrites dans ce manuel, prenez rendez-vous avec votre orthopédiste pour les révisions. Les éléments suivants doivent faire l'objet d'inspections et d'un entretien réguliers.

8.1. PNEUS

Inspectez régulièrement les pneus du scooter afin de détecter toute usure excessive, coupure, fissure ou tout autre dommage visible

8.2. REMPLACEMENT DES ROUES

Le scooter est équipé de pneus en polyuréthane (PU). Si un pneu présente des dommages ou une usure excessive, il convient de remplacer la roue complète. Pour obtenir des informations sur les roues de rechange, contactez votre orthopédiste.

Avant toute intervention :

- Retirez la clé du contact.
- Assurez-vous que le scooter n'est pas en mode roue libre.

8.3. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

Utilisez un chiffon humide et un nettoyeur doux non abrasif pour nettoyer les parties en plastique et métalliques du scooter. Évitez les produits susceptibles de rayer ou d'endommager les surfaces.

8.4. ROULEMENTS D'ESSIEU ET ENSEMBLE MOTEUR/ TRANSMISSION

Ces composants sont lubrifiés en usine, scellés et ne nécessitent aucune lubrification supplémentaire pendant leur durée de vie.

8.5. CONSOLE, CHARGEUR ET ÉLECTRONIQUE ARRIÈRE

Veillez à ce que ces zones restent sèches. Si elles ont été exposées à l'eau ou à l'humidité, laissez-les sécher complètement avant de les utiliser.

8.6. VÉRIFICATIONS QUOTIDIENNES

Lorsque le scooter est à l'arrêt, vérifiez l'accélérateur. Assurez-vous qu'il n'est ni tordu ni endommagé et qu'il revient en position neutre lorsque vous le relâchez. N'essayez pas de le réparer vous-même. Si vous constatez un problème, contactez votre orthopédiste.

Inspectez visuellement le câble de la colonne de direction. Assurez-vous qu'il n'est pas coupé et qu'aucun conducteur n'est à nu. Si vous constatez un problème, contactez votre orthopédiste.

Vérifiez que les pneus pleins ne présentent pas de zones aplaties. Ces déformations peuvent nuire à la stabilité.

Inspectez les accoudoirs pour vérifier qu'il n'y a pas de vis desserrées ou de dommages. Si vous constatez un problème, contactez votre orthopédiste.

Vérifiez les freins. Ce contrôle doit être effectué sur une surface plane et avec au moins 1 mètre d'espace libre autour du scooter.

8.7. VÉRIFICATIONS HEBDOMADAIRES

Vérifiez que les connecteurs du contrôleur et du chargeur ne présentent pas de traces de corrosion. Si nécessaire, contactez votre magasin de matériel orthopédique.

8.8. VÉRIFICATIONS MENSUELLES

Vérifiez que les roues anti-basculement ne frottent pas contre le sol pendant le fonctionnement. Vérifiez l'usure des roues anti-basculement et remplacez-les si nécessaire.

Vérifiez l'usure des pneus. Maintenez le scooter propre et exempt de boue, de saleté, de restes de nourriture, etc.

8.9. VÉRIFICATIONS ANNUELLES

Apportez votre scooter Ikaria chez votre orthopédiste pour un entretien annuel, surtout si vous l'utilisez tous les jours. Cela permet de garantir son bon fonctionnement et de prévenir d'éventuelles pannes.

9. GUIDE DE DÉPANNAGE

Si le scooter présente un problème, veuillez consulter les informations suivantes avant de contacter votre orthopédiste. Le système de contrôle surveille en permanence le fonctionnement du scooter. Lorsqu'une anomalie est détectée, le système peut afficher un code d'erreur.

Code	Erreur	Description	Mesures correctives
Erreur 1	Batterie faible	Les batteries doivent être rechargées	Chargez complètement les batteries.
Erreur 2	Batterie faible Tension insuffisante	La tension de la batterie est trop faible pour permettre le fonctionnement	Rechargez les batteries. Vérifiez les connexions des batteries
Erreur 3	Défaillance de la tension de la batterie	La tension de la batterie est trop élevée	Vérifiez l'état de la batterie. Vérifiez le chargeur et les connexions
Erreur 4	Défaillance du courant du moteur	Le moteur consomme un courant excessif	Vérifiez le moteur. Vérifiez le câblage et les connexions
Erreur 5	Défaillance du frein électromagnétique	Il y a un problème au niveau du système de freinage électromagnétique	Vérifiez les connexions du frein. Vérifiez le câblage associé
Erreur 6	Manette d'accélération hors position	Le levier d'accélération n'est pas en position neutre lors de la mise en marche	Relâchez complètement la manette d'accélération. Éteignez puis rallumez le scooter
Erreur 7	Défaillance du potentiomètre	Une anomalie a été détectée dans le système de contrôle de vitesse	Vérifiez le régulateur de vitesse. Vérifiez les connexions électriques
Erreur 8	Défaillance de la tension du moteur	Le moteur ou le câblage associé présente une anomalie	Vérifiez le moteur. Vérifiez toutes les connexions et le câblage associé
Erreur 9	Autre erreur	Le contrôleur peut présenter une panne interne	Vérifiez toutes les connexions et le câblage. Contactez votre orthopédiste si le problème persiste

10. GARANTIE

DURÉE DE LA GARANTIE

Le produit acheté par vous est protégé par cette garantie, pour le défaut de conformité du client qui se manifeste dans une période de 3 ans à compter de la date d'achat du produit ou de la date de livraison.

CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie couvre toute panne ou défaut de fabrication pendant les 24 premiers mois suivant l'achat du produit ; après 2 ans et jusqu'à 3 ans, le consommateur doit continuer à contacter le vendeur pour réparer le défaut de conformité du bien, mais si nécessaire, l'utilisateur doit démontrer que le produit est défectueux en raison de la fabrication et non en raison d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien.

La portée territoriale de cette garantie s'étend à l'ensemble du territoire national espagnol.

Cette garantie n'affecte pas les droits dont dispose le consommateur conformément aux dispositions du décret-loi royal 7/2021, du 27 avril, sur la transposition des directives de l'Union européenne en matière de défense des consommateurs.

PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE LA GARANTIE

S'il est impossible de communiquer avec le point de vente, soit parce qu'il a fermé ses portes, soit parce que le produit a été acheté dans une autre communauté autonome, le consommateur peut s'adresser directement au fabricant par courrier électronique à l'adresse info@totalcare-europe.com.

Au moment de la réclamation, il est indispensable de présenter une copie de la facture ou du ticket de caisse, ou un bon de livraison postérieur à la facture ou au ticket de caisse, indiquant clairement le produit acheté et la date.

Le consommateur doit retourner le produit au même endroit où il a été acheté, accompagné d'une note expliquant le défaut de conformité.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS

- Les dommages causés par une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur en ne respectant pas les instructions données dans ce manuel ou causés par d'autres facteurs humains, une mauvaise utilisation, une collision avec un objet quelconque.
- Les dommages causés par un accident, un abus, une négligence ou une mauvaise utilisation.
- Les dommages causés par un incendie, une inondation, une tempête ou tout autre événement naturel.
- Les produits qui ont été préalablement réparés ou manipulés par du personnel non autorisé par le fabricant ou le vendeur.
- Si les pièces utilisées ne sont pas fabriquées par notre société.
- Tout produit ne portant pas ou ayant eu son numéro de série ou d'usine modifié ou effacé.
- La garantie ne couvre pas les éléments d'usure.
- La réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse sera effectué par du personnel qualifié et autorisé par TotalCare Europe, S.L.

NE PAS UTILISER CE PRODUIT S'IL SEMBLE ENDOMMAGÉ OU S'IL MANQUE DES PIÈCES.

CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR.

Légende de l'étiquetage



Conformité européenne



Vous devez vous référer au mode d'emploi pour les informations relatives à la sécurité.



Consultez le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.



Données du fabricant



Date de fabrication



Représentant européen



Lot



Référence du produit



Numéro de série



Dispositif médical conforme au MDR.

Manuel d'utilisation

Petite scooter démontable **Ikaria**

V1 · 10/06/2026