



Magnum Pro

Andador de exterior

MANUAL DE USUARIO

Ref. AALMAGNUMPRO

más de 60 años viviendo sin límites

! Nota importante

Las características técnicas indicadas son orientativas, ya que pueden presentar cambios de diseño según las necesidades de fabricación.

El producto del presente catálogo no necesariamente ha sido fotografiado en su configuración estándar.

Consultar nuestra página web para ver el modelo actualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DESDE TOTALCARE EUROPE

LE AGRADECEMOS SU CONFIANZA

Gracias por adquirir un producto de **IM** by **TotalCare Europe**.

El producto que usted ha adquirido está dotado de la más avanzada tecnología y ha soportado las pruebas más exigentes.

La experiencia a lo largo del tiempo hace que nuestros productos ofrezcan las mejores prestaciones, haciendo que usted pueda disfrutar cada día más de la libertad y autonomía que necesita.

Le sugerimos que dedique un momento para leer las instrucciones que le proporcionamos. Así podrá familiarizarse con su nuevo andador para exterior **Magnum Pro**, que le permitirá obtener el máximo rendimiento y vida útil de este.

más de **60 años** viviendo **sin límites**

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA.

Importante leer el manual antes de utilizar el producto.

1 – Partes del andador	4
2 – Descripción del producto	4
3 – Características del producto	5
4 – Antes de empezar.....	7
5 – Uso y montaje	8
6 – Mantenimiento y limpieza	10
7 – Garantía.....	11

1. PARTES DEL ANDADOR



2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ANDADOR DE ALUMINIO DE ALTAS PRESTACIONES Y ULTRALIGERO

El Magnum Pro es un andador fabricado en aluminio ultraligero con un peso de solo 6,5 kg.

Incorpora componentes y materiales de alta calidad, como ruedas con goma EVA blanda que proporcionan una conducción más suave y confortable, así como tapizados en PU Leather, impermeables y de gran durabilidad.

Además de ligero, es un andador compacto, con un ancho total de 58 cm y una talla de 45 cm, lo que facilita su uso tanto en interiores como en exteriores. Su robusta estructura permite soportar usuarios de hasta 136 kg.

Disponible en acabado blanco mate con tapizado marrón y azul mate con tapizado negro.

3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN GENERAL

Medidas

Ancho total	58 cm
Ancho ruedas traseras	46 cm
Profundidad total	67 cm
Alto total (regulable)	79 - 94 cm

Medidas plegado

Ancho plegado	24 cm
Alto total plegado	79 cm
Profundidad plegado	67 cm

Peso

Peso total	6,50 kg
Peso máximo soportado	136 kg

Material Aluminio

Color Blanco mate / Azul mate



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Asiento

Ancho del asiento	44 cm
Ancho útil para sentarse	45 cm
Profundidad del asiento	25 cm
Alto del asiento al suelo	58 cm
Material del asiento	PU leather, impermeable

Bolsa

Ancho de la bolsa	38 cm
Alto de la bolsa	26 cm
Profundidad de la bolsa	17 cm
Peso soportado de la bolsa	5 kg
Capacidad de la bolsa	11 L.
Material de la bolsa	PU leather, impermeable

Respaldo

Ancho del respaldo	48 cm
Alto del respaldo	12 cm
Tipo de respaldo	Extraíble, regulable en altura y en profundidad
Material del respaldo	PU leather, impermeable

Ruedas

Medidas ruedas delanteras	Ø23 cm
Medidas ruedas traseras	Ø19 cm
Ancho ruedas delanteras	3 cm
Ancho ruedas traseras	3 cm
Tipo de ruedas	Goma EVA blanda
Tipo de freno	Freno maneta



4. ANTES DE EMPEZAR

4.1. ANTES DE EMPEZAR

Su seguridad es lo más importante para TotalCare Europe. Así que tómese su tiempo para leer este manual que juega un papel importante en su seguridad.

Para garantizar su seguridad y prolongar la vida útil del andador Magnum Pro, consérvelo, compruébelo y manténgalo de forma adecuada y periódica.

Este manual refleja el diseño y las especificaciones en el momento de su publicación. Dado que el diseño cambia, es posible que algunas ilustraciones e imágenes de este manual no coincidan con los productos adquiridos.

TotalCare Europe no se hace responsable de las lesiones físicas o pérdidas materiales causadas por un uso inadecuado o inseguro de este producto. Esperamos que el andador Magnum Pro pueda aportar mayor comodidad a su vida.

4.2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea atentamente este manual antes de utilizar el andador y compruebe que todas las piezas estén en buen estado para garantizar su seguridad.
2. No camine sobre suelo empapado, o bajo el entorno de luz insuficiente y obstrucciones para evitar resbalones o tropiezos.
3. No lleve calcetines sin zapatos, zapatillas o tacones altos cuando camine con el andador.
4. Tranquilícese antes de caminar, reduzca la zancada y mire al frente.
5. No utilice el andador durante mucho tiempo para evitar la rigidez muscular y la contractura articular.
6. Los usuarios deben familiarizarse con todas las características, el uso previsto y el mantenimiento del Magnum Pro.
7. Deben realizarse comprobaciones y mantenimiento periódicos.

4.3. INSTRUCCIONES DE USO

- Este producto está diseñado y fabricado exclusivamente para un solo uso, con un peso máximo de 136 kg. No está destinado al transporte de mercancías ni a ser utilizado como silla de ruedas, carrito, etc. El andador compensará la falta de apoyo adecuado de las piernas apoyándose o desplazándose con el uso de las extremidades superiores o el pecho. El Magnum Pro proporcionará mayor estabilidad, apoyo y seguridad durante la marcha.
- No cuelgue nada en el asa ni en las demás piezas de este producto.
- Asegúrese de que el andador está desplegado en su sitio.
- Se recomienda consultar a su médico, fisioterapeuta o terapeuta ocupacional para determinar si usted es apto para el manejo de este producto.
- La capacidad máxima de carga de la bolsa de almacenamiento es de 5 kg, puede haber algunos riesgos cuando se excede el peso máximo.
- Puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores, sólo en superficies en las que las cuatro ruedas estén en contacto con el suelo.
- No utilice el andador en terrenos rocosos, llenos de baches o arenosos, ni en lugares con una inclinación pronunciada. Estos terrenos especiales afectarán al equilibrio corporal y a la seguridad.
- Por favor, no utilice este andador si se encuentran restricciones físicas como brazos débiles, síndrome de desequilibrio vestibular central, discapacidad visual y pérdida de extremidades.
- La garantía de este producto se basa en el uso y mantenimiento normales descritos en este manual. No cubre los fallos del dispositivo debidos a un mal uso o a un mantenimiento negligente por parte del propietario.

4.4. NORMAS DE SEGURIDAD

- Preste atención a las condiciones de la carretera en todo momento y asegúrese de que no hay ningún obstáculo delante de usted cuando utilice el andador.
- Asegúrese de que ambos frenos están en modo de estacionamiento cuando utilice el andador como bipedestador.
- Sujete las asas con ambas manos cuando lo utilice.
- Tenga en cuenta que algunas partes del andador pueden calentarse o enfriarse mucho debido a factores como la radiación solar. Tenga cuidado al tocarlas.

- Por favor, compruebe que el mecanismo de ajuste del asa está correctamente bloqueado y que el asa es fiable antes de utilizar el andador.
- Utilizar el Magnum Pro con las manos mojadas puede provocar descontrol y pérdida de equilibrio.
- Está prohibido utilizar el andador en carreteras o en autopista.
- Tenga en cuenta que el cuidado y mantenimiento adecuados del andador pueden prolongar su vida útil. Pero un cuidado y mantenimiento defectuosos o negligentes del andador limitan la responsabilidad.



 **Lea atentamente y siga las instrucciones de este manual para utilizar el andador de forma correcta y evitar lesiones físicas o daños.**

5. USO Y MONTAJE

5.1. AJUSTE DE LA EMPUÑADURA

Para regular la altura de los mangos, levante la abrazadera de ajuste para desbloquearla y desplace el mango hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la posición deseada. A continuación, vuelva a bajar la abrazadera para bloquearlo. Un "click" audible confirmará que el tubo ha quedado correctamente fijado.


Repita la operación en ambos lados hasta obtener la altura adecuada. El andador dispone de 7 posiciones de regulación en altura. Asegúrese de que ambos puños queden ajustados a la misma altura para garantizar una conducción segura y cómoda.

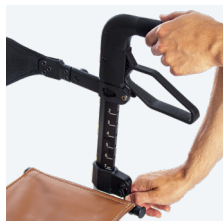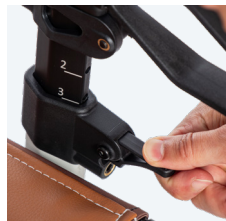

5.2. USO DEL FRENO

5.2.1. Freno maneta

- Apriete la palanca de freno con cuatro dedos para detener el andador. Suelte la palanca de freno para activar el modo de marcha.

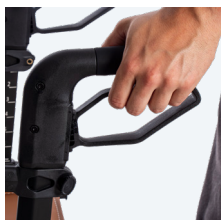


5.2.2. Freno bloqueo o de estacionamiento

- Empuje hacia abajo la palanca de freno para activar el freno de estacionamiento. Un sonido audible de "click" indicará que el freno está en la posición correcta.



No mantenga los frenos accionados de forma continua mientras camina con el andador, ya que esto puede provocar un desgaste prematuro.

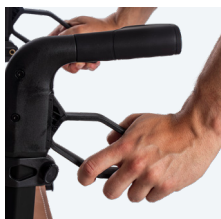

5.3. PLEGADO Y DESPLEGADO

5.3.1. Desplegado

- Levante el gancho de seguridad de plegado.




- Tire de los puños hacia fuera.
- Empuje hacia abajo los travesaños exteriores del asiento hasta escuchar un "click" notable del mecanismo de bloqueo. En ese momento, la barra transversal del asiento estará completamente bloqueada.



- Compruebe que la barra transversal del asiento esté correctamente encajada en el bastidor y que el mecanismo de bloqueo quede completamente fijado.



- Si desea instalar la bolsa, cuelgue las asas situadas a ambos lados de la misma en los ganchos del chasis del andador.


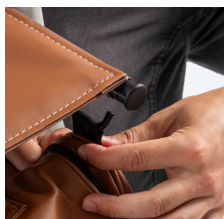


5.3.2. Plegado

- Accione el freno de estacionamiento.



- Sujete ligeramente el asa con la mano izquierda y levante la correa del asiento para liberar el mecanismo de bloqueo.

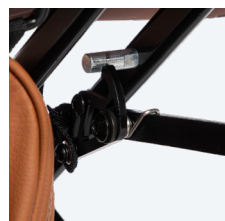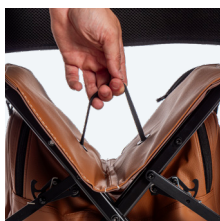

- Sujete y empuje las empuñaduras una hacia la otra hasta que el andador esté plegado.



- Cierre la bolsa de almacenamiento y asegure la correa de velcro para evitar que se abra.
- Mantenga presionado el botón de ajuste de la empuñadura para bajar su altura. Luego, cierre el mecanismo de ajuste de la empuñadura.
- Presione el gancho de seguridad hacia abajo hasta que se encaje en la barra transversal del asiento.



5.4. REGULACIÓN DEL RESPALDO

5.4.1. Regulación en altura

Gire la perilla en sentido antihorario para aflojarla, ajuste el respaldo a la altura deseada y vuelva a apretarla girándola en sentido horario. Antes de utilizar el andador, asegúrese de que la perilla haya quedado correctamente fijada.



5.4.2. Regulación en profundidad

Presione el botón de ajuste del respaldo y al mismo tiempo, deslice el respaldo hacia delante o hacia atrás hasta alcanzar la posición deseada.



5.4.3. Extracción del respaldo

Desenrosque completamente las perillas de ambos lados girándolas en sentido antihorario. Una vez retiradas, extraiga el respaldo.



5.5. REGULACIÓN DE LOS FRENOS

Para regular la fuerza de frenado, presione la carcasa del tornillo hacia abajo y gírela hacia la izquierda o hacia la derecha hasta obtener la tensión deseada. Verifique posteriormente que ambos frenos actúan de forma equilibrada y eficaz.



No cuelgue nada sobre el respaldo, ya que podría afectar a la estabilidad.

6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

6.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

6.1.1. Limpieza

El asiento, el respaldo y el chasis pueden limpiarse periódicamente con un paño suave humedecido con agua.

6.1.2. Qué hacer y qué no hacer

- No utilice limpiadores de alta presión para la limpieza y no salpique agua sobre el andador.
- Los disolventes químicos volátiles, como el alcohol de alta concentración, la esponja y el cepillo están prohibidos para la limpieza.
- Tras la limpieza y desinfección, asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas.

6.2. CONDICIONES AMBIENTALES

6.2.1. Transporte y almacenamiento

- Condiciones ambientales: -40°C - 65°C
- Humedad relativa: 0%-90

6.3. MANTENIMIENTO

- Compruebe periódicamente que los tornillos estén bien apretados.
- Verifique el funcionamiento de los frenos. Si detecta desgaste, contacte con su ortopedia.
- Mantenga las ruedas limpias. Cambie las ruedas en cuanto se desgasten o dañen.
- Para los tejidos, elimine el polvo y lave únicamente con agua tibia. No utilice detergentes, lejía ni productos de limpieza. No centrifugue ni planche. Deje secar a la sombra.

6.4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

- Mantenga el andador en un ambiente seco durante el transporte y el almacenamiento.
- El andador Magnum Pro debe embalsarse para su almacenamiento a fin de protegerlo contra la corrosión y las materias extrañas.

7. GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA

El producto adquirido por Ud. queda protegido por la presente garantía, por la falta de conformidad del cliente que se manifieste en el plazo de 3 años desde la fecha de compra del producto o la fecha de entrega.

ALCANCE DE LA GARANTÍA

La garantía cubre toda avería o defecto de fabricación durante los primeros 24 meses desde la compra del producto, a partir de los 2 años y hasta los 3 años, el consumidor debe seguir dirigiéndose a la parte vendedora para conseguir reparar la falta de conformidad del bien, pero en el caso necesario el usuario deberá demostrar que el producto esta defectuoso por fabricación y no por un mal uso o una falta de mantenimiento.

El alcance territorial de esta Garantía es para todo el territorio nacional español.

La presente Garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en defensa de los consumidores.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para poder hacer efectiva la Garantía el consumidor deberá dirigirse al punto de venta donde adquirido el producto, en el caso de que le sea imposible la comunicación con el punto de venta, ya sea porque ha cerrado o porque ha adquirido el producto en otra comunicad autónoma, se podrá dirigir directamente al fabricante a través del correo electrónico info@totalcare-europe.com.

Es imprescindible presentar copia de la factura o del ticket de compra, o un albarán de entrega posterior a la factura o ticket, en el momento de la reclamación, donde ampare claramente el producto comprado y la fecha.

El consumidor deberá entregar el producto en el mismo lugar que los adquirió, acompañando una nota explicativa de la falta de conformidad.

LA PRESENTE GARANTÍA NO CUBRE

- Los daños causados por mal uso por parte del usuario al no obedecer las instrucciones indicadas en este manual o causadas por otros factores humanos, mal uso, colisión con algún objeto...
- Los daños causados por accidente, abuso, negligencia o mal uso.
- Los daños causados por fuego, inundación, tormentas o cualquier evento de la naturaleza.
- Los productos que hayan sido previamente reparados o manipulados por personal no autorizado por el fabricante o vendedor.
- Si las piezas utilizadas no son fabricadas por nuestra empresa.
- Cualquier producto que no lleve o tenga alterado o borrado su numero de serie o de fábrica.
- La garantía no cubre los elementos de desgaste.
- Las reparaciones o sustitución de la pieza defectuosa serán efectuadas por un personal cualificado y autorizado por TotalCare Europe, S.L.

NO UTILICE ESTE PRODUCTO SI APARENTEMENTE ESTÁ DAÑADO O LE FALTAN PIEZAS.

CONTACTE CON SU PROVEEDOR.

Leyenda etiquetaje.



Conformidad Europea.



Representante Europeo.



Debe consultar las instrucciones de uso para obtener información de seguridad.



Lote.



Consulte el manual de usuario antes de utilizar el producto.



Referencia del producto.



Datos del fabricante.



Número de serie.



Fecha de fabricación.



Producto sanitario conforme con el MDR.

Manual de usuario

Andador de exterior Magnum Pro

V1 · 15/06/2026