



Magnum Pro

Andarilho de exterior

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. AALMAGNUMPRO

mais de 60 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem estar sujeitas a alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Ver o nosso website para o modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com o seu novo andarilho de exterior **Magnum Pro**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **60 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Peças do andarilho	4
2 — Descrição do produto	4
3 — Características do produto	5
4 — Antes de começar	7
5 — Utilização e montagem	8
6 — Manutenção e limpeza	10
7 — Garantia	11

1. PEÇAS DO ANDARILHO



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ANDADOR DE ALUMÍNIO ULTRALEVE E DE ALTO DESEMPENHO

O Magnum Pro é um andador fabricado em alumínio ultraleve, com um peso de apenas 6,5 kg.

Incorpora componentes e materiais de alta qualidade, tais como rodas com borracha EVA macia que proporcionam uma condução mais suave e confortável, bem como estofos em PU Leather, impermeáveis e de grande durabilidade.

Além de leve, é um andador compacto, com uma largura total de 58 cm e uma altura de 45 cm, o que facilita a sua utilização tanto em espaços interiores como exteriores. A sua estrutura robusta permite suportar utilizadores até 136 kg.

Disponível com acabamento branco mate com estofos castanhos e azul mate com estofos pretos.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



INFORMAÇÕES GERAIS

Dimensões

Largura total	58 cm
Largura das rodas traseiras	46 cm
Profundidade total	67 cm
Altura total (ajustável)	79 - 94 cm

Dimensões quando dobrado

Largura quando dobrado	24 cm
Altura total quando dobrado	79 cm
Profundidade quando dobrado	67 cm

Peso

Peso total	6,50 kg
Peso máximo suportado	136 kg

Material	Alumínio
----------	----------

Cor	Branco mate / Azul mate
-----	-------------------------



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Assento

Largura do assento	44 cm
Largura útil para se sentar	45 cm
Profundidade do assento	25 cm
Altura do assento até ao chão	58 cm
Material do assento	Couro PU, impermeável

Saco

Largura do saco	38 cm
Altura do saco	26 cm
Profundidade do saco	17 cm
Peso suportado pelo saco	5 kg
Capacidade do saco	11 L
Material do saco	Couro PU, impermeável

Encosto

Largura do encosto	48 cm
Altura do encosto	12 cm
Tipo de encosto	Extraíble, regulable en altura y en profundidad
Material do encosto	Couro PU, impermeável

Rodas

Dimensões das rodas dianteiras	Ø23 cm
Dimensões das rodas traseiras	Ø19 cm
Largura das rodas dianteiras	3 cm
Largura das rodas traseiras	3 cm
Tipo de rodas	Borracha EVA macia
Tipo de travão	Travão de manete



4. ANTES DE COMEÇAR

4.1. ANTES DE COMEÇAR

A sua segurança é o mais importante para a TotalCare Europe. Por isso, reserve algum tempo para ler este manual, que desempenha um papel importante na sua segurança.

Para garantir a sua segurança e prolongar a vida útil do andador Magnum Pro, guarde-o, verifique-o e faça a sua manutenção de forma adequada e periódica.

Este manual reflete o design e as especificações em vigor à data da sua publicação. Uma vez que o design está sujeito a alterações, é possível que algumas ilustrações e imagens deste manual não correspondam aos produtos adquiridos.

A TotalCare Europe não se responsabiliza por lesões físicas ou danos materiais causados por uma utilização inadequada ou insegura deste produto. Esperamos que o andador Magnum Pro possa trazer mais conforto à sua vida.

4.2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Leia atentamente este manual antes de utilizar o andarilho e verifique se todas as peças estão em bom estado, para garantir a sua segurança.
2. Não ande em piso molhado, nem em ambientes com pouca luz ou com obstáculos, para evitar escorregadelas ou tropeções.
3. Não use meias sem sapatos, ténis ou saltos altos quando andar com o andarilho.
4. Relaxe antes de caminhar, reduza o comprimento da passada e olhe para a frente.
5. Não utilize o andarilho durante muito tempo, para evitar rigidez muscular e contratura articular.
6. Os utilizadores devem familiarizar-se com todas as características, a utilização prevista e a manutenção do Magnum Pro.
7. Devem ser realizadas verificações e manutenção periódicas.

4.3. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este produto foi concebido e fabricado exclusivamente para uso único, com um peso máximo de 136 kg. Não se destina ao transporte de mercadorias nem a ser utilizado como cadeira de rodas, carrinho, etc. O andador compensará a falta de apoio adequado das pernas, apoiando-se ou deslocando-se com o uso dos membros superiores ou do peito. O Magnum Pro proporcionará maior estabilidade, apoio e segurança durante a marcha.
- Não pendure nada na pega nem nas restantes peças deste produto.
- Certifique-se de que o andador está desdobrado e na posição correta.
- Recomenda-se que consulte o seu médico, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional para determinar se está apto a utilizar este produto.
- A capacidade máxima de carga do saco de arrumação é de 5 kg; podem existir alguns riscos caso se exceda o peso máximo.
- Pode ser utilizado tanto em ambientes interiores como exteriores, apenas em superfícies em que as quatro rodas estejam em contacto com o solo.
- Não utilize o andador em terrenos rochosos, cheios de buracos ou arenosos, nem em locais com inclinação acentuada. Estes terrenos especiais afetarão o equilíbrio corporal e a segurança.
- Por favor, não utilize este andador se tiver restrições físicas, tais como braços fracos, síndrome de desequilíbrio vestibular central, deficiência visual e perda de membros.
- A garantia deste produto aplica-se ao uso e manutenção normais descritos neste manual. Não cobre avarias do dispositivo decorrentes de utilização indevida ou de manutenção negligente por parte do proprietário.

4.4. NORMAS DE SEGURANÇA

- Preste atenção às condições da estrada em todos os momentos e certifique-se de que não há nenhum obstáculo à sua frente quando utilizar o andador.
- Certifique-se de que ambos os travões estão no modo de estacionamento quando utilizar o andador como suporte para ficar de pé.
- Segure as pegas com ambas as mãos durante a utilização.
- Tenha em conta que algumas partes do andador podem aquecer ou arrefecer bastante devido a fatores como a radiação solar. Tenha cuidado ao tocá-las.
- Por favor, verifique se o mecanismo de ajuste da pega está corretamente bloqueado e se a pega é fiável antes de utilizar o andador.
- Utilizar o Magnum Pro com as mãos molhadas pode provocar perda de controlo e de equilíbrio.
- É proibido utilizar o andador em estradas ou autoestradas.
- Tenha em conta que os cuidados e a manutenção adequados do andador podem prolongar a sua vida útil. No entanto, cuidados e manutenção inadequados ou negligentes do andador limitam a responsabilidade.

 **Leia atentamente e siga as instruções deste manual para utilizar o andador de forma correta e evitar lesões físicas ou danos.**

5. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM

5.1. AJUSTE DO CABO

Para ajustar a altura dos punhos, levante a braçadeira de ajuste para a desbloquear e desloque o punho para cima ou para baixo até atingir a posição desejada. Em seguida, volte a baixar a braçadeira para a bloquear. Um «clique» audível confirmará que o tubo ficou corretamente fixado.

Repita a operação em ambos os lados até obter a altura adequada. O andarilho dispõe de

7 posições de regulação de altura. Certifique-se de que ambas as pegas ficam ajustadas à mesma altura para garantir uma condução segura e confortável.



5.2. UTILIZAÇÃO DO TRAVÃO

5.2.1. Travão de alavanca

- Pressione a alavanca do travão com quatro dedos para parar o andador. Solte a alavanca do travão para ativar o modo de marcha.



5.2.2. Travão de bloqueio ou de estacionamento

- Empurre a alavanca do travão para baixo para ativar o travão de estacionamento. Um som audível de «clique» indicará que o travão está na posição correta.



Não mantenha os travões pressionados continuamente enquanto caminha com o andador, pois isso pode provocar um desgaste prematuro.

5.3. DOBRADO E DESDOBRADO

5.3.1. Desdobrado


- Levante o gancho de segurança de dobragem.



- Puxe as alças para fora.
- Empurre para baixo as travessas exteriores do assento até ouvir um «clique» nítido do mecanismo de bloqueio. Nesse momento, a barra transversal do assento estará completamente bloqueada.



- Verifique se a barra transversal do assento está corretamente encaixada no quadro e se o mecanismo de bloqueio está completamente fixado.

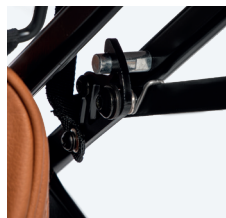

- Se pretender instalar o saco, pendure as alças situadas em ambos os lados do mesmo nos ganchos do quadro do andador.




5.3.2. Dobrado

- Aciona o travão de estacionamento.



- Segura ligeiramente a pega com a mão esquerda e levanta a correia do assento para libertar o mecanismo de bloqueio.

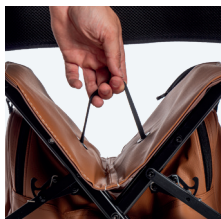

- Segura e empurra as pegas uma em direção à outra até que o andarilho fique dobrado.



- Feche o saco de arrumação e prenda a fita de velcro para evitar que se abra.
- Mantenha premido o botão de ajuste do punho para baixar a sua altura. Em seguida, feche o mecanismo de ajuste do punho.
- Pressione o gancho de segurança para baixo até encaixar na barra transversal do assento.



5.4. AJUSTE DO ENCOSTO

5.4.1. Regulação da altura

Gire o botão no sentido anti-horário para o desaperpar, ajuste o encosto à altura desejada e volte a apertá-lo, girando-o no sentido horário. Antes de utilizar o andador, certifique-se de que o botão ficou bem apertado.



5.4.2. Regulação aprofundada

Pressione o botão de ajuste do encosto e, ao mesmo tempo, deslize o encosto para a frente ou para trás até atingir a posição desejada.



5.4.3. Remoção do encosto

Desaparafuse completamente os botões de ambos os lados, rodando-os no sentido anti-horário. Depois de os retirar, retire o encosto.



5.5. AJUSTE DOS TRAVÕES

Para regular a força de travagem, pressione a carcaça do parafuso para baixo e rode-a para a esquerda ou para a direita até obter a tensão desejada. Verifique posteriormente se ambos os travões funcionam de forma equilibrada e eficaz.



Não pendure nada no encosto, pois isso pode comprometer a estabilidade.

6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

6.1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

6.1.1. Limpeza

- O assento, o encosto e a estrutura podem ser limpos periodicamente com um pano macio humedecido com água.

6.1.2. O que fazer e o que não fazer

- Não utilize máquinas de limpeza de alta pressão para a limpeza e não salpique água sobre o andador.
- É proibido utilizar solventes químicos voláteis, como álcool de alta concentração, esponjas e escovas para a limpeza.
- Após a limpeza e a desinfeção, certifique-se de que todas as peças estão completamente secas.

6.2. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

6.2.1. Condições ambientais

- Condiciones ambientales: -40°C - 65°C
- Humedad relativa: 0%-90

6.3. MANTENIMIENTO

- Verifique periodicamente se os parafusos estão bem apertados.
- Verifique o funcionamento dos travões. Se detetar desgaste, contacte o seu ortopedista.
- Mantenha as rodas limpas. Substitua as rodas assim que estiverem gastas ou danificadas.
- No que diz respeito aos tecidos, remova o pó e lave apenas com água morna. Não utilize detergentes, lixívia nem produtos de limpeza. Não centrifugue nem passe a ferro. Deixe secar à sombra.

6.4. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- Mantenha o andador num ambiente seco durante o transporte e o armazenamento.
- O andador Magnum Pro deve ser embalado para armazenamento, de modo a protegê-lo contra a corrosão e a materiais estranhos.

7. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à factura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZE ESTE PRODUTO SE ESTE PARECER DANIFICADO OU COM PEÇAS EM FALTA.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Legenda da etiquetagem.



Conformidade Europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

Manual do utilizador

Andarilho para exterior Magnum Pro

V1 · 15/06/2026