



Magnum Pro

Andador de exterior

MANUALE D'USO

Ref. AALMAGNUMPRO

più di 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono subire modifiche progettuali in base alle esigenze di produzione.

Il prodotto presente in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Si prega di consultare il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

VI RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA FIDUCIA.

Grazie di aver acquistato un prodotto di **IM by TotalCare Europa**.

Il prodotto che avete acquistato è stato concepito con tecnologia d'avanguardia e ha superato le prove di collaudo più rigorose

L'esperienza attraverso il tempo fa sì che i nostri ausili offrano un design funzionale che permette più libertà e autonomia, per svolgere le attività di igiene ogni giorno.

La preghiamo di dedicare un momento alla lettura del presente manuale per assicurare un corretto uso del nuovo camminatore **Magnum Pro**. Troverete le informazioni e i consigli per un corretto uso del dispositivo e prolungare il suo ciclo di vita.

più di **60 anni** vivono **senza limiti**

GUIDA RAPIDA.

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 — Parti del deambulatore.....	4
2 — Descrizione del prodotto.....	4
3 — Caratteristiche del prodotto	5
4 — Prima di iniziare	7
5 — Utilizzo e montaggio.....	8
6 — Manutenzione e pulizia	10
7 — Garanzia	11

1. PARTI DEL DEAMBULATORE



2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

DEAMBULATORE IN ALLUMINIO ULTRALEGGERO E DALLE ELEVATE PRESTAZIONI

Il Magnum Pro è un deambulatore realizzato in alluminio ultraleggero con un peso di soli 6,5 kg.

È dotato di componenti e materiali di alta qualità, come le ruote con gomma EVA morbida che garantiscono una guida più fluida e confortevole, nonché rivestimenti in PU Leather, impermeabili e di grande durata.

Oltre ad essere leggero, è un deambulatore

compatto, con una larghezza totale di 58 cm e un'altezza di 45 cm, il che ne facilita l'utilizzo sia in ambienti interni che esterni. La sua struttura robusta consente di sostenere utenti fino a 136 kg.

Disponibile nella finitura bianco opaco con rivestimento marrone e blu opaco con rivestimento nero.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



INFORMAZIONI GENERALI

Dimensioni

Larghezza totale	58 cm
Larghezza delle ruote posteriori	46 cm
Profondità totale	67 cm
Altezza totale (regolabile)	79 - 94 cm

Dimensioni da chiuso

Larghezza da chiuso	24 cm
Altezza totale da chiuso	79 cm
Profondità da chiuso	67 cm

Peso

Peso totale	6,50 kg
Peso massimo supportato	136 kg

Materiale	Alluminio
-----------	-----------

Colore	Bianco opaco / Blu opaco
--------	--------------------------



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sedile

Larghezza del sedile	44 cm
Larghezza utile per sedersi	45 cm
Profondità del sedile	25 cm
Altezza del sedile da terra	58 cm
Materiale del sedile	Pelle PU, impermeabile

Borsa

Larghezza della borsa	38 cm
Altezza della borsa	26 cm
Profondità della borsa	17 cm
Peso massimo supportato dalla borsa	5 kg
Capacità della borsa	11 L
Materiale della borsa	Pelle PU, impermeabile

Schienale

Larghezza dello schienale	48 cm
Altezza dello schienale	12 cm
Tipo di schienale	Estraibile, regolabile in altezza e in profondità
Materiale dello schienale	Pelle PU, impermeabile

Ruote

Dimensioni ruote anteriori	Ø23 cm
Dimensioni ruote posteriori	Ø19 cm
Larghezza ruote anteriori	3 cm
Larghezza ruote posteriori	3 cm
Tipo di ruote	Gomma EVA morbida
Tipo di freni	Freno a leva



4. PRIMA DI INIZIARE

4.1. PRIMA DI INIZIARE

La vostra sicurezza è la priorità assoluta per TotalCare Europe. Vi invitiamo quindi a dedicare il tempo necessario alla lettura del presente manuale, che riveste un ruolo fondamentale per la vostra sicurezza.

Per garantire la vostra sicurezza e prolungare la durata del deambulatore Magnum Pro, conservatelo, controllatelo e sottoponetelo a manutenzione in modo adeguato e periodico.

Il presente manuale riflette il design e le specifiche tecniche in vigore al momento della pubblicazione. Poiché il design è soggetto a modifiche, è possibile che alcune illustrazioni e immagini contenute nel manuale non corrispondano ai prodotti acquistati.

TotalCare Europe non si assume alcuna responsabilità per lesioni fisiche o danni materiali causati da un uso improprio o non sicuro di questo prodotto. Ci auguriamo che il deambulatore Magnum Pro possa rendere la vostra vita più confortevole.

4.2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il deambulatore e verificare che tutte le parti siano in buone condizioni per garantire la propria sicurezza.
2. Non camminare su pavimenti bagnati, in condizioni di scarsa illuminazione o in presenza di ostacoli, per evitare di scivolare o inciampare.
3. Non indossare calzini senza scarpe, scarpe da ginnastica o tacchi alti quando si cammina con il deambulatore.
4. Rilassatevi prima di camminare, accorciate la falcata e guardate davanti a voi.
5. Non utilizzate il deambulatore per periodi prolungati per evitare rigidità muscolare e contratture articolari.
6. Gli utenti devono familiarizzarsi con tutte le caratteristiche, l'uso previsto e la manutenzione del Magnum Pro.

7. Deben realizarse comprobaciones y mantenimiento periódicos.

4.3. ISTRUZIONI PER L'USO

- Questo prodotto è progettato e realizzato esclusivamente per un uso monouso, con un peso massimo di 136 kg. Non è destinato al trasporto di merci né all'uso come sedia a rotelle, carrello, ecc. Il deambulatore compenserà la mancanza di un adeguato sostegno delle gambe, consentendo all'utente di appoggiarsi o spostarsi utilizzando gli arti superiori o il torace. Il Magnum Pro garantirà maggiore stabilità, sostegno e sicurezza durante la deambulazione.
- Non appendere nulla alla maniglia né alle altre parti di questo prodotto.
- Assicurarsi che il deambulatore sia aperto e posizionato correttamente.
- Si raccomanda di consultare il proprio medico, fisioterapista o terapeuta occupazionale per determinare se si è idonei all'uso di questo prodotto.
- La capacità massima di carico della borsa portaoggetti è di 5 kg; il superamento del peso massimo può comportare alcuni rischi.
- Può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno, solo su superfici in cui tutte e quattro le ruote siano a contatto con il suolo.
- Non utilizzare il deambulatore su terreni rocciosi, accidentati o sabbiosi, né in luoghi con una pendenza pronunciata. Questi terreni particolari comprometteranno l'equilibrio corporeo e la sicurezza.
- Si prega di non utilizzare questo deambulatore in presenza di limitazioni fisiche quali debolezza delle braccia, sindrome da squilibrio vestibolare centrale, disabilità visiva e perdita di arti.
- La garantía de este producto se basa en el uso y mantenimiento normales descritos en este manual. No cubre los fallos del dispositivo debidos a un mal uso o a un mantenimiento negligente por parte del propietario.

4.4. NORME DI SICUREZZA

- Prestare attenzione alle condizioni della strada in ogni momento e assicurarsi che non vi siano ostacoli davanti a sé quando si utilizza il deambulatore.
- Assicurarsi che entrambi i freni siano in posizione di parcheggio quando si utilizza il deambulatore come ausilio per alzarsi in piedi.
- Tenere le maniglie con entrambe le mani durante l'uso.
- Si tenga presente che alcune parti del deambulatore possono surriscaldarsi o raffreddarsi notevolmente a causa di fattori quali l'irraggiamento solare. Prestare attenzione quando le si tocca.

- Si prega di verificare che il meccanismo di regolazione della maniglia sia correttamente bloccato e che la maniglia sia affidabile prima di utilizzare il deambulatore.
- L'utilizzo del Magnum Pro con le mani bagnate può causare perdita di controllo e di equilibrio.
- È vietato utilizzare il deambulatore su strade o autostrade.
- Si tenga presente che una cura e una manutenzione adeguate del deambulatore possono prolungarne la durata. Tuttavia, una cura e una manutenzione inadeguate o negligenti del deambulatore limitano la responsabilità.

 **Leggere attentamente e seguire le istruzioni contenute nel presente manuale per utilizzare correttamente il deambulatore ed evitare lesioni fisiche o danni.**


5. UTILIZZO E MONTAGGIO

5.1. REGOLAZIONE L'IMPUGNATURA

Per regolare l'altezza delle maniglie, sollevare la fascetta di regolazione per sbloccarla e spostare la maniglia verso l'alto o verso il basso fino a raggiungere la posizione desiderata. Successivamente, abbassare nuovamente la fascetta per bloccarla. Un "clic" udibile confermerà che il tubo è stato fissato correttamente.

Ripetere l'operazione su entrambi i lati fino a ottenere l'altezza adeguata. Il deambulatore dispone di

7 posizioni di regolazione in altezza. Assicurarsi che entrambe le impugnature siano regolate alla stessa altezza per garantire una guida sicura e confortevole.

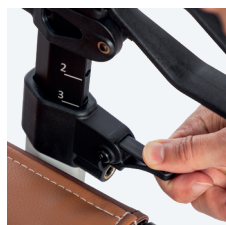

5.2. USO DEL FRENO

5.2.1. Freno a leva

Premere la leva del freno con quattro dita per arrestare il deambulatore. Rilasciare la leva del freno per attivare la modalità di marcia.



5.2.2. Freno di stazionamento o di bloccaggio

- Spingere verso il basso la leva del freno per azionare il freno di stazionamento. Un "clic" udibile indicherà che il freno si trova nella posizione corretta.



Non tenere i freni azionati in modo continuo mentre si cammina con il deambulatore, poiché ciò potrebbe causare un'usura prematura.

5.3. PIEGATO E APERTO

5.3.1. Aperto

- Sollevare il gancio di sicurezza di chiusura.




- Tirare verso l'esterno le maniglie.
- Spingere verso il basso le traverse esterne del sedile fino a sentire un "clic" ben percettibile del meccanismo di bloccaggio. A quel punto, la barra trasversale del sedile sarà completamente bloccata.



- Verificare che la traversa del sedile sia correttamente inserita nel telaio e che il meccanismo di bloccaggio sia completamente fissato.



- Se si desidera installare la borsa, agganciare i manici situati su entrambi i lati della stessa ai ganci del telaio del deambulatore.

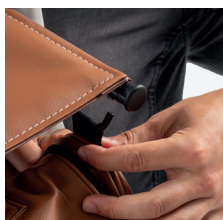


5.3.1. Chiusura

- Azionare il freno di stazionamento.



- Afferrare leggermente la maniglia con la mano sinistra e sollevare la cinghia del sedile per sbloccare il meccanismo di bloccaggio.

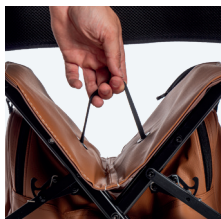

- Afferrare e spingere le impugnature l'una verso l'altra fino a quando il deambulatore non è ripiegato.



- Chiudere la borsa di stoccaggio e fissare la cinghia in velcro per evitare che si apra.
- Tenere premuto il pulsante di regolazione dell'impugnatura per abbassarne l'altezza. Quindi, chiudere il meccanismo di regolazione dell'impugnatura.
- Premere il gancio di sicurezza verso il basso fino a quando non si incastra nella barra trasversale del sedile.



5.4. ALTEZZA REGOLABILE

5.4.1. Regolazione in altezza

Ruotare la manopola in senso antiorario per allentarla, regolare lo schienale all'altezza desiderata e serrarla nuovamente ruotandola in senso orario. Prima di utilizzare il deambulatore, assicurarsi che la manopola sia stata fissata correttamente.



5.4.2. Regolazione di precisione

Premere il pulsante di regolazione dello schienale e, contemporaneamente, far scorrere lo schienale in avanti o indietro fino a raggiungere la posizione desiderata.



5.4.3. Rimozione del pannello posteriore

Svitare completamente le manopole su entrambi i lati ruotandole in senso antiorario. Una volta rimosse, estrarre lo schienale.



5.5. REGOLAZIONE DEI FRENI

Per regolare la forza frenante, premere verso il basso il corpo della vite e ruotarlo verso sinistra o verso destra fino a ottenere la tensione desiderata. Verificare infine che entrambi i freni funzionino in modo equilibrato ed efficace.



Non appendere nulla allo schienale, poiché ciò potrebbe comprometterne la stabilità.

6. MANUTENZIONE E PULIZIA

6.1. PULIZIA E DISINFEZIONE

6.1.1. Pulizia

- Il sedile, lo schienale e il telaio possono essere puliti periodicamente con un panno morbido inumidito con acqua.

6.1.2. Cosa fare e cosa non fare

- Non utilizzare idropulitrici per la pulizia e non spruzzare acqua sul deambulatore.
- È vietato utilizzare solventi chimici volatili, come l'alcol ad alta concentrazione, spugne e spazzole per la pulizia.
- Dopo la pulizia e la disinfezione, assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte.

6.2. CONDIZIONI AMBIENTALI

6.2.1. Trasporto e stoccaggio

- Condizioni ambientali: da -40 °C a 65 °C
- Umidità relativa: 0%–90%

6.3. MANUTENZIONE

- Check regularly that the screws are tight.
- Check that the brakes are working properly. If you notice any wear and tear, contact your orthopaedic specialist.
- Keep the wheels clean. Replace the wheels as soon as they become worn or damaged.
- For fabric parts, remove any dust and wash using lukewarm water only. Do not use detergents, bleach or cleaning products. Do not spin-dry or iron. Leave to dry in the shade.

6.4. TRASPORTO E STOCCAGGIO

- Keep the walker in a dry place during transport and storage.
- The Magnum Pro walker must be packed away for storage to protect it from corrosion and foreign matter.

7. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Il prodotto da te acquistato è tutelato da tale garanzia, per difetto di conformità del cliente che si manifesti entro il termine di 3 anni dalla data di acquisto del prodotto o dalla data di consegna.

AMBITO DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 24 mesi dall'acquisto del prodotto, da 2 anni a 3 anni, il consumatore deve continuare a contattare il venditore per riparare il difetto di conformità del bene, ma se necessario, il l'utente deve dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della fabbricazione e non a causa di uso improprio o mancanza di manutenzione. L'ambito territoriale di questa Garanzia è per l'intero territorio nazionale spagnolo.

La presente Garanzia non pregiudica i diritti a disposizione del consumatore in conformità con le disposizioni del regio decreto-legge 7/2021, del 27 aprile, che recepisce le direttive dell'Unione europea in difesa dei consumatori.

PROCEDURA PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il consumatore dovrà recarsi presso il punto vendita dove ha acquistato il prodotto, nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile. È possibile contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com.

È indispensabile presentare una copia della fattura o dello scontrino di acquisto, o una bolla di consegna successiva alla fattura o allo scontrino, al momento del reclamo, che indichi chiaramente il prodotto acquistato e la data.

Il consumatore deve consegnare il prodotto nello stesso luogo in cui è stato acquistato, accompagnato da una nota esplicativa del difetto di conformità.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente dal mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale o causato da altri fattori umani, uso improprio, collisione con un oggetto...
- Danni causati da incidente, abuso, negligenza o uso improprio.
- Danni causati da incendi, inondazioni, tempeste o qualsiasi evento naturale.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore o dal venditore.
- Se le parti utilizzate non sono prodotte dalla nostra azienda.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli articoli soggetti a usura.
- Riparazione o la sostituzione della parte difettosa sarà effettuata da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE APPARE DANNEGGIATO O MANCANTE DI PARTI.

CONTATTARE IL PROPRIO FORNITORE.

Etichettatura legenda.



Conformità europea



Dovresti fare riferimento alle istruzioni di utilizzo per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul produttore



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto



Riferimento prodotto



Numero di serie



Dispositivo medico conforme al MDR

Manuale d'uso

Deambulatore da esterno Magnum Pro

V1 · 15/06/2026