



Magnum Pro

Déambulateur d'extérieur

MANUEL D'UTILISATION

Ref. AALMAGNUMPRO

plus de 60 ans de vie sans limites

⚠ Remarque importante

Les caractéristiques techniques indiquées sont indicatives, car elles peuvent faire l'objet de modifications de conception en fonction des exigences de fabrication.

Le produit présenté dans ce catalogue n'a pas nécessairement été photographié dans sa configuration standard.

Veuillez consulter notre site web pour voir le modèle mis à jour.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

Merci d'avoir acheté un produit **IM** by **TotalCare Europe**.

Le produit que vous avez acheté est doté de la technologie la plus avancée et a subi les tests les plus exigeants.

L'expérience acquise au fil du temps permet à nos produits d'offrir les meilleures performances, afin que vous puissiez profiter toujours plus de la liberté et de l'autonomie dont vous avez besoin au quotidien.

Nous vous suggérons de prendre un moment pour lire les instructions fournies. Cela vous permettra de vous familiariser avec votre nouveau déambulateur **Magnum Pro** ce qui vous permettra d'en tirer le maximum de performances et de durée de vie.

plus de **60 ans** de vie **sans limites**

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE.

Il est important de lire le manuel avant d'utiliser le produit.

1 — Pièces du déambulateur	4
2 — Description du produit	4
3 —Caractéristiques du produit	5
4 —Avant de commencer.....	7
5 — Utilisation et montage	8
6 —Entretien et nettoyage.....	10
7 — Garantie.....	11

1. PIÈCES DU DÉAMBULATEUR



2. DESCRIPTION DU PRODUIT

DÉAMBULATEUR EN ALUMINIUM ULTRALÉGER ET HAUTEMENT PERFORMANT

Le Magnum Pro est un déambulateur fabriqué en aluminium ultraléger, pesant seulement 6,5 kg.

Il intègre des composants et des matériaux de haute qualité, tels que des roues en caoutchouc EVA souple qui assurent une conduite plus douce et plus confortable, ainsi que des revêtements en cuir PU, imperméables et très résistants.

En plus d'être léger, ce déambulateur est compact, avec une largeur totale de 58 cm et une hauteur de 45 cm, ce qui facilite son utilisation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sa structure robuste lui permet de supporter des utilisateurs pesant jusqu'à 136 kg.

Disponible en finition blanc mat avec revêtement marron et bleu mat avec revêtement noir.

3. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

Largeur totale	58 cm
Largeur des roues arrière	46 cm
Profondeur totale	67 cm
Hauteur totale (réglable)	79 - 94 cm

Dimensions une fois replié

Largeur une fois replié	24 cm
Hauteur totale une fois replié	79 cm
Profondeur une fois replié	67 cm

Poids

Poids total	6,50 kg
Poids maximal admis	136 kg

Matériel	Aluminium
----------	-----------

Couleur	Blanc mat / Bleu mat
---------	----------------------



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Siège

Largeur du siège	44 cm
Largeur utile pour s'asseoir	45 cm
Profondeur du siège	25 cm
Hauteur du siège par rapport au sol	58 cm
Matériau du siège	Cuir PU, imperméable

Sac

Largeur du sac	38 cm
Hauteur du sac	26 cm
Profondeur du sac	17 cm
Poids maximal supporté par le sac	5 kg
Capacité du sac	11 L
Matériau du sac	Cuir PU, imperméable

Dossier

Largeur du dossier	48 cm
Hauteur du dossier	12 cm
Type de dossier	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur
Matériau du dossier	Cuir PU, imperméable

Roues

Dimensions des roues avant	Ø23 cm
Dimensions des roues arrière	Ø19 cm
Largeur des roues avant	3 cm
Largeur des roues arrière	3 cm
Type de roues	Caoutchouc EVA souple
Type de freins	Frein à levier



4. AVANT DE COMMENCER

4.1. AVANT DE COMMENCER

Votre sécurité est la priorité absolue de TotalCare Europe. Prenez donc le temps de lire ce manuel, qui joue un rôle important pour votre sécurité.

Afin de garantir votre sécurité et de prolonger la durée de vie du déambulateur Magnum Pro, veillez à l'entretenir, à le vérifier et à le maintenir correctement et régulièrement.

Ce manuel reflète la conception et les spécifications en vigueur au moment de sa publication. La conception étant susceptible d'évoluer, il est possible que certaines illustrations et images de ce manuel ne correspondent pas aux produits que vous avez achetés.

TotalCare Europe décline toute responsabilité en cas de blessures physiques ou de dommages matériels résultant d'une utilisation inappropriée ou non conforme de ce produit. Nous espérons que le déambulateur Magnum Pro vous apportera davantage de confort dans votre quotidien.

4.2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le déambulateur et vérifiez que toutes les pièces sont en bon état afin de garantir votre sécurité.
2. Ne marchez pas sur un sol détrempé, ni dans un environnement mal éclairé ou encombré, afin d'éviter de glisser ou de trébucher.
3. Ne portez pas de chaussettes sans chaussures, ni de baskets ou de talons hauts lorsque vous marchez avec le déambulateur.
4. Restez calme avant de marcher, réduisez la longueur de vos foulées et regardez devant vous.
5. N'utilisez pas le déambulateur pendant une durée prolongée afin d'éviter les raideurs musculaires et les contractures articulaires.
6. Les utilisateurs doivent se familiariser avec toutes les caractéristiques, l'utilisation prévue et l'entretien du Magnum Pro.
7. Des contrôles et un entretien réguliers doivent être effectués.

4.3. MODE D'EMPLOI

- Ce produit est conçu et fabriqué exclusivement pour un usage unique, avec un poids maximal de 136 kg. Il n'est pas destiné au transport de marchandises ni à être utilisé comme fauteuil roulant, chariot, etc. Le déambulateur compensera le manque de soutien adéquat des jambes en s'appuyant ou en se déplaçant à l'aide des membres supérieurs ou de la poitrine. Le Magnum Pro offrira une plus grande stabilité, un meilleur soutien et une sécurité accrue lors de la marche.
- Ne suspendez rien à la poignée ni aux autres pièces de ce produit.
- Assurez-vous que le déambulateur est correctement déplié et en place.
- Il est recommandé de consulter votre médecin, votre kinésithérapeute ou votre ergothérapeute afin de déterminer si vous êtes apte à utiliser ce produit.
- La capacité de charge maximale du sac de rangement est de 5 kg ; le dépassement du poids maximal peut présenter certains risques.
- Il peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, uniquement sur des surfaces où les quatre roues sont en contact avec le sol.
- N'utilisez pas le déambulateur sur des terrains rocailleux, accidentés ou sablonneux, ni sur des pentes raides. Ces types de terrains peuvent nuire à votre équilibre et à votre sécurité.
- Veuillez ne pas utiliser ce déambulateur en cas de limitations physiques telles que des bras faibles, un syndrome de déséquilibre vestibulaire central, un handicap visuel ou une perte de membres..
- La garantie de ce produit s'applique dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien normaux, tels que décrits dans ce manuel. Elle ne couvre pas les défaillances de l'appareil dues à une mauvaise utilisation ou à un entretien négligent de la part du propriétaire.

4.4. RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Soyez attentif à l'état de la chaussée à tout moment et assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle devant vous lorsque vous utilisez le déambulateur.
- Assurez-vous que les deux freins sont en position de stationnement lorsque vous utilisez le déambulateur comme aide à la station debout.
- Tenez les poignées à deux mains lors de son utilisation.
- Notez que certaines parties du déambulateur peuvent devenir très chaudes ou très froides en raison de facteurs tels que le rayonnement solaire. Faites attention lorsque vous les touchez.
- Veuillez vérifier que le mécanisme de réglage de la poignée est correctement verrouillé et que la poignée est fiable avant d'utiliser le déambulateur.
- L'utilisation du Magnum Pro avec les mains mouillées peut entraîner une perte de contrôle et d'équilibre.
- Il est interdit d'utiliser le déambulateur sur les routes ou les autoroutes.
- Veuillez noter qu'un entretien et une maintenance appropriés du déambulateur peuvent prolonger sa durée de vie. Toutefois, un entretien et une maintenance défectueux ou négligents du déambulateur limitent la responsabilité.

 **Veuillez lire attentivement et suivre les instructions de ce manuel afin d'utiliser correctement le déambulateur et d'éviter toute blessure physique ou tout dommage.**


5. UTILISATION ET MONTAGE

5.1. RÉGLAGE DE LA POIGNÉE

Pour régler la hauteur des poignées, soulevez le collier de serrage pour le déverrouiller, puis déplacez la poignée vers le haut ou vers le bas jusqu'à atteindre la position souhaitée. Abaissez ensuite le collier pour le verrouiller. Un « clic » audible confirmera que le tube est correctement fixé.

Répétez l'opération des deux côtés jusqu'à obtenir la hauteur adéquate. Le déambulateur dispose de

7 positions de réglage en hauteur. Assurez-vous que les deux poignées soient réglées à la même hauteur afin de garantir une utilisation sûre et confortable.

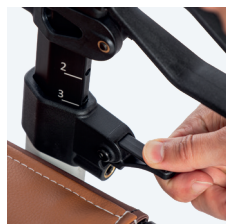

5.2. UTILISATION DU FREIN

5.2.1. Utilisation du frein

- Appuyez sur le levier de frein avec quatre doigts pour arrêter le déambulateur. Relâchez le levier de frein pour passer en mode marche.



5.2.2. Frein de stationnement ou de blocage

- Appuyez sur le levier de frein pour enclencher le frein de stationnement. Un « clic » audible indiquera que le frein est correctement enclenché.



Ne maintenez pas les freins enfoncés en permanence lorsque vous marchez avec le déambulateur, car cela pourrait entraîner une usure prématurée.

5.3. PLIÉ ET DÉPLIÉ

5.3.1. Déploiement

- Relevez le loquet de sécurité de pliage.



- Tirez les poignées vers l'extérieur.
- Poussez vers le bas les traverses extérieures du siège jusqu'à entendre un « clic » distinct provenant du mécanisme de verrouillage. À ce moment-là, la traverse du siège sera complètement verrouillée.



- Vérifiez que la barre transversale du siège est correctement enclenchée dans le châssis et que le mécanisme de verrouillage est bien fixé.



- Si vous souhaitez installer le sac, accrochez les poignées situées de chaque côté de celui-ci aux crochets du châssis du déambulateur.




5.3.2. Pliage

- Actionnez le frein de stationnement.



- Tenez légèrement la poignée de la main gauche et soulevez la sangle du siège pour déverrouiller le mécanisme de blocage.

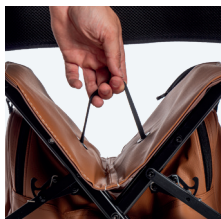

- Saisissez les poignées et poussez-les l'une vers l'autre jusqu'à ce que le déambulateur soit plié.



- Fermez le sac de rangement et fixez la sangle Velcro pour l'empêcher de s'ouvrir.
- Maintenez enfoncé le bouton de réglage de la poignée pour abaisser sa hauteur. Fermez ensuite le mécanisme de réglage de la poignée.
- Appuyez sur le crochet de sécurité vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la barre transversale du siège.



5.4. RÉGLAGE DU DOSSIER

5.4.1. Réglage en hauteur

Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le desserrer, réglez le dossier à la hauteur souhaitée, puis resserrez-le en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Avant d'utiliser le déambulateur, assurez-vous que le bouton est bien fixé.



5.4.2. Régulation en profondeur

Appuyez sur le bouton de réglage du dossier tout en faisant glisser celui-ci vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à atteindre la position souhaitée.



5.4.3. Retrait du dossier

Dévissez complètement les boutons situés de chaque côté en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois ceux-ci retirés, retirez le dossier.



5.5. RÉGLAGE DES FREINS

Pour régler la force de freinage, appuyez sur le corps de la vis et tournez-le vers la gauche ou vers la droite jusqu'à obtenir la tension souhaitée. Vérifiez enfin que les deux freins fonctionnent de manière équilibrée et efficace.



Ne suspendez rien au dossier, car cela pourrait nuire à sa stabilité.

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

6.1. NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

6.1.1. Nettoyage

- L'assise, le dossier et le châssis peuvent être nettoyés régulièrement à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau.

6.1.2. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire

- N'utilisez pas de nettoyeurs à haute pression pour le nettoyage et évitez de projeter de l'eau sur le déambulateur.
- L'utilisation de solvants chimiques volatils, tels que l'alcool à forte concentration, ainsi que d'éponges et de brosses, est interdite pour le nettoyage.
- Après le nettoyage et la désinfection, assurez-vous que toutes les pièces soient parfaitement sèches.

6.2. CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

6.2.1. Transport et stockage

- Conditions ambiantes : -40 °C à 65 °C
- Humidité relative : 0 % à 90 %

6.3. ENTRETIEN

- Vérifiez régulièrement que les vis sont bien serrées.
- Vérifiez le bon fonctionnement des freins. Si vous constatez une usure, contactez votre orthopédiste.
- Veillez à ce que les roues restent propres. Remplacez les roues dès qu'elles sont usées ou endommagées.
- Pour les tissus, éliminez la poussière et lavez-les uniquement à l'eau tiède. N'utilisez pas de lessive, d'eau de Javel ni de produits nettoyants. Ne les essorez pas et ne les repassez pas. Laissez-les sécher à l'ombre.

6.4. TRANSPORT ET STOCKAGE

- Conservez le déambulateur dans un endroit sec pendant le transport et le stockage.

- Le déambulateur Magnum Pro doit être emballé avant d'être stocké afin de le protéger contre la corrosion et les corps étrangers.

7. GARANTIE

DURÉE DE LA GARANTIE

Le produit acheté par vous est protégé par cette garantie, pour le défaut de conformité du client qui se manifeste dans une période de 3 ans à compter de la date d'achat du produit ou de la date de livraison.

CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie couvre toute panne ou défaut de fabrication pendant les 24 premiers mois suivant l'achat du produit ; après 2 ans et jusqu'à 3 ans, le consommateur doit continuer à contacter le vendeur pour réparer le défaut de conformité du bien, mais si nécessaire, l'utilisateur doit démontrer que le produit est défectueux en raison de la fabrication et non en raison d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien.

La portée territoriale de cette garantie s'étend à l'ensemble du territoire national espagnol.

Cette garantie n'affecte pas les droits dont dispose le consommateur conformément aux dispositions du décret-loi royal 7/2021, du 27 avril, sur la transposition des directives de l'Union européenne en matière de défense des consommateurs.

PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE LA GARANTIE

S'il est impossible de communiquer avec le point de vente, soit parce qu'il a fermé ses portes, soit parce que le produit a été acheté dans une autre communauté autonome, le consommateur peut s'adresser directement au fabricant par courrier électronique à l'adresse info@totalcare-europe.com.

Au moment de la réclamation, il est indispensable de présenter une copie de la facture ou du ticket de caisse, ou un bon de livraison postérieur à la facture ou au ticket de caisse, indiquant clairement le produit acheté et la date.

Le consommateur doit retourner le produit au même endroit où il a été acheté, accompagné d'une note expliquant le défaut de conformité.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS

- Les dommages causés par une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur en ne respectant pas les instructions données dans ce manuel ou causés par d'autres facteurs humains, une mauvaise utilisation, une collision avec un objet quelconque.
- Les dommages causés par un accident, un abus, une négligence ou une mauvaise utilisation.
- Les dommages causés par un incendie, une inondation, une tempête ou tout autre événement naturel.
- Les produits qui ont été préalablement réparés ou manipulés par du personnel non autorisé par le fabricant ou le vendeur.
- Si les pièces utilisées ne sont pas fabriquées par notre société.
- Tout produit ne portant pas ou ayant eu son numéro de série ou d'usine modifié ou effacé.
- La garantie ne couvre pas les éléments d'usure.
- La réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse sera effectué par du personnel qualifié et autorisé par TotalCare Europe, S.L.

NE PAS UTILISER CE PRODUIT S'IL SEMBLE ENDOMMAGÉ OU S'IL MANQUE DES PIÈCES.

CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR.

Légende de l'étiquetage



Conformité européenne



Vous devez vous référer au mode d'emploi pour les informations relatives à la sécurité.



Consultez le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.



Données du fabricant



Date de fabrication



Représentant européen



Lot



Référence du produit



Numéro de série



Dispositif médical conforme au MDR.

Manuel d'utilisation

Déambulateur d'extérieur Magnum Pro

V1 · 15/06/2026