



ATLANTIK
im BY TOTALCARE



Atlantik Flex

Cadeira de rodas elétrica
compacta e basculante

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. SEFACATLANFLEXM55BMN

mais de 50 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem apresentar alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Consulte o nosso website para ver o modelo atualizado

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com a sua nova cadeira de rodas elétrica **Atlantik Flex**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **50 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Partes da cadeira	4
2 — Descrição do produto	4
3 — Características do produto	5
4 — Instruções de segurança	7
5 — Funcionamento e perigos	9
6 — Utilização e montagem	10
7 — Bateria e carregamento	13
8 — Armazenamento e outras indicações	15
9 — Verificação e manutenção	15
10 — Resolução de problemas	16
11 — Garantia	17



1. PARTES DA CADEIRA



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA COMPACTA E BASCULANTE

A Atlantik Flex destaca-se pelo seu tamanho compacto, ideal para uso em interiores e exteriores.

A sua característica mais inovadora é o sistema de amortecimento por cruzeta, que permite que a suspensão flexione e balance, para se adaptar a todos os tipos de terrenos, suavizando as irregularidades para o utilizador e facilitando a passagem por lances de até 10 cm.

A cadeira oferece reclinção manual e inclinação eletrónica. Equipada com dois potentes motores de 450 W, atinge uma velocidade máxima de 10 km/h. As suas duas baterias de gel de 55 Ah proporcionam uma autonomia de até 40 km.

Além disso, incorpora um avançado sistema de iluminação LED e piscas, totalmente controlável a partir do joystick.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



INFORMAÇÃO GERAL

Medidas

Largura total	59,5 cm
Profundidade (sem apoio para os pés)	81 cm
Profundidade (com apoio para os pés)	109 cm
Altura total	110 cm
Altura do assento ao chão sem almofada	49 cm
Altura do assento ao chão com almofada	56 cm

Medidas quando dobrado

Largura quando dobrado	59,5 cm
Profundidade quando dobrado	81 cm
Altura quando dobrado	62 cm

Peso

Peso total (bateria incluída)	86 kg
Peso máximo suportado	150 kg

Material	Aço
----------	-----

Cor	Preto mate e azul
-----	-------------------



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Assento

Largura do assento (base ajustável)	40 - 50 cm
Largura da almofada	44 cm / 55 cm
Largura útil para sentar (apoio de braços ajustável)	42 - 68 cm
Profundidade do assento (ajustável)	46,5 - 54 cm
Altura do assento ao solo sem almofada	49 cm
Altura do assento ao solo com almofada	56 cm
Inclinação do assento	0 - 25° (eletrónico)

Motor

Motor	2 x 450 W
Bateria	2 x 55 (gel)
Autonomia	35 - 40 km
Velocidade máxima	10 km/h

Apoio de braços

Comprimento do apoio de braços	41 cm
Largura do apoio de braços	8 cm
Altura do apoio de braços a partir do assento (ajustável)	19 - 30 cm
Tipo de apoio de braços	Ajustáveis em largura e altura

Encosto


Largura do encosto	44 cm
Altura do encosto	52 cm
Tipo de encosto	Ajustável com cinco correias
Inclinação do encosto	90° - 130° (manual)

Rodas

Medidas das rodas dianteiras	Ø22 cm
Medidas das rodas traseiras	Ø34 cm
Largura das rodas dianteiras	7 cm
Largura das rodas traseiras	7 cm
Tipo de rodas	Maciças

Outras características

Altura máxima dos lancis	10 cm
Cintura, buzina e rodas antiderrapantes	Sí
Controlador	Dynamic
Garfos dianteiros	Alumínio
Joystick	Retráctil
Inclinação máxima de subida	10°
Raio de viragem	150 cm
Apoios para os pés	Ajustáveis em altura, profundidade e inclinação

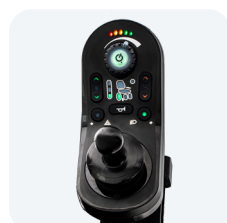

4. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

4.1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de utilizar a cadeira de rodas pela primeira vez, é essencial que leia e compreenda totalmente este manual do utilizador. O seu objetivo é fornecer as informações necessárias para utilizar e manter a sua cadeira de rodas de forma correta e segura. Além disso, antes de utilizar qualquer acessório, deve ler e compreender o manual específico correspondente.

Este manual inclui várias advertências de segurança que devem ser respeitadas em todos os momentos. Sempre que vir o símbolo de exclamação, consulte este capítulo para obter a advertência correspondente.

4.2. ADVERTÊNCIAS GERAIS DE SEGURANÇA

A sua cadeira de rodas é um equipamento médico complexo que deve ser utilizado de forma segura. Este capítulo fornece informações essenciais para garantir uma utilização adequada e segura do produto.

A TotalCare Europe não se responsabiliza pelo incumprimento das advertências e instruções contidas neste manual do utilizador, nem pela omissão de boas práticas. Da mesma forma, não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes de decisões ou utilizações inadequadas do equipamento.

⚠️ AVISO: Quando utilizar a Atlantik Flex como assento num veículo, esta deve estar virada para a frente e é obrigatório o uso de cintos de segurança, incluindo cintos de ombro e pélvicos, para reduzir o risco de a cabeça ou o tronco baterem nos componentes do veículo. A cadeira de rodas foi concebida e testada exclusivamente para este tipo de utilização. A sua utilização em qualquer outra configuração de assentos do veículo pode causar ferimentos graves ou mesmo a morte.

⚠️ AVISO: Certifique-se de utilizar corretamente os pontos de fixação e os sistemas de acoplamento. A utilização incorreta pode causar ferimentos graves ou mesmo a morte.

⚠️ AVISO: Ajuste o sistema de retenção de forma que o mecanismo de desbloqueio não possa ser acionado acidentalmente durante uma colisão. Não fazer isso pode causar ferimentos graves.

⚠️ AVISO: Os dispositivos de posicionamento para cadeiras de rodas não substituem os cintos de segurança instalados nos veículos e não oferecem a mesma proteção em caso de acidente. Utilizar um dispositivo de posicionamento como substituto do cinto de segurança pode causar lesões graves.

⚠️ AVISO: Utilize sempre os dispositivos de posicionamento corretamente fixados, incluindo as correias de fixação. A falta de fixação adequada pode causar lesões.

⚠️ AVISO: Não utilize a cadeira Atlantik Flex para puxar objetos nem pendure peso excessivo nela, pois isso pode desestabilizar a cadeira e causar acidentes ou lesões.

⚠️ AVISO: Tenha em conta as dimensões da sua cadeira de rodas. Algumas saídas de emergência ou caminhos podem ser demasiado estreitos para permitir a sua passagem segura.

⚠️ ATENÇÃO

Não conduza a cadeira de rodas em ruas ou estradas públicas. A cadeira de rodas não foi concebida para circular como um veículo. Cumpra sempre as regras de trânsito locais e conduza com precaução.

Não monte nem desmonte a cadeira de rodas nem qualquer um dos seus componentes. A sua cadeira de rodas foi configurada especificamente para satisfazer as suas necessidades, seguindo as indicações do seu médico e ortopedista. A instalação, modificação ou reparação da cadeira requer conhecimentos técnicos, formação e experiência especializados por uma oficina acreditada pela TotalCare Europe.

O modo de roda livre só deve ser utilizado em terreno plano e na presença de um assistente que controle a cadeira de rodas. A sua utilização em inclinações ou sem assistência pode provocar lesões ou danos materiais.

⚠️ AVISO: não conduza a cadeira Atlantik Flex se exceder o peso máximo do utilizador, 150 kg. Se o fizer, a cadeira de rodas poderá causar-lhe ferimentos.

⚠️ AVISO: se o assento ou o encosto estiverem levantados ou inclinados, conduza sempre a baixa velocidade. Não circule em declives ou sobre obstáculos nestas condições, pois a cadeira pode perder estabilidade e provocar acidentes.

⚠️ AVISO: se a cadeira de rodas ou os seus acessórios sofrerem danos durante o transporte, a condução ou por qualquer outro motivo, pare de a utilizar imediatamente e notifique o mais rapidamente possível a ortopedia onde comprou a cadeira. Pode não ser seguro continuar a utilizá-la.

⚠️ AVISO: certifique-se de que os componentes eletrónicos não fiquem expostos à humidade. Se observar que algum revestimento ou controlo está rachado ou danificado, deve substituí-lo imediatamente. A exposição à humidade pode provocar curto-circuitos ou incêndios, o que pode causar ferimentos pessoais ou danos materiais.

⚠️ AVISO: Certifique-se de que os componentes eletrónicos não estejam expostos à humidade. Se observar que algum revestimento ou controlo está rachado ou danificado, deve substituí-lo imediatamente. A exposição à humidade pode provocar curto-circuitos ou incêndios, o que pode causar ferimentos pessoais ou danos materiais.

⚠️ AVISO: a cadeira de rodas Atlantik Flex é pesada e contém várias peças móveis. Por esse motivo, existe risco de esmagamento se a cadeira for ajustada ou utilizada incorretamente. Preste especial atenção à posição do seu corpo e evite colocar qualquer parte do corpo entre as peças móveis.

⚠️ AVISO: as baterias usadas devem ser descartadas de forma responsável, em conformidade com as normas locais de reciclagem.

⚠️ AVISO: mantenha os pneus calibrados de acordo com a pressão recomendada. Uma sobrecarga pode provocar a explosão dos pneus e causar ferimentos.

⚠️ AVISO: Não utilize a cadeira de rodas em escadas ou escadas rolantes.

⚠️ AVISO: lembre-se de que o consumo de álcool pode afetar a sua capacidade de conduzir a cadeira de rodas elétrica.

⚠️ AVISO: não utilize a cadeira de rodas se tiver sofrido uma queda, tiver sido atropelada, exposta ao fogo, submersa em água ou tiver estado envolvida num acidente de trânsito ou outro incidente grave. Este tipo de situações pode causar danos importantes que nem sempre são visíveis durante uma inspeção. Nestes casos, contacte o seu ortopedista. Os danos resultantes destes incidentes não estão cobertos pela garantia da TotalCare Europe.

⚠️ AVISO: Ajuste os apoios para os pés de forma a que não entrem em contacto com o solo durante a condução, mesmo ao circular em rampas ou sobre obstáculos. Se baterem no solo, a cadeira pode perder estabilidade, o que pode causar lesões.

⚠️ AVISO: ao subir inclinações, ultrapassar obstáculos ou circular em terrenos irregulares (como areia), a cadeira de rodas requer um elevado consumo de energia. Recomendamos evitar conduzir durante períodos prolongados nestas condições.

⚠️ AVISO: aconselhamos não utilizar a cadeira de rodas em condições meteorológicas extremas, como chuva intensa, tempestades de neve, calor extremo ou frio intenso. A exposição prolongada à luz solar ou a temperaturas muito baixas pode fazer com que a superfície da cadeira aqueça ou arrefeça em excesso.

⚠️ AVISO: quando a bateria está a uma temperatura de 25 °C, a cadeira de rodas oferece uma autonomia aproximada de 25 quilómetros. Esta autonomia pode ser afetada pela temperatura da bateria.

⚠️ AVISO: Temperaturas inferiores a -25 °C podem danificar a bateria da cadeira.

⚠️ AVISO: não permita que menores de idade utilizem a cadeira de rodas sem supervisão.

⚠️ AVISO: as especificações indicadas neste manual do utilizador definem o peso máximo que a cadeira de rodas pode suportar, bem como o peso declarado do utilizador. Este valor inclui tanto o peso do utilizador como o de quaisquer pertences pessoais que transporte.

⚠️ AVISO: Se a cadeira de rodas não estiver a funcionar corretamente ou se suspeitar que existe algum problema, pare-a o mais rapidamente possível, desligue a alimentação e contacte o seu ortopedista.

Evite paragens e arranques bruscos. Tenha especial cuidado nas seguintes situações:

- Perto da berma de uma estrada.
- Ao circular em superfícies macias ou irregulares, como relva, cascalho, areia, gelo ou neve.
- Ao passar de uma zona de alta tração para uma zona de baixa tração.
- Em estradas estreitas ou espaços reduzidos.

4.3. OBSERVAÇÕES SOBRE A COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA (CEM)

Os dispositivos eletrónicos das cadeiras de rodas elétricas podem ser afetados por campos eletromagnéticos externos, como os gerados por telemóveis ou outros equipamentos eletrónicos.

5. FUNCIONAMENTO E PERIGOS

5.1. ANTES DE SE SENTAR NA SUA CADEIRA

Antes de usar a sua cadeira, é fundamental realizar algumas verificações para garantir a sua segurança e o funcionamento adequado:

- Verifique se a bateria está totalmente carregada.
- Certifique-se de que o cinto de segurança está apertado.
- Verifique se a cadeira elétrica está totalmente aberta e se os tubos do assento estão corretamente posicionados nos suportes laterais.
- Certifique-se de que a alavanca do joystick está desligada para evitar movimentos acidentais em caso de contacto acidental com o joystick.

5.2. INÍCIO

- Certifique-se de que está sentado de forma segura.
- Verifique se os apoios para os pés estão colocados na altura correta para os seus pés.

5.3. ENDEREÇO

- Use o joystick para dirigir a cadeira elétrica. Recomenda-se ajustar a velocidade para o nível mais baixo até adquirir experiência e prática na

sua condução.

- Mantenha espaço livre suficiente ao virar a cadeira elétrica para garantir que as rodas estejam livres de obstáculos.
- Tenha especial cuidado ao conduzir em marcha-atrás.

5.4. CONDUÇÃO EM DECLIVES, SUBIDAS E RAMPAS

- Não conduza a cadeira de rodas em inclinações superiores a 10°. Circular em inclinações pronunciadas pode desestabilizar a cadeira e causar lesões. Para garantir um desempenho ideal e maior estabilidade, tenha especial cuidado em inclinações superiores a 6°.
- Ao subir ou descer inclinações, faça-o sempre em linha reta.
- Evite conduzir em inclinações em qualquer direção, pois isso pode causar o capotamento da cadeira Atlantik Flex e provocar lesões graves.
- Tente manter a cadeira elétrica em movimento ao subir ou descer uma inclinação. Se precisar parar, reinicie e acelere lentamente e com cuidado.
- Tenha em atenção que a distância de travagem da cadeira elétrica pode ser consideravelmente maior em inclinações do que em terreno plano.

6. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM

6.1. COMANDO DE CONTROLO

Ajuste de velocidade: Há uma roda que permite ajustar a velocidade máxima a que a cadeira se deslocará. Gire para a direita para aumentá-la ou para a esquerda para diminuí-la.

Botão da buzina: Pressione o botão para ativar a buzina.

Tomada do carregador: a tomada é utilizada para carregar a bateria, ligue o carregador fornecido pela TotalCare Europe.

Botão das luzes de condução: quando ligar as luzes de condução, o indicador luminoso correspondente acenderá.

Botão de viragem à esquerda: ao manter o botão pressionado, o pisca-pisca correspondente será ativado. Para desligá-lo, pressione o botão novamente ou aguarde 15 segundos.

Botão de viragem à direita: ao manter o botão pressionado, o pisca-pisca correspondente será ativado. Para desligá-lo, pressione o botão novamente ou aguarde 15 segundos.

Botão da luz de aviso: ativa os 4 piscas.

Indicador da bateria: Os LEDs na parte superior do comando indicam o estado de carga:

1) ●●●●●● Todos os LEDs acesos: sistema ligado.

2) ●●●●●● Todos os LEDs estão acesos e os verdes no final piscam: sobrecarga da bateria. Reduza a velocidade se estiver a circular numa inclinação.

3) ●●●●●● Os LEDs vermelho e âmbar estão acesos: bateria com carga média

4) ●●●●●● LED vermelho e âmbar acesos: bateria fraca

5) ●●●●●● Apenas o LED vermelho está aceso: Bateria muito fraca, recarregue a sua cadeira.

6) ○●●●●● O LED vermelho pisca: Bateria com carga mínima, recarregue imediatamente.




CUIDADO


É proibido desligar a alimentação durante a condução, pois isso pode fazer com que a cadeira Atlantik Flex pare repentinamente e possa tombar.

6.2. MONTAGEM DA CADEIRA


Retire a cadeira de rodas da caixa. Puxe para si a fita que se encontra atrás do encosto. Deixe a fita na posição desejada e verifique se ficou fixa e estável.

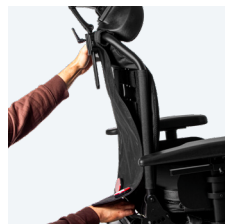

Para montar os apoios para os pés, levante a alça para cima e gire o apoio para os pés de fora para dentro até que o pino encaixe no suporte.

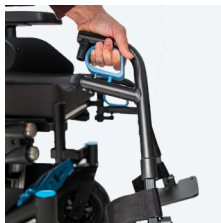

Usando a porca lateral, aperte a fixação do apoio para os braços. Caso seja necessário um maior curso, mova a tampa de plástico para fora para poder girá-la sem exercer força no parafuso.

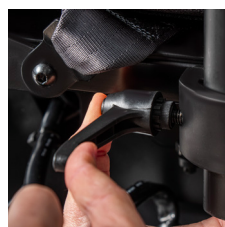



6.3. AJUSTE DA ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS

Para ajustar a altura do apoio de braços, solte a porca lateral para liberar a fixação. Se precisar de um curso maior, desloque a tampa de plástico para fora para poder girar a porca sem exercer pressão sobre o parafuso. Depois de liberada, ajuste a altura do apoio de braços e volte a fixá-la firmemente.



6.4. AJUSTE DA LARGURA DOS APOIOS DE BRAÇOS


A largura dos apoios de braços pode ser facilmente ajustada. Para maior conforto durante o ajuste, recomenda-se inclinar a cadeira ao máximo. Desaperte o parafuso utilizando a chave Allen de 6 mm fornecida, deslize o apoio de braços até atingir a largura desejada e volte a apertar o parafuso para o fixar corretamente.

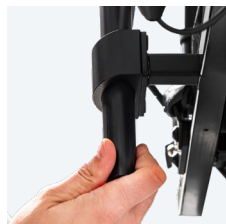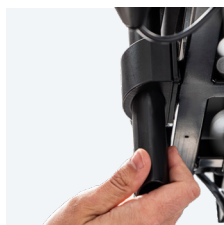

6.5. RECLINAÇÃO DO ENCOSTO

O encosto da cadeira Atlantik Flex pode ser reclinado manualmente e oferece quatro posições: 115°, 129°, 141° e 153°. Além disso, pode ser inclinado para a frente quando necessário, ajustando-se sobre o assento para reduzir o tamanho da cadeira.

Para **reclinar o encosto**, puxe a alça inferior localizada na parte traseira. Ao fazê-lo, os pinos serão desbloqueados e poderá ajustar a inclinação. Quando atingir a posição desejada, solte a alça para que os pinos encaixem corretamente. Certifique-se sempre de que o encosto está bem bloqueado antes de utilizar a cadeira.

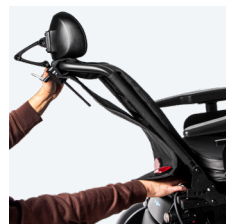


6.6. INCLINAÇÃO DO ASSENTO

A função de inclinação eletrônica inclina toda a secção do assento da cadeira Atlantik Flex, incluindo o encosto, o assento e os apoios para os pés.

Quando a cadeira está inclinada, a velocidade máxima é reduzida automaticamente ou, em alguns casos, a capacidade de condução é completamente bloqueada. A luz amarela acende para indicar a redução da velocidade, enquanto a luz vermelha avisa que o motor está limitado.

Para **ajustar a inclinação do assento**, prima primeiro o botão indicado na fotografia. Quando o joystick mostrar a luz que indica que o assento está no modo de ajuste de inclinação, empurre o joystick para a frente para inclinar a cadeira para trás e empurre o joystick para trás para voltar à posição inicial.

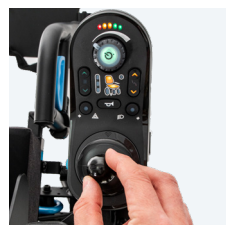

6.7. AJUSTE DA PROFUNDIDADE DOS APOIOS PARA OS PÉS

Com uma chave de 5, solte o parafuso localizado na lateral da cadeira enquanto segura a porca com uma chave fixa de 13. Deslize o suporte do apoio para os pés até a posição desejada e volte a apertá-lo.



6.8. AJUSTE DOS APOIOS PARA OS PÉS

Regulação da altura: com uma chave de 4, desaperte os dois parafusos localizados na parte traseira do apoio para os pés. Ajuste a altura e volte a apertá-los.



Regulação da inclinação: na parte inferior da plataforma, desaperte ambas as porcas com uma chave fixa de 10. Retire a parte superior da plataforma para deixar à vista dois parafusos. Desaperte estes parafusos com uma chave de 4 sem os retirar completamente, ajuste a plataforma à inclinação desejada e volte a apertá-los. Por último, volte a montar a parte superior da plataforma.





Regulação da largura da plataforma: solte as duas porcas localizadas na parte inferior da plataforma com uma chave fixa de 10. Deslize uma placa da plataforma sobre a outra até obter a largura desejada e volte a apertar.





6.9. AJUSTE DO ENCOSTO DE CABEÇA

Pode ajustar a altura do encosto de cabeça utilizando a alavanca traseira para soltar a sua fixação. Depois de desbloqueado, ajuste a altura e volte a fixá-lo. Da mesma forma, pode bloquear as duas articulações do encosto de cabeça apertando ambos os parafusos com a chave Allen de 5.

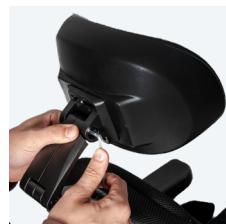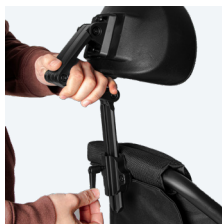


6.10. REGULAÇÃO DA PROFUNDIDADE DO ASSENTO

Na parte traseira, nas laterais da cadeira, solte os dois parafusos com a chave Allen de 5 fornecida. Desloque o suporte do encosto até à posição desejada para aumentar ou reduzir a profundidade do assento e volte a apertar, certificando-se de que também fixa o suporte do cinto.

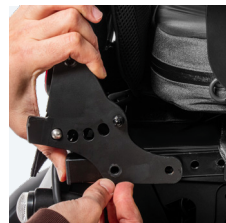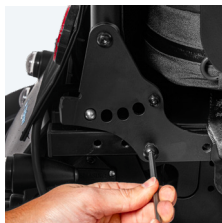

6.11. REGULAÇÃO DA LARGURA DO ASSENTO

Para ajustar a largura do assento, incline a cadeira ao máximo para trabalhar com maior conforto. Com a chave de 6, solte os quatro parafusos localizados nas barras transversais dianteira e traseira. Depois de soltos, deslize as laterais do assento até a posição desejada e volte a apertar os parafusos.

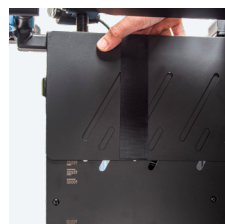

6.12. USO DA LIBERAÇÃO DO MOTOR (RODA LIVRE)

Puxe a alavanca de cada motor para a posição aberta, em direção ao exterior da cadeira, para desbloquear os travões e permitir o empurro manual da cadeira. Nesta posição, a função elétrica fica desativada. Para ativar novamente o modo elétrico, empurre a alavanca para a posição fechada, em direção ao interior da cadeira. Nesta configuração, a cadeira não pode ser empurrada manualmente.



6.13. BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO

Se a cadeira não ligar, é possível que o interruptor geral de alimentação esteja desligado. Pressione-o para restabelecer o fornecimento de energia elétrica..



6.14. MUDANÇA DE LADO DO JOYSTICK

Primeiro, remova o estofamento do apoio de braço utilizando uma chave Allen de 4 e retirando os 4 parafusos inferiores. Solte o parafuso lateral do suporte do joystick com uma chave de 5 e retire o joystick juntamente com o tubo que o sustenta.

Em seguida, com uma chave Allen de 4 e uma chave fixa de 8, retire o suporte do joystick. Repita o mesmo procedimento no lado oposto para retirar o estofamento do apoio de braço.


Coloque o suporte do joystick no lado oposto usando os parafusos e porcas correspondentes e volte a aparafusar todos os componentes.



7. BATERIA E CARREGAMENTO

7.1. CARGA DA BATERIA

Pode carregar a sua cadeira de rodas através do comando. A tomada de carregamento encontra-se na parte frontal do joystick.

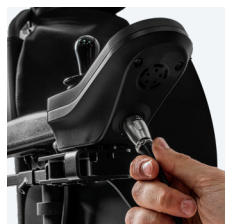

Depois de ligar o carregador, conecte o cabo de carregamento à cadeira de rodas antes de ligá-lo a uma tomada externa. Não utilize a cadeira enquanto estiver a carregar.

Carregue a cadeira com a maior frequência possível. Não a utilize se o nível da bateria estiver baixo, pois poderá ficar imobilizado. Se a bateria estiver completamente descarregada, carregue-a imediatamente.

Utilize apenas o carregador fornecido pela TotalCare Europe e certifique-se de que o carregamento é feito numa sala seca e bem ventilada. Carregue sempre em interiores.

Para mais informações e instruções adicionais, consulte o manual do carregador incluído com a sua cadeira de rodas ou contacte o seu ortopedista.

8. ARMAZENAMENTO E OUTRAS INDICAÇÕES

8.1. ARMAZENAMENTO DA CADEIRA ATLANTIK FLEX

A cadeira de rodas Atlantik Flex pode ser armazenada por períodos curtos ou prolongados, sendo fundamental seguir certas precauções para garantir a integridade dos seus componentes elétricos e mecânicos, bem como a vida útil da bateria e o estado geral da estrutura.

Em caso de armazenamento temporário ou de curta duração, recomenda-se colocar a cadeira num ambiente seco, estável e com temperatura controlada superior a 5 °C para evitar que a bateria perca carga ou que os componentes elétricos sejam afetados pela condensação e humidade, o que poderia aumentar a suscetibilidade à corrosão dos contactos e conexões.

Quando o **armazenamento for prolongado**, antes de guardar a cadeira, certifique-se de que a bateria está completamente carregada e que o disjuntor principal foi desligado para evitar consumos residuais de energia que possam deteriorar a bateria ou os sistemas eletrónicos. Durante este período de inatividade, é aconselhável realizar cargas mensais periódicas da bateria, ligando temporariamente o disjuntor principal e utilizando o carregador fornecido pela TotalCare Europe, seguindo rigorosamente as nossas instruções, de modo a manter a capacidade de armazenamento da bateria e evitar falhas elétricas ou mecânicas. Além disso, recomenda-se inspecionar ocasionalmente a cadeira durante o armazenamento para verificar se não ocorreram acúmulos de umidade, deformações ou sinais de desgaste nos componentes, garantindo assim que a cadeira estará pronta para uso imediato quando necessário.

8.2. INTERRUPTOR PRINCIPAL

A cadeira de rodas Atlantik Flex está equipada com um disjuntor principal que permite desligar com segurança a alimentação elétrica da cadeira, por exemplo, durante o transporte ou quando é necessário um corte temporário de energia por motivos de segurança ou manutenção.

Em caso de falha no circuito elétrico, o disjuntor disparará automaticamente para proteger os componentes eletrónicos e evitar danos maiores. Na primeira vez que isso acontecer, o utilizador pode reiniciar o disjuntor manualmente usando a alavanca localizada na parte traseira da cadeira, certificando-se previamente de que o painel de controlo está fechado para evitar qualquer risco elétrico.

Se o disjuntor disparar repetidamente, recomenda-se não tentar novas restaurações por conta própria e contactar imediatamente o seu ortopedista para que ele realize uma inspeção e reparação adequadas. O uso correto do disjuntor principal contribui para a segurança do utilizador e para a manutenção ideal do sistema elétrico da cadeira, evitando danos nos motores, na bateria e nos componentes eletrónicos de controlo.

8.3. RESTRIÇÕES À CIRCULAÇÃO

Ao conduzir a cadeira de rodas Atlantik Flex, é importante ter em conta as limitações de altura dos obstáculos e a segurança do utilizador. **A cadeira pode ultrapassar obstáculos de até 5 cm com segurança e, em condições controladas, é capaz de subir lances de até 10 cm; no entanto, tentar ultrapassar obstáculos superiores a 5 cm implica um risco elevado de capotamento, danos na cadeira e possíveis lesões.** Se a cadeira tiver um sistema de bloqueio adicional para transporte em veículos, isso pode afetar a manobrabilidade e a estabilidade, pelo que se deve ter muito cuidado. Ao descer ladeiras ou subir qualquer tipo de meio-fio, mesmo aqueles com menos de 5 cm, recomenda-se reduzir a velocidade de condução e proceder com o máximo cuidado, mantendo sempre um controlo firme do joystick. Ao conduzir em descidas, o centro de gravidade do utilizador desloca-se para a frente, pelo que, se a cadeira ganhar velocidade involuntariamente, deve soltar o joystick para a parar e retomar a descida de forma controlada. Estas medidas contribuem para garantir a estabilidade da cadeira, a segurança do utilizador e a integridade dos seus componentes mecânicos e eletrónicos.

9. VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO

Para que a cadeira de rodas funcione de forma ideal, é fundamental utilizá-la corretamente e fazer a sua manutenção regularmente.

Uma boa utilização e manutenção prolongarão a sua vida útil e reduzirão o risco de avarias. Realize apenas os ajustes e tarefas de manutenção descritos neste manual do utilizador. Qualquer outro tipo de serviço, reparação ou manutenção deve ser realizado por um técnico qualificado autorizado pela TotalCare Europe.

9.1. LIMPEZA

Cuidados e manutenção regulares ajudarão a prevenir o desgaste e danos desnecessários ao seu produto. Antes de limpar a cadeira de rodas, certifique-se de desligar a alimentação.

9.2. SUPERFÍCIES METÁLICAS

O revestimento em pó de alta qualidade proporciona uma proteção ideal contra a corrosão. Para a limpeza habitual, utilize um pano macio ou uma esponja com água quente e um detergente suave. Enxague com água e seque cuidadosamente com um pano limpo.

Para remover marcas de abrasão em superfícies semibrilhantes, aplique uma cera macia seguindo as instruções do fabricante. Em superfícies

brilhantes, remova arranhões e marcas de desgaste usando um polidor para automóveis e, em seguida, aplique uma cera suave para restaurar o brilho original.

9.3. PLÁSTICOS

Para a limpeza habitual, lave as superfícies plásticas com um pano macio, água quente e um detergente suave. Enxague bem com água e seque com um pano limpo e macio. Não utilize solventes nem utensílios abrasivos.

9.4. TECIDOS E PNEUS

Para a limpeza regular dos estofos, use água morna e um sabão suave não abrasivo. Use um pano macio ou uma escova para remover a sujidade. Remova os restos de água ou espuma com um pano limpo e seco e deixe a superfície secar completamente. Para manchas mais persistentes, repita o processo conforme necessário.

As manchas de tinta podem ser removidas com água e sabão ou álcool isopropílico. Não utilize métodos de limpeza diferentes dos indicados, pois podem danificar os pneus ou a estofagem e anular a garantia da cadeira de rodas.

Se desejar, pode remover a cobertura do pneu antes de o limpar. Para mais detalhes, consulte as instruções de limpeza.

Programa de manutenção	Diário	Semanal	Mensal	Anual
Verifique o indicador de carga da bateria e carregue-a, se necessário	X			
Certifique-se de que o joystick e outros painéis de controlo não estão danificados	X			
Certifique-se de que todas as peças removíveis estão bem fixadas	X			
Verifique o desgaste dos cintos e das fivelas	X			
Se a cadeira de rodas estiver equipada com rodas pneumáticas, verifique os pneus e encha-os, se necessário		X		
Certifique-se de que as luzes e os piscas da Atlantik Flex estão a funcionar e estão limpos		X		
Limpe a cadeira de rodas e siga as instruções de manutenção			X	
Verifique o desgaste da estofagem, dos assentos e dos suportes			X	
Verifique se o modo de roda livre e o joystick de roda livre estão a funcionar corretamente			X	
Inspeção completa, verificação de segurança e manutenção realizada por uma ortopedia autorizada da sua cadeira Atlantik Flex				X

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Este guia de resolução de problemas descreve as falhas e os eventos mais frequentes que podem ocorrer durante a utilização da cadeira de rodas, bem como as ações recomendadas para a sua correção.

No entanto, este guia não abrange todos os possíveis problemas ou situações que podem ocorrer. Caso necessite de assistência adicional, recomendamos que entre em contacto com o seu ortopedista para receber suporte técnico especializado. Todas as tarefas de diagnóstico, resolução de problemas e reparação dos sistemas eletrónicos devem ser realizadas exclusivamente por pessoal qualificado e com experiência em eletrónica de cadeiras de rodas, a fim de garantir a segurança do utilizador e a integridade dos componentes do equipamento.

Incidência	Possível causa	Remédio
A cadeira de rodas não pode ser conduzida	Carregador de bateria conectado	Desligue o carregador da bateria
	Cadeira de rodas em modo de roda livre	Saia do modo de roda livre e reinicie a cadeira de rodas
	A cadeira de rodas está bloqueada	Abra a cadeira de rodas
	Uma função do assento ativou a supressão automática da condução	Certifique-se de que o encosto não está reclinado e que o assento não está inclinado ou levantado Desligue a alimentação e aguarde que o motor arrefeça
A cadeira de rodas desliga-se automaticamente após um período de inatividade (20-30 minutos)	Superaquecimento do motor	Prima o botão de arranque no painel de controlo para ligar novamente a cadeira de rodas
A cadeira de rodas pára durante a marcha	Modo de economia de energia ativado	Reponha o disjuntor principal, mais informações na página 14
As cadeiras de rodas apenas abrandam	O disjuntor principal disparou	Certifique-se de que o encosto não está reclinado e que o assento não está inclinado ou levantado
A cadeira de rodas não arranca	A função do assento ativa o limite de velocidade automático	Carregue a bateria
	Descarga da bateria	Ligue o cabo ao controlador
	O cabo de ligação ao painel de controlo soltou-se	Ligue o disjuntor principal, mais informações na página 14
Cadeira de rodas não recarregável	O disjuntor principal foi desligado	Ligue o disjuntor principal, mais informações na página 14
	O disjuntor de carga disparou	Aguarde cinco minutos para que carregue. O disjuntor será reiniciado automaticamente

11. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à factura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZAR ESTE PRODUTO SE ELE PARECER ESTAR DANIFICADO OU FALTAR PEÇAS.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

ATLANTIK

IM BY TOTALCARE



Legenda da etiquetagem.



Conformidade europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.

Manual do utilizador

Cadeira de rodas elétrica compacta e basculante **Atlantik Flex**

V1 · 27/01/2026