



ATLANTIK
im BY TOTALCARE

Atlantik Flex

Sedia a rotelle elettrica
compatta e ribaltabile

MANUALE D'USO

Ref. SEFACATLANFLEXM55BMN

più di 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, poiché possono presentare modifiche progettuali a seconda delle esigenze costruttive.

Il prodotto in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Consulta il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

TI RINGRAZIAMO PER LA TUA FIDUCIA.

Grazie per aver acquistato un prodotto **IM di TotalCare Europe**.

Il prodotto che avete acquistato è dotato della tecnologia più avanzata e ha superato i test più severi.

L'esperienza nel tempo significa che i nostri prodotti offrono i migliori vantaggi, permettendoti di godere di più libertà ogni giorno e l'autonomia di cui hai bisogno.

Ti suggeriamo di dedicare un momento alla lettura delle istruzioni fornite. Questo ti permetterà di familiarizzare con la tua nuova sedia a rotelle elettrica **Atlantik Flex**, che ti consentirà di ottenere il massimo delle prestazioni e della vita utile da essa.


più di **50 anni** vivono **senza limiti**

GUIDA RAPIDA.

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 – Parti della sedia.....	4
2 – Descrizione del prodotto.....	4
3 – Caratteristiche del prodotto	5
4 – Istruzioni di sicurezza.....	7
5 – Funzionamento e pericoli.....	9
6 – Utilizzo e montaggio	10
7 – Batteria e ricarica	13
8 – Conservazione e altre indicazioni.....	14
9 – Controllo e manutenzione	15
10 – Risoluzione dei problemi	16
11 – Garanzia.....	17

1. PARTI DELLA SEDIA

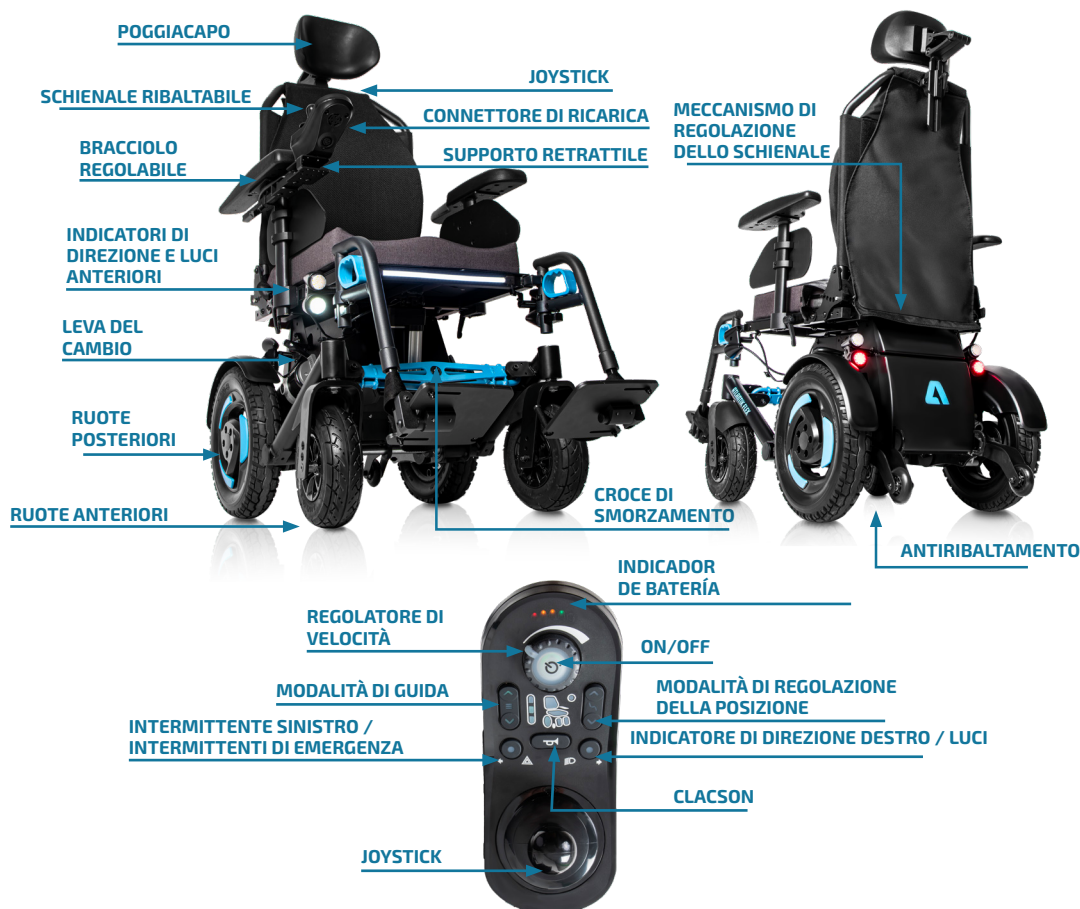

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SEDIA A ROTELLE ELETTRICA COMPATTA E BASCULANTE

Atlantik Flex si distingue per le sue dimensioni compatte, ideali per l'uso sia all'interno che all'esterno.

La sua caratteristica più innovativa è il sistema di ammortizzazione tramite crociera, che consente alla sospensione di flettersi e inclinarsi per adattarsi a tutti i tipi di terreno, attenuando le irregolarità per l'utente e facilitando il superamento di cordoli fino a 10 cm.

La sedia offre reclinazione manuale e inclinazione elettronica. Dotata di due potenti motori da 450 W, raggiunge una velocità massima di 10 km/h. Le sue due batterie al gel da 55 Ah garantiscono un'autonomia fino a 40 km.

Inoltre, incorpora un avanzato sistema di illuminazione a LED e indicatori di direzione, completamente controllabile dal joystick.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



INFORMAZIONI GENERALI

Misure

Larghezza totale	59,5 cm
Profondità senza poggiapiedi	81 cm
Profondità con poggiapiedi	109 cm
Altezza totale	110 cm
Altezza della seduta da terra senza cuscino	49 cm
Altezza della seduta da terra con cuscino	56 cm

Misure da chiuso

Profondità da chiuso	59,5 cm
Larghezza da chiuso	81 cm
Altezza da chiuso	62 cm

Peso

Peso totale (batteria inclusa)	86 kg
Peso massimo supportato	150 kg

Materiale	Acciaio
-----------	---------

Colore	Nero opaco e blu
--------	------------------



CARATTERISTICHE TECNICHE

Seduta

Larghezza seduta (base regolabile)	40 - 50 cm
Larghezza cuscino	44 cm / 55 cm
Larghezza utile per sedersi (braccioli regolabili)	42 - 68 cm
Profondità seduta (regolabile)	46,5 - 54 cm
Altezza seduta da terra senza cuscino	49 cm
Altezza seduta da terra con cuscino	56 cm
Inclinazione seduta	0 - 25° (elettronico)

Motore

Motore	2 x 450 W
Batteria	2 x 55 (gel)
Autonomia	35 - 40 km
Velocità massima	10 km/h

Braccioli

Lunghezza bracciolo	41 cm
Larghezza bracciolo	8 cm
Altezza bracciolo dal sedile (regolabile)	19 - 30 cm
Tipo di bracciolo	Regolabili in larghezza e altezza

Schienale


Larghezza dello schienale	44 cm
Altezza dello schienale	52 cm
Tipo di schienale	Regolabile con cinque cinghie
Reclinabilità dello schienale	90° - 130° (manuale)

Ruote

Dimensioni ruote anteriori	Ø22 cm
Dimensioni ruote posteriori	Ø34 cm
Larghezza ruote anteriori	7 cm
Larghezza ruote posteriori	7 cm
Tipo di ruote	Massicce

Altre caratteristiche

Altezza massima cordoli	10 cm
Cintura, clacson e ruote antiribaltamento	Sì
Controller	Dinamico
Forche anteriori	Alluminio
Joystick	Retrattile
Pendenza massima di salita	10°
Raggio di sterzata	150 cm
Poggipiedi	Regolabili in altezza, profondità e inclinazione

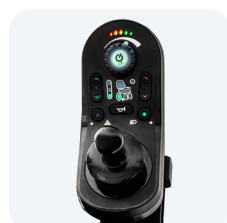

4. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

4.1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare la sedia a rotelle per la prima volta, è indispensabile leggere e comprendere appieno il presente manuale d'uso. Il suo scopo è fornire le informazioni necessarie per utilizzare e mantenere la sedia a rotelle in modo corretto e sicuro. Inoltre, prima di utilizzare qualsiasi accessorio, è necessario leggere e comprendere il manuale specifico corrispondente.

Il presente manuale contiene diverse avvertenze di sicurezza che devono essere rispettate in ogni momento. Ogni volta che vedete il simbolo del punto esclamativo, consultate questo capitolo per conoscere l'avvertenza corrispondente..

4.2. AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

La vostra sedia a rotelle è un dispositivo medico complesso che deve essere utilizzato in modo sicuro. Questo capitolo fornisce informazioni essenziali per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

TotalCare Europe non si assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni contenute nel presente manuale d'uso, né per l'omissione di buone pratiche. Allo stesso modo, non sarà responsabile per danni personali o materiali derivanti da decisioni o usi impropri del dispositivo.

⚠ AVVERTENZA: cQuando si utilizza Atlantik Flex come sedile in un veicolo, deve essere orientato in avanti ed è obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza, comprese quelle diagonali e addominali, per ridurre il rischio che la testa o il busto urtino contro le parti del veicolo. La sedia a rotelle è stata progettata e testata esclusivamente per questo tipo di utilizzo. Il suo utilizzo in qualsiasi altra configurazione dei sedili del veicolo potrebbe causare lesioni gravi o addirittura la morte.

⚠ AVVERTENZA: Assicurarsi di utilizzare correttamente i punti di fissaggio e i sistemi di aggancio. Un uso improprio può causare lesioni gravi o addirittura la morte.

⚠ AVVERTENZA: Regolare il sistema di ritenuta in modo tale che il meccanismo di sblocco non possa essere azionato accidentalmente durante una collisione. In caso contrario, potrebbero verificarsi lesioni gravi.

⚠ AVVERTENZA: I dispositivi di posizionamento per sedie a rotelle non sostituiscono le cinture di sicurezza installate nei veicoli e non offrono la stessa protezione in caso di incidente. L'uso di un dispositivo di posizionamento in sostituzione della cintura di sicurezza può causare lesioni gravi.

⚠ AVVERTENZA: Utilizzare sempre dispositivi di posizionamento correttamente fissati, comprese le cinghie di fissaggio. Il mancato fissaggio adeguato può causare lesioni.

⚠ AVVERTENZA: Non utilizzare la sedia Atlantik Flex per trascinare oggetti né appendere pesi eccessivi, poiché ciò potrebbe destabilizzare la sedia e causare incidenti o lesioni.

⚠ AVVERTENZA: Tenete conto delle dimensioni della vostra sedia a rotelle. Alcune uscite di emergenza o corridoi potrebbero essere troppo stretti per consentirne il passaggio in sicurezza..

⚠ ATTENZIONE

Non guidare la sedia a rotelle su strade pubbliche o autostrade. La sedia a rotelle non è progettata per circolare come un veicolo. Rispettare sempre le norme locali di circolazione stradale e guidare con prudenza.

Non montare o smontare la sedia a rotelle né alcuno dei suoi componenti. La sedia a rotelle è stata configurata specificatamente per soddisfare le esigenze dell'utente, seguendo le indicazioni del medico e dell'ortopedico. L'installazione, la modifica o la riparazione della sedia richiedono conoscenze tecniche, formazione ed esperienza specializzate da parte di un'officina accreditata da TotalCare Europe.

La modalità ruota libera deve essere utilizzata solo su terreno pianeggiante e in presenza di un assistente che controlli la sedia a rotelle. Il suo utilizzo su pendii o senza assistenza può causare lesioni o danni materiali.

⚠ AVVERTENZA: Non guidare la sedia Atlantik Flex se il peso dell'utente supera il limite massimo di 150 kg. In caso contrario, la sedia a rotelle potrebbe causare lesioni.

⚠ AVVERTENZA: Non utilizzare la sedia a rotelle per trasportare passeggeri, indipendentemente dalla loro età o dal loro peso. Ciò potrebbe compromettere la manovrabilità e la stabilità della sedia a rotelle.

⚠ AVVERTENZA: Se il sedile o lo schienale sono sollevati o reclinati, guidare sempre a bassa velocità. Non percorrere pendenze né ostacoli in queste condizioni, poiché il seggiolino potrebbe perdere stabilità e causare incidenti.

⚠ AVVERTENZA: Se la sedia a rotelle o i suoi accessori subiscono danni durante il trasporto, la guida o per qualsiasi altro motivo, smettere immediatamente di utilizzarla e segnalarlo al più presto al negozio di ortopedia dove è stata acquistata. Potrebbe non essere sicuro continuare a utilizzarla.

⚠ AVVERTENZA: Assicurarsi che i componenti elettronici non siano esposti all'umidità. Se si nota che un rivestimento o un comando è crepato o danneggiato, sostituirlo immediatamente. L'esposizione all'umidità può causare cortocircuiti o incendi, con conseguenti lesioni personali o danni materiali.

⚠ AVVERTENZA: La sedia a rotelle Atlantik Flex è pesante e contiene numerose parti mobili. Per questo motivo, esiste il rischio di schiacciamento se la sedia viene regolata o utilizzata in modo errato. Prestare particolare attenzione alla posizione del corpo ed evitare di posizionare qualsiasi parte del corpo tra le parti mobili.

⚠ AVVERTENZA: Le batterie usate devono essere smaltite in modo responsabile, nel rispetto delle normative locali in materia di riciclaggio..

⚠ AVVERTENZA: Mantenete i pneumatici gonfiati alla pressione raccomandata. Un sovraccarico può causare l'esplosione dei pneumatici e provocare lesioni.

⚠ AVVERTENZA: Non utilizzare la sedia a rotelle su scale o scale mobili.

⚠ AVVERTENZA: Ricordate che il consumo di al-

col può influire sulla vostra capacità di guidare la sedia a rotelle elettrica.

⚠ AVVERTENZA: Non utilizzare la sedia a rotelle se è caduta, è stata investita, esposta al fuoco, immersa in acqua o è stata coinvolta in un incidente stradale o in un altro incidente grave. Questo tipo di situazioni può causare danni importanti che non sempre sono visibili durante un'ispezione. In questi casi, contattare il proprio ortopedico. I danni derivanti da questi incidenti non sono coperti dalla garanzia TotalCare Europe.

⚠ AVVERTENZA: Regolare i poggiatesta in modo che non entrino in contatto con il suolo durante la guida, anche quando si percorrono rampe o si superano ostacoli. Se urtano il suolo, la sedia potrebbe perdere stabilità, causando lesioni.

⚠ AVVERTENZA: Quando si affrontano salite, si superano ostacoli o si percorrono terreni irregolari (come la sabbia), la sedia a rotelle richiede un elevato consumo di potenza. Si consiglia di evitare di guidare per periodi prolungati in queste condizioni.

⚠ AVVERTENZA: Si consiglia di non utilizzare la sedia a rotelle in condizioni meteorologiche estreme, quali pioggia intensa, tempeste di neve, caldo torrido o freddo intenso. L'esposizione prolungata alla luce solare o a temperature molto basse può causare un surriscaldamento o un raffreddamento eccessivo della superficie della sedia.

⚠ AVVERTENZA: Quando la batteria è a una temperatura di 25 °C, la sedia a rotelle offre un'autonomia di circa 25 chilometri. Questa autonomia può essere influenzata dalla temperatura della batteria.

⚠ AVVERTENZA: temperature inferiori a 25 °C riducono l'autonomia. Temperature inferiori a -25 °C possono danneggiare la batteria della sedia a rotelle.

⚠ AVVERTENZA: Non consentire ai minori di utilizzare la sedia a rotelle senza supervisione.

⚠ AVVERTENZA: Le specifiche indicate nel presente manuale d'uso definiscono il peso massimo che la sedia a rotelle può sostenere, nonché il peso dichiarato dell'utente. Questo valore include sia il peso dell'utente che quello di eventuali effetti personali trasportati.

⚠ AVVERTENZA: Se la sedia a rotelle non funziona correttamente o si sospetta che ci sia un problema, fermarla il prima possibile, scollegare l'alimentazione e contattare il proprio ortopedico.

Evita arresti e ripartenze brusche. Presta particolare attenzione nelle seguenti situazioni:

- Vicino al bordo di una carreggiata.
- Quando si guida su superfici morbide o irregolari, come erba, ghiaia, sabbia, ghiaccio o neve.
- Quando ci si sposta da una zona ad alta trazione a una zona a bassa trazione.
- Su strade strette o in spazi ristretti.

4.3. OSSERVAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC)

Los dispositivos electrónicos de las sillas de ruedas eléctricas pueden verse afectados por campos electromagnéticos externos, como los generados por teléfonos móviles u otros equipos electrónicos.

5. FUNZIONAMENTO E PERICOLI

5.1. PRIMA DI SEDERSI SULLA SEDIA

Prima di utilizzare la sedia, è fondamentale effettuare alcuni controlli per garantirne la sicurezza e il corretto funzionamento.

- Verificare che la batteria sia completamente carica.
- Assicurarsi di allacciare la cintura di sicurezza.
- Verificare che la sedia elettrica sia completamente aperta e che i tubi del sedile siano correttamente posizionati nei supporti laterali.
- Assicurarsi che la leva del joystick sia spenta per evitare movimenti accidentali in caso di contatto accidentale con il joystick.

5.2. HOME

- Assicurarsi di essere seduti in modo sicuro.
- Verificare che i poggipiedi siano posizionati all'altezza corretta per i propri piedi.

5.3. INDIRIZZO

- Utilizzare il joystick per guidare la sedia a rotelle elettrica. Si consiglia di impostare la velocità al livello più basso fino a quando non si acquisisce esperienza e pratica nella sua guida.

- Lasciare spazio sufficiente quando si gira la sedia elettrica per assicurarsi che le ruote siano libere da ostacoli.

- Prestare particolare attenzione durante la retromarcia.

5.4. GUIDA SU PENDII, SALITE E RAMPE

- Non guidare la sedia a rotelle su pendenze con un'inclinazione superiore a 10°. La guida su pendenze ripide può destabilizzare la sedia e causare lesioni. Per garantire prestazioni ottimali e maggiore stabilità, prestare particolare attenzione su pendenze superiori a 6°.
- Quando si sale o si scende una pendenza, procedere sempre in linea retta.
- Evitare di guidare su pendenze in qualsiasi direzione, poiché ciò potrebbe causare il ribaltamento della sedia Atlantik Flex e provocare lesioni gravi.
- Cercare di mantenere la sedia elettrica in movimento quando si sale o si scende una pendenza. Se è necessario fermarsi, ripartire e accelerare lentamente e con cautela.
- Tenere presente che la distanza di frenata della sedia elettrica può essere notevolmente maggiore sulle pendenze rispetto al terreno pianeggiante.

6. UTILIZZO E MONTAGGIO

6.1. COMANDO DI CONTROLLO

Regolazione della velocità: È presente una rotella che consente di regolare la velocità massima di spostamento della sedia. Ruotarla verso destra per aumentarla o verso sinistra per diminuirla.

Pulsante del clacson: Premere il pulsante per attivare il clacson.

Presa di corrente del caricabatterie: La presa di corrente viene utilizzata per caricare la batteria, collegare il caricabatterie fornito da TotalCare Europe.

Pulsante luci di marcia: Quando si accendono le luci di marcia, si accende la spia corrispondente.

Pulsante di rotazione a sinistra: tenendo premuto il pulsante, si attiverà l'indicatore di direzione corrispondente. Per disattivarlo, premere nuovamente il pulsante o attendere 15 secondi.

Pulsante di rotazione a destra: tenendo premuto il pulsante, si attiverà l'indicatore di direzione corrispondente. Per disattivarlo, premere nuovamente il pulsante o attendere 15 secondi.

Pulsante spia avvertenza: attiva i 4 indicatori di direzione.

Indicatore batteria: I LED nella parte superiore del telecomando indicano lo stato di carica:

1) ●●●●●●● Tutti i LED accesi: sistema acceso.

2) ●●●●●●● Tutti i LED sono accesi e quelli verdi alla fine lampeggiano: sovraccarico della batteria. Ridurre la velocità se si sta percorrendo una salita.

3) ●●●●●●● I LED rosso e ambra sono accesi: batteria a metà carica

4) ●●●●●●● LED rosso e ambra accesi: batteria scarica

5) ●●●●●●● Solo il LED rosso è acceso: batteria quasi scarica, ricaricare la sedia a rotelle.


6) ●●●●●●● IL LED rosso lampeggia: Batteria scarica, ricaricare immediatamente.

⚠ ATTENZIONE


È vietato scollegare l'alimentazione durante la guida, poiché ciò potrebbe causare l'arresto improvviso della sedia Atlantik Flex e il suo ribaltamento.

6.2. MONTAGGIO DELLA SEDIA


Estraete la sedia a rotelle dalla scatola. Tirate verso di voi la cinghia che si trova dietro lo schienale. Lasciate la cinghia nella posizione desiderata e verificate che sia ben fissata e stabile.

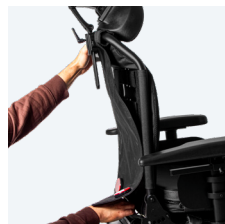

Per montare i poggiatesta, sollevare la maniglia verso l'alto e ruotare il poggiatesta dall'esterno verso l'interno fino a quando il perno non si innesta nel supporto.

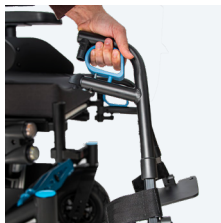

Utilizzando la rotella laterale, stringere il fissaggio del bracciolo. Se è necessaria una corsa maggiore, spostare verso l'esterno il cappuccio di plastica per poterlo ruotare senza esercitare forza sulla vite.

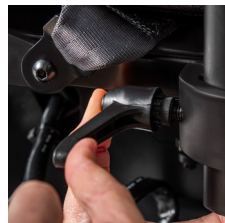

6.3. REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL BRACCIOLO




Per regolare l'altezza del bracciolo, allentare la rotella laterale per sbloccare il fissaggio. Se è necessaria una corsa maggiore, spostare verso l'esterno il cappuccio di plastica per poter ruotare la rotella senza esercitare pressione sulla vite. Una volta sbloccato, regolare l'altezza del bracciolo e fissarlo nuovamente in modo saldo.



6.4. REGOLAZIONE DELLA LARGHEZZA DEI BRACCIOLI

La larghezza dei braccioli può essere regolata facilmente. Per una maggiore comodità durante la regolazione, si consiglia di inclinare la sedia al massimo.


Allentare la vite utilizzando la chiave a brugola da 6 mm in dotazione, far scorrere il bracciolo fino a raggiungere la larghezza desiderata e serrare nuovamente la vite per fissarlo correttamente.

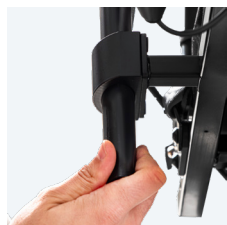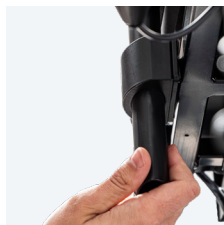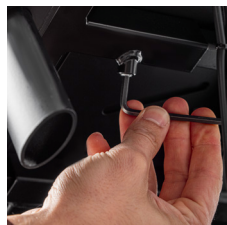

6.5. INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE

Lo schienale della sedia Atlantik Flex può essere reclinato manualmente e offre quattro posizioni. Inoltre, può essere ribaltato in avanti quando necessario, regolandosi sul cuscino per ridurre le dimensioni della sedia.

Per **reclinare lo schienale**, tirare la maniglia inferiore situata nella parte posteriore. In questo modo, i perni si sbloccheranno e sarà possibile regolare l'inclinazione. Una volta raggiunta la posizione desiderata, rilasciare la maniglia affinché i perni si innestino correttamente. Assicurarsi sempre che lo schienale sia ben bloccato prima di utilizzare la sedia.

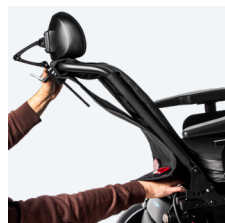

6.6. RIBALTAMENTO DEL SEDILE

La funzione di inclinazione elettronica inclina l'intera sezione del sedile della sedia Atlantik Flex, compreso lo schienale, il sedile e i poggiatesta.

Quando la sedia è inclinata, la velocità massima viene automaticamente ridotta o, in alcuni casi, la capacità di guida viene completamente bloccata. La spia gialla si accende per indicare la riduzione della velocità, mentre la spia rossa avvisa che il motore è limitato.

Per **regolare l'inclinazione del sedile**, premere prima il pulsante indicato nella fotografia. Quando il joystick mostra la luce che indica che il sedile è in modalità di regolazione dell'inclinazione, spingere il joystick in avanti per inclinare la sedia all'indietro e spingere il joystick indietro per riportarla nella posizione iniziale.



6.7. REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DEI POGGIAPIEDI

Con una chiave da 5, allentare la vite situata sul lato della sedia tenendo fermo il dado con una chiave fissa da 13. Far scorrere il supporto del poggiatesta nella posizione desiderata e riavvitare.



6.8. REGOLAZIONE DEI POGGIAPIEDI

Regolazione dell'altezza: Con una chiave da 4, allentare le due viti situate nella parte posteriore del poggiatesta. Regolare l'altezza e riavvitare le viti.



Regolazione dell'inclinazione: nella parte inferiore della piattaforma, allentare entrambi i dadi con una chiave fissa da 10. Rimuovere la parte superiore della piattaforma per scoprire due viti. Allentare queste viti con una chiave da 4 senza rimuoverle completamente, regolare la piattaforma all'inclinazione desiderata e serrarle nuovamente. Infine, rimontare la parte superiore della piattaforma.





Regolazione della larghezza della piattaforma: Allentare i due dadi situati nella parte inferiore della piattaforma con una chiave fissa da 10. Far scorrere una piastra della piattaforma sull'altra fino a ottenere la larghezza desiderata e serrare nuovamente.





6.9. REGOLAZIONE DEL POGGIACAPO

È possibile regolare l'altezza del poggiatesta utilizzando la leva posteriore per sbloccare il fissaggio. Una volta sbloccato, regolare l'altezza e fissarlo nuovamente. È inoltre possibile bloccare i due snodi del poggiatesta serrando entrambe le viti con la chiave a brugola da 5.

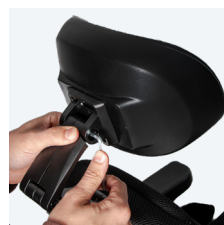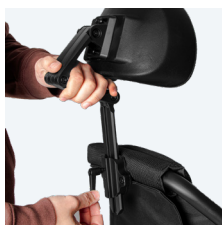


6.10. REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DEL SEDILE

Sul retro, ai lati della sedia, allentare le due viti con la chiave a brugola da 5 in dotazione. Spostare il supporto dello schienale nella posizione desiderata per aumentare o ridurre la profondità del sedile e riavvitare, assicurandosi di fissare anche il supporto della cintura.

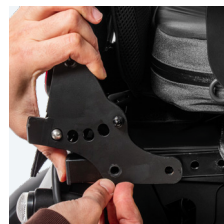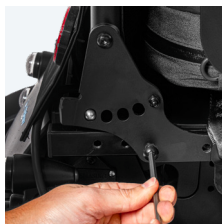

6.11. REGOLAZIONE DELLA LARGHEZZA DEL SEDILE

Per regolare la larghezza del sedile, inclinare la sedia al massimo per lavorare più comodamente. Con la chiave da 6, allentare le quattro viti situate sulle barre trasversali anteriori e posteriori. Una volta allentate, far scorrere i lati del sedile nella posizione desiderata e riavvitare.

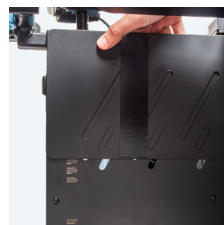

6.12. USO DEL RILASCIO DEL MOTORE (RUOTA LIBERA)

Tirare la maniglia di ciascun motore verso la posizione aperta, verso l'esterno della sedia, per sbloccare i freni e consentire la spinta manuale della sedia. In questa posizione, la funzione elettrica è disattivata. Per riattivare la modalità elettrica, spingere la maniglia verso la posizione chiusa, verso l'interno della sedia. In questa configurazione, la sedia non può essere spinta manualmente.



6.13. INTERRUPTORE ALIMENTAZIONE

Se la sedia non si accende, è possibile che l'interruttore generale dell'alimentazione sia spento. Premere per ripristinare l'alimentazione elettrica..



6.14. CAMBIO DI LATO DEL JOYSTICK

Per prima cosa, rimuovere l'imbottitura del bracciolo utilizzando una chiave a brugola da 4 e svitando le 4 viti inferiori. Allentare la vite laterale del supporto del joystick con una chiave da 5 e rimuovere il joystick insieme al tubo che lo sostiene.

Quindi, con una chiave a brugola da 4 e una chiave fissa da 8, rimuovere il supporto del joystick. Ripetere la stessa procedura sul lato opposto per rimuovere l'imbottitura del bracciolo.


Posizionare il supporto del joystick sul lato opposto utilizzando le viti e i dadi corrispondenti e riavvitare tutti i componenti.



7. BATTERIA E RICARICA

7.1. CARICA DELLA BATTERIA

È possibile ricaricare la sedia a rotelle tramite il comando. La presa di ricarica si trova nella parte anteriore del joystick.

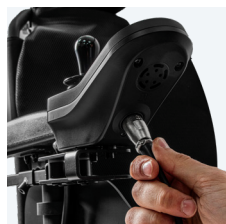

Dopo aver collegato il caricabatterie, collegare il cavo di ricarica alla sedia a rotelle prima di collegarlo a una presa di corrente esterna. Non utilizzare la sedia durante la ricarica.

Ricaricare la sedia il più spesso possibile. Non utilizzarla se il livello della batteria è basso, poiché si potrebbe rimanere bloccati. Se la batteria è completamente scarica, ricaricarla immediatamente.

Utilizzare solo il caricabatterie fornito da TotalCare Europe e assicurarsi di effettuare la ricarica in un ambiente asciutto e ben ventilato. Ricaricare sempre all'interno.

Per ulteriori informazioni e istruzioni aggiuntive, consultare il manuale del caricabatterie fornito con la sedia a rotelle o contattare il proprio ortopedico.

8. CONSERVAZIONE E ALTRE INDICAZIONI

8.1. CONSERVAZIONE DELLA SEDIA ATLANTIK FLEX

La sedia a rotelle Atlantik Flex può essere conservata per periodi brevi o prolungati, ma è fondamentale seguire alcune precauzioni per garantire l'integrità dei suoi componenti elettrici e meccanici, nonché la durata della batteria e lo stato generale della struttura.

In caso di stoccaggio temporaneo o di breve durata, si consiglia di collocare la sedia in un ambiente asciutto, stabile e con una temperatura controllata superiore a 5 °C per evitare che la batteria si scarichi o che i componenti elettrici siano danneggiati dalla condensa e dall'umidità, che potrebbero aumentare la suscettibilità alla corrosione dei contatti e dei collegamenti.

In caso di **stoccaggio prolungato**, prima di riporre la sedia è necessario assicurarsi che la batteria sia completamente carica e che l'interruttore principale sia stato scollegato per evitare consumi residui di energia che potrebbero danneggiare la batteria o i sistemi elettronici. Durante questo periodo di inattività, si consiglia di ricaricare periodicamente la batteria ogni mese ricollegando temporaneamente l'interruttore principale e utilizzando il caricabatterie fornito da TotalCare Europe seguendo rigorosamente le nostre istruzioni, in modo da mantenere la capacità di accumulo della batteria e prevenire guasti elettrici o meccanici. Si raccomanda inoltre di ispezionare occasionalmente la sedia durante lo stoccaggio per verificare che non vi siano accumuli di umidità, deformazioni o segni di usura dei componenti, assicurando così che la sedia sia pronta per l'uso immediato quando necessario.

8.2. INTERRUETTORE PRINCIPALE

La sedia a rotelle Atlantik Flex è dotata di un interruttore principale che consente di scollegare in modo sicuro l'alimentazione elettrica della sedia, ad esempio durante il trasporto o quando è necessario un'interruzione temporanea dell'alimentazione per motivi di sicurezza o manutenzione.

In caso di guasto al circuito elettrico, l'interrutto-

re si attiverà automaticamente per proteggere i componenti elettronici ed evitare danni maggiori. La prima volta che ciò si verifica, l'utente può ripristinare manualmente l'interruttore utilizzando la leva situata nella parte posteriore della sedia, assicurandosi preventivamente che il pannello di controllo sia chiuso per evitare qualsiasi rischio elettrico.

Se l'interruttore scatta ripetutamente, si raccomanda di non tentare ulteriori ripristini da soli e di contattare immediatamente il proprio ortopedico per un'ispezione e una riparazione adeguata. L'uso corretto dell'interruttore principale contribuisce alla sicurezza dell'utente e alla manutenzione ottimale del sistema elettrico della sedia, evitando danni ai motori, alla batteria e all'elettronica di controllo.

8.3. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE

Quando si guida la sedia a rotelle Atlantik Flex, è importante tenere conto dei limiti di altezza degli ostacoli e della sicurezza dell'utente. **La sedia può superare ostacoli fino a 5 cm in tutta sicurezza e, in condizioni controllate, è in grado di salire cordoli fino a 10 cm; tuttavia, tentare di superare ostacoli superiori a 5 cm comporta un elevato rischio di ribaltamento, danni alla sedia e possibili lesioni.** Se la sedia è dotata di un sistema di bloccaggio aggiuntivo per il trasporto in veicoli, questo può influire sulla manovrabilità e sulla stabilità, pertanto è necessario prestare la massima attenzione. Quando si scende una pendenza o si sale su qualsiasi tipo di cordolo, anche quelli inferiori a 5 cm, si raccomanda di ridurre la velocità di guida e di procedere con la massima cautela, mantenendo sempre un controllo saldo del joystick. Durante la guida in discesa, il baricentro dell'utente si sposta in avanti, quindi se la sedia acquista velocità involontariamente, è necessario rilasciare il joystick per fermarla e riprendere la discesa in modo controllato. Queste misure contribuiscono a garantire la stabilità della sedia, la sicurezza dell'utente e l'integrità dei suoi componenti meccanici ed elettronici.

9. CONTROLLO E MANUTENZIONE

Affinché la sedia a rotelle funzioni in modo ottimale, è fondamentale utilizzarla correttamente e sottoporla a regolare manutenzione.

Un uso e una manutenzione corretti ne prolungheranno la durata e ridurranno il rischio di guasti. Eseguire solo le regolazioni e le operazioni di manutenzione descritte nel presente manuale d'uso. Qualsiasi altro tipo di assistenza, riparazione o manutenzione deve essere effettuato da un tecnico qualificato autorizzato da TotalCare Europe.

9.1. PULIZIA

Una cura e una manutenzione regolari contribuiranno a prevenire l'usura e danni inutili al prodotto. Prima di pulire la sedia a rotelle, assicurarsi di scollegarla dall'alimentazione.

9.2. SUPERFICI METALLICHE

Il rivestimento in polvere di alta qualità garantisce una protezione ottimale contro la corrosione. Per la pulizia ordinaria, utilizzare un panno morbido o una spugna con acqua calda e un detergente delicato. Risciacquare con acqua e asciugare accuratamente con un panno pulito.

Per rimuovere i segni di abrasione dalle superfici semilucide, applicare una cera morbida seguendo

le istruzioni del produttore. Sulle superfici lucide, rimuovere graffi e segni di usura utilizzando un lucidante per auto, quindi applicare una cera morbida per ripristinare la lucentezza originale.

9.3. PLASTICA

Per la pulizia ordinaria, lavare le superfici in plastica con un panno morbido, acqua calda e un detergente delicato. Risciacquare bene con acqua e asciugare con un panno pulito e morbido. Non utilizzare solventi o utensili abrasivi..

9.4. TESSUTI E PNEUMATICI

Per la pulizia regolare dei rivestimenti, utilizzare acqua tiepida e un sapone delicato non abrasivo. Utilizzare un panno morbido o una spazzola per rimuovere lo sporco. Rimuovere i residui di acqua o schiuma con un panno pulito e asciutto e lasciare asciugare completamente la superficie. Per le macchie più ostinate, ripetere il processo secondo necessità.

Le macchie di inchiostro possono essere rimosse con acqua e sapone o con alcool isopropilico. Non utilizzare metodi di pulizia diversi da quelli indicati, poiché potrebbero danneggiare i pneumatici o la tappezzeria e invalidare la garanzia della sedia a rotelle.

Se lo si desidera, è possibile rimuovere il rivestimento del pneumatico prima di pulirlo. Per maggiori dettagli, consultare le istruzioni di pulizia.

Programma di manutenzione	Gior- nale	Settima- nale	Mensile	Annuale
Controllare l'indicatore di carica della batteria e ricaricarla se necessario	X			
Assicurarsi che il joystick e gli altri pannelli di controllo non siano danneggiati	X			
Assicurarsi che tutte le parti rimovibili siano ben fissate	X			
Controllare l'usura delle cinture e delle fibbie	X			
Se la sedia a rotelle è dotata di ruote pneumatiche,		X		
controllare i pneumatici e gonfiarli se necessario		X		
Assicurarsi che le luci e gli indicatori di direzione dell'Atlantik Flex funzionino e siano puliti			X	
Pulire la sedia a rotelle e seguire le istruzioni di manutenzione			X	
Controllare l'usura dei rivestimenti, dei sedili e dei supporti			X	
Verificare che la modalità ruota libera e il joystick della ruota libera funzionino correttamente				X

10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La presente guida alla risoluzione dei problemi descrive i guasti e gli eventi più frequenti che possono verificarsi durante l'uso della sedia a rotelle, nonché le azioni consigliate per la loro correzione.

Tuttavia, questa guida non copre tutti i possibili problemi o situazioni che potrebbero verificarsi. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, vi consigliamo di contattare il vostro ortopedico per ricevere supporto tecnico specializzato. Tutte le operazioni di diagnosi, risoluzione dei problemi e riparazione dei sistemi elettronici devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato ed esperto nell'elettronica delle sedie a rotelle, al fine di garantire la sicurezza dell'utente e l'integrità dei componenti dell'apparecchiatura.

Incidenza	Possibile causa	Rimedio
La sedia a rotelle non può essere guidata.	Caricabatteria collegato	Scogliere il caricabatteria.
	Sedia a rotelle in modalità ruota libera	Uscire dalla modalità ruota libera e riavviare la sedia a rotelle.
	La sedia a rotelle è bloccata	Aprire la sedia a rotelle.
	Una funzione del sedile ha attivato la soppressione automatica della guida	Assicurarsi che lo schienale non sia reclinato e che il sedile non sia inclinato o sollevato.
	Surriscaldamento del motore	Scogliere l'alimentazione e attendere che il motore si raffreddi.
La sedia a rotelle si spegne automaticamente dopo un periodo di inattività (20-30 minuti).	Modalità risparmio energetico attivata	Premere il pulsante di avvio sul pannello di controllo per riaccendere la sedia a rotelle.
La sedia a rotelle si ferma durante il tragitto	È scattato l'interruttore principale	Ripristinare l'interruttore principale, ulteriori informazioni a pagina 14
Le sedie a rotelle rallentano soltanto	La funzione del sedile attiva il limite di velocità automatico	Assicurarsi che lo schienale non sia reclinato e che il sedile non sia inclinato o sollevato
La sedia a rotelle non parte	Scarica della batteria	Caricare la batteria
	Il cavo di collegamento al pannello di controllo si è staccato	Collegare il cavo al controller
	L'interruttore principale è stato disattivato	Collegare l'interruttore principale, ulteriori informazioni a pagina 14
Sedia a rotelle non ricaricabile	L'interruttore principale è stato disattivato	Collegare l'interruttore principale, ulteriori informazioni a pagina 14
	L'interruttore di carica è scattato	Attendere cinque minuti affinché si ricarichi. L'interruttore si ripristinerà automaticamente

11. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Il prodotto da te acquistato è tutelato da tale garanzia, per difetto di conformità del cliente che si manifesti entro il termine di 3 anni dalla data di acquisto del prodotto o dalla data di consegna.

AMBITO DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 24 mesi dall'acquisto del prodotto, da 2 anni a 3 anni, il consumatore deve continuare a contattare il venditore per riparare il difetto di conformità del bene, ma se necessario, il l'utente deve dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della fabbricazione e non a causa di uso improprio o mancanza di manutenzione. L'ambito territoriale di questa Garanzia è per l'intero territorio nazionale spagnolo.

La presente Garanzia non pregiudica i diritti a disposizione del consumatore in conformità con le disposizioni del regio decreto-legge 7/2021, del 27 aprile, che recepisce le direttive dell'Unione europea in difesa dei consumatori.

PROCEDURA PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il consumatore dovrà recarsi presso il punto vendita dove ha acquistato il prodotto, nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile. È possibile contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com.

È indispensabile presentare una copia della fattura o dello scontrino di acquisto, o una bolla di consegna successiva alla fattura o allo scontrino, al momento del reclamo, che indichi chiaramente il prodotto acquistato e la data.

Il consumatore deve consegnare il prodotto nello stesso luogo in cui è stato acquistato, accompagnato da una nota esplicativa del difetto di conformità.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente dal mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale o causato da altri fattori umani, uso improprio, collisione con un oggetto...
- Danni causati da incidente, abuso, negligenza o uso improprio.
- Danni causati da incendi, inondazioni, tempeste o qualsiasi evento naturale.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore o dal venditore.
- Se le parti utilizzate non sono prodotte dalla nostra azienda.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli articoli soggetti a usura.
- Riparazione o la sostituzione della parte difettosa sarà effettuata da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE APPARENTEMENTE DANNEGGIATO O MANCANTE DI PARTI.

CONTATTA IL TUO FORNITORE.

ATLANTIK

IM BY TOTALCARE



Etichettatura legenda.



Conformità europea



Dovresti fare riferimento alle istruzioni di utilizzo per ottenere informazioni sulla sicurezza



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Informazioni sul produttore



Data di produzione



Rappresentante europeo



Lotto



Riferimento prodotto



Numero di serie



Dispositivo medico conforme al MDR

Manuale d'uso

Sedia a rotelle elettrica compatta e ribaltabile **Atlantik Flex**

V1 · 27/01/2026