

ATLANTIK
im BY TOTALCARE



Atlantik Flex

Fauteuil roulant électrique
compact et inclinable

MANUEL D'UTILISATION

Ref. SEFACATLANFLEXM55BMN

plus de 50 ans de vie sans limites

⚠ Remarque importante

Les caractéristiques techniques indiquées sont indicatives, car elles peuvent faire l'objet de modifications de conception en fonction des exigences de fabrication.

Le produit présenté dans ce catalogue n'a pas nécessairement été photographié dans sa configuration standard.

Veuillez consulter notre site web pour voir le modèle mis à jour.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

Merci d'avoir acheté un produit **IM** by **TotalCare Europe**.

Le produit que vous avez acheté est doté de la technologie la plus avancée et a subi les tests les plus exigeants.

L'expérience acquise au fil du temps permet à nos produits d'offrir les meilleures performances, afin que vous puissiez profiter toujours plus de la liberté et de l'autonomie dont vous avez besoin au quotidien.

Nous vous suggérons de prendre quelques instants pour lire les instructions fournies. Vous vous familiariserez ainsi avec votre nouveau fauteuil roulant électrique **Atlantik Flex**, ce qui vous permettra d'en tirer le maximum de performances et de durée de vie.


plus de **50 ans** de vie **sans limites**

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE.

Il est important de lire le manuel avant d'utiliser le produit.

1 — Parties de la chaise iTaka.....	4
2 — Description du produit	4
3 — Caractéristiques du produit.....	5
4 — Consignes de sécurité.....	7
5 — Fonctionnement et dangers	9
6 — Utilisation et assemblage	10
7 — Batterie et charge.....	13
8 — Conservation et autres indications.....	14
9 — Essais et maintenance	15
10 — Dépannage	16
11 — Garantie	17

1. PARTIES DE LA CHAISE

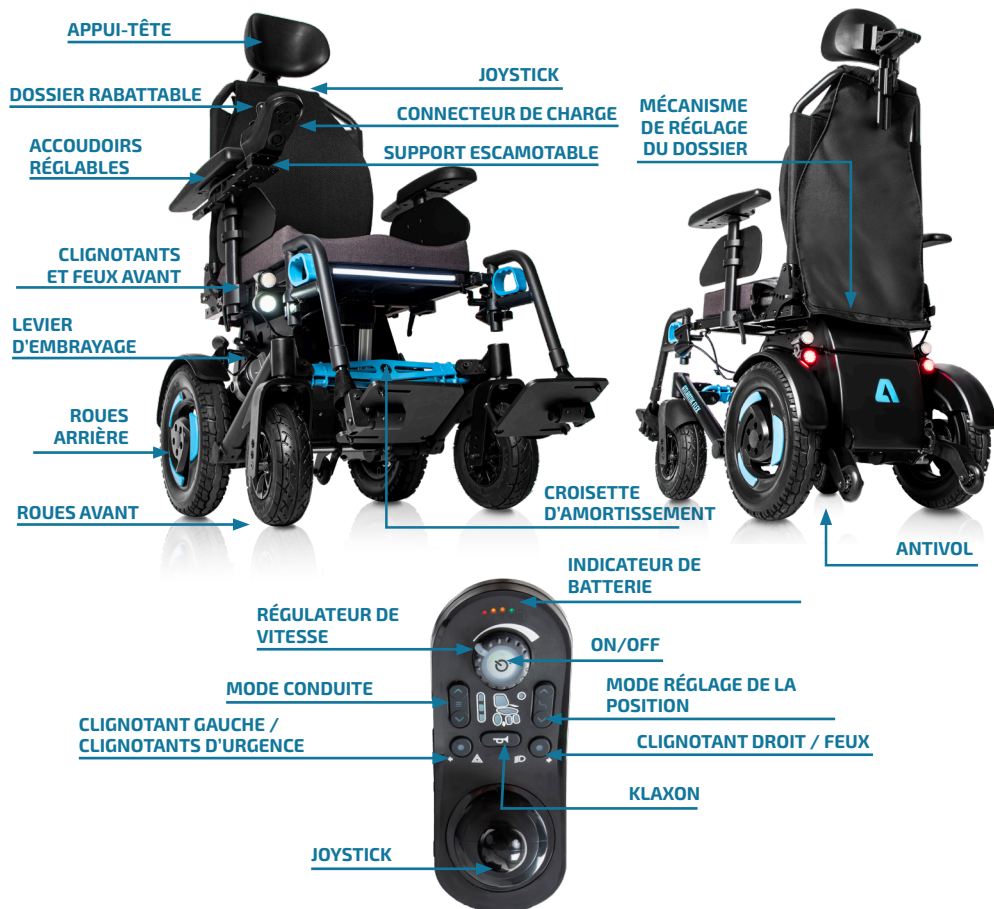

2. DESCRIPTION DU PRODUIT

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE COMPACT ET BASCULANT

L'Atlantik Flex se distingue par sa taille compacte, idéale pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

Sa caractéristique la plus innovante est son système d'amortissement à croisillon, qui permet à la suspension de fléchir et de basculer pour s'adapter à tous les types de terrains, adoucissant les irrégularités pour l'utilisateur et facilitant le passage sur des bordures jusqu'à 10 cm.

Le fauteuil offre une inclinaison manuelle et un basculement électronique. Équipé de deux puissants moteurs de 450 W, il atteint une vitesse maximale de 10 km/h. Ses deux batteries gel de 55 Ah offrent une autonomie pouvant atteindre 40 km.

De plus, il intègre un système avancé d'éclairage LED et de clignotants, entièrement contrôlable à partir du joystick.

3. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions	
Largeur totale	59,5 cm
Profondeur sans repose-pieds	81 cm
Profondeur avec repose-pieds	109 cm
Hauteur totale	110 cm
Hauteur de l'assise au sol sans coussin	49 cm
Hauteur de l'assise au sol avec coussin	56 cm

Dimensions plié	
Profondeur plié	59,5 cm
Largeur plié	81 cm
Hauteur plié	62 cm

Poids	
Poids total (batterie incluse)	86 kg
Poids maximal supporté	150 kg

Matériel	Acier
----------	-------

Couleur	Noir mat et bleu
---------	------------------



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assise

Largeur de l'assise (base réglable)	40 - 50 cm
Largeur du coussin	44 cm / 55 cm
Largeur utile pour s'asseoir (accoudoirs réglables)	42 - 68 cm
Profondeur de l'assise (réglable)	46,5 - 54 cm
Hauteur de l'assise au sol sans coussin	49 cm
Hauteur de l'assise au sol avec coussin	56 cm
Inclinaison de l'assise	0 - 25° (électronique)

Moteur

Moteur	2 x 450 W
Batterie	2 x 55 (gel)
Autonomie	35 - 40 km
Vitesse maximale	10 km/h

Accoudoirs

Longueur des accoudoirs	41 cm
Largeur des accoudoirs	8 cm
Hauteur des accoudoirs depuis l'assise (réglable)	19 - 30 cm
Type d'accoudoirs	Réglables en largeur et en hauteur

Dossier


Largeur du dossier	44 cm
Hauteur du dossier	52 cm
Type de dossier	Réglable à l'aide de cinq sangles
Inclinaison du dossier	90° - 130° (manuel)

Roues

Dimensions des roues avant	Ø22 cm
Dimensions des roues arrière	Ø34 cm
Largeur des roues avant	7 cm
Largeur des roues arrière	7 cm
Type de roues	Massives

Autres caractéristiques

Hauteur maximale des bordures	10 cm
Ceinture, klaxon et roues anti-basculement	Oui
Contrôleur	Dynamic
Fourches avant	Aluminium
Joystick	Retractable
Pente maximale d'escalade	10°
Rayon de braquage	150 cm
Repose-pieds	Réglables en hauteur, en profondeur et en inclinaison

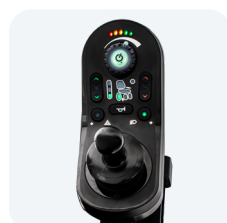

4. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

4.1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser le fauteuil roulant pour la première fois, il est impératif de lire et de comprendre entièrement ce manuel d'utilisation. Son objectif est de fournir les informations nécessaires pour utiliser et entretenir votre fauteuil roulant correctement et en toute sécurité. De même, avant d'utiliser tout accessoire, vous devez lire et comprendre le manuel spécifique correspondant.

Ce manuel comprend plusieurs avertissements de sécurité qui doivent être respectés à tout moment. Chaque fois que vous voyez le symbole d'exclamation, consultez ce chapitre pour obtenir l'avertissement correspondant.

4.2. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

Votre fauteuil roulant est un équipement médical complexe qui doit être utilisé en toute sécurité. Ce chapitre fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation correcte et sûre du produit.

TotalCare Europe décline toute responsabilité en cas de non-respect des avertissements et des instructions contenus dans ce manuel d'utilisation, ou en cas de non-respect des bonnes pratiques. De même, TotalCare Europe ne saurait être tenu responsable des dommages corporels ou matériels résultant de décisions ou d'utilisations inappropriées de l'équipement.

⚠ AVERTISSEMENT: Lorsque vous utilisez l'Atlantik Flex comme siège dans un véhicule, celui-ci doit être orienté vers l'avant et le port de la ceinture de sécurité, y compris les ceintures épaulières et abdominales, est obligatoire afin de réduire le risque que la tête ou le torse heurtent les composants du véhicule. Le fauteuil roulant a été conçu et testé exclusivement pour ce type d'utilisation. Son utilisation dans toute autre configuration de sièges du véhicule pourrait entraîner des blessures graves, voire mortelles..

⚠ AVERTISSEMENT: Veillez à utiliser correctement les points d'ancrage et les systèmes d'accrochage. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

⚠ AVERTISSEMENT: Réglez le système de retenue de manière à ce que le mécanisme de déverrouillage ne puisse pas être actionné accidentellement lors d'une collision. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT: Les dispositifs de positionnement pour fauteuils roulants ne remplacent pas les ceintures de sécurité installées dans les véhicules et n'offrent pas la même protection en cas d'accident. L'utilisation d'un dispositif de positionnement à la place d'une ceinture de sécurité peut causer des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT: Utilisez toujours les dispositifs de positionnement correctement fixés, y compris les sangles de fixation. Une fixation inadéquate peut entraîner des blessures.

⚠ AVERTISSEMENT: N'utilisez pas le fauteuil Atlantik Flex pour tirer des objets et n'y suspendez pas de poids excessif, car cela pourrait déstabiliser le fauteuil et provoquer des accidents ou des blessures.

⚠ AVERTISSEMENT: Tenez compte des dimensions de votre fauteuil roulant. Certaines issues de secours ou certains chemins peuvent être trop étroits pour vous permettre de passer en toute sécurité.

⚠ ATTENTION

Ne conduisez pas le fauteuil roulant sur les routes ou les voies publiques. Le fauteuil roulant n'est pas conçu pour circuler comme un véhicule. Respectez toujours les règles de circulation locales et conduisez prudemment.

Ne démontez pas et ne remontez pas le fauteuil roulant ni aucun de ses composants. Votre fauteuil roulant a été spécialement configuré pour répondre à vos besoins, conformément aux indications de votre médecin et de votre orthopédiste. L'installation, la modification ou la réparation du fauteuil nécessite des connaissances techniques, une formation et une expérience spécialisées, qui ne peuvent être fournies que par un atelier agréé par TotalCare Europe.

Le mode roue libre ne doit être utilisé que sur terrain plat et en présence d'un assistant qui contrôle le fauteuil roulant. Son utilisation sur des pentes ou sans assistance peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT: Ne conduisez pas le fauteuil Atlantik Flex si le poids maximal de l'utilisateur, soit 150 kg, est dépassé. Si vous le faites, le fauteuil roulant pourrait vous blesser..

⚠ AVERTISSEMENT: Vous ne devez pas utiliser le fauteuil roulant pour transporter des passagers, quels que soient leur âge ou leur poids. Cela pourrait nuire à la maniabilité et à la stabilité du fauteuil roulant.

⚠ AVERTISSEMENT: Si le siège ou le dossier sont relevés ou inclinés, conduisez toujours à faible vitesse. Ne circulez pas sur des pentes ou sur des obstacles dans ces conditions, car le fauteuil pourrait perdre sa stabilité et provoquer des accidents.

⚠ AVERTISSEMENT: Si le fauteuil roulant ou ses accessoires sont endommagés pendant le transport, la conduite ou pour toute autre raison, cessez immédiatement de l'utiliser et signalez-le dès que possible au magasin d'orthopédie où vous l'avez acheté. Il pourrait être dangereux de continuer à l'utiliser..

⚠ AVERTISSEMENT: Assurez-vous que les composants électroniques ne sont pas exposés à l'humidité. Si vous remarquez qu'un revêtement ou une commande est fissuré ou endommagé, remplacez-le immédiatement. L'exposition à l'humidité peut provoquer des courts-circuits ou des incendies, pouvant entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT: Le fauteuil roulant Atlantik Flex est lourd et comporte de nombreuses pièces mobiles. Il existe donc un risque d'écrasement si le fauteuil est mal réglé ou mal utilisé. Faites particulièrement attention à la position de votre corps et évitez de placer une partie de votre corps entre les pièces mobiles.

⚠ AVERTISSEMENT: Les batteries usagées doivent être éliminées de manière responsable, conformément à la réglementation locale en matière de recyclage.

⚠ AVERTISSEMENT: maintenez les pneus gonflés à la pression recommandée. Une surcharge peut provoquer l'explosion des pneus et causer des blessures.

⚠ AVERTISSEMENT: n'utilisez pas le fauteuil roulant dans les escaliers ou les escaliers roulants.

⚠ AVERTISSEMENT: n'oubliez pas que la consommation d'alcool peut affecter votre capacité à conduire le fauteuil roulant électrique.

⚠ AVERTISSEMENT: n'utilisez pas le fauteuil roulant s'il a subi une chute, a été heurté, exposé au feu, immergé dans l'eau ou impliqué dans un accident de la circulation ou un autre incident grave. Ce type de situation peut causer des dommages importants qui ne sont pas toujours visibles lors d'une inspection. Dans ces cas, contactez votre orthopédiste. Les dommages résultant de ces incidents ne sont pas couverts par la garantie TotalCare Europe.

⚠ AVERTISSEMENT: réglez les repose-pieds de manière à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec le sol pendant la conduite, même lorsque vous circulez sur des rampes ou sur des obstacles. S'ils heurtent le sol, le fauteuil peut perdre sa stabilité, ce qui pourrait entraîner des blessures..

⚠ AVERTISSEMENT: lors de la montée de pentes, du franchissement d'obstacles ou de la conduite sur des terrains irréguliers (comme le sable), le fauteuil roulant nécessite une consommation d'énergie élevée. Nous vous recommandons d'éviter de conduire pendant de longues périodes dans ces conditions.

⚠ AVERTISSEMENT: aconsejamos no utilizar la silla de ruedas en condiciones meteorológicas extremas, como lluvia intensa, tormentas de nieve, calor extremo o frío severo. La exposición prolongada a la luz solar o a temperaturas muy bajas puede hacer que la superficie de la silla se caliente o enfrie en exceso.

⚠ AVERTISSEMENT: cuando la batería se encuentra a una temperatura de 25°C, la silla de ruedas ofrece una autonomía aproximada de 25 kilómetros. Esta autonomía puede verse afectada por la temperatura de la batería.

⚠ AVERTISSEMENT: temperaturas inferiores a 25°C reducen la autonomía. Temperaturas inferiores a -25°C pueden dañar la batería de la silla.

⚠ AVERTISSEMENT: Ne laissez pas des enfants utiliser le fauteuil roulant sans surveillance.

⚠ AVERTISSEMENT: les spécifications indiquées dans ce manuel d'utilisation définissent le poids maximal que le fauteuil roulant peut supporter, ainsi que le poids déclaré de l'utilisateur. Cette valeur comprend à la fois le poids de l'utili-

sateur et celui de tous les effets personnels qu'il transporte.

⚠ AVERTISSEMENT: si le fauteuil roulant ne fonctionne pas correctement ou si vous soupçonnez un problème, arrêtez-le dès que possible, débranchez l'alimentation électrique et contactez votre orthopédiste. Évitez les arrêts et les démarrages brusques. Soyez particulièrement prudent dans les situations suivantes : Près du bord d'une chaussée.

Évitez les arrêts et les démarrages brusques. Soyez particulièrement prudent dans les situations suivantes :

- Près du bord d'une chaussée.

- Lorsque vous roulez sur des surfaces molles ou irrégulières, telles que l'herbe, le gravier, le sable, la glace ou la neige.
- Lorsque vous passez d'une zone à forte adhérence à une zone à faible adhérence.
- Sur des routes étroites ou dans des espaces confinés.

4.3. REMARQUES CONCERNANT LA COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

Les dispositifs électroniques des fauteuils roulants électriques peuvent être affectés par des champs électromagnétiques externes, tels que ceux générés par les téléphones portables ou d'autres équipements électroniques.

5. FONCTIONNEMENT ET DANGERS

5.1. AVANT DE VOUS ASSEoir SUR VOTRE CHAISE

Avant d'utiliser votre fauteuil, il est essentiel d'effectuer certaines vérifications afin de garantir votre sécurité et son bon fonctionnement:

- Vérifiez que la batterie est complètement chargée.
- Assurez-vous d'attacher votre ceinture de sécurité.
- Vérifiez que le fauteuil électrique est complètement ouvert et que les tubes du siège sont correctement positionnés dans les supports latéraux.
- Assurez-vous que le levier du joystick est désactivé afin d'éviter tout mouvement accidentel en cas de contact accidentel avec le joystick.

5.2. ACCUEIL

- Assurez-vous d'être assis en toute sécurité.
- Vérifiez que les repose-pieds sont réglés à la bonne hauteur pour vos pieds.

5.3. ADRESSE

- Utilisez le joystick pour diriger le fauteuil électrique. Il est recommandé de régler la vitesse au niveau le plus bas jusqu'à ce que vous acquériez de l'expérience et de la pratique dans son utilisation.

- Gardez suffisamment d'espace libre lorsque vous tournez le fauteuil électrique afin de vous assurer que les roues ne rencontrent aucun obstacle.
- Soyez particulièrement prudent lorsque vous reculez.

5.4. CONDUITE SUR DES PENTES, DES CÔTES ET DES RAMPES

- Ne conduisez pas le fauteuil roulant sur des pentes dont l'inclinaison est supérieure à 10°. Rouler sur des pentes raides peut déstabiliser le fauteuil et causer des blessures. Pour garantir des performances optimales et une plus grande stabilité, soyez particulièrement prudent sur les pentes supérieures à 6°.
- Lorsque vous montez ou descendez une pente, faites-le toujours en ligne droite.
- Évitez de rouler sur des pentes dans n'importe quelle direction, car cela pourrait faire basculer le fauteuil Atlantik Flex et causer des blessures graves.
- Essayez de maintenir le fauteuil électrique en mouvement lorsque vous montez ou descendez une pente. Si vous devez vous arrêter, démarrez et accélérez lentement et prudemment.
- Notez que la distance de freinage du fauteuil électrique peut être considérablement plus longue sur les pentes que sur un terrain plat.

6. UTILISATION ET MONTAGE

6.1. COMMANDE À DISTANCE

Réglage de la vitesse : Une molette vous permet de régler la vitesse maximale à laquelle le fauteuil se déplacera. Tournez-la vers la droite pour l'augmenter ou vers la gauche pour la diminuer.

Bouton klaxon : appuyez sur le bouton pour activer le klaxon.

Prise du chargeur : la prise sert à charger la batterie, branchez le chargeur fourni par TotalCare Europe.

Bouton feux de route : lorsque vous allumez les feux de route, le voyant correspondant s'allume.

Bouton de virage à gauche : maintenez le bouton enfoncé pour activer le clignotant correspondant. Pour le désactiver, appuyez à nouveau sur le bouton ou attendez 15 secondes.

Bouton de virage à droite : maintenez le bouton enfoncé pour activer le clignotant correspondant. Pour le désactiver, appuyez à nouveau sur le bouton ou attendez 15 secondes.

Bouton avertissement : active les 4 clignotants.

Indicateur de batterie : Les LED situées dans la partie supérieure de la commande indiquent l'état de charge :

1) ●●●●●●●● Todos los LED encendidos: sistema encendido.

2) ●●●●●●●● Toutes les LED sont allumées et les vertes à l'extrémité clignotent : surcharge de la batterie. Réduisez votre vitesse si vous roulez en pente.

3) ●●●●●●●● Les voyants rouge et orange sont allumés : batterie à moitié chargée

4) ●●●●●●●● Voyants rouge et orange allumés : batterie faible

5) ●●●●●●●● Seul le voyant rouge est allumé : batterie très faible, rechargez votre fauteuil.


6) ●●●●●●●● Le voyant rouge clignote : batterie au minimum, rechargez immédiatement.

! ATTENTION


Il est interdit de déconnecter l'alimentation pendant la conduite, car cela pourrait entraîner l'arrêt soudain du fauteuil Atlantik Flex et son renversement.

6.2. MONTAGE DE LA CHAISE


Sortez le fauteuil roulant de son emballage. Tirez vers vous la sangle située derrière le dossier. Placez la sangle dans la position souhaitée et vérifiez qu'elle est bien fixée et stable.

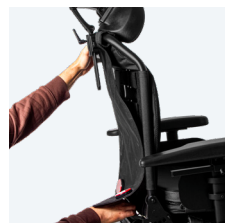

Pour monter les repose-pieds, soulevez la poignée vers le haut et tournez le repose-pied de l'extérieur vers l'intérieur jusqu'à ce que la goupille s'enclenche dans le support.

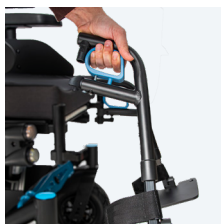

À l'aide de la molette latérale, serrez la fixation de l'accoudoir. Si vous avez besoin d'une plus grande course, déplacez le capuchon en plastique vers l'extérieur afin de pouvoir le tourner sans exercer de force sur la vis.

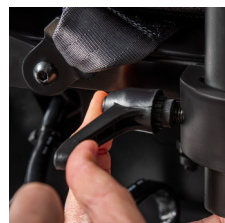

6.3. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE L'ACCOUDOIR

Pour régler la hauteur de l'accoudoir, desserrez la vis à molette latérale afin de libérer la fixation.

Si vous avez besoin d'une plus grande amplitude, déplacez le capuchon en plastique vers l'extérieur afin de pouvoir tourner la vis à molette sans exercer de pression sur la vis.




Une fois libérée, réglez la hauteur de l'accoudoir et resserrez-la fermement.



6.4. RÉGLAGE DE LA LARGEUR DES ACCOUDOIRS

La largeur des accoudoirs peut être facilement réglée. Pour plus de confort lors du réglage, il est recommandé d'incliner le siège au maximum.


Desserrez la vis à l'aide de la clé Allen de 6 mm fournie, faites glisser l'accoudoir jusqu'à obtenir la largeur souhaitée, puis resserrez la vis pour le fixer correctement.

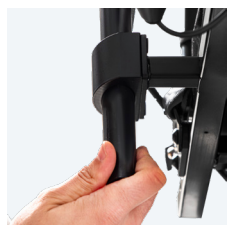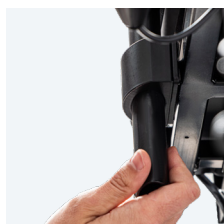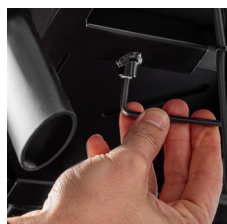

6.5. INCLINAISON DU DOSSIER

Le dossier du fauteuil Atlantik Flex peut être incliné manuellement et offre quatre positions. De plus, il peut être rabattu vers l'avant si nécessaire, s'ajustant sur le coussin pour réduire la taille du fauteuil.

Pour **incliner le dossier**, tirez sur la poignée inférieure située à l'arrière. Cela permettra de déverrouiller les goupilles et vous pourrez alors régler l'inclinaison. Une fois la position souhaitée atteinte, relâchez la poignée pour que les goupilles s'enclenchent correctement. Assurez-vous toujours que le dossier est bien verrouillé avant d'utiliser la chaise.

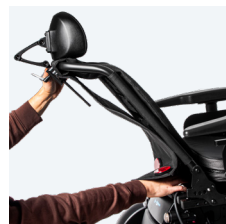


6.6. INCLINAISON DU SIÈGE

La fonction d'inclinaison électronique incline toute la section du siège du fauteuil Atlantik Flex, y compris le dossier, l'assise et les repose-pieds.

Lorsque le fauteuil est incliné, la vitesse maximale est automatiquement réduite ou, dans certains cas, la capacité de conduite est complètement bloquée. Le voyant jaune s'allume pour indiquer la réduction de vitesse, tandis que le voyant rouge avertit que le moteur est limité.

Pour **régler l'inclinaison du siège**, appuyez d'abord sur le bouton indiqué sur la photo. Lorsque le joystick affiche le voyant indiquant que le siège est en mode de réglage de l'inclinaison, poussez le joystick vers l'avant pour incliner le siège vers l'arrière et poussez le joystick vers l'arrière pour le ramener à sa position initiale.

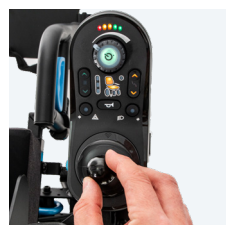

6.7. RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DES REPOSE-PIEDS

À l'aide d'une clé de 5, desserrez la vis située sur le côté du siège tout en maintenant l'écrou à l'aide d'une clé fixe de 13. Faites glisser le support du repose-pieds jusqu'à la position souhaitée et revissez-le.



6.8. RÉGLAGE DES REPOSE-PIEDS

Réglage de la hauteur: à l'aide d'une clé de 4, desserrez les deux vis situées à l'arrière du repose-pieds. Réglez la hauteur et resserrez les vis.



Réglage de l'inclinaison: au bas de la plate-forme, desserrez les deux écrous à l'aide d'une clé fixe de 10. Retirez la partie supérieure de la plate-forme pour découvrir deux vis. Desserrez ces vis à l'aide d'une clé de 4 sans les retirer complètement, réglez la plate-forme à l'inclinaison souhaitée et resserrez-les. Enfin, remontez la partie supérieure de la plate-forme.





Réglage de la largeur de la plate-forme: desserrez les deux écrous situés au bas de la plate-forme à l'aide d'une clé fixe de 10. Faites glisser une plaque de la plate-forme sur l'autre jusqu'à obtenir la largeur souhaitée, puis resserrez.





6.9. RÉGLAGE DE L'APPUI-TÊTE

Vous pouvez régler la hauteur de l'appui-tête à l'aide de la molette arrière pour le débloquer. Une fois débloqué, réglez la hauteur et rebloquez-le. Vous pouvez également bloquer les deux articulations de l'appui-tête en serrant les deux vis à l'aide de la clé Allen de 5.

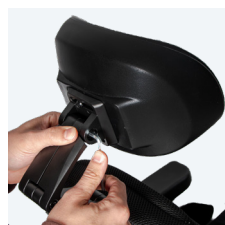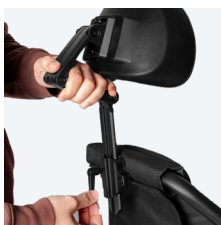


6.10. RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DU SIÈGE

À l'arrière, sur les côtés du siège, desserrez les deux vis à l'aide de la clé Allen de 5 fournie. Déplacez le support du dossier jusqu'à la position souhaitée pour augmenter ou réduire la profondeur du siège, puis revissez en veillant à bien fixer également le support de la ceinture.

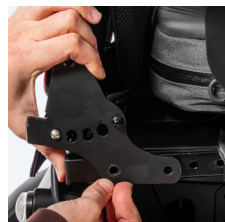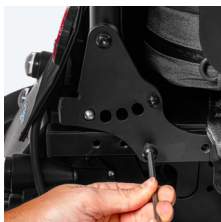


6.11. RÉGLAGE DE LA LARGEUR DU SIÈGE

Pour régler la largeur du siège, inclinez la chaise au maximum afin de travailler plus confortablement. À l'aide d'une clé de 6, desserrez les quatre vis situées sur les barres transversales avant et arrière. Une fois les vis desserrées, faites glisser les côtés du siège jusqu'à la position souhaitée et resserrez les vis.

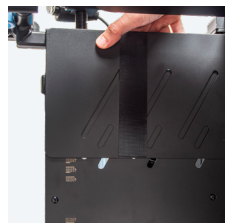

6.12. UTILISATION DU DÉGAGEMENT DU MOTEUR (ROUE LIBRE)

Tirez la poignée de chaque moteur vers la position ouverte, vers l'extérieur du fauteuil, pour débloquer les freins et permettre la poussée manuelle du fauteuil. Dans cette position, la fonction électrique est désactivée. Pour réactiver le mode électrique, poussez la poignée vers la position fermée, vers l'intérieur du fauteuil. Dans cette configuration, le fauteuil ne peut pas être poussé manuellement.

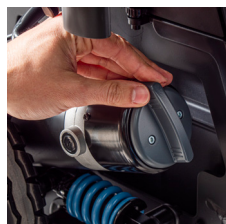

6.13. INTERRUPTEUR ALIMENTATION

Si le fauteuil ne s'allume pas, il est possible que l'interrupteur général d'alimentation soit éteint. Appuyez dessus pour rétablir l'alimentation électrique.



6.14. CHANGEMENT DE CÔTÉ DU JOYSTICK

Commencez par retirer le rembourrage de l'accoudoir à l'aide d'une clé Allen de 4 et en retirant les

4 vis inférieures. Desserrez la vis latérale du support du joystick à l'aide d'une clé de 5 et retirez le joystick ainsi que le tube qui le soutient.

Ensuite, à l'aide d'une clé Allen de 4 et d'une clé fixe de 8, retirez le support du joystick. Répétez la même procédure de l'autre côté pour retirer le rembourrage de l'accoudoir.

Placez le support du joystick de l'autre côté à l'aide des vis et des écrous correspondants, puis re-vissez tous les composants.



7. BATTERIE ET CHARGE


7.1. CHARGE DE LA BATTERIE

Vous pouvez recharger votre fauteuil roulant à l'aide de la commande. La prise de recharge se trouve à l'avant du joystick.

Après avoir branché le chargeur, connectez le câble de recharge au fauteuil roulant avant de le brancher à une prise électrique externe. N'utilisez pas le fauteuil pendant qu'il est en cours de recharge.

Rechargez le fauteuil aussi souvent que possible. Ne l'utilisez pas si le niveau de la batterie est faible, car vous risqueriez de vous retrouver immobilisé. Si la batterie est complètement déchargée, rechargez-la immédiatement.

Utilisez uniquement le chargeur fourni par Total-Care Europe et veillez à effectuer la recharge dans une pièce sèche et bien ventilée. Rechargez toujours à l'intérieur. Pour plus d'informations, contactez votre orthopédiste.

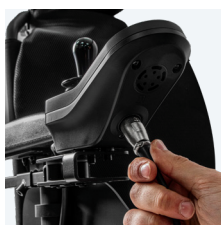

8. CONSERVATION ET AUTRES INDICATIONS

8.1. RANGEMENT DU FAUTEUIL ATLANTIK FLEX

Le fauteuil roulant Atlantik Flex peut être stocké pendant des périodes courtes ou longues, mais il est essentiel de respecter certaines précautions afin de garantir l'intégrité de ses composants électriques et mécaniques, ainsi que la durée de vie de la batterie et l'état général de la structure.

En cas de stockage temporaire ou de courte durée, il est recommandé de placer le fauteuil dans un environnement sec, stable et à température contrôlée supérieure à 5 °C afin d'éviter que la batterie ne se décharge ou que les composants électriques ne soient affectés par la condensation et l'humidité, ce qui pourrait augmenter la susceptibilité à la corrosion des contacts et des connexions.

En cas de **stockage prolongé**, avant de ranger le fauteuil, il faut s'assurer que la batterie est complètement chargée et que le disjoncteur principal a été déconnecté afin d'éviter toute consommation résiduelle d'énergie susceptible d'endommager la batterie ou les systèmes électroniques. Pendant cette période d'inactivité, il est conseillé de recharger la batterie tous les mois en reconnectant temporairement le disjoncteur principal et en utilisant le chargeur fourni par TotalCare Europe, en suivant strictement nos instructions, afin de maintenir la capacité de stockage de la batterie et d'éviter toute défaillance électrique ou mécanique. Il est également recommandé d'inspecter occasionnellement le fauteuil pendant le stockage afin de vérifier qu'il n'y a pas d'accumulation d'humidité, de déformations ou de signes d'usure sur les composants, garantissant ainsi que le fauteuil sera prêt à être utilisé immédiatement en cas de besoin.

8.2. INTERRUPTEUR PRINCIPAL

Le fauteuil roulant Atlantik Flex est équipé d'un disjoncteur principal qui permet de couper en toute sécurité l'alimentation électrique du fauteuil, par exemple pendant son transport ou lorsqu'une coupure temporaire de courant est nécessaire pour des raisons de sécurité ou d'entretien.

En cas de défaillance du circuit électrique, le disjoncteur se déclenche automatiquement pour protéger les composants électroniques et éviter des dommages plus importants. La première fois que cela se produit, l'utilisateur peut réinitialiser le disjoncteur manuellement à l'aide du levier situé à l'arrière du fauteuil, après s'être assuré que le panneau de commande est fermé afin d'éviter tout risque électrique.

Si le disjoncteur se déclenche à plusieurs reprises, il est recommandé de ne pas tenter de le réinitialiser soi-même et de contacter immédiatement votre orthopédiste afin qu'il procède à une inspection et à une réparation appropriées. L'utilisation correcte du disjoncteur principal contribue à la sécurité de l'utilisateur et au bon entretien du système électrique du fauteuil, en évitant d'endommager les moteurs, la batterie et les composants électroniques de contrôle.

8.3. RESTRICTIONS DE CIRCULATION

Lorsque vous conduisez le fauteuil roulant Atlantik Flex, il est important de tenir compte des limitations de hauteur des obstacles et de la sécurité de l'utilisateur. **Le fauteuil peut franchir des obstacles jusqu'à 5 cm en toute sécurité et, dans des conditions contrôlées, il est capable de monter des bordures jusqu'à 10 cm ; cependant, tenter de franchir des obstacles supérieurs à 5 cm comporte un risque élevé de renversement, d'endommagement du fauteuil et de blessures éventuelles.** Si le fauteuil est équipé d'un système de verrouillage supplémentaire pour le transport en véhicule, celui-ci peut affecter la maniabilité et la stabilité. Il convient donc d'être extrêmement prudent. Lors d'une descente ou lors du franchissement d'un trottoir, même inférieur à 5 cm, il est recommandé de réduire la vitesse et de procéder avec la plus grande prudence, en gardant toujours un contrôle ferme du joystick. En descendant une pente, le centre de gravité de l'utilisateur se déplace vers l'avant. Si le fauteuil prend de la vitesse involontairement, il faut lâcher le joystick pour l'arrêter et reprendre la descente de manière contrôlée. Ces mesures contribuent à garantir la stabilité du fauteuil, la sécurité de l'utilisateur et l'intégrité de ses composants mécaniques et électroniques.

9. ESSAIS ET MAINTENANCE

Pour que le fauteuil roulant fonctionne de manière optimale, il est essentiel de l'utiliser correctement et de l'entretenir régulièrement.

Une utilisation et un entretien appropriés prolongeront sa durée de vie et réduiront le risque de pannes. Effectuez uniquement les réglages et les tâches d'entretien décrits dans ce manuel d'utilisation. Tout autre type d'entretien, de réparation ou de maintenance doit être effectué par un technicien qualifié agréé par TotalCare Europe.

9.1. NETTOYAGE

Un entretien et une maintenance réguliers contribueront à prévenir l'usure et les dommages inutiles de votre produit. Avant de nettoyer le fauteuil roulant, veillez à le débrancher de l'alimentation électrique.

9.2. SURFACES MÉTALLIQUES

Le revêtement en poudre de haute qualité offre une protection optimale contre la corrosion. Pour le nettoyage régulier, utilisez un chiffon doux ou une éponge avec de l'eau chaude et un détergent doux. Rincez à l'eau et séchez soigneusement avec un chiffon propre.

Pour éliminer les traces d'abrasion sur les surfaces semi-mates, appliquez une cire douce en suivant les instructions du fabricant. Sur les surfaces brillantes,

éliminez les rayures et les traces d'usure à l'aide d'un polish pour voiture, puis appliquez une cire douce pour restaurer la brillance d'origine.

9.3. PLASTIQUES

Pour le nettoyage courant, lavez les surfaces en plastique avec un chiffon doux, de l'eau chaude et un détergent doux. Rincez abondamment à l'eau et séchez avec un chiffon propre et doux. N'utilisez pas de solvants ni d'ustensiles abrasifs.

9.4. TISSUS ET PNEUS

Pour le nettoyage régulier des tissus d'ameublement, utilisez de l'eau tiède et un savon doux non abrasif. Utilisez un chiffon doux ou une brosse pour éliminer la saleté. Essayez l'eau ou la mousse restante avec un chiffon propre et sec, puis laissez la surface sécher complètement. Pour les taches plus tenaces, répétez le processus autant de fois que nécessaire.

Les taches d'encre peuvent être éliminées avec de l'eau et du savon ou de l'alcool isopropylique. N'utilisez pas d'autres méthodes de nettoyage que celles indiquées, car elles pourraient endommager les pneus ou le revêtement et annuler la garantie du fauteuil roulant.

Si vous le souhaitez, vous pouvez retirer le revêtement du pneu avant de le nettoyer. Pour plus de détails, consultez les instructions de nettoyage.

Programme d'entretien	Quotidien	Hebdomadaire	Mensuel	Annuel
Vérifiez l'indicateur de charge de la batterie et rechargez-la si nécessaire	X			
Assurez-vous que le joystick et les autres panneaux de commande ne sont pas endommagés	X			
Assurez-vous que toutes les pièces amovibles sont bien fixées	X			
Vérifiez l'usure des ceintures et des boucles	X			
Si le fauteuil roulant est équipé de roues pneumatiques, vérifiez les pneus et gonflez-les si nécessaire.		X		
Assurez-vous que les feux et les clignotants de l'Atlantik Flex fonctionnent et sont propres.		X		
Nettoyez le fauteuil roulant et suivez les instructions d'entretien.			X	
Vérifiez l'usure du rembourrage, des sièges et des supports.			X	
Vérifiez que le mode roue libre et le joystick roue libre fonctionnent correctement			X	
Inspection complète, contrôle de sécurité et entretien effectués par un orthopédiste agréé pour votre fauteuil Atlantik Flex				X

10. DÉPANNAGE

Le présent guide de dépannage décrit les pannes et les événements les plus fréquents pouvant survenir lors de l'utilisation du fauteuil roulant, ainsi que les mesures recommandées pour y remédier.

Toutefois, ce guide ne couvre pas tous les problèmes ou situations possibles. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, nous vous recommandons de contacter votre orthopédiste pour obtenir une assistance technique spécialisée. Toutes les tâches de diagnostic, de dépannage et de réparation des systèmes électroniques doivent être effectuées exclusivement par du personnel qualifié et expérimenté dans le domaine de l'électronique des fauteuils roulants, afin de garantir la sécurité de l'utilisateur et l'intégrité des composants de l'équipement.

Incidence	Cause possible	Remède
Le fauteuil roulant ne peut pas être conduit	Chargeur de batterie connecté	Débranchez le chargeur de batterie
	Fauteuil roulant en mode roue libre	Quittez le mode roue libre et redémarrez le fauteuil roulant
	Le fauteuil roulant est bloqué	Ouvrez le fauteuil roulant
	Une fonction du siège a activé la suppression automatique de la conduite	Assurez-vous que le dossier n'est pas incliné et que le siège n'est pas incliné ou relevé
Le fauteuil roulant s'éteint automatiquement après une période d'inactivité (20 à 30 minutes)	Surchauffe du moteur	Débranchez l'alimentation et attendez que le moteur refroidisse.
	Mode économie d'énergie activé	Appuyez sur le bouton de démarrage du panneau de commande pour remettre le fauteuil roulant sous tension.
Le fauteuil roulant s'arrête pendant la marche	Le disjoncteur principal s'est déclenché	Réinitialisez le disjoncteur principal, plus d'informations à la page 14.
Les fauteuils roulants ne font que ralentir	La fonction du siège active la limitation automatique de la vitesse	Assurez-vous que le dossier n'est pas incliné et que le siège n'est pas incliné ou relevé.
Le fauteuil roulant ne démarre pas	Décharge de la batterie	Chargez la batterie.
	Le câble de connexion au panneau de commande s'est détaché	Branchez le câble au contrôleur.
	Le disjoncteur principal a été déclenché	Branchez le disjoncteur principal, plus d'informations à la page 14.
Fauteuil roulant non rechargeable	Le disjoncteur principal a été déconnecté	Branchez le disjoncteur principal, plus d'informations à la page 14.
		Attendez cinq minutes que la batterie se recharge. Le disjoncteur se réenclenchera tout seul.

11. GARANTIE

DURÉE DE LA GARANTIE

Le produit acheté par vous est protégé par cette garantie, pour le défaut de conformité du client qui se manifeste dans une période de 3 ans à compter de la date d'achat du produit ou de la date de livraison.

CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie couvre toute panne ou défaut de fabrication pendant les 24 premiers mois suivant l'achat du produit ; après 2 ans et jusqu'à 3 ans, le consommateur doit continuer à contacter le vendeur pour réparer le défaut de conformité du bien, mais si nécessaire, l'utilisateur doit démontrer que le produit est défectueux en raison de la fabrication et non en raison d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien.

La portée territoriale de cette garantie s'étend à l'ensemble du territoire national espagnol.

Cette garantie n'affecte pas les droits dont dispose le consommateur conformément aux dispositions du décret-loi royal 7/2021, du 27 avril, sur la transposition des directives de l'Union européenne en matière de défense des consommateurs.

PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE LA GARANTIE

S'il est impossible de communiquer avec le point de vente, soit parce qu'il a fermé ses portes, soit parce que le produit a été acheté dans une autre communauté autonome, le consommateur peut s'adresser directement au fabricant par courrier électronique à l'adresse info@totalcare-europe.com.

Au moment de la réclamation, il est indispensable de présenter une copie de la facture ou du ticket de caisse, ou un bon de livraison postérieur à la facture ou au ticket de caisse, indiquant clairement le produit acheté et la date.

Le consommateur doit retourner le produit au même endroit où il a été acheté, accompagné d'une note expliquant le défaut de conformité.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS

- Les dommages causés par une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur en ne respectant pas les instructions données dans ce manuel ou causés par d'autres facteurs humains, une mauvaise utilisation, une collision avec un objet quelconque.
- Les dommages causés par un accident, un abus, une négligence ou une mauvaise utilisation.
- Les dommages causés par un incendie, une inondation, une tempête ou tout autre événement naturel.
- Les produits qui ont été préalablement réparés ou manipulés par du personnel non autorisé par le fabricant ou le vendeur.
- Si les pièces utilisées ne sont pas fabriquées par notre société.
- Tout produit ne portant pas ou ayant eu son numéro de série ou d'usine modifié ou effacé.
- La garantie ne couvre pas les éléments d'usure.
- La réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse sera effectué par du personnel qualifié et autorisé par TotalCare Europe, S.L.

NE PAS UTILISER CE PRODUIT S'IL SEMBLE ENDOMMAGÉ OU S'IL MANQUE DES PIÈCES.

CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR.

ATLANTIK

IM BY TOTALCARE



Légende de l'étiquetage



Conformité européenne



Vous devez vous référer au mode d'emploi pour les informations relatives à la sécurité.



Consultez le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.



Données du fabricant



Date de fabrication



Représentant européen



Lot



Référence du produit



Numéro de série



Dispositif médical conforme au MDR.

Manuel d'utilisation

Fauteuil roulant électrique compact et inclinable **Atlantik Flex**

V1 · 27/01/2026