

iVOLTA



iVolta

Cadeira de rodas
elétrica dobrável

MANUAL DO UTILIZADOR

Ref. SEPALIVOLTAM

mais de 60 anos a viver sem limites

! Nota importante

As características técnicas identificadas são indicativas, uma vez que podem estar sujeitas a alterações de concepção de acordo com as necessidades de fabrico.

O produto presente neste catálogo não foi necessariamente fotografado na sua configuração padrão.

Ver o nosso website para o modelo atualizado.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

OBRIGADO PELA SUA CONFIANÇA.

Obrigado por adquirir um produto **IM by TotalCare Europe**.

O produto que adquiriu está equipado com a tecnologia mais avançada e tem resistido aos testes mais exigentes.

A experiência ao longo do tempo faz com que os nossos produtos ofereçam o melhor desempenho, para que possa desfrutar cada vez mais da liberdade e autonomia de que necessita todos os dias.

Sugerimos que dedique um momento para ler as instruções fornecidas.

Assim poderá familiarizar-se com o sua nova cadeira de rodas elétrica **iVolta**, que lhe permitirá obter o máximo rendimento e vida útil desta.

mais de **60 anos** a viver **sem limites**

GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA.

É importante ler o manual antes de utilizar o produto.

1 — Partes da cadeira iVolta	4
2 — Descrição do produto	4
3 — Características do produto	5
4 — Precauções de utilização	7
5 — Utilização e montagem	10
6 — Manutenção e armazenamento	13
7 — Análise e resolução de problemas.....	14
8 — Garantia	15



1. PARTES DA CADEIRA iVOLTA



2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO SUPERLEVE

A cadeira de rodas elétrica iVolta destaca-se pelo seu design leve e compacto. Graças ao seu chassi de alumínio, pesa apenas 18 kg sem a bateria, mantendo uma grande robustez e uma capacidade de até 125 kg.

As suas dimensões reduzidas, com uma largura total de 59,5 cm e uma profundidade de apenas 74 cm com os apoios para os pés rebatidos, facilitam a manobrabilidade em espaços estreitos.

Equipada com dois motores de 150 W, atinge uma velocidade máxima de 6 km/h. Além disso, está disponível com uma bateria de lítio de 10 Ah ou 15 Ah, oferecendo uma autonomia de até 17 km.

Destaca-se pelo seu design atraente, combinando leveza e funcionalidade num acabamento exclusivo em azul acinzentado mate.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



iVOLTA

INFORMAÇÕES GERAIS

Dimensões

Largura total	59,5 cm
Profundidade sem apoio para os pés	74 - 78 cm*
Profundidade com apoio para os pés	100 - 104 cm*
Altura total	98 cm
Altura do assento ao chão sem almofada	50 cm
Altura do assento ao chão com almofada	56 cm

*Profundidade ajustável através das rodas anti-capotamento.
A profundidade dos apoios para os pés é ajustável em 5 cm.
A medida de 104 cm corresponde à posição máxima.

Dimensões quando dobrada

Profundidade quando dobrada	44 cm
Largura quando dobrada	59,5 cm
Altura quando dobrada	74 cm

Peso

Peso total (sem bateria)	18 kg
Peso total (com bateria de 10 Ah)	19,50 kg
Peso total (com bateria de 15 Ah)	19,85 kg
Peso máximo suportado	125 kg

Material	Alumínio
-----------------	----------

Cor	Azul acinzentado mate
------------	-----------------------



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Assento

Largura do assento	45 cm
Largura útil para sentar (tamanho)	45 cm
Profundidade do assento	44 cm
Altura da almofada	6 cm

Motor

Motor	2 x 150 W
Bateria	10 Ah / 15 Ah (lítio)
Número de baterias	1
Autonomia	8 - 12 km (10 Ah) / 12 - 17 km (15 Ah)
Velocidade máxima	6 km/h

Apoio de braços

Comprimento do apoio de braços	26 cm
Largura do apoio de braços	5 cm
Tipo de apoio de braços	Rebatíveis

Encosto

Largura do encosto	44 cm
Altura do encosto	45 cm
Tipo de encosto	Fixo

Rodas

Dimensões das rodas dianteiras	Ø20 cm
Dimensões das rodas traseiras	Ø29 cm
Largura das rodas dianteiras	4 cm
Largura das rodas traseiras	4,5 cm
Tipo de rodas	Massivas

Outras características

Altura máxima dos rebordos	2,5 cm
Bolso debaixo do assento	30 x 25 x 12 cm (9 L.)
Bolso no encosto	23 x 22 cm
Cinto de segurança	Sim
Buzina	Sim
Inclinação máxima de subida	10°
Raio de viragem	90 cm
Regulação da altura do apoio para os pés	2,5 cm
Regulação da prof. do apoio para os pés	5 cm
Rodas ant capotamento	Sim (removíveis)
Tipo de travões	Eletromagnéticos

*Antes de reservar um voo, recomendamos que entre em contacto com a companhia aérea para confirmar se esta permite o transporte de cadeiras de rodas elétricas com baterias.



4. PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

4.1. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Leia o manual do utilizador: antes de conduzir, é imprescindível ter lido e compreendido na íntegra o manual do utilizador.

Capacidade de carga: a capacidade máxima de carga é de 125 kg. Por favor, evite sobrecarregar o veículo, uma vez que este foi concebido para uso individual e não deve transportar passageiros.

Condições de condução: não conduza sob o efeito do álcool ou em estados de fadiga extrema.

Condução noturna e em condições de baixa visibilidade: evite conduzir à noite ou em condições de visibilidade reduzida.

Autoavaliação antes de conduzir: realize uma autoavaliação antes de cada viagem. Consulte as secções «4.2», «4.3» e «4.4» do manual se for a primeira vez que conduz.

Proteção contra os elementos ambientais: tenha em conta que a cadeira de rodas não é impermeável; por conseguinte, evite expô-la à chuva ou à neve e abstenha-se de conduzir nessas condições meteorológicas.

4.2. ATENÇÃO AO USO

Superfície de circulação: a cadeira de rodas iVolta foi concebida para circular em superfícies planas. Evite terrenos lamacentos, íngremes, fofos, estreitos, gelados ou estradas em mau estado.

Contornar obstáculos: a cadeira de rodas iVolta tem a capacidade de contornar obstáculos, mas recomenda-se reduzir a velocidade e deslocar-se lentamente ao fazê-lo.

Inclinação máxima de subida: a cadeira de rodas pode subir com um ângulo de inclinação máximo de 10°.

Altura máxima dos lancis: não tente ultrapassar lancis com mais de 2,5 cm. Conduzir a iVolta sobre obstáculos que excedam esta altura pode provocar capotamentos e causar lesões graves. Tenha sempre em conta as suas capacidades de condução e quaisquer limitações pessoais.

Evitar aglomerações e tráfego intenso: por favor, evite conduzir em áreas com aglomerações ou tráfego intenso.

Segurança na condução: certifique-se de que o sistema de controlo está devidamente instalado. Mantenha o joystick na posição vertical e sente-se corretamente, apertando o cinto de segurança atempadamente. Em caso de perda de controlo devido a capotamento, apoie-se no encosto.

Ligar e ajustar a velocidade: ao ligar a cadeira, verifique se a velocidade ajustada é adequada às suas capacidades operacionais. Recomenda-se iniciar a condução a baixa velocidade em cada utilização, acelerando gradualmente.

El uso de accesorios y cables que no estén especificados o suministrados por TotalCare Europe, de este equipo puede resultar en un aumento de las emisiones electromagnéticas o una disminución de la inmunidad electromagnética de este equipo, llevando a un funcionamiento inadecuado.

4.3. AVISOS DE UTILIZAÇÃO

Manobras não recomendadas: nunca tente realizar novas manobras por conta própria, para além das indicadas no manual.

Alterações não autorizadas: não efetue quaisquer alterações na cadeira iVolta sem a autorização da TotalCare Europe. A adição de acessórios pode alterar especificações como o peso total, o tamanho ou o centro de gravidade. Tenha em conta que algumas alterações podem danificar objetos nas proximidades.



CUIDADO

Não nos responsabilizamos por danos pessoais ou materiais decorrentes de uma utilização incorreta. Para evitar danos ou lesões decorrentes da utilização inadequada da cadeira de rodas, o utilizador deve tomar medidas de segurança.

Respeite as regras locais de trânsito para peões. Uma vez que pode ser difícil de ser visto, aguarde até que o caminho esteja livre antes de prosseguir com extrema atenção. A utilização de dispositivos de segurança, tais como refletos, vestuário refletor, luzes e símbolos, é essencial para a sua segurança ao circular.

Utilização não prevista: não utilize a cadeira de rodas para fins diferentes dos previstos, tais como treino com pesos, prática de desporto, arrastamento, transporte ou reboque, uma vez que tal pode representar um risco para a segurança e um esforço indevido para a cadeira de rodas.

Fumar na cadeira de rodas: recomendamos vivamente que não fume cigarros enquanto estiver sentado na sua cadeira de rodas.

Assento e modificações: não altere as especificações do assento nem coloque almofadas ou travesseiros sobre o mesmo, uma vez que isso pode resultar em instabilidade e possíveis quedas do utilizador.

Subir ou descer: antes de subir ou descer da cadeira de rodas, sente-se o mais atrás possível para evitar lesões causadas por capotamento.

Apoios de braços e apoios para os pés: evite agarrar-se aos apoios de braços, pois isso pode provocar capotamentos e lesões. Da mesma forma, evite concentrar o seu peso nos apoios para os pés para evitar capotamentos e lesões pessoais.

Utilização de oxigénio: tome precauções extremas ao utilizar oxigénio perto de circuitos elétricos ou materiais inflamáveis. Consulte o seu fornecedor de oxigénio para obter informações sobre a utilização segura.

Modo manual: não utilize a cadeira de rodas no modo manual sem acompanhante, pois isso pode causar lesões. Não se desloque sozinho enquanto estiver sentado; peça ajuda ao seu acompanhante, se necessário..

Ajustes do controlador: atenção. Não altere os ajustes do joystick. Peça ao seu ortopedista para verificar o aparelho caso note alguma alteração na sua capacidade de controlar a cadeira de rodas.

Paragem repentina: durante o funcionamento, a cadeira de rodas pode parar repentinamente. Não a utilize se apresentar anomalias ou irregularidades.

Modo manual em plano inclinado: evite colocar a cadeira de rodas no modo manual em qualquer

plano inclinado, para prevenir a perda de controlo e deslocamentos indesejados.

Permanência numa posição fixa: se pretender permanecer sentado numa posição fixa durante muito tempo, desligue a alimentação para evitar o movimento acidental da cadeira de rodas.

Evite acessórios que interfiram com o joystick, uma vez que podem provocar movimentos inesperados da cadeira de rodas.

4.4. TENHA EM CONTA AS SEGUIN- TES INDICAÇÕES

1. Não ligue o cabo diretamente ao terminal/ clipe da bateria para a carregar.
2. Não ligue outros dispositivos ao sistema eletrónico nem ligue outros dispositivos com a bateria da cadeira de rodas.
3. Ao desligar o feixe de cabos, segure no terminal para evitar danos. Não puxe diretamente pelo feixe de cabos.
4. Ao subir inclinações, conduza em linha reta. Evite formar um ângulo com a inclinação e tenha cuidado ao subir para reduzir a possibilidade de capotamento.
5. O armazenamento prolongado a temperaturas extremas prejudicará o seu funcionamento.
6. Verifique sempre se há corrosão nos componentes elétricos, feixes de cabos e terminais.
7. Não retire o fusível do chicote da bateria. Se estiver danificado, contacte o seu ortopedista para o substituir.
8. Desça inclinações à velocidade mínima. Se a velocidade for superior à esperada, solte a alavanca do joystick para parar a cadeira e, em seguida, pressione-a ligeiramente para controlar a velocidade de descida. Contacte o seu ortopedista se algum acessório da unidade de assento se soltar; substitua imediatamente as peças desgastadas ou danificadas.
9. Não leve a cadeira de rodas para o duche, banheira, piscina ou sauna. Condições como chuva, neve, sal, nevoeiro ou superfícies geladas podem causar corrosão prematura nos parafusos e componentes.

10. A marcha-atrás só é possível em estradas planas. Faça-o suavemente e a baixa velocidade, parando frequentemente para verificar se há obstáculos. Evite inclinar-se para a frente ou para trás ao longo da inclinação, para evitar capotamentos.
11. Evite qualquer posição ou movimento que possa alterar o seu centro de gravidade enquanto estiver sentado na sua cadeira iVolta, uma vez que isso poderá provocar inclinações.
12. Não apoie todo o peso num único lado do apoio de braços, pois isso pode provocar o capotamento. Evite colocar as mãos por cima do assento ou inclinar o corpo para evitar quedas.
13. Não conduza a cadeira de rodas à beira de ribeiros, lagos ou mares. Evite conduzir na água. Evite a exposição prolongada a ambientes excessivamente quentes ou frios, uma vez que isso pode danificar partes da cadeira, bem como a bateria e outros componentes elétricos.
14. Não arraste a cadeira de rodas para evitar danos em peças essenciais devido à velocidade excessiva.
15. Tenha muito cuidado ao subir e descer escadas com a cadeira de rodas parada. O dobramento da cadeira de rodas deve ser realizado com a ajuda de pessoas fisicamente capazes.
16. Não utilize a cadeira de rodas em estado de embriaguez. O consumo de álcool pode afetar a condução segura da cadeira de rodas.
17. Nem todas as cadeiras de rodas são iguais. Por favor, reserve algum tempo para aprender como funciona a cadeira iVolta antes de a utilizar.
18. A cadeira iVolta pode entrar no elevador; desligue a alimentação e sente-se firmemente para evitar movimentos.



Reduza a velocidade ao virar, evite curvas bruscas e mantenha o centro de gravidade estável. Não desloque o centro de gravidade na direção oposta ao virar, para evitar capotamentos.

Mantenha-se a si próprio, a sua roupa e os objetos afastados da roda enquanto a cadeira estiver em movimento.

Não arraste nada atrás da cadeira durante a condução.

Não utilize a cadeira de rodas com a bateria descarregada para evitar ficar preso.

Evite circular em estradas ou declives potencialmente perigosos, como superfícies cobertas de neve, gelo, relva cortada ou folhas molhadas.

Não apoie todo o peso num único lado do apoio de braços, pois isso pode provocar uma inclinação.

Não coloque as mãos por cima do assento nem incline o corpo, pois isso pode danificar o encosto e provocar uma queda.

Embora a sua cadeira de rodas possa ultrapassar obstáculos altos, recomendamos que não tente ultrapassar a altura especificada. Se tiver alguma dúvida sobre como ultrapassar obstáculos com segurança, peça ajuda. Tenha em atenção as suas capacidades operacionais e limitações pessoais. Poderá ser necessário remover ou cobrir os limiares e instalar rampas nas saídas e entradas.

Nunca utilize a cadeira de rodas perto de vias férreas ou passagens de nível. Não conduza a cadeira de rodas à beira de um ribeiro, lago ou mar.

Não suba escadas nem escadas rolantes com a cadeira de rodas.

Para garantir a sua segurança, leia e compreenda este manual. Mantenha-se atento ao conduzir qualquer cadeira de rodas para garantir a sua segurança.

5. UTILIZAÇÃO E MONTAGEM

5.1. UTILIZAÇÃO DO COMANDO DE CONTROLO

Botão de ligar: prima o botão de ligar durante dois segundos para ligar a cadeira iVolta. Para desligar a cadeira, prima novamente o botão de ligar durante 2 segundos.

Joystick: controle a direção e a velocidade da cadeira de rodas. Ao empurrar o joystick a partir da sua posição central, a cadeira move-se mais depressa; ao soltá-lo, a cadeira volta à posição inicial e trava automaticamente.

Evite qualquer acessório que possa interferir no funcionamento do joystick, uma vez que isso poderá provocar movimentos acidentais da cadeira de rodas.



Botão para aumentar e diminuir a velocidade: depois de ligar a cadeira iVolta, o indicador de velocidade mostra a velocidade atual. Os botões para aumentar e diminuir ajustam a velocidade em uma barra a cada pressão. O número de barras representa a velocidade máxima. O utilizador pode ajustar o intervalo.



A cadeira dispõe de 5 velocidades:

- Primeira velocidade: 2 km/h.
- Segunda velocidade: 3 km/h.
- Terceira velocidade: 4 km/h.
- Quarta velocidade: 5 km/h.
- Quinta velocidade: 6 km/h.

5.2. CAPACIDADE DE CARGA DA CADEIRA

Utilização da bateria do joystick: a autonomia da bateria é indicada pelo indicador de bateria, cujo nível vai diminuindo à medida que a bateria se esgota. Recomenda-se carregar a bateria da cadeira quando estiverem acesas duas linhas do indicador de bateria, uma vez que isso é mais benéfico para a durabilidade da bateria.

Carregamento da cadeira (método 1): ligue a ficha do carregador à tomada de três pinos do controlador. Em seguida, ligue o carregador a uma tomada elétrica convencional. Durante o carregamento, o joystick permanecerá aceso e a luz piscará. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz do carregador ficará verde. Assim que o carregamento terminar, desligue primeiro o carregador da tomada e, em seguida, da cadeira.

Carregamento da bateria fora da cadeira de rodas (método 2): para retirar a bateria, puxe a alça de libertação para fora e, simultaneamente, deslize a bateria para fora até a retirar completamente. Depois de retirada, poderá proceder ao seu carregamento.



Botão de ligar e desligar da bateria: o interruptor ON/OFF situado na caixa da bateria não está operacional na cadeira iVolta. Por este motivo, a cadeira poderá funcionar e a bateria poderá ser carregada independentemente da posição do interruptor.



Carregue completamente a bateria nova antes de a utilizar pela primeira vez, para atingir 90% do seu desempenho máximo. Efetue uma carga completa após cada utilização para manter um desempenho superior a 90%. Após quatro ou cinco ciclos de carga, a taxa de utilização aproxima-se dos 100%, prolongando a sua vida útil.

Se não for utilizada, **recomenda-se carregar a bateria mensalmente e utilizá-la durante mais de 20 minutos**, para prolongar a sua vida útil. As baterias utilizadas há mais de três anos devem ser levadas ao ortopedista para a devida revisão ou substituição.

Outras advertências:

- Antes de iniciar o carregamento, certifique-se de que a cadeira está desligada.
- Não deixe a bateria a carregar durante mais de 24 horas consecutivas.
- Utilize apenas o carregador original fornecido pela TotalCare Europe.
- Não cubra o carregador enquanto este estiver a funcionar.
- Não carregue a bateria perto de materiais inflamáveis ou fontes de calor.
- Não manuseie a ficha nem o carregador com as mãos molhadas. Realize a carga em um lugar seco y bien ventilado.




Efetue uma carga completa antes da primeira utilização, para garantir uma ligação ideal entre o sistema do controlador e a bateria de lítio.

5.3. BAIXAR O APOIO DE BRAÇOS


Para rebater, prima o botão de bloqueio situado por baixo do apoio de braços e levante-o simultaneamente.

Para o rebater, pressione para baixo até ouvir um «clique», indicando que o botão de bloqueio ficou bem fixo no seu lugar. O apoio de braços voltará à sua posição original.

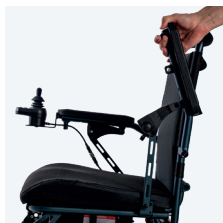


5.4. UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO DE DOBRAR E DESDOBRAR



Dobrada: para dobrar a cadeira, puxe a alavanca de desbloqueio situada na parte de trás do encosto. Mantenha o mecanismo desbloqueado enquanto segura o encosto e desloque-o para a frente até dobrar a cadeira de forma controlada.

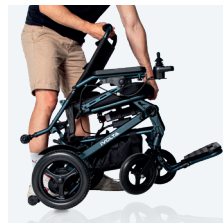

Desdobramento: para desdobrar a cadeira, segure no encosto e no assento e abra-a até ficar totalmente estendida. Certifique-se de que está completamente desdobrada antes de a utilizar.

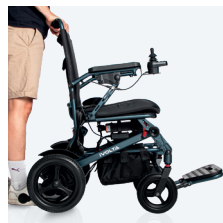

Rodas de transporte: a cadeira possui duas rodas de transporte que permitem transportá-la dobrada de forma prática, como se fosse uma mala. Estas rodas são amovíveis. Para as retirar, prima o botão «quick release» e puxe-as para fora. Esta operação só pode ser realizada com a cadeira iVolta completamente dobrada.

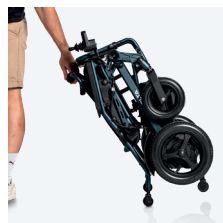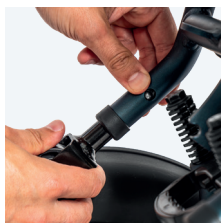

5.5. COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DA BATERIA

Para retirar a bateria, puxe a alça de libertação para fora e, ao mesmo tempo, deslize a bateria para fora até a retirar completamente.



5.6. MONTAGEM DO JOYSTICK

Ajuste o joystick para a posição mais confortável, de acordo com as suas necessidades. Desaperte o botão do apoio de braços e estique o joystick. Quando estiver na posição desejada, fixe bem o joystick apertando o botão.



5.7. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIBERTAÇÃO DO TRAVÃO (RODA LIVRE)

O motor tem duas posições. Na primeira imagem, com a alavanca para trás, a cadeira encontra-se no modo manual: o motor fica desativado e a cadeira pode ser empurrada manualmente. Para ativar o motor e utilizar a cadeira no modo elétrico, puxe a alavanca para a frente, tal como se mostra na segunda imagem.



5.8. UTILIZAÇÃO DAS BARRAS ANTI-CAPOTAMENTO

As barras anti-capotamento são amovíveis. Para as retirar, prima o botão «quick release» e puxe-as para fora. A sua remoção permite reduzir o comprimento da cadeira e facilita as manobras em espaços reduzidos. Antes de utilizar a cadeira, certifique-se de que as barras anti-capotamento estão corretamente instaladas..



5.9. REGULAÇÃO DA PLATAFORMA

Para ajustar a **altura da plataforma**, retire a tampa da porca. Desaperte o parafuso com uma chave Allen de 5 mm, segurando a porca com uma chave fixa.

Desloque o tubo até ao orifício pretendido e volte a apertar os parafusos. O ajuste tem um curso total de 2,5 cm. Certifique-se de que a plataforma fica devidamente fixada.



Para **ajustar a profundidade da plataforma**, puxe simultaneamente ambos os botões para fora e desloque a plataforma até à posição desejada. A plataforma dispõe de dois pontos de ajuste, com um curso total de 5 cm.

Depois de selecionar a posição desejada, solte os botões e verifique se a plataforma ficou corretamente bloqueada.



6. MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

6.1. MANUTENÇÃO

Tal como qualquer veículo motorizado, a sua cadeira de rodas elétrica necessita de manutenção de rotina. Pode realizar algumas verificações por si próprio, mas outras requerem assistência profissional.

Evite expor a cadeira de rodas a ambientes húmidos.

A humidade pode causar avarias eletrónicas e mecânicas, bem como a corrosão dos componentes elétricos.

Tenha em atenção as temperaturas extremas.

Mantenimiento y limpieza

- Evite bater nas unidades de controlo e a exposição prolongada a condições extremas.
- Mantenha o controlador limpo e verifique as ligações para garantir o seu bom estado.
- Se o indicador da bateria apresentar apenas uma luz acesa, carregue a bateria imediatamente.
- Evite lavar a cadeira de rodas com água. A superfície do chassis possui uma camada protetora.
- Não utilize produtos químicos no assento e nos apoios de braços de vinil, pois podem causar deslizamentos ou fissuras. Utilize um pano húmido com água e sabão neutro e seque-os.

Después del uso:

- Desconecte la alimentación y prohíbe el uso a niños o personas inconscientes. Guarde la silla a temperatura normal para conservar sus prestaciones. Limpie la silla con un paño suave, evitando productos químicos. Lave y seque.



PRECAUCIÓN

Para asegurar la calidad de la silla, en caso de requerir el reemplazo de piezas consumibles como la batería, ruedas, joystick, motor/ actuador o cargador, le instamos a contactar con su ortopedia. Es esencial utilizar repuestos originales del mismo modelo y especificación y cualquier reparación debe llevarse a cabo en instalaciones de mantenimiento profesionales autorizados por TotalCare Europe.

6.2. CONTROLOS DIÁRIOS

A fim de garantir o bom funcionamento da cadeira de rodas, recomenda-se a realização de inspeções regulares antes de cada utilização, bem como revisões semanais, mensais e semestrais.

Elementos de inspeção	A qualquer momento	Semanal	Mensual	Semestral
Cubos, mecanismos de transmissão			●	
Função do joystick	●			
Travão	●			
Cabos de ligação		●		
Estado da bateria	●			
Estado dos pneus			●	
Estado do chassis				●
Estado do motor e do condutor				●
Alinhamento das rodas dianteiras		●		
Limpeza	●			

7. ANÁLISE E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O sistema utiliza sinais sonoros e luzes LED para indicar possíveis erros ou avarias do dispositivo. Estes alertas podem estar relacionados com componentes como o motor, os travões, a bateria ou as ligações elétricas. A tabela seguinte irá ajudá-lo a identificar cada incidência e as ações recomendadas.

Embora a maioria das avarias possa ser diagnosticada sem ferramentas adicionais, recomenda-se que contacte o seu ortopedista sempre que for apresentado um aviso de erro. Consulte a tabela para interpretar os diferentes códigos apresentados no ecrã e os sinais sonoros correspondentes.

Número de bipes	Erro	Método de eliminação
1 sinal sonoro	Bateria fraca	Carregue a bateria.
2 sinais sonoros	Avaria no motor esquerdo	Desligue o dispositivo e verifique se a alavanca de desbloqueio do motor está no modo elétrico. Se o problema persistir, contacte o seu ortopedista ou o serviço técnico autorizado.
4 sinais sonoros	Avaria no motor direito	Desligue o dispositivo e verifique se a alavanca de desbloqueio do motor está no modo elétrico. Se o problema persistir, contacte o seu ortopedista ou o serviço técnico autorizado.
6 sinais sonoros	Sobrecorrente	Reinicie a cadeira. Se o erro continuar a aparecer, contacte o seu ortopedista ou o serviço técnico autorizado.
7 sinais sonoros	Avaria no joystick	Reinicie a cadeira. Se o erro continuar a aparecer, contacte o seu ortopedista ou o serviço técnico autorizado.
8 sinais sonoros	Avaria no controlador	Reinicie a cadeira. Se o erro continuar a aparecer, contacte o seu ortopedista ou o serviço técnico autorizado.
9 sinais sonoros	Erro de comunicação	Verifique se todos os cabos e conectores estão corretamente ligados. Se o problema persistir, contacte o seu ortopedista ou o serviço técnico autorizado.

8. GARANTIA

DURAÇÃO DA GARANTIA

O produto adquirido pelo cliente é protegido pela presente garantia, pela falta de conformidade do cliente que se manifeste no prazo de 3 anos a partir da data de compra do produto ou da data de entrega.

ÂMBITO DA GARANTIA

A garantia cobre qualquer avaria ou defeito de fabrico durante os primeiros 24 meses após a compra do produto. Após 2 anos e até 3 anos, o consumidor deve continuar a contactar o vendedor para reparar a não conformidade do produto, mas se necessário, o utilizador deve provar que o produto é defeituoso devido ao fabrico e não devido a má utilização ou falta de manutenção.

O âmbito territorial desta Garantia é para totalidade do território nacional espanhol.

Esta Garantia não afeta os direitos à disposição do consumidor, de acordo com as disposições do Real Decreto-Lei 7/2021, de 27 de Abril, sobre a transposição das diretivas da União Europeia em defesa dos consumidores.

PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DA GARANTIA

Para que a Garantia seja eficaz, o consumidor deve dirigir-se ao ponto de venda onde o produto foi adquirido; no caso de ser impossível comunicar com o ponto de venda, seja porque o produto foi fechado ou porque foi adquirido noutra comunidade autónoma, o consumidor pode contactar directamente o fabricante através do e-mail info@totalcare-europe.com.

É essencial apresentar uma cópia da fatura ou recibo de compra, ou uma nota de entrega posterior à factura ou recibo, no momento da reclamação, indicando claramente o produto comprado e a data.

O consumidor deve entregar o produto no mesmo local onde foi adquirido, acompanhado de uma nota que explique a falta de conformidade.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE

- Danos causados por má utilização pelo utilizador por não obedecer às instruções dadas neste manual ou causados por outros factores humanos, má utilização, colisão com um objeto...
- Danos causados por acidente, abuso, negligência ou uso indevido.
- Danos causados por incêndio, inundação, tempestade ou qualquer outro evento natural.
- Produtos que tenham sido previamente reparados ou manuseados por pessoal não autorizado pelo fabricante ou vendedor.
- Se as peças utilizadas não forem fabricadas pela nossa empresa.
- Qualquer produto que não ostente ou tenha tido o seu número de série ou de fábrica alterado ou obliterado.
- A garantia não cobre elementos de desgaste.
- A reparação ou substituição da peça defeituosa será efetuada por pessoal qualificado e autorizado da TotalCare Europe, SL.

NÃO UTILIZE ESTE PRODUTO SE ESTE PARECER DANIFICADO OU COM PEÇAS EM FALTA.

CONTACTE O SEU FORNECEDOR.

Legenda da etiquetagem.



Conformidade Europeia.



Deve consultar as instruções de utilização para obter informações de segurança.



Consultar o manual do utilizador antes de utilizar o produto.



Dados do fabricante.



Data de fabrico.



Representante Europeu.



Lote.



Referência do produto.



Número de série.



Dispositivo médico em conformidade com o MDR.



Vídeo MiTaller

Digitalize o código QR para aceder ao vídeo do manual do utilizador

Manual do utilizador

Cadeira de rodas elétrica dobrável **iVolta**

V1 · 30/06/2026