



iVOLTA

iVolta

Sedia a rotelle
elettrica pieghevole

MANUALE D'USO

Ref. SEPALIVOLTAM



più di 50 anni di vita senza limiti

! Nota importante

Le caratteristiche tecniche indicate sono indicative, in quanto possono subire modifiche progettuali in base alle esigenze di produzione.

Il prodotto presente in questo catalogo non è stato necessariamente fotografato nella sua configurazione standard.

Si prega di consultare il nostro sito web per vedere il modello aggiornato.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DA TOTALCARE EUROPE

VI RINGRAZIAMO PER LA VOSTRA FIDUCIA.

Grazie di aver acquistato un prodotto di **IM by TotalCare Europa**.

Il prodotto che avete acquistato è stato concepito con tecnologia d'avanguardia e ha superato le prove di collaudo più rigorose

L'esperienza attraverso il tempo fa sì che i nostri ausili offrano un design funzionale che permette più libertà e autonomia, per svolgere le attività di igiene ogni giorno.

Le consigliamo di dedicare qualche minuto alla lettura delle istruzioni che le abbiamo fornito. In questo modo potrà familiarizzare con la sua nuova sedia a rotelle elettrica **iVolta**. Troverete le informazioni e i consigli per un corretto uso del dispositivo e prolungare il suo ciclo di vita.

più di **60 anni** vivono **senza limiti**

GUIDA RAPIDA.

Importante leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto.

1 — Parti della sedia iVolta	4
2 — Descrizione del prodotto.....	4
3 — Caratteristiche del prodotto	5
4 — Precauzioni d'uso	7
5 — Utilizzo e montaggio.....	10
6 — Manutenzione e conservazione	13
7 — Analisi e risoluzione dei problemi	14
8 — Garanzia.....	15

1. PARTI DELLA SEDIA iVOLTA



2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SEDIA A ROTELLE ELETTRICA PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO ULTRALEGGERA

La sedia a rotelle elettrica iVolta si distingue per il suo design leggero e compatto. Grazie al telaio in alluminio, pesa solo 18 kg senza batteria, pur mantenendo una grande robustezza e una portata fino a 125 kg.

Le sue dimensioni ridotte, con una larghezza totale di 59,5 cm e una profondità di soli 74 cm con i poggiatesta ripiegati, ne facilitano la manovrabilità in spazi ristretti.

Dotata di due motori da 150 W, raggiunge una velocità massima di 6 km/h. Inoltre, è disponibile con una batteria al litio da 10 Ah o 15 Ah, che offre un'autonomia fino a 17 km.

Si distingue per il suo design accattivante, che unisce leggerezza e funzionalità in un'esclusiva finitura blu-grigiastro opaca.

3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



iVOLTA

INFORMAZIONI GENERALI

Dimensioni

Larghezza totale	59,5 cm
Profondità senza poggipiedi	74 - 78 cm*
Profondità con poggipiedi	100 - 104 cm*
Altezza totale	98 cm
Altezza dal sedile al pavimento senza cuscino	50 cm
Altezza dal sedile al pavimento con cuscino	56 cm

*Profondità regolabile tramite le rotelle antiribaltamento. La profondità dei poggipiedi è regolabile di 5 cm. La misura di 104 cm corrisponde alla posizione massima.

Dimensioni da chiusa

Profondità da chiusa	44 cm
Larghezza da chiusa	59,5 cm
Altezza da chiusa	74 cm

Peso

Peso totale (senza batteria)	18 kg
Peso totale (con batteria da 10 Ah)	19,50 kg
Peso totale (con batteria da 15 Ah)	19,85 kg
Peso massimo supportato	125 kg

Material	Alluminio
----------	-----------

Colore	Blu grigiastro opaco
--------	----------------------



CARATTERISTICHE TECNICHE
Seduta

Larghezza della seduta	45 cm
Larghezza utile per sedersi (misura)	45 cm
Profondità della seduta	44 cm
Altezza del cuscino	6 cm

Motore

Motore	2 x 150 W
Batteria	10 Ah / 15 Ah (litio)
Numero di batterie	1
Autonomia	8 - 12 km (10 Ah) / 12 - 17 km (15 Ah)
Velocità massima	6 km/h

Bracciolo

Lunghezza del bracciolo	26 cm
Larghezza del bracciolo	5 cm
Tipo di bracciolo	A ribalta

Schienale

Larghezza dello schienale	44 cm
Altezza dello schienale	45 cm
Tipo di schienale	Fisso

Ruote

Dimensioni delle ruote anteriori	Ø20 cm
Dimensioni delle ruote posteriori	Ø29 cm
Larghezza delle ruote anteriori	4 cm
Larghezza delle ruote posteriori	4,5 cm
Tipo di ruote	Massicci

Altre caratteristiche

Altezza massima dei cordoli	2,5 cm
Tasca sotto il sedile	30 x 25 x 12 cm (9 L.)
Tasca sullo schienale	23 x 22 cm
Cintura di sicurezza	Sì
Clacson	Sì
Pendenza massima superabile	10°
Raggio di sterzata	90 cm
Regolazione in altezza del poggiatesta	2,5 cm
Regolazione in profondità del poggiatesta	5 cm
Ruote antiribaltamento	Sì (rimovibili)
Tipo di freni	Elettromagnetici

*Prima di prenotare un volo, ti consigliamo di contattare la compagnia aerea per verificare se sono ammesse sedie a rotelle elettriche a batteria.



4. PRECAUZIONI D'USO

4.1. ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere il manuale d'uso: prima di mettersi alla guida, è indispensabile aver letto e compreso integralmente il manuale d'uso.

Capacità di carico: la capacità massima di carico è di 125 kg. Si prega di non sovraccaricare il veicolo, poiché è progettato per uso individuale e non deve trasportare passeggeri.

Condizioni di guida: non guidare sotto l'effetto dell'alcol o in condizioni di estrema stanchezza.

Guida notturna e in condizioni di scarsa visibilità: evitare di guidare di notte o in condizioni di visibilità ridotta.

Autocontrollo prima della guida: effettuare un autocontrollo prima di ogni viaggio. Consultare le sezioni "4.2", "4.3" e "4.4" del manuale se è la prima volta che si guida.

Protezione dagli agenti atmosferici: tenere presente che la sedia a rotelle non è impermeabile; pertanto, evitare di esporla alla pioggia o alla neve e astenersi dal guidare in tali condizioni meteorologiche.

4.2. ISTRUZIONI PER L'USO

Superficie di guida: la sedia a rotelle iVolta è progettata per circolare su superfici piane. Evitare terreni fangosi, ripidi, morbidi, stretti, ghiacciati o strade in cattive condizioni.

Superamento degli ostacoli: la sedia a rotelle iVolta è in grado di superare gli ostacoli, ma si raccomanda di ridurre la velocità e di procedere lentamente durante questa manovra.

Pendenza massima superabile: la sedia a rotelle può salire con un angolo di inclinazione massimo di 10°.

Altezza massima dei cordoli: non tentare di superare cordoli di altezza superiore a 2,5 cm. Guidare la iVolta su ostacoli che superano tale altezza può provocare ribaltamenti e causare lesioni gravi. Tenere sempre in considerazione le proprie capacità di guida e qualsiasi limitazione personale.

Evitare assembramenti e traffico intenso: si pre-

ga di evitare di guidare in aree con assembramenti o traffico intenso.

Sicurezza di guida: assicurarsi che il sistema di controllo sia correttamente installato. Mantenere il joystick in posizione verticale e sedersi correttamente, allacciando la cintura di sicurezza per tempo. In caso di perdita di controllo dovuta a ribaltamento, appoggiarsi allo schienale.

Accensione e regolazione della velocità: all'accensione della sedia a rotelle, verificare che la velocità impostata sia adeguata alle proprie capacità di guida. Si raccomanda di iniziare a guidare a bassa velocità ad ogni utilizzo, accelerando gradualmente.



ATTENZIONE

Si deve evitare l'uso simultaneo di questa apparecchiatura con altri dispositivi o il suo impilamento, poiché ciò potrebbe causare un malfunzionamento. Qualora fosse necessario ricorrere a tale utilizzo, è richiesta una supervisione costante per garantire che entrambe le apparecchiature funzionino normalmente.

L'uso di accessori e cavi non specificati o forniti da TotalCare Europe con questa apparecchiatura può comportare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica della stessa, con conseguente funzionamento non corretto.

4.3. AVVERTENZE PER L'USO



ATTENZIONE

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni alle persone o alle cose derivanti da un uso improprio. Per evitare danni o lesioni causati da un uso inadeguato della sedia a rotelle, l'utente deve adottare misure di sicurezza.

Rispettare le norme locali relative al traffico pedonale. Poiché l'utente potrebbe essere difficilmente visibile, attendere che la strada sia libera prima di procedere con estrema cautela. L'uso di dispositivi di sicurezza quali catari-frangenti, indumenti riflettenti, luci e simboli è essenziale per la sicurezza durante la guida.

Manovre non consentite: non tentare mai di eseguire manovre nuove di propria iniziativa, al di fuori di quelle indicate nel manuale.

Modifiche non autorizzate: non apportare alcuna modifica alla sedia a rotelle iVolta senza l'autorizzazione di TotalCare Europe. L'aggiunta di accessori può alterare specifiche quali il peso totale, le dimensioni o il baricentro. Tenere presente che alcune modifiche possono danneggiare gli oggetti circostanti.

Uso non previsto: non utilizzare la sedia a rotelle per scopi diversi da quelli previsti, come l'allenamento con i pesi, la pratica sportiva, il traino, il trasporto o il rimorchio, poiché ciò potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza e uno sforzo eccessivo per la sedia a rotelle.

Fumo sulla sedia a rotelle: si raccomanda vivamente di non fumare sigarette mentre si è seduti sulla sedia a rotelle.

Sedile e modifiche: non modificare le specifiche del sedile né posizionare cuscini o cuscini da letto su di esso, poiché ciò può causare instabilità e possibili cadute dell'utente.

Salire o scendere: prima di salire o scendere dalla sedia a rotelle, sedetevi il più indietro possibile per prevenire lesioni dovute al ribaltamento.

Braccioli e poggipiedi: evitate di aggrapparvi al bracciolo, poiché ciò potrebbe causare ribaltamenti e lesioni. Allo stesso modo, evitate di concentrare il vostro peso sul poggipiedi per prevenire ribaltamenti e lesioni personali.

Uso de oxígeno: extreme precauciones al usar oxígeno cerca de circuitos eléctricos o materiales combustibles. Consulte con su proveedor de oxígeno para obtener información sobre el uso seguro.

Modo manual: no utilice la silla de ruedas en modo manual sin acompañante, ya que podría causar lesiones. No se mueva por sí mismo al estar sentado, pida ayuda a su acompañante si es necesario.

Ajustes del controlador: atención. No modifique los ajustes del joystick. Pida a su ortopedia que lo compruebe si nota algún cambio en su capacidad para controlar la silla de ruedas.

Uso dell'ossigeno: prestare la massima attenzione quando si utilizza l'ossigeno in prossimità di circuiti

elettrici o materiali infiammabili. Rivolgersi al proprio fornitore di ossigeno per informazioni sull'uso sicuro.

Modalità manuale: non utilizzare la sedia a rotelle in modalità manuale senza un accompagnatore, poiché ciò potrebbe causare lesioni. Non spostarsi autonomamente mentre si è seduti; se necessario, chiedere aiuto all'accompagnatore.

Regolazioni del controller: attenzione. Non modificare le impostazioni del joystick. Chiedere al proprio ortopedico di verificarle se si nota un cambiamento nella capacità di controllare la sedia a rotelle.

Arresto improvviso: durante il funzionamento, la sedia a rotelle potrebbe arrestarsi improvvisamente. Non utilizzarla se presenta anomalie o irregolarità.

Modalità manuale su piano inclinato: eviti di utilizzare la sedia a rotelle in modalità manuale su qualsiasi piano inclinato per prevenire la perdita di controllo e spostamenti indesiderati.

Permanenza in posizione fissa: se prevede di rimanere seduto in una posizione fissa per molto tempo, scolleghi l'alimentazione per evitare il movimento accidentale della sedia a rotelle.

Evitare l'uso di accessori che possano interferire con il joystick, poiché potrebbero causare movimenti imprevisti della sedia a rotelle.

4.4. SI PREGA DI TENERE PRESENTI LE SEGUENTI INDICAZIONI

1. Non collegare il cavo direttamente al morsetto/clip della batteria per ricaricarla.
2. Non collegare altri dispositivi al sistema elettronico né accendere altri dispositivi utilizzando la batteria della sedia a rotelle.
3. Quando scollega il fascio di cavi, afferri il terminale per evitare danni. Non tiri direttamente il fascio di cavi.
4. Quando si sale su pendenze, proceda in linea retta. Eviti di formare un angolo con la pendenza e presti attenzione durante la salita per ridurre il rischio di ribaltamento.
5. Lo stoccaggio prolungato a temperature estreme ne comprometterà il funzionamento.
6. Controlli sempre la presenza di corrosione sui componenti elettrici, sui fasci di cavi e sui morsetti.

7. Non rimuovere il fusibile dal cablaggio della batteria. Se è danneggiato, contattare il proprio ortopedico per sostituirlo.
8. Percorrere le discese alla velocità minima. Se la velocità è superiore al previsto, rilasciare la leva del joystick per arrestare la sedia a rotelle, quindi premere leggermente per controllare la velocità di discesa. Contattare il proprio ortopedico se un accessorio dell'unità di seduta si allenta; sostituire immediatamente le parti usurate o danneggiate.
9. Non portare la sedia a rotelle nella doccia, nella vasca da bagno, in piscina o in sauna. Condizioni quali pioggia, neve, sale, nebbia o superfici ghiacciate possono causare corrosione prematura delle viti e dei componenti.
10. La retromarcia è possibile solo su strade pianeggianti. Eseguita con delicatezza e a bassa velocità, fermandoti spesso per verificare la presenza di ostacoli. Evita di inclinarsi in avanti o all'indietro lungo la pendenza per prevenire il ribaltamento.
11. Evita qualsiasi posizione o movimento che possa modificare il tuo centro di gravità mentre sei seduto sulla tua sedia a rotelle iVolta, poiché ciò potrebbe causare inclinazioni.
12. Non appoggiare tutto il peso su un solo lato del bracciolo, poiché la sedia potrebbe ribaltarsi. Evitare di appoggiare le mani oltre il sedile o di inclinare il corpo per prevenire cadute.
13. Non guidare la sedia a rotelle lungo le rive di ruscelli, laghi o mari. Evitare di guidare in acqua. Evitare l'esposizione prolungata ad ambienti eccessivamente caldi o freddi, poiché ciò può danneggiare parti della sedia a rotelle, nonché la batteria e altri componenti elettrici.
14. Non trascinare la sedia a rotelle per evitare danni alle parti fondamentali dovuti a velocità eccessiva.
15. Prestare molta attenzione quando si salgono e si scendono le scale con la sedia a rotelle ferma. La chiusura della sedia a rotelle deve essere effettuata con l'aiuto di persone fisicamente in grado di farlo.
16. Non utilizzare la sedia a rotelle in stato di ebbrezza. Il consumo di alcol può compromettere la guida sicura della sedia a rotelle.

17. Non tutte le sedie a rotelle sono uguali. Si prega di dedicare del tempo a imparare come funzionare la sedia iVolta prima di utilizzarla.

18. La sedia iVolta potrebbe entrare nell'ascensore; scollegare l'alimentazione e sedersi saldamente per evitare movimenti.



PRECAUCIÓN

Riducete la velocità in curva, evitate le curve brusche e mantenete stabile il baricentro. Non spostate il baricentro nella direzione opposta durante la curva per evitare il ribaltamento.

Tenete voi stessi, i vostri indumenti e gli oggetti lontani dalle ruote mentre la sedia è in movimento.

Non trascinate nulla dietro la sedia durante la guida.

Non utilizzate la sedia a rotelle con la batteria scarica per evitare di rimanere bloccati.

Evitate di circolare su strade o pendenze potenzialmente pericolose, come superfici coperte di neve, ghiaccio, erba tagliata o foglie bagnate.

Non appoggi tutto il peso su un solo lato del bracciolo, poiché ciò potrebbe causare un'inclinazione.

Non appoggi le mani sopra il sedile né inclini il corpo, poiché ciò potrebbe danneggiare lo schienale e provocare una caduta.

Sebbene la vostra sedia a rotelle sia in grado di superare ostacoli alti, vi raccomandiamo di non tentare di superare l'altezza specificata. Se avete dubbi su come superare gli ostacoli in sicurezza, chiedete aiuto. Prestate attenzione alle vostre capacità operative e alle vostre limitazioni personali. Potrebbe essere necessario rimuovere o coprire le soglie e installare rampe in corrispondenza di uscite e ingressi.

Non utilizzare mai la sedia a rotelle in prossimità di binari ferroviari o passaggi a livello. Non guidare la sedia a rotelle lungo le rive di un torrente, di un lago o del mare.

Non superare scale o scale mobili con la sedia a rotelle.

Per garantire la propria sicurezza, leggere e comprendere il presente manuale. Prestare la massima attenzione durante la guida di qualsiasi sedia a rotelle per garantire la propria sicurezza.

5. UTILIZZO E MONTAGGIO

5.1. UTILIZZO DEL TELECOMANDO

Pulsante di accensione: Premere il pulsante di accensione per due secondi per accendere la sedia a rotelle iVolta. Per spegnere la sedia, premere nuovamente il pulsante di accensione per 2 secondi.

Joystick: consente di controllare la direzione e la velocità della sedia a rotelle. Spingendo il joystick dalla posizione centrale, la sedia accelera; rilasciandolo, torna automaticamente in posizione iniziale e frena.

Evitare qualsiasi accessorio che possa interferire con il funzionamento del joystick, poiché potrebbe causare movimenti accidentali della sedia a rotelle.



Pulsanti di aumento e riduzione della velocità: dopo aver acceso la sedia a rotelle iVolta, l'indicatore di velocità mostra la velocità attuale. I pulsanti di aumento e riduzione regolano la velocità di una tacca alla volta ad ogni pressione. Il numero di tacche rappresenta la velocità massima. L'utente può regolare l'intervallo.



La sedia a rotelle dispone di 5 velocità:

- Prima velocità: 2 km/h.
- Seconda velocità: 3 km/h.
- Terza velocità: 4 km/h.
- Quarta velocità: 5 km/h.
- Quinta velocità: 6 km/h.

5.2. CARICO MASSIMO DELLA SEDIA


Utilizzo della batteria del joystick: la durata della batteria è indicata dall'indicatore di carica, il cui livello diminuisce man mano che la batteria si scarica. Si consiglia di ricaricare la batteria della sedia a rotelle quando sull'indicatore di carica sono accese 2 linee, poiché ciò favorisce una maggiore durata della batteria.

Ricarica della sedia a rotelle (metodo 1): collegare la spina del caricabatterie alla presa a tre fori del controller. Quindi, collegare il caricabatterie a una presa di corrente standard. Durante la ricarica, il joystick rimarrà acceso e lampeggerà. Quando la batteria sarà completamente carica, la spia del caricabatterie diventerà verde. Una volta terminata la ricarica, scollegare prima il caricabatterie dalla presa di corrente e poi dalla sedia a rotelle.

Ricarica della batteria fuori dalla sedia a rotelle (metodo 2): per estrarre la batteria, tirare verso l'esterno la maniglia di sgancio e, contemporaneamente, far scorrere la batteria verso l'esterno fino a rimuoverla completamente. Una volta estratta, sarà possibile procedere alla ricarica.



Pulsante di accensione e spegnimento della batteria: l'interruttore ON/OFF situato sull'alloggiamento della batteria non è operativo sulla sedia a rotelle iVolta. Per questo motivo, la sedia a rotelle potrà funzionare e la batteria potrà ricaricarsi indipendentemente dalla posizione dell'interruttore.

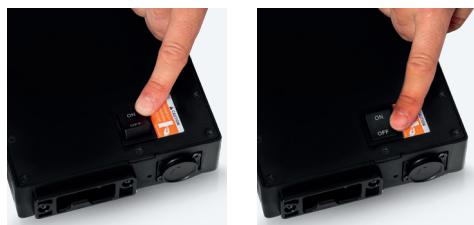

Caricare completamente la batteria nuova prima di utilizzarla per la prima volta per raggiungere il 90% delle sue prestazioni massime. Effettuare una ricarica completa dopo ogni utilizzo per mantenere le prestazioni al di sopra del 90%. Dopo quattro o cinque cicli di ricarica, il tasso di utilizzo si avvicina al 100%, prolungandone la durata.

Se non viene utilizzata, **si consiglia di ricaricare la batteria ogni mese e di utilizzarla per più di 20 minuti** per prolungarne la durata. Le batterie utilizzate per più di tre anni devono essere portate dal tecnico ortopedico per un'adeguata revisione o sostituzione.

Altre avvertenze:

- Prima di avviare la ricarica, assicurarsi che la sedia a rotelle sia spenta.
- Non lasciare la batteria in ricarica per più di 24 ore consecutive.
- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie originale fornito da TotalCare Europe.
- Non coprire il caricabatterie mentre è in funzione.
- Non ricaricare la batteria in prossimità di materiali infiammabili o fonti di calore.
- Non maneggiare la spina né il caricabatterie con le mani bagnate.
- Realice la carga en un lugar seco y bien ventilado.



Effettuare una ricarica completa prima del primo utilizzo per garantire un collegamento ottimale tra il sistema del controller e la batteria al litio.

5.3. ABBASSARE IL BRACCIOLO


Per ribaltarlo, premere il pulsante di blocco situato sotto il bracciolo e sollevarlo contemporaneamente.

Per ribaltarlo, premere verso il basso fino a sentire un "clic", che indica che il pulsante di blocco si è bloccato in posizione. Il bracciolo tornerà così nella sua posizione originale.




5.4. UTILIZZO DELLE OPERAZIONI DI CHIUSURA E APERTURA

Chiusura: per chiudere la sedia, tirare la maniglia di sblocco situata nella parte posteriore dello schienale. Tenere sbloccato il meccanismo mentre si tiene fermo lo schienale e spingerlo in avanti fino a chiudere la sedia in modo controllato.


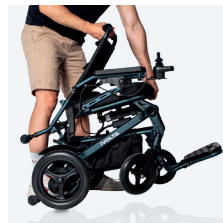


Apertura: per aprire la sedia, afferrare lo schienale e il sedile e aprirla fino a quando non è completamente distesa. Assicurarsi che sia completamente aperta prima di utilizzarla.

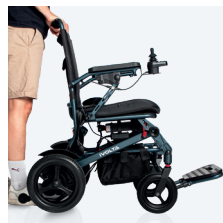

Ruote di trasporto: la sedia è dotata di due ruote di trasporto che consentono di trasportarla comodamente una volta ripiegata, proprio come se fosse una valigia. Queste ruote sono rimovibili. Per rimuoverle, premere il pulsante "quick release" ed estrarle verso l'esterno.

Questa operazione può essere eseguita solo con la sedia iVolta completamente ripiegata.

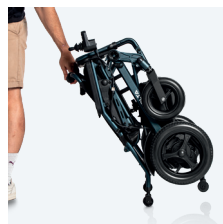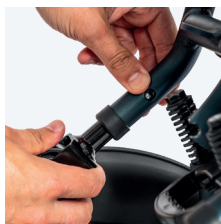

5.5. INSERIMENTO E RIMOZIONE DELLA BATTERIA

Per rimuovere la batteria, tirare verso l'esterno la maniglia di sgancio e, contemporaneamente, far scorrere la batteria verso l'esterno fino a estrarla completamente.



5.6. MONTAGGIO DEL JOYSTICK

Regolare il joystick nella posizione più comoda in base alle proprie esigenze. Allentare la manopola del bracciolo e allungare il joystick. Una volta raggiunta la posizione desiderata, fissare saldamente il joystick stringendo la manopola.




5.7. UTILIZZO DEL RILASCIO DEL FRENO (RUOTA LIBERA)

Il motore dispone di due posizioni. Nella prima immagine, con la leva tirata indietro, la sedia è in modalità manuale: il motore è disattivato e la sedia può essere spinta manualmente. Per attivare il motore e utilizzare la sedia in modalità elettrica, tirare la leva in avanti, come mostrato nella seconda immagine.




5.8. UTILIZZO DELLE BARRE ANTIRIBALTAMENTO

Le barre antiribaltamento sono rimovibili. Per rimuoverle, premere il pulsante ****"quick release"***** ed estrarle verso l'esterno. La loro rimozione riduce la lunghezza della sedia a rotelle, facilitando le manovre negli spazi ristretti. Prima dell'uso, assicurarsi che siano correttamente reinstallate.

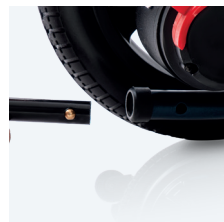



5.9. REGOLAZIONE DELLA PIATTAFORMA

Per **regolare l'altezza della piattaforma**, rimuovere il tappo del dado. Allentare la vite con una chiave a brugola da 5 mm, mantenendo fermo il dado con una chiave fissa. Spostare il tubo fino al foro desiderato e serrare nuovamente la vite e il dado. La regolazione dispone di una corsa totale di 2,5 cm. Assicurarsi che la piattaforma sia correttamente fissata.

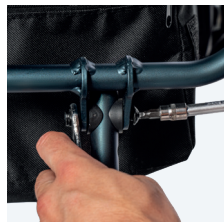

Per **regolare la profondità della piattaforma**, tirare contemporaneamente entrambe le manopole verso l'esterno e spostare la piattaforma nella posizione desiderata. La piattaforma dispone di due punti di regolazione, con una corsa totale di 5 cm.

Una volta selezionata la posizione desiderata, rilasciare le manopole e verificare che la piattaforma sia stata bloccata correttamente.

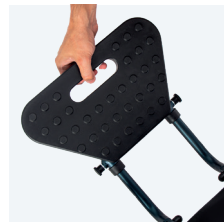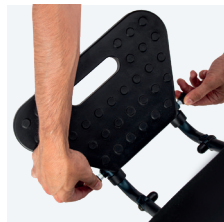

6. MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

6.1. MANUTENZIONE

Come qualsiasi veicolo a motore, anche la sua sedia a rotelle elettrica necessita di una manutenzione periodica. Alcuni controlli può effettuarli da solo, ma per altri è necessario ricorrere all'aiuto di un professionista.

Eviti di esporre la sedia a rotelle ad ambienti umidi.

L'umidità può causare malfunzionamenti elettronici e meccanici, oltre alla corrosione dei componenti elettrici.

Prestate attenzione alle temperature estreme.

Manutenzione e pulizia

- Evitare di urtare le unità di controllo e l'esposizione prolungata a condizioni estreme.
- Mantenere pulito il controller e verificare i collegamenti per assicurarne il corretto funzionamento.
- Se l'indicatore della batteria mostra solo una spia accesa, ricaricare immediatamente la batteria.
- Evitare di lavare la sedia a rotelle con acqua. La superficie del telaio è dotata di uno strato protettivo.
- Non utilizzare prodotti chimici sul sedile e sui

braccioli in vinile, poiché potrebbero causare scivolamenti o crepe. Utilizzare un panno umido con acqua e sapone neutro, quindi asciugare.

Dopo l'uso:

- Scollegare l'alimentazione e vietare l'uso da parte di bambini o persone incoscienti. Conservare la sedia a temperatura ambiente per preservarne le prestazioni. Pulire la sedia con un panno morbido, evitando l'uso di prodotti chimici. Lavare e asciugare.



ATTENZIONE

Per garantire la qualità della sedia a rotelle, qualora fosse necessaria la sostituzione di parti soggette a usura quali batteria, ruote, joystick, motore/attuatore o caricabatterie, vi invitiamo a contattare il vostro negozio di articoli ortopedici. È fondamentale utilizzare ricambi originali dello stesso modello e con le stesse specifiche; inoltre, qualsiasi riparazione deve essere effettuata presso centri di manutenzione professionali autorizzati da TotalCare Europe.

6.2. CONTROLLI QUOTIDIANI

Al fine di garantire il corretto funzionamento della sedia a rotelle, si raccomanda di effettuare controlli regolari prima di ogni utilizzo, nonché revisioni settimanali, mensili e semestrali.

Elementi da controllare	In qualsiasi momento	Settimanale	Mensile	Semestrale
Cubi, meccanismi di trasmissione			●	
Funzionamento del joystick	●			
Freno	●			
Cavi di collegamento		●		
Stato della batteria	●			
Stato degli pneumatici			●	
Stato del telaio				●
Stato del motore e del conducente				●
Allineamento delle ruote anteriori		●		
Pulizia	●			

7. ANALISI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il sistema utilizza segnali acustici e luci LED per segnalare eventuali errori o guasti del dispositivo. Questi avvisi possono riguardare componenti quali il motore, i freni, la batteria o i collegamenti elettrici. La tabella seguente vi aiuterà a identificare ogni problema e le azioni consigliate.

Sebbene la maggior parte dei guasti possa essere diagnosticata senza attrezzi aggiuntivi, si raccomanda di contattare il proprio ortopedico in caso di qualsiasi segnalazione di errore. Consultare la tabella per interpretare i diversi codici visualizzati sullo schermo e i corrispondenti segnali acustici.

Numero di bip	Errore	Procedura di risoluzione
1 bip	Batteria scarica	Caricare la batteria.
2 bip	Guasto al motore sinistro	Spegnere il dispositivo e verificare che la leva di sblocco del motore sia in modalità elettrica. Se il problema persiste, contattare il proprio ortopedico o il servizio di assistenza tecnica autorizzato.
4 bip	Guasto al motore destro	Spegnere il dispositivo e verificare che la leva di sblocco del motore sia in modalità elettrica. Se il problema persiste, contattare il proprio ortopedico o il servizio di assistenza tecnica autorizzato.
6 bip	Sovracorrente	Riavviare la sedia a rotelle. Se l'errore continua a comparire, contattare il proprio ortopedico o il servizio di assistenza tecnica autorizzato.
7 bip	Guasto al joystick	Riavviare la sedia a rotelle. Se l'errore continua a comparire, contattare il proprio ortopedico o il servizio di assistenza tecnica autorizzato.
8 bip	Guasto al controller	Riavviare la sedia a rotelle. Se l'errore continua a comparire, contattare il proprio ortopedico o il servizio di assistenza tecnica autorizzato.
9 bip	Errore di comunicazione	Verificare che tutti i cavi e i connettori siano collegati correttamente. Se il problema persiste, contattare il proprio ortopedico o il servizio di assistenza tecnica autorizzato.

8. GARANZIA

DURATA DELLA GARANZIA

Il prodotto da te acquistato è tutelato da tale garanzia, per difetto di conformità del cliente che si manifesti entro il termine di 3 anni dalla data di acquisto del prodotto o dalla data di consegna.

AMBITO DELLA GARANZIA

La garanzia copre qualsiasi guasto o difetto di fabbricazione durante i primi 24 mesi dall'acquisto del prodotto, da 2 anni a 3 anni, il consumatore deve continuare a contattare il venditore per riparare il difetto di conformità del bene, ma se necessario, il l'utente deve dimostrare che il prodotto è difettoso a causa della fabbricazione e non a causa di uso improprio o mancanza di manutenzione. L'ambito territoriale di questa Garanzia è per l'intero territorio nazionale spagnolo.

La presente Garanzia non pregiudica i diritti a disposizione del consumatore in conformità con le disposizioni del regio decreto-legge 7/2021, del 27 aprile, che recepisce le direttive dell'Unione europea in difesa dei consumatori.

PROCEDURA PER L'EFFICACIA DELLA GARANZIA

Per rendere effettiva la Garanzia, il consumatore dovrà recarsi presso il punto vendita dove ha acquistato il prodotto, nel caso in cui la comunicazione con il punto vendita sia impossibile. È possibile contattare direttamente il produttore via e-mail all'indirizzo info@totalcare-europe.com.

È indispensabile presentare una copia della fattura o dello scontrino di acquisto, o una bolla di consegna successiva alla fattura o allo scontrino, al momento del reclamo, che indichi chiaramente il prodotto acquistato e la data.

Il consumatore deve consegnare il prodotto nello stesso luogo in cui è stato acquistato, accompagnato da una nota esplicativa del difetto di conformità.

QUESTA GARANZIA NON COPRE

- Danni causati da uso improprio da parte dell'utente dal mancato rispetto delle istruzioni indicate in questo manuale o causato da altri fattori umani, uso improprio, collisione con un oggetto...
- Danni causati da incidente, abuso, negligenza o uso improprio.
- Danni causati da incendi, inondazioni, tempeste o qualsiasi evento naturale.
- Prodotti che sono stati precedentemente riparati o manipolati da personale non autorizzato dal produttore o dal venditore.
- Se le parti utilizzate non sono prodotte dalla nostra azienda.
- Qualsiasi prodotto che non porti o abbia il suo numero di serie o di fabbrica alterato o cancellato.
- La garanzia non copre gli articoli soggetti a usura.
- Riparazione o la sostituzione della parte difettosa sarà effettuata da personale qualificato autorizzato da TotalCare Europe, SL.

NON UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO SE APPARE DANNEGGIATO O MANCANTE DI PARTI.

CONTATTARE IL PROPRIO FORNITORE.

Etichettatura legenda.



Conformità europea



Rappresentante europeo



Dovresti fare riferimento alle istruzioni di utilizzo per ottenere informazioni sulla sicurezza



Lotto



Consultare il manuale dell'utente prima di utilizzare il prodotto



Riferimento prodotto



Informazioni sul produttore



Numero di serie



Data di produzione



Dispositivo medico conforme al MDR



Video MiTaller

Scansiona il codice QR per accedere al video del manuale d'uso

Manuale d'uso

Sedia a rotelle elettrica pieghevole **iVolta**

V1 · 30/06/2026