

iVOLTA



iVolta

Fauteuil roulant
électrique pliable

MANUEL D'UTILISATION

Ref. SEPALIVOLTAM



plus de **60 ans** de vie sans limites

! Remarque importante

Les caractéristiques techniques indiquées sont indicatives, car elles peuvent faire l'objet de modifications de conception en fonction des exigences de fabrication.

Le produit présenté dans ce catalogue n'a pas nécessairement été photographié dans sa configuration standard.

Veuillez consulter notre site web pour voir le modèle mis à jour.

TotalCare Europe

(+34) 935 942 066

info@totalcare-europe.com

C / Amsterdam 1-3, 08191 Rubí, España

www.totalcare-europe.com

DE TOTALCARE EUROPE

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

Merci d'avoir acheté un produit **IM** by **TotalCare Europe**.

Le produit que vous avez acheté est doté de la technologie la plus avancée et a subi les tests les plus exigeants.

L'expérience acquise au fil du temps permet à nos produits d'offrir les meilleures performances, afin que vous puissiez profiter toujours plus de la liberté et de l'autonomie dont vous avez besoin au quotidien.

Nous vous recommandons de prendre quelques instants pour lire les instructions que nous vous fournissons. Vous pourrez ainsi vous familiariser avec votre nouveau fauteuil roulant électrique **iVolta**, ce qui vous permettra d'en tirer le meilleur parti et d'en prolonger la durée de vie.

plus de **60 ans** de vie **sans limites**

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE.

Il est important de lire le manuel avant d'utiliser le produit.

1 — Composants du siège iVolta.....	4
2 — Description du produit	4
3 — Caractéristiques du produit.....	5
4 — Précautions d'utilisation.....	7
5 — Utilisation et montage	10
6 — Entretien et rangement.....	13
7 — Diagnostic et dépannage	14
8 — Garantie	15

1. COMPOSANTS DU SIÈGE iVOLTA



2. DESCRIPTION DU PRODUIT

FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE PLIABLE EN ALUMINIUM ULTRA-LÉGER

Le fauteuil roulant électrique iVolta se distingue par sa conception légère et compacte. Grâce à son châssis en aluminium, il ne pèse que 18 kg sans batterie, tout en conservant une grande robustesse et une capacité de charge allant jusqu'à 125 kg.

Ses dimensions réduites, avec une largeur totale de 59,5 cm et une profondeur de seulement 74 cm lorsque les repose-pieds sont repliés, facilitent les manœuvres dans les

espaces étroits.

Équipé de deux moteurs de 150 W, il atteint une vitesse maximale de 6 km/h. De plus, il est disponible avec une batterie au lithium de 10 Ah ou 15 Ah, offrant une autonomie pouvant atteindre 17 km.

Il se distingue par son design attrayant, alliant légèreté et fonctionnalité dans une finition exclusive bleu grisâtre mat.

3. CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



iVOLTA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

Largeur totale	59,5 cm
Profondeur sans repose-pieds	74 - 78 cm*
Profondeur avec repose-pieds	100 - 104 cm*
Hauteur totale	98 cm
Hauteur de l'assise au sol sans coussin	50 cm
Hauteur de l'assise au sol avec coussin	56 cm

*Profondeur réglable à l'aide des roulettes anti-basculement.

La profondeur des repose-pieds est réglable par paliers de 5 cm.

La mesure de 104 cm correspond à la position maximale.

Dimensions une fois repliée

Profondeur une fois repliée	44 cm
Largeur une fois repliée	59,5 cm
Hauteur une fois repliée	74 cm

Poids

Poids total (sans batterie)	18 kg
Poids total (avec batterie de 10 Ah)	19,50 kg
Poids total (avec batterie de 15 Ah)	19,85 kg
Poids maximal supporté	125 kg

Matériel	Aluminium
-----------------	-----------

Couleur	Bleu grisâtre mat
----------------	-------------------



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Assise

Largeur de l'assise	45 cm
Largeur utile pour s'asseoir (taille)	45 cm
Profondeur de l'assise	44 cm
Hauteur du coussin	6 cm

Moteur

Moteur	2 x 150 W
Batterie	10 Ah / 15 Ah (lithium)
Nombre de batteries	1
Autonomie	8 - 12 km (10 Ah) / 12 - 17 km (15 Ah)
Vitesse maximale	6 km/h

Accoudoir

Longueur de l'accoudoir	26 cm
Largeur de l'accoudoir	5 cm
Type d'accoudoir	Rabattables

Dossier

Largeur du dossier	44 cm
Hauteur du dossier	45 cm
Type de dossier	Fixe

Roues

Dimensions des roues avant	Ø20 cm
Dimensions des roues arrière	Ø29 cm
Largeur des roues avant	4 cm
Largeur des roues arrière	4,5 cm
Type de roues	Massives

Autres caractéristiques

Hauteur maximale des rebords	2,5 cm
Poche sous le siège	30 x 25 x 12 cm (9 L.)
Poche sur le dossier	23 x 22 cm
Ceinture de sécurité	Oui
Klaxon	Oui
Pente maximale franchissable	10°
Rayon de braquage	90 cm
Réglage en hauteur du repose-pieds	2,5 cm
Réglage en profondeur du repose-pieds	5 cm
Roues anti-bascullement	Oui (amovibles)
Type de freins	Électromagnétiques



*Avant de réserver un vol, nous vous recommandons de contacter la compagnie aérienne pour vérifier si elle autorise les fauteuils roulants électriques à batterie.

4. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

4.1. MODE D'EMPLOI

Lire le manuel d'utilisation: avant de prendre le volant, il est impératif d'avoir lu et compris l'intégralité du manuel d'utilisation.

Capacité de charge: la capacité de charge maximale est de 125 kg. Veuillez ne pas surcharger le véhicule, car il est conçu pour un usage individuel et ne doit pas transporter de passagers.

Conditions de conduite: ne conduisez pas sous l'emprise de l'alcool ou en cas de fatigue extrême.

Conduite de nuit et dans des conditions de faible visibilité: évitez de conduire de nuit ou dans des conditions de visibilité réduite.

Vérification avant la conduite: effectuez une vérification avant chaque trajet. Consultez les sections « 4.2 », « 4.3 » et « 4.4 » du manuel si c'est la première fois que vous conduisez.

Protection contre les intempéries: gardez à l'esprit que le fauteuil roulant n'est pas imperméable ; évitez donc de l'exposer à la pluie ou à la neige et ne conduisez pas dans ces conditions météorologiques..

4.2. CONSIGNES D'UTILISATION

Surface de roulement: le fauteuil iVolta est conçu pour rouler sur des surfaces planes. Évitez les terrains boueux, escarpés, meubles, étroits, verglacés ou les routes en mauvais état.

Franchissement d'obstacles: le fauteuil roulant iVolta est capable de franchir des obstacles, mais il est recommandé de réduire la vitesse et de se déplacer lentement lors de cette manœuvre.

Pente maximale d'ascension: le fauteuil roulant peut gravir des pentes présentant un angle d'inclinaison maximal de 10°.

Hauteur maximale des bordures: n'essayez pas de franchir des bordures de plus de 2,5 cm. Conduire l'iVolta sur des obstacles dépassant cette hauteur peut entraîner un renversement et causer des blessures graves. Tenez toujours compte de vos compétences de conduite et de vos éventuelles limitations personnelles.

Évitez les foules et la circulation dense: veuillez éviter de circuler dans des zones très fréquentées ou à forte circulation.

Sécurité de conduite: assurez-vous que le système de commande est correctement installé. Maintenez le joystick en position verticale et asseyez-vous correctement, en bouclant votre ceinture à temps. En cas de perte de contrôle due à un renversement, appuyez-vous contre le dossier.

Mise en marche et réglage de la vitesse: lors de la mise en marche du fauteuil, vérifiez que la vitesse réglée est adaptée à vos capacités de conduite. Il est recommandé de commencer à rouler à faible vitesse à chaque utilisation, puis d'accélérer progressivement.

L'utilisation avec cet équipement d'accessoires et de câbles non spécifiés ou non fournis par TotalCare Europe peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement, ce qui peut nuire à son bon fonctionnement.

4.3. AVERTISSEMENTS D'UTILISATION

Manœuvres non recommandées: n'essayez jamais d'effectuer de nouvelles manœuvres de votre propre initiative, en dehors de celles indiquées dans le manuel.

Modifications non autorisées: n'apportez aucune modification au fauteuil iVolta sans l'autorisation de TotalCare Europe. L'ajout d'accessoires peut modifier certaines caractéristiques techniques telles que le poids total, les dimensions ou le centre de gravité. Veuillez noter que certaines modifications peuvent endommager les objets environnants.



ATTENTION

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'une mauvaise utilisation. Afin d'éviter tout dommage ou blessure lié à une utilisation inappropriée du fauteuil roulant, l'utilisateur doit prendre des mesures de sécurité.

Respectez les règles locales de circulation piétonne. Comme vous pouvez être difficile à voir, attendez que la voie soit libre avant de vous engager avec la plus grande prudence. L'utilisation de dispositifs de sécurité tels que des catadioptrés, des vêtements réfléchissants, des feux et des symboles est essentiellement pour votre sécurité lorsque vous vous déplacez.

Utilisation non prévue: n'utilisez pas le fauteuil roulant à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu, telles que la musculation, la pratique d'un sport, le remorquage, le transport ou la traction, car cela pourrait présenter un risque pour la sécurité et exercer une contrainte excessive sur le fauteuil roulant.

Fumer dans le fauteuil roulant: nous vous recommandons vivement de ne pas fumer de cigarettes lorsque vous êtes assis dans votre fauteuil roulant.

Siège et modifications: ne modifiez pas les caractéristiques techniques du siège et ne placez pas de coussins ou d'oreillers dessus, car cela pourrait entraîner une instabilité et des chutes de l'utilisateur.

Montée et descente: avant de monter ou de descendre du fauteuil roulant, asseyez-vous le plus en arrière possible afin d'éviter toute blessure due à un basculement.

Accoudoirs et repose-pieds: évitez de vous agripper aux accoudoirs, car cela pourrait provoquer un basculement et des blessures. De même, évitez de concentrer votre poids sur le repose-pieds afin d'éviter tout basculement et toute blessure corporelle.

Utilisation de l'oxygène: faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous utilisez de l'oxygène à proximité de circuits électriques ou de matériaux inflammables. Consultez votre fournisseur d'oxygène pour obtenir des informations sur son utilisation en toute sécurité.

Mode manuel: n'utilisez pas le fauteuil roulant en mode manuel sans accompagnateur, car cela pourrait causer des blessures. Ne vous déplacez pas seul lorsque vous êtes assis ; demandez de l'aide à votre accompagnateur si nécessaire.

Réglages du contrôleur: attention. Ne modifiez pas les réglages du joystick. Demandez à votre orthopédiste de vérifier le dispositif si vous constatez un changement dans votre capacité à contrôler le fauteuil roulant.

Arrêt brusque: pendant son fonctionnement, le fauteuil roulant peut s'arrêter brusquement. Ne l'utilisez pas s'il présente des anomalies ou des irrégularités.

Mode manuel sur une pente: évitez de placer le fauteuil roulant en mode manuel sur une pente afin de prévenir toute perte de contrôle et tout déplacement indésirable.

Stationnement en position fixe: si vous prévoyez de rester assis dans une position fixe pendant une longue période, débranchez l'alimentation afin d'éviter tout mouvement accidentel du fauteuil roulant.

Évitez les accessoires qui pourraient gêner le fonctionnement du joystick, car ils pourraient provoquer des mouvements inattendus du fauteuil roulant.

4.4. VEUILLEZ TENIR COMPTE DES INDICATIONS SUIVANTES

1. Ne branchez pas le câble directement sur la borne ou la pince de la batterie pour la recharger.
2. Ne branchez pas d'autres appareils sur le système électronique et n'alimentez pas d'autres appareils à l'aide de la batterie du fauteuil roulant.
3. Lorsque vous débranchez le faisceau de câbles, tenez la cosse pour éviter tout dommage. Ne tirez pas directement sur le faisceau de câbles.
4. Lorsque vous montez des pentes, roulez en ligne droite. Évitez de former un angle avec la pente et soyez prudent lors de la montée afin de réduire le risque de renversement.
5. Un stockage prolongé à des températures extrêmes nuira à son bon fonctionnement.
6. Vérifiez toujours l'absence de corrosion sur les composants électriques, les faisceaux de câbles et les bornes.
7. Ne retirez pas le fusible du faisceau de câbles de la batterie. S'il est endommagé, contactez votre orthopédiste pour le faire remplacer.
8. Descendez les pentes à vitesse minimale. Si la vitesse est plus élevée que prévu, relâchez le levier du joystick pour arrêter le fauteuil, puis appuyez légèrement dessus pour contrôler la vitesse de descente. Contactez votre orthopédiste si un accessoire de l'unité d'assise se desserre ; remplacez immédiatement les pièces usées ou endommagées.

9. N'emmenez pas le fauteuil roulant sous la douche, dans la baignoire, à la piscine ou au sauna. Des conditions telles que la pluie, la neige, le sel, le brouillard ou les surfaces verglacées peuvent provoquer une corrosion prématurée des vis et des composants.
10. La marche arrière n'est possible que sur des routes plates. Effectuez-la en douceur et à faible vitesse, en vous arrêtant fréquemment pour vérifier l'absence d'obstacles. Évitez de vous pencher vers le bas ou vers l'arrière dans les pentes afin d'éviter tout renversement.
11. Évitez toute position ou tout mouvement susceptible de modifier votre centre de gravité lorsque vous êtes assis dans votre fauteuil iVolta, car cela pourrait provoquer des basculements.
12. Ne reposez pas tout votre poids sur un seul côté de l'accoudoir, car cela pourrait provoquer un renversement. Évitez de poser vos mains au-dessus du siège ou d'incliner votre corps pour prévenir les chutes.
13. Ne conduisez pas le fauteuil roulant au bord de ruisseaux, de lacs ou de la mer. Évitez de rouler dans l'eau. Évitez toute exposition prolongée à des environnements excessivement chauds ou froids, car cela peut endommager certaines parties du fauteuil, ainsi que la batterie et d'autres composants électriques.
14. Ne faites pas glisser le fauteuil roulant afin d'éviter d'endommager des pièces essentielles en raison d'une vitesse excessive.
15. Soyez très prudent lorsque vous montez et descendez des escaliers avec le fauteuil roulant à l'arrêt. Le pliage du fauteuil roulant doit être effectué avec l'aide de personnes physiquement aptes.
16. N'utilisez pas le fauteuil roulant en état d'ébriété. La consommation d'alcool peut nuire à la conduite en toute sécurité du fauteuil roulant.
17. Tous les fauteuils roulants ne sont pas identiques. Veuillez prendre le temps de vous familiariser avec le fonctionnement du fauteuil iVolta avant de l'utiliser.
18. Le fauteuil iVolta peut entrer dans l'ascenseur ; débranchez-le et asseyez-vous bien en place pour éviter tout mouvement.



ATTENTION

Réduisez votre vitesse dans les virages, évitez les virages brusques et maintenez votre centre de gravité stable. Ne déplacez pas votre centre de gravité dans la direction opposée au virage afin d'éviter tout renversement.

Veillez à ce que vos vêtements et vos objets personnels ne se trouvent pas à proximité des roues lorsque le fauteuil est en mouvement.

Ne traînez rien derrière le fauteuil pendant la conduite.

N'utilisez pas le fauteuil roulant lorsque la batterie est déchargée afin d'éviter de vous retrouver bloqué.

Évitez de circuler sur des routes ou des pentes potentiellement dangereuses, telles que celles recouvertes de neige, de glace, d'herbe coupée ou de feuilles mouillées.

Ne posez pas tout votre poids sur un seul côté de l'accoudoir, car cela pourrait provoquer une inclinaison.

Ne passez pas vos mains par-dessus le siège et ne vous penchez pas en avant, car cela pourrait endommager le dossier et provoquer une chute.

Même si votre fauteuil roulant est capable de franchir des obstacles élevés, nous vous recommandons de ne pas tenter de dépasser la hauteur spécifiée. En cas de doute sur la manière de franchir des obstacles en toute sécurité, demandez de l'aide. Tenez compte de vos capacités de conduite et de vos limitations personnelles. Vous devrez peut-être retirer ou recouvrir les seuils et installer des rampes aux entrées et sorties.

N'utilisez jamais votre fauteuil roulant à proximité de voies ferrées ou de passages à niveau. Ne conduisez pas votre fauteuil roulant au bord d'un ruisseau, d'un lac ou de la mer.

Ne franchissez pas d'escaliers ni d'escaliers roulants avec votre fauteuil roulant.

Pour garantir votre sécurité, lisez et comprenez ce manuel. Restez vigilant lorsque vous conduisez un fauteuil roulant, quel qu'il soit, afin d'assurer votre sécurité.

5. UTILISATION ET MONTAGE

5.1. UTILISATION DE LA TÉLÉ-COMMANDE

Bouton de mise en marche: appuyez sur le bouton de mise en marche pendant deux secondes pour mettre le fauteuil iVolta sous tension. Pour éteindre le fauteuil, appuyez à nouveau pendant 2 secondes sur le bouton de mise en marche.

Joystick: contrôlez la direction et la vitesse du fauteuil roulant. Lorsque vous poussez le joystick depuis sa position centrale, le fauteuil accélère ; lorsque vous le relâchez, il revient en position initiale et freine automatiquement.

Évitez tout accessoire susceptible d'interférer avec le fonctionnement du joystick, car cela pourrait entraîner des mouvements involontaires du fauteuil roulant.



Boutons d'augmentation et de réduction permettent de régler la vitesse par paliers. L'indicateur affiche le niveau de vitesse sélectionné, jusqu'à la vitesse maximale. L'utilisateur peut ajuster la plage de vitesse.



Le fauteuil dispose de 5 vitesses :

- Première vitesse : 2 km/h.
- Deuxième vitesse : 3 km/h.
- Troisième vitesse : 4 km/h.
- Quatrième vitesse : 5 km/h.
- Cinquième vitesse : 6 km/h.

5.2. CHARGE ADMISSIBLE DU FAUTEUIL


Utilisation de la batterie du joystick: l'autonomie de la batterie est indiquée par le voyant de batterie, dont le niveau diminue à mesure que la batterie se décharge. Il est conseillé de recharger la batterie du fauteuil lorsque deux barres du voyant de batterie sont allumées, car cela permet de préserver la durée de vie de la batterie.

Chargement du fauteuil (méthode 1): branchez la fiche du chargeur dans la prise à trois broches du contrôleur. Branchez ensuite le chargeur sur une prise de courant standard. Pendant la recharge, le joystick reste allumé et clignote. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant du chargeur passe au vert. Une fois la recharge terminée, débranchez d'abord le chargeur de la prise de courant, puis du fauteuil.

Chargement de la batterie hors du fauteuil roulant (méthode 2): pour retirer la batterie, tirez sur la poignée de déverrouillage vers l'extérieur tout en faisant glisser la batterie vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée. Une fois retirée, vous pouvez procéder à sa recharge.



Bouton de mise en marche et d'arrêt de la batterie : l'interrupteur ON/OFF situé sur le boîtier de la batterie ne fonctionne pas sur le fauteuil iVolta. C'est pourquoi le fauteuil peut fonctionner et la batterie peut se recharger quelle que soit la position de l'interrupteur.

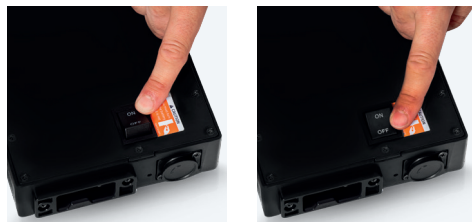

Chargez complètement la nouvelle batterie avant de l'utiliser pour la première fois afin d'atteindre 90 % de sa capacité maximale. Effectuez une charge complète après chaque utilisation pour maintenir une capacité supérieure à 90 %. Après quatre ou cinq cycles de charge, le taux d'utilisation avoisine les 100 %, ce qui prolonge sa durée de vie.

En cas de non-utilisation, il **est recommandé de recharger la batterie tous les mois et de l'utiliser pendant plus de 20 minutes** afin de prolonger sa durée de vie. Les batteries utilisées depuis plus de trois ans doivent être apportées chez un orthopédiste pour un contrôle ou un remplacement.

Autres mises en garde:

- Avant de commencer la recharge, assurez-vous que le fauteuil est éteint.
- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus de 24 heures d'affilée.
- Utilisez uniquement le chargeur d'origine fourni par TotalCare Europe.
- Ne couvrez pas le chargeur lorsqu'il est en marche.
- Ne rechargez pas la batterie à proximité de matériaux inflammables ou de sources de chaleur.
- Ne manipulez pas la prise ni le chargeur avec les mains mouillées.
- Effectuez la recharge dans un endroit sec et bien aéré.



Effectuez une charge complète avant la première utilisation afin de garantir une connexion optimale entre le système du contrôleur et la batterie au lithium.

5.3. RABATTRE L'ACCOUDOIR


Pour le rabattre, appuyez sur le bouton de verrouillage situé sous l'accoudoir tout en le soulevant.

Pour le relever, appuyez vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », indiquant que le bouton de verrouillage s'est enclenché. L'accoudoir reprendra alors sa position initiale.




5.4. UTILISATION DES FONCTIONS DE PLIAGE ET DE DÉPLIAGE



Pliage: pour plier la chaise, tirez sur la poignée de déverrouillage située à l'arrière du dossier. Maintenez le mécanisme déverrouillé tout en tenant le dossier, puis faites-le glisser vers l'avant jusqu'à ce que la chaise soit pliée de manière contrôlée.

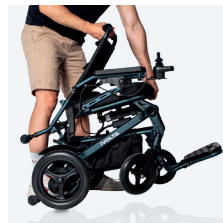

Dépliage: pour déplier la chaise, tenez le dossier et l'assise et ouvrez-la jusqu'à ce qu'elle soit entièrement déployée. Assurez-vous qu'elle est complètement dépliée avant de l'utiliser.

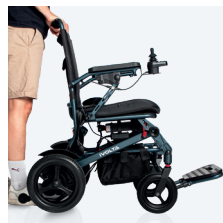

Roulettes de transport: le fauteuil est équipé de deux roulettes de transport qui permettent de le transporter facilement une fois plié, comme s'il s'agissait d'une valise. Ces roulettes sont amovibles. Pour les retirer, appuyez sur le bouton « quick release » et tirez-les vers l'extérieur. Cette opération ne peut être effectuée que lorsque le fauteuil iVolta est entièrement plié.

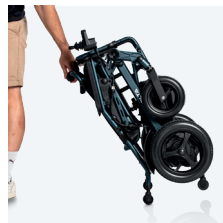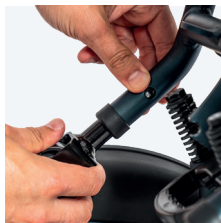

5.5. INSTALLATION ET RETRAIT DE LA BATTERIE

Pour retirer la batterie, tirez sur la poignée de déverrouillage vers l'extérieur tout en faisant glisser la batterie vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée.




5.6. MONTAGE DU JOYSTICK

Réglez le joystick dans la position la plus confortable en fonction de vos besoins. Desserrez la molette de l'accoudeur et étirez le joystick. Une fois dans la position souhaitée, fixez solidement le joystick en serrant la molette.




5.7. UTILISATION DU DÉBLOCAGE DU FREIN (ROUE LIBRE)

Le moteur dispose de deux positions. Sur la première image, avec le levier en position arrière, le fauteuil est en mode manuel : le moteur est désactivé et le fauteuil peut être poussé manuellement. Pour activer le moteur et utiliser le fauteuil en mode électrique, tirez le levier vers l'avant, comme le montre la deuxième image.

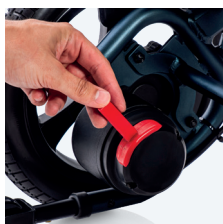

5.8. UTILISATION DES BARRES ANTI-BASCULEMENT


Les barres anti-basculement sont amovibles et peuvent être retirées en appuyant sur le bouton « quick release » puis en les tirant vers l'extérieur. Leur démontage réduit la longueur du fauteuil et facilite les manœuvres dans les espaces restreints. Avant toute utilisation, vérifiez qu'elles sont correctement installées.

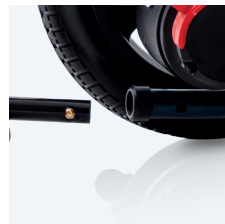

5.9. RÉGLEMENTATION DE LA PLATEFORME



Pour **régler la hauteur de la plateforme**, retirez le bouchon de l'écrou. Desserrez la vis à l'aide d'une clé Allen de 5 mm tout en maintenant l'écrou avec une clé plate.

Déplacez le tube jusqu'au trou souhaité, puis resserrez les vis. La course totale du réglage est de 2,5 cm. Assurez-vous que la plateforme est correctement fixée.

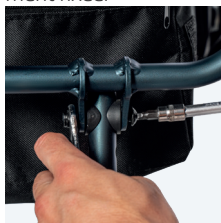

Pour **régler la profondeur de la plateforme**, tirez simultanément les deux poignées vers l'extérieur et déplacez la plateforme jusqu'à la position souhaitée. La plateforme dispose de deux points de réglage, avec une course totale de 5 cm.

Une fois la position souhaitée sélectionnée, relâchez les poignées et vérifiez que la plateforme est bien verrouillée.

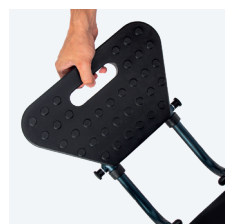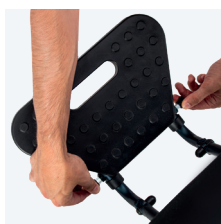

6. ENTRETIEN ET RANGEMENT

6.1. ENTRETIEN

Comme tout véhicule motorisé, votre fauteuil roulant électrique nécessite un entretien régulier. Vous pouvez effectuer certaines vérifications vous-même, mais d'autres nécessitent l'intervention d'un professionnel.

Évitez d'exposer le fauteuil roulant à des environnements humides.

L'humidité peut entraîner des dysfonctionnements électroniques et mécaniques, ainsi que la corrosion des composants électriques.

Tenez compte des températures extrêmes.

Entretien et nettoyage

- Évitez de heurter les unités de commande et de les exposer de manière prolongée à des conditions extrêmes.
- Nettoyez régulièrement le contrôleur et vérifiez les connexions pour vous assurer de son bon état.
- Si le voyant de la batterie n'affiche qu'un seul voyant allumé, rechargez la batterie immédiatement.
- Évitez de laver le fauteuil roulant à l'eau. La surface du châssis est recouverte d'une couche protectrice.

- N'utilisez pas de produits chimiques sur l'assise et les accoudoirs en vinyle, car ils peuvent provoquer des glissements ou des fissures. Utilisez un chiffon humide imbibé d'eau et de savon neutre, puis séchez-les.

Après utilisation:

- Débranchez l'alimentation électrique et veillez à ce que les enfants ou les personnes inconscientes ne l'utilisent pas. Rangez le fauteuil à température ambiante afin de préserver ses performances. Nettoyez le fauteuil avec un chiffon doux, en évitant les produits chimiques. Lavez-le et séchez-le.



Afin de garantir la qualité du fauteuil, si le remplacement de pièces d'usure telles que la batterie, les roues, le joystick, le moteur/ actionneur ou le chargeur s'avère nécessaire, nous vous invitons à contacter votre orthopédiste. Il est essentiel d'utiliser des pièces de rechange d'origine correspondant au même modèle et aux mêmes spécifications, et toute réparation doit être effectuée dans des centres de maintenance professionnels agréés par TotalCare Europe.

6.2. CONTRÔLES QUOTIDIENS

Afin de garantir le bon fonctionnement du fauteuil roulant, il est recommandé de procéder à des contrôles réguliers avant chaque utilisation, ainsi qu'à des révisions hebdomadaires, mensuelles et semestrielles..

Éléments à contrôler	À tout moment	Hebdomadaire	Mensuel	Semestriel
Roues, mécanismes de transmission			●	
Fonctionnement du joystick	●			
Frein	●			
Câbles de connexion		●		
État de la batterie	●			
État des pneus			●	
État du châssis				●
État du moteur et du conducteur				●
Alignement des roues avant		●		
Propreté	●			

7. DIAGNOSTIC ET DÉPANNAGE

Le système utilise des signaux sonores et des voyants LED pour signaler d'éventuelles erreurs ou pannes de l'appareil. Ces alertes peuvent concerner des composants tels que le moteur, les freins, la batterie ou les connexions électriques. Le tableau ci-dessous vous aidera à identifier chaque incident et les mesures recommandées.

Bien que la plupart des dysfonctionnements puissent être diagnostiqués sans outils supplémentaires, il est recommandé de contacter votre orthopédiste en cas d'alerte d'erreur. Consultez le tableau pour interpréter les différents codes affichés à l'écran et les signaux sonores correspondants.

Nombre de bips	Erreur	Procédure de dépannage
1 bip	Batterie faible	Rechargez la batterie.
2 bips	Défaillance du moteur gauche	Éteignez l'appareil et vérifiez que le levier de déverrouillage du moteur est en mode électrique. Si le problème persiste, contactez votre orthopédiste ou le service après-vente agréé.
4 bips	Défaillance du moteur droit	Éteignez l'appareil et vérifiez que le levier de déverrouillage du moteur est en mode électrique. Si le problème persiste, contactez votre orthopédiste ou le service technique agréé.
6 bips	Surintensité	Redémarrez le fauteuil. Si l'erreur persiste, contactez votre orthopédiste ou le service technique agréé.
7 bips	Défaillance du joystick	Redémarrez le fauteuil. Si l'erreur persiste, contactez votre prothésiste ou le service après-vente agréé.
8 bips	Défaillance du contrôleur	Redémarrez le fauteuil. Si l'erreur persiste, contactez votre prothésiste ou le service après-vente agréé.
9 bips	Erreur de communication	Vérifiez que tous les câbles et connecteurs sont correctement branchés. Si le problème persiste, contactez votre prothésiste ou le service après-vente agréé.

8. GARANTIE

DURÉE DE LA GARANTIE

Le produit acheté par vous est protégé par cette garantie, pour le défaut de conformité du client qui se manifeste dans une période de 3 ans à compter de la date d'achat du produit ou de la date de livraison.

CHAMP D'APPLICATION DE LA GARANTIE

La garantie couvre toute panne ou défaut de fabrication pendant les 24 premiers mois suivant l'achat du produit ; après 2 ans et jusqu'à 3 ans, le consommateur doit continuer à contacter le vendeur pour réparer le défaut de conformité du bien, mais si nécessaire, l'utilisateur doit démontrer que le produit est défectueux en raison de la fabrication et non en raison d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien.

La portée territoriale de cette garantie s'étend à l'ensemble du territoire national espagnol.

Cette garantie n'affecte pas les droits dont dispose le consommateur conformément aux dispositions du décret-loi royal 7/2021, du 27 avril, sur la transposition des directives de l'Union européenne en matière de défense des consommateurs.

PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE LA GARANTIE

S'il est impossible de communiquer avec le point de vente, soit parce qu'il a fermé ses portes, soit parce que le produit a été acheté dans une autre communauté autonome, le consommateur peut s'adresser directement au fabricant par courrier électronique à l'adresse info@totalcare-europe.com.

Au moment de la réclamation, il est indispensable de présenter une copie de la facture ou du ticket de caisse, ou un bon de livraison postérieur à la facture ou au ticket de caisse, indiquant clairement le produit acheté et la date.

Le consommateur doit retourner le produit au même endroit où il a été acheté, accompagné d'une note expliquant le défaut de conformité.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS

- Les dommages causés par une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur en ne respectant pas les instructions données dans ce manuel ou causés par d'autres facteurs humains, une mauvaise utilisation, une collision avec un objet quelconque.
- Les dommages causés par un accident, un abus, une négligence ou une mauvaise utilisation.
- Les dommages causés par un incendie, une inondation, une tempête ou tout autre événement naturel.
- Les produits qui ont été préalablement réparés ou manipulés par du personnel non autorisé par le fabricant ou le vendeur.
- Si les pièces utilisées ne sont pas fabriquées par notre société.
- Tout produit ne portant pas ou ayant eu son numéro de série ou d'usine modifié ou effacé.
- La garantie ne couvre pas les éléments d'usure.
- La réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse sera effectué par du personnel qualifié et autorisé par TotalCare Europe, S.L.

NE PAS UTILISER CE PRODUIT S'IL SEMBLE ENDOMMAGÉ OU S'IL MANQUE DES PIÈCES.

CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR.

Légende de l'étiquetage



Conformité européenne



Vous devez vous référer au mode d'emploi pour les informations relatives à la sécurité.



Consultez le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.



Données du fabricant



Date de fabrication



Représentant européen



Lot



Référence du produit



Numéro de série



Dispositif médical conforme au MDR.



Vidéo MiTaller

Scannez le code QR pour accéder à la vidéo du mode d'emploi

Manuel d'utilisation

Fauteuil roulant électrique pliable **iVolta**

V1 · 30/06/2026